

Angelcare®

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

DIGITÁLIS ÉRINTŐKÉPERNYŐS
LÉGZÉSFIGYELŐ ÉS BABAÓRZÓ KÉSZÜLÉK

AC701 típus

Gyári alapbeállítás:
légzésfigyelő és
babaórzó. A készülék
riaszt, ha nem érzékel
mozgást az érzékelő lap.



HU
119

PL
153



TARTALOMJEGYZÉK

! VIGYÁZAT	121
AZ AC701 KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE	126
1. LÉPÉS - A szülői egység töltése (15 óra)	127
2. LÉPÉS - Az érzékelő lap/lapok telepítése	128
3. LÉPÉS - A babaegység beállítása	131
4. LÉPÉS - A készülék bekapcsolása	132
5. LÉPÉS - A monitor ellenőrzése és kezelése	133
6. LÉPÉS - További funkciók be- és kikapcsolása	138
Hibakeresés	144
Korlátozott garancia	146
Műszaki adatok	147
ENGLISH	2
FRANÇAIS	29
ESPAÑOL	59
PORTUGUÊS	89
POLSKI	153

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

ŐRIZZE MEG EZT A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

KÉRJÜK, OLVASSA EL A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS AZ UTASÍTÁSOKAT, MIELŐTT ÖSSZESZERELNÉ ÉS HASZNÁLNI KEZDENÉ A TERMÉKET.

A FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT OKOZHAT, ÉS KÁRT TEHET A TERMÉKBEN.

AZ ÉRZÉKELŐ LAP NEM HASZNÁLHATÓ FELNÖTTEK VAGY 24 HÓNAPOSNÁL IDŐSEBB GYERMEKEK ESETÉBEN.

AZ ÉRZÉKELŐLAP FUNKCIÓJA NEM AZ, HOGY MEGÁLLAPÍTSA, HOGY A GYERMEK A GYEREKÁGYON KÍVÜL TARTÓZKODIK-E

! VIGYÁZAT

A terméket csak felnőtt szerelheti össze.
Összeszereléskor a kisméretű alkatrészeket tartsa gyermekektől távol.

Az Angelcare® fontosnak tartja vásárlói véleményét.
Ha Ön nem teljesen elégedett, vagy kérdése van,
forduljon hozzánk az angelcare@cdecinc.ca címen (az **Egyesült Államokban és Kanadában**),
más országokban forduljon a helyi forgalmazóhoz.





▲ VIGYÁZAT

1. EZ A TERMÉK NEM HELYETTESÍTI A FELELŐS FELNŐTT FELÜGYELETÉT. Ez a termék arra készült, hogy segítse gyermekének megfigyelését. A készülék használata közben továbbra is biztosítani kell a gyermek folyamatos biztonságához szükséges felügyeletet. A koraszülött, illetve veszélyeztetettnek tekintett csecsemőket mindig egészségügyi szakszemélyzet felügyelete mellett figyelje. A monitort TILOS orvosi megfigyelőeszközként vagy a bőschohalál (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS) megelőzésére szolgáló eszközként használni.

2. FULLADÁSVESZÉLY – A vezetékek a gyermekekre tekeredve FULLADÁST okozhatnak. Úgy helyezze el a vezetékeket, hogy a gyermekek



ne érhessek el (hagyon legalább 1 méter távolságot). SOHA ne próbálja az érzékelőlapo(ka)t a vezeték védőburkolata nélkül használni. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a vezeték védőburkolata biztonságos helyen, a gyerekágy lába alatt legyen rögzítve. Ne használja az érzékelőlapo(ka)t, ha a védőburkolat megsérült vagy eltört.

3. Soha ne használjon hosszabítókábelt a váltóáramú tápegységhez. KIZÁRÓLAG a tartozék tápegységet használja.

4. Ha a tápegységet a hálózati aljzathoz csatlakoztatta, NE érintse meg a szabadon lévő végét.

5. MINDIG ügyeljen arra, hogy mind az adó, mind a vevő megfelelően működjön, és egymás hatósugarán belül legyenek. Ellenőrizze a készüléket az első használat előtt, majd időszakonként, illetve ha megváltoztatja a babaegység helyét.

6. MINDIG azonnal ellenőrizze a csecsemőt, amikor a készülék riaszt!

7. NE használja a készüléket víz közelében (pl. fürdőkád, mosogató stb.).



8. MINDIG tartsa a készüléket a hőforrásoktól távol (pl. kályhától, radiátortól, stb.).

9. A baba-, és a szülői egységet a megfelelő szellőzés és hűtés érdekében MINDIG sima felületre, állítva helyezze el. NE tegye a heverőre, párnára, ágyra, stb., melyek akadályozzák a szellőzést.

10. Ez a babamonitor a jelek átviteléhez nyilvános rádiófrekvenciát használ. Előfordulhat, hogy a szülői egység a környéken lévő más babamonitorból származó jeleket vesz, vagy a jeladó interferenciát okoz. Előfordulhat, hogy e monitor adását másik háztartásban fogják. Magánszférája védelmében mindig KAPCSOLJA KI mindkét egységet, ha nem használja.

11. Ez a termék NEM játék. NE hagyja, hogy gyermekek játsszanak vele.

12. Ez a termék kisméretű alkatrészeket tartalmaz. A terméket csak felnőtt szerelheti össze. Legyen körültekintő a termék kicsomagolásakor és összeszerelésekor, és a kisméretű alkatrészeket tartsa gyermekektől távol.

13. A készüléket 10 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten használja és tárolja.



▲ AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

14. KIZÁRÓLAG AAA MÉRETŰ ÚJRATÖLTETHŐ akkumulátorokat használjon a szülői egységben. NE használja vegyesen a feltöltött és a lemerült akkumulátorokat. NE használjon vegyesen alkáli, vagy normál szárazelemeket és akkumulátorokat. Az akkumulátorok behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra. NE zárja rövidre a tápvezetékeket. KIZÁRÓLAG a javasolt, vagy

H
U



azokkal egyenértékű feszültségű és méretű akkumulátorokat és a megfelelő tápegységet használja. Vegye ki az akkumulátorokat, amikor a termék hosszabb időszakon keresztül tárolja, illetve ha az akkumulátor lemerült. A használhatatlanná vált akkumulátorokat a megfelelő gyűjtőhelyen adja le. NE kísérelje meg a nem újratölthető elemek töltését. Az akkumulátorok töltését CSAK felnőtt felügyelete mellett végezze. Az akkumulátorokat tartsa gyermekektől távol.

15. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

15.1 Olvassa el ezt az útmutatót - Minden biztonsági szabályt olvasson el a termék használata előtt.

15.2 Tartsa be az utasításokat. A biztonsági és használati útmutatót őrizze meg a későbbi használatra.

15.3 Tartsa be a figyelmeztetéseket - Tartson be a terméken és a használati útmutatóban feltüntetett minden óvintézkedést.

15.4 Kövesse az utasításokat - Tartson be minden üzemeltetési és használati utasítást.

15.5 Víz és nedvesség - NE használja ezt a készüléket víz közelében. Például, ne használja kád, lavór vagy mosdókagyló közelében, nedves környezetben, vagy medence, stb. mellett. Ügyeljen rá, hogy semmi NE essen az egységre, és ne kerülhessen folyadék az egységekbe vagy az érzékelő lapokra.

15.6 Tisztítás - Tisztítás előtt minden részegységet válasszon le az elektromos hálózatról. NE merítse vízbe a babaegységet, a szülői egységet, illetve a töltőállvány egyetlen részét sem. Kizárólag száraz ruhával tisztítsa.

15.7 Szellőzés - NE zárjon el egyetlen szellőzőnyílást sem. Biztosítsa a megfelelő szellőzést, amikor az egységeket használja. NE takarja le sem a babaegységet, sem a szülői egységet semmilyen tárggyal, például takaróval. NE tegye a készüléket fiókba vagy bármilyen olyan helyre, mely tompítaná a hangot, vagy zavarán a normál légáramlás

15.8 Hőforrások - NE telepítse a készüléket semmilyen hőforrás, például radiátor, hőleadó rács, tűzhely, TV-készülék vagy más olyan berendezés (beleértve az erősítőket is) közelébe, melyek hőt termelnek. A hő károsíthatja a készülékházat vagy az elektromos alkatrészeket.

15.9 A hálózati csatlakozó vezeték védelme - Védje az érzékelő lapok és a tápegység hálózati csatlakozóvezetékét a külső behatásoktól. Ügyeljen arra, hogy ne járjanak rajta, ne szoruljon be a bútorok vagy más tárgyak alá. Különös figyelmet fordítson a csatlakozásokra, dugaszokra, a dugaszolóaljzatokra, valamint arra a pontra, ahol a vezeték kilép a készülékházból.

15.10 Tartozékok - Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja. NE tegye a terméket instabil kocsiba, állványra, háromlábú állványra, konzolra vagy asztalra. A termék leeshet, súlyos sérülést okozva gyermeknek vagy a felnőttnek, és a termék is károsodhat. CSAK a gyártó által ajánlott, vagy a termékkel együtt forgalmazott kocsit, állványt, háromlábú állványt, konzolt vagy asztalt használjon. Minden esetben kövesse a gyártó útmutatását.

15.11 Vihar, villámlás, zivatar esetén, illetve amikor hosszabb ideig nem használja, válassza le a hálózatról a készüléket.

15.12 Javítás - NE kísérelje meg a termék javítását, mivel a burkolat felnyitása vagy eltávolítása esetén (kivéve a elemtartó fedelét) áramütés érheti, vagy egyéb veszélynek lehet kitéve.

15.13 Alkatrészcsere - Amikor alkatrészt cserél, ügyeljen arra, hogy a gyártó által jóváhagyott cserealkatrész ugyanolyan jellemzőkkel rendelkezzen, mint az eredeti alkatrész. A jóvá nem hagyott alkatrész használata tüzet, áramütést vagy más veszélyhelyzetet okozhat.

15.14 Használat - Ez a készülék segédeszköz! NEM HELYETTESÍTI a felnőttek általi felügyeletet, és nem használható erre a célra. A készüléket CSAK a jelen kézikönyvben leírt célra szabad használni.

15.15 Energiaforrás - Csak az adapteren feltüntetett típusú energiaforrásról üzemeltesse a terméket. Ha nem biztos benne, milyen típusú energiaellátás van otthonában, kérjen tanácsot a forgalmazótól vagy az energiaszolgáltatótól.

15.16 Túlterhelés - NE terhelje túl a hálózati fali csatlakozó aljzatokat, hosszabbítókat vagy elosztókat, mivel ez tüzet, vagy áramütést okozhat.

15.17 Tárgy vagy folyadék bejutása - SOHA ne dugjon semmilyen tárgyat a termékbe a készülékház nyílásain keresztül, mivel azok veszélyes feszültségű pontokat érinthetnek,






rövidzárlatot, tüzet és áramütést okozhatnak. SOHA ne öntsön semmilyen folyadékot a termékre.

15.18 Antenna - Az adóhoz használt antennát úgy telepítse, hogy személyektől legalább 20 cm távolságra legyen. Ne üzemeltesse a készüléket más antennával, vagy annak közelében és ne kapcsoljon az antennára más készüléket.

15.19 Villamos vezetékek - A külső antennát NE HELYEZZE villamos légvezetékek vagy más villamos világítási vagy tápáramkör közelébe, ahol ráeshet ilyen villamos vezetésekre vagy áramkörre, mivel az ezekkel való érintkezés halálos kimenetelű lehet.

15.20 FULLADÁSVESZÉLY - A vezetékek a gyermekekre tekeredve FULLADÁST okozhatnak. Úgy helyezze el a vezetékeket, hogy a gyermekek

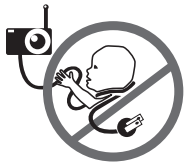

ne érhessek el (hagyon legalább 1 méter távolságot). SOHA ne próbálja a zérzékelőlapo(ka)t a vezeték védőburkolata nélkül használni. Minden használat előtt ellenőrizze,

hogy a vezeték védőburkolata biztonságos helyen, a gyermekágy lába alatt legyen rögzítve. Ne használja az érzékelőlapo(ka)t, ha a védőburkolat megsérült vagy eltört.

15.21 Ez a babamonitor a jelek átviteléhez nyilvános rádiófrekvenciákat használ. Előfordulhat, hogy a szülői egység a környéken lévő más babamonitorból származó jeleket vagy interferencia-jeleket vesz. Előfordulhat, hogy e monitor adását másik háztartásban fogják. Magánszférája védelmében gondoskodjon arról, hogy mindkét egységet KIKAPCSOLJA, ha nem használja.

15.22 Vibrációforrás - Amikor a terméket használja, NE használjon gyermekágy-mozgatót vagy más olyan gyermekágy-tartozékot, ami vibrációt kelthet. További vibrációforrás lehet egy ventilátor, mosógép, hangos zene stb. Ezek a vibrációforrások megzavarhatják az Angelcare® monitor teljesítményét, és a riasztás nem szólal meg, ha a készülék továbbra is érzékel bármilyen mozgást a csecsemőn kívül. Győződjön meg arról, hogy minden vibrációforrást kikapcsolt a monitor használata előtt.

Többféle ok miatt tapasztalhat hibás riasztást. A leggyakoribb ok az, hogy a babaegységet nem kapcsolta ki, miután a csecsemőt kivette a gyermekágyból. A másik ok az, hogy az érzékelő

lapot nem megfelelően helyezte a matrac alá.

Ügyeljen arra, hogy az érzékelő lapot sima, erős felületre, nyomtatott oldalával felfelé helyezze el. Lehetséges, hogy az érzékenységi szintet is be kell szabályoznia. (Lásd az 5.1. pontot.) Mindig ügyeljen arra, hogy azonnal nézze meg a csecsemőt, amikor riasztás hallható.

15.23 Érzékelő lap. - Ha a gyermekágyban rugós vagy rugalmas lécekből álló betét van, tegyen egy legalább 33 x 33 cm méretű, 6 mm vastag kemény deszkalapot az ágybetét és az érzékelő lap közé. Az Angelcare® monitort csak olyan gyermekágyban használja, ahol az érzékelő lap egy teljesen sima, szilárd felületen fekszik. Az érzékelő lap vezetékeit MINDIG a gyermekágy matraca alatt, és a gyermekek számára el nem érhető módon helyezze el.

H
U



16. AZ AKKUMULÁTOROK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

16.1 KIZÁRÓLAG a felhasználói kézikönyvben meghatározott típusú és méretű akkumulátorokat használjon. Ha nem megfelelő akkumulátorokat használ, robbanásveszélyt idézhet elő.

16.2 KIZÁRÓLAG AAA méretű újratölthető akkumulátorokat és/vagy a szülői egységhez mellékelt váltóáramú tápegységet használja. A szülői egységben kizárólag újratölthető akkumulátorokat használjon. NE használjon alkáli elemeket, mert súlyosan károsítja az egységet.

16.3 Az akkumulátorokat az első használat előtt 15 órán keresztül töltsé. Ügyeljen arra, hogy a készüléket KAPCSOLJA KI ebben az időszakban. KIZÁRÓLAG a készülékhez mellékelt váltóáramú tápegységet használja.

16.4 NE használja ezt a tápegységet semmilyen más berendezéshez.

16.5 Mielőtt leválasztja a váltóáramú tápegységet a babaegységről, KAPCSOLJA KI. Ha nem kapcsolja ki, az egység áttér elemes üzemmódra, ha előzőleg az elemeket behelyezte.

16.6 NE használjon újratölthető akkumulátorokat a babaegységben. KIZÁRÓLAG alkáli elemeket használjon.

16.7 NE dobja tűzbe sem az akkumulátorokat, sem a szárazelemeket! Felrobbanhatnak! Az erre szolgáló veszélyes hulladék gyűjtőhelyen adja le azokat.

16.8 Legyen körültekintő az elemek kezelésekor: ne zárja rövidre azok pólusait vezető anyagokkal, mint például a gyűrűk, karkötők és kulcsok. Kerülje az akkumulátorok túltöltését, rövidre zárását, fordított töltését, csonkítását vagy elégetését, hogy megelőzze a mérgező anyagok felszabadulását, hidrogén és/vagy oxigén felszabadulását, a felületi hőmérséklet emelkedését.

16.9 NE kísérelje meg feltölteni az ehhez a termékhez mellékelt, illetve az ezzel való használatra javasolt nem tölthető szárazelemeket. Az elemekből korrozív elektrolit szivároghat, vagy felrobbanhatnak.

16.10 NE kísérelje meg megújítani az ehhez a termékhez mellékelt, illetve az ezzel való használatra javasolt szárazelemeket azzal, hogy felmelegíti azokat. Az elektrolit hirtelen kiszabadulhat, ami égési sérülést, illetve szem- vagy bőrirritációt okozhat.

16.11 Ha és amikor szükséges, a elemeket cserélje ki ugyanolyan feszültségű és méretűekre. Ha a kicserélni kívánt elem más elemekkel van sorba kapcsolva, cserélje ki ezzel egy időben a többi is. TILOS a régi és az új elemek keverése.

16.12 Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorokat helyes polaritással helyezze be az akkumulátortartóba. Az akkumulátorok fordított behelyezése a töltési folyamat beindulását okozhatja, ami szivárgást vagy robbanást eredményezhet.

16.13 Távolítsa el az elemeket a termékből, ha a terméket 30 napon túl kívánja tárolni, mivel az elemek szivároghatnak, és károsíthatják a terméket.

16.14 A lemerült akkumulátorokat vegye ki a készülékből, amint lehetséges, mivel ezek nagyobb valószínűséggel fognak szivárogni a termékben, mint a feltöltöttek. Ha egy akkumulátor szivárog, azonnal cserélje ki. Ehhez viseljen védőkesztyűt.

16.15 NE tárolja ezt a terméket, illetve az ehhez a termékhez mellékelt, vagy az ezzel való használatra javasolt akkumulátorokat magas hőmérsékletű helyiségben.





FIGYELMEZTETÉS

(Csak Észak-Amerika)

17. A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé teszik a felhasználó készülék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

17.1 MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést a B. kategóriájú digitális készülékekre vonatkozó határértékek szerint ellenőriztük, és annak az FCC szabályok 15. pontja értelmében megfelelt. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy a lakókörnyezetben történő üzembe helyezéskor megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát gerjeszt, használ, és sugározhat. Amennyiben a készüléket nem az útmutatóban leírtak szerint helyezi üzembe és használja, a rádiókommunikációra káros interferenciát okozhat.

17.2 Nem garantálható, hogy bizonyos esetekben nem lép fel interferencia. Ha a készülék a rádió- vagy televízió műsorok vételében interferenciát okoz, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a következő intézkedések valamelyikével vagy többel próbálhatja meg kiküszöbölni az interferenciát:

- Fordítsa másfelé vagy helyezze át a műsorszórás vételére szolgáló antennát.
- Különítse el jobban a készüléket és a vevőegységet.
- A készüléket csatlakoztassa a vevőegységétől eltérő áramkörön lévő csatlakozó aljzatba.
- Forduljon segítségért a kereskedőhöz, vagy tapasztalt rádió-, vagy TV-szerelőhöz.

17.3 A készülék megfelel az FCC sugárvédelmi szabályok 15. pontjának, valamint a kanadai ipar engedélyköteles RSS szabványának / szabványainak. A készülék működése megfelel az alábbi két feltételnek:

- 1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá
- 2) A készüléknek el kell viselnie bármilyen vett interferenciát, beleértve azt az interferenciát is, mely nem kívánatos működést idézhet elő.

H
U

FCC ÉS IC SZABÁLYOZÁSOK

RF sugárzásra vonatkozó nyilatkozat

A babaegység megfelel az FCC RF sugárzás szabályozatlan környezetben való kitettségre vonatkozó határértékeinek. **Figyelem:** Az FCC RF (rádiófrekvenciás) kitettségre vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében a babaegységet legalább 20 cm-re helyezze el a babától és a helyiségben tartózkodóktól. A szülői egység megfelel az FCC RF kitettségre vonatkozó irányelveknek testre szerelt használat esetén. Előfordulhat, hogy az esetleges tartozékok nem felelnek meg az FCC RF kitettségre vonatkozó irányelveknek.

Industry Canada

A termék megfelel a vonatkozó Industry Canada műszaki követelményeknek.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE


TARTOZÉKOK:



Tölthető szülői egység



Töltő

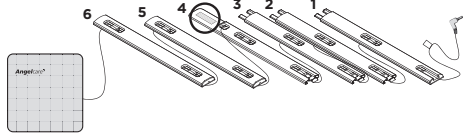


1 érzékelő lap (AC701) vagy 2 érzékelő lap (AC701-2SP) előre felszerelt kábelvédővel




Övcsat



Babaegység

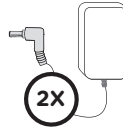

2 db hálózati adapter

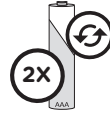

2 db tölthető akkumulátor
(a szülői egységhez)

ELŐKÉSZÍTENDŐ:

Egy kemény deszkalap (nem tartozék)

Vastagsága: **6 mm**

Minimális méretek:

33 cm x 33 cm

Maximális méretek: a matrac
méretével megegyezők



Kemény deszkalap

FONTOS

A kemény lap legyen nagyobb, mint az érzékelő lap felülete, illetve az AC701-2SP modellnél mint a két érzékelő lap együttes felülete.

AMIRE MÉG SZÜKSÉG LESZ (NEM TARTOZÉK):



2 db AA alkáli elem a
babaegységhez





Kisméretű csillagfejű
csavarhúzó


BABASZOBA:

FONTOS

A kiságyat a fal mellé, huzatmentes helyre helyezze. A babaegységet vízszintes, stabil felületen helyezze el a kiságygal szemben, attól legalább **1 méter** távolságban. Győződjön meg arról, hogy az adaptert a készülékhez legközelebbi fali aljzatba csatlakoztatta, ahol az könnyen hozzáférhető.


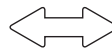
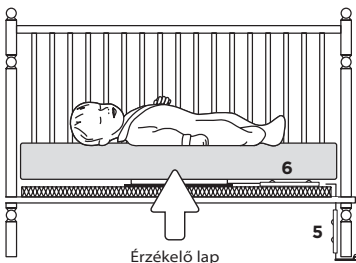


FONTOS
Tartson
legalább
1 m
távolságot.

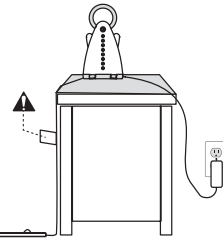



1. LÉPÉS - A SZÜLŐI EGYSÉG TÖLTÉSE (15 ÓRA)

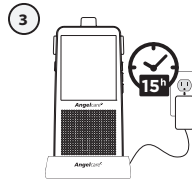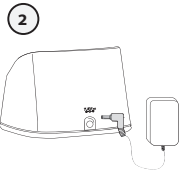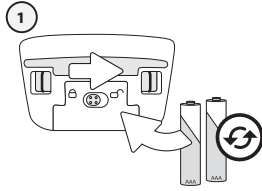

VIGYÁZAT

A szülői egységben SOHA ne használjon alkáli elemeket; ezek felrobbanhatnak.


- 1) Csúsztassa el a gombot az akkumulátortér burkolatának kioldásához és kinyitásához. Helyezze be a tölthető akkumulátorokat (tartozék), ahogy a képen látható.
- 2) Csatlakoztassa a hálózati adaptert a szülői egységbe, majd egy hálózati konnektorba.
- 3) Töltse az egységet **15 órán át megszakítás nélkül** (az első használat előtt).

MEGJEGYZÉS:


Az akkumulátor teljesítményének optimalizálásához olvassa el a jelen kézikönyv 125. oldalán található Hibaelhárítás fejezet „Az újratölthető elemek karbantartása” részét.

H

SZÜLŐI EGYSÉG:

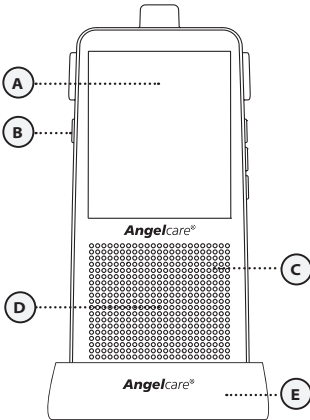

Előlnézet

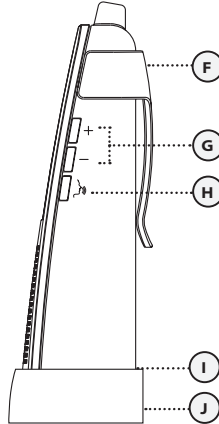


Jobb oldali nézet

- A) LCD érintőképernyő
- B) BEKAPCSOLÁS/ KIKAPCSOLÁS
- C) Mikrofon
- D) Hangszóró
- E) Töltő
- F) Övcsat
- G) Hangszóró hangerőszabályozó gombok
- H) Válasz gomb
- I) Akkumulátor burkolat (nem látható)
- J) AC adapter kimenet (nem látható)





2. LÉPÉS - AZ ÉRZÉKELŐ LAP ELHELYEZÉSE

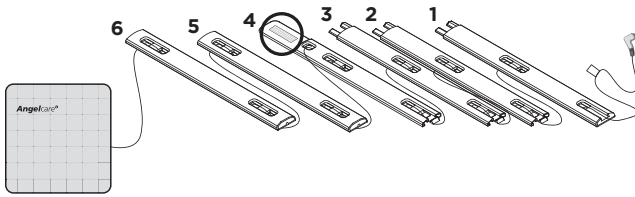

Érzékelő lap gyárilag felszerelt kábelvédőkkel

1-es, 2-es, 3-as, 4-es kábelvédők:
Helyezze a padlóra

4-es kábelvédő:
Az egységet a kétoldali ragasztószalaggal alulról rögzítse a gyermekágy lábához

5-ös kábelvédő:
Helyezze függőlegesen az ágyrács és a padló közé

6-os kábelvédő:
Helyezze a matrac alá

⚠ FIGYELMEZTETÉS FULLADÁSVESZÉLY.


A vezetékek a gyermekekre tekeredve FULLADÁST okozhatnak.

- Úgy helyezze el a vezetékeket, hogy a gyermekek ne érhessek el (hagyjon legalább 1 méter távolságot).
- A csecsemők és kisgyerekek súlyos fulladásveszélynek vannak kitéve, ezért a szülők és gondozók felelőssége, hogy a babaegységet mindig tegyék legalább 1 méter távolságra a gyermekágytól.
- **SOHA** ne használja az érzékelő lapot a kábelvédők nélkül. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a kábelvédők biztonságos helyen, a gyermekágy lába alatt legyenek rögzítve. Ne használja az érzékelő lapot, ha a kábelvédők megsérültek vagy eltörték.
- **SOHA** ne használjon hosszabítókábelt a váltakozó áramú tápegységhez. **KIZÁRÓLAG** a tartozék tápegységet használja. A termék nem játék. Soha ne engedje, hogy a gyermekek játszanak vele.



2.1 - A BABAEGYSÉG HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA

A babaegység számára olyan helyet válasszon, ami legalább **1 méter távolságra van a gyermekágytól**.

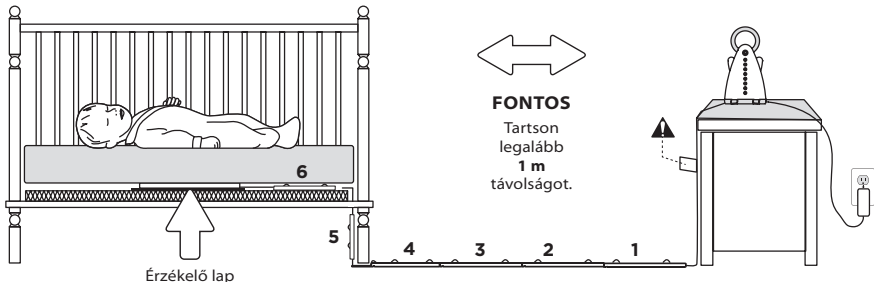


FONTOS
Tartson
legalább
1 m
távolságot.

Érzékelő lap






2.2 - VÁLASZSA KI, HOGY A GYEREKÁGY MELYIK LÁBÁHOZ KÍVÁNJA RÖGZÍTENI A KÁBELVÉDŐKET

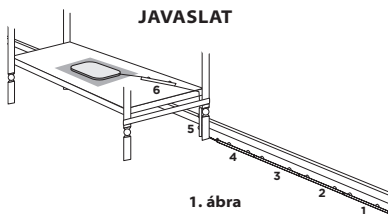


VAGY

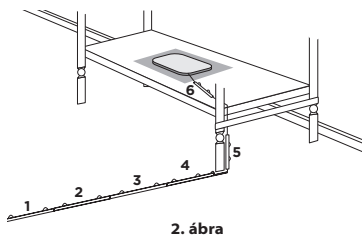


- 1) Válassza a gyermekágy babaegységhez legközelebb eső lábát (**1. ábra**). Ha a babaegységet a szoba másik végében helyezte el, válassza azt a lábat, amelyik a babaegységhez a legközelebb esik, és el tudja helyezni a védőburkolattal ellátott kábeleket (**2. ábra**). A védőburkolattal ellátott kábeleket lehetőleg a fal mellett vezesse el.

H

2.3 - AZ ÉRZÉKELŐ LAP FELSZERELÉSE AZ ÁGYRÁCSRA

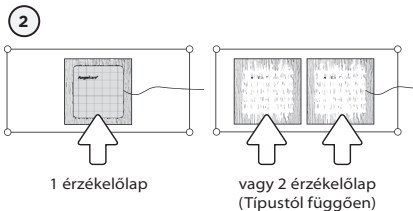


- 1) Vegye ki a gyermekágy matracát.
- 2) Helyezze az érzékelő táblá(ka)t – nyomtatott oldallal felfelé a kemény lapra.
- 3) Húzza át az adapter dugóját, a figyelmeztető címkét és az első 5 kábelvédőt a gyermekágy lábának háta mögött, **az ágyrács és a gyermekágy belső oldala között**.

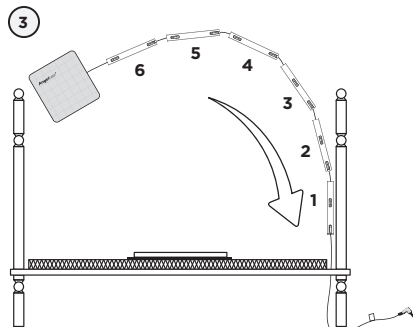




4

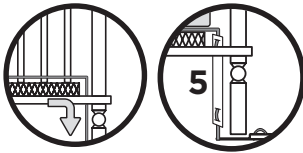


5




6

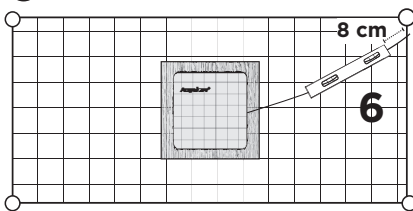


7

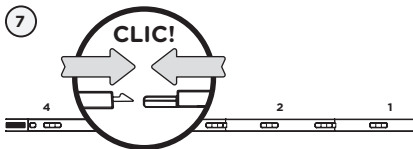


8

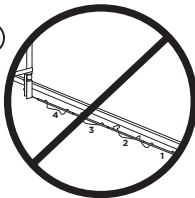

9

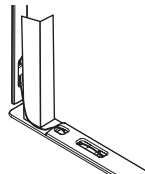

10

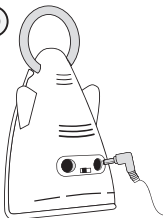

4) Az első 4 kábelvédőt helyezze a padlóra, de az 5. kábelvédőt hagyja függőlegesen, és rögzítse az ágyláb belső oldalára **(a matrac és a gyerekágy belső oldala közé)**.

5) Ügyeljen arra, hogy a vezeték sehol ne legyen laza.

6) Helyezze a 6. kábelvédőt kb. 8 cm távolságra az ágyrács szélétől.

7) Pattintsa össze a többi, padlón elhelyezett kábelvédőt.

8) Ügyeljen arra, hogy a vezeték sehol ne legyen laza.

9) Húzza le a 4. kábelvédőről a kétoldalú ragasztószalagot, és rögzítse vele a kábelvédőt a gyerekágy lábához.

10) Helyezze el a babaegységet egy vízszintes, stabil felületre úgy, hogy a gyerekágy felé nézzen, és legalább 1 méter távolságra legyen attól. Ezután dugja be az érzékelő lap vezetékét a babaegységbe.

11) Ellenőrizze, hogy az érzékelő lap nem mozdult-e el a helyéről.

12) Tegye vissza a gyerekágyba a matracot.

..... Az érzékelő lap bármilyen méretű és típusú matracal használható, kivéve a memóriahabos és formamegőrző matracokat.

..... A kemény deszkalap állandó nyomást fejt ki az érzékelő lapra, így lehetővé teszi, hogy a lap akkor is érzékelje a baba mozgását, amikor ő a gyerekágy szélén van.






FIGYELMEZTETÉS

FULLADÁSVESZÉLY

- Feszítse meg az érzékelő lap vezetékét, hogy ne legyen laza.
- Ha a gyermek növekedése miatt lejjebb állítja az ácsrácsot, csúsztassa fel a függőlegesen álló kábelvédőt (5), hogy az körülbelül az ágyrács és a padló között közepén maradjon. Az érzékelő lap laza vezetékét csúsztassa be a padlón található kábelvédőbe.
- Az érzékelő lap nem felnőttek, vagy 24 hónaposnál idősebb kisgyermekek felügyeletére készült
- Ne használja tovább az érzékelő lapot, ha a gyerek betölti a 24 hónapos kort. Rakja el az érzékelő lapot, és őrizze meg későbbi használatra.
- AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT: Ellenőrizze, hogy az egység készen áll-e a használatra, ehhez olvassa el a használati útmutató telepítés ellenőrzésére vonatkozó részét

CH


3. LÉPÉS - A BABAEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

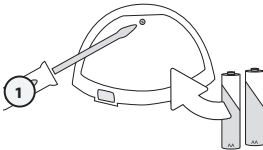

- 1) Csavarozza ki az akkumulátortér burkolatát, és tegyen be 2 AA alkáli elemet (nem tartozék).
- 2) Tegye a babaegységet **legalább 1 m** távolságra a gyerekágytól.
- 3) Csatlakoztassa a hálózati adaptert a babaegységhez, majd egy hálózati konnektorba.


MEGJEGYZÉS:

Az elemek áramkimaradás esetén is biztosítják a működést.

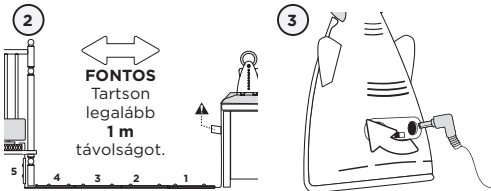




BABAEGYSÉG:

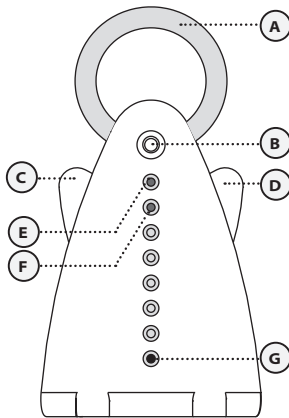


Előlnézet

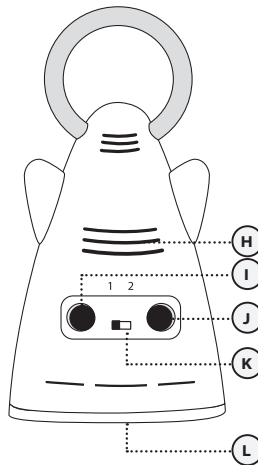

Hátulnézet

- A) Éjszakai fény
- B) Tartás/Csipogó gomb
- C) **BEKAPCSOLÁS/ KIKAPCSOLÁS** (bal „szárny”)
- D) Éjszakai fény ki/be (jobb „szárny”)
- E) Bekapcsolás jelző (zöld)
Alacsony akkumulátorszint-jelző (piros) Tartásjelző (villogó zöld)
- F) Mozdásjelző (zöld) Riasztás jelző (piros)
- G) Mikrofon
- H) Hangszóró
- I) Érzékelő lap kimenet
- J) Váltóáramú adapter kimenet
- K) Babaegység kapcsoló 1. Mód – Általános 2. Mód – Csak mozgás
- L) Akkumulátortér burkolata (nem látható)

4. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

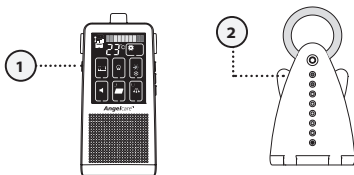

- 1) Nyomja meg a szülői egység **BE/KI** gombját, hogy normál módba lépjen.
- 2) Nyomja meg és tartsa nyomva a babaegység **bal „szárny” (left 'wing')** gombját 2 másodpercig.

..... Az LCD monitor 30 másodperc inaktivitás után energiatakarékos üzemmódba lép (elsötétül).
..... A „felébresztéshez” nyomjon meg egy gombot.



..... Kikapcsolt babaegység mellett a bekapcsolt szülői egység keresni fogja a kapcsolatot a babaegységgel. A **Kapcsolat** ikon a következő ciklust megjelenítve végzi a keresést.



..... Ha megszakadt a kapcsolat a 2 egység között (olvassa el a hibaelhárítás részt):

- **A Hatókörön kívül** ikon megjelenik a képernyőn és a szülői egység sipolni kezd.





FONTOS IKONOK

23°C

Hőmérséklet ikon:

Jelzi a helyiség hőmérsékletét

Akkumulátorszint ikon:

Jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét



Beállítások ikon:

A beállítások megnyitása

VOX

VOX ikon: Jelzi, hogy a Vox funkció be van kapcsolva (Hang-aktiválás)

ECO

ECO ikon: Jelzi, hogy az ECO funkció be van kapcsolva



Hőmérsékleti riasztás ikon: Jelzi, hogy a hőmérsékleti riasztás aktív



Hang ikon:

Jelzi, hogy a babaőrző funkció aktív



Érzékelő tábla ikon: Jelzi, hogy a légzésfigyelő aktív



Inga ikon: Jelzi, hogy a „PITTYEGŐ” funkció aktív



Szintjelző sáv: Jelzi a babaegység hangerőszintjét

Kapcsolat ikon: Jelzi a szülői- és a babaegység közötti kapcsolat minőségét.



HU

5. LÉPÉS - A MONITOR ELLENŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE

Az Angelcare® készülék használható az előre programozott gyári beállításokkal, vagy egyéni igényei szerint testre is szabhatja azokat.



MEGJEGYZÉS:

A **Beállítások** üzemmódban végzett módosítások nem aktiválódnak, amíg meg nem erősíti azokat a Vissza (**Return**) ikon megnyomásával. A módosítások jóváhagyását egy sípszó jelzi.

FONTOS

A Beállítások üzemmódban a szülő- és a babaegység közötti hangátvitel ideiglenesen szünetel. CSAK a mozgásérzékelés aktív (ha bekapcsolta).





5.1 - ÉRZÉKELŐLAP

AZ ÉRZÉKELŐLAP AKTIVÁLÁSA:




- 1) Nyomja meg az **Érzékelő lap (Sensor Pad)** ikont a légzésfigyelő mód **aktiválásához** vagy **inaktiválásához**.



Ha a légzésfigyelő mód **KI** állapotban van, a „PITTYEGŐ” mód is automatikusan kikapcsolt (**KI**) állapotban van. Ez lehetővé teszi, hogy **CSAK a baba hangjait** észlelje.

AZ ÉRZÉKELŐLAP TESZTELÉSE:

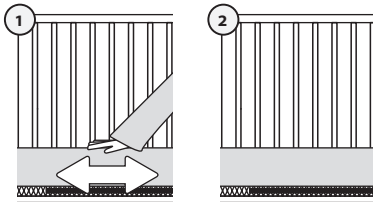

- 1) A matracot enyhén lenyomva mozgassa a kezét.
- 2) Vegye le a kezét a matracról és távolodjon el a kiságytól. 15 másodperc elteltével „PITTYEGŐ” riasztás előtti hang hallható, majd 5 másodperc múlva a megszólal a **riasztás**.
- 3) Ismét mozgassa meg a kezét a matracon, akár a négy sarkánál is. Ellenőrizze, hogy a babaegység mozgásjelzője még mindig villog-e.



RIASZTÁS


- A készülék akkor riaszt, ha az érzékelő lap 20 másodpercig nem érzékel mozgást.
- A szülő- és a babaegység hangszórója egyaránt hangos figyelmeztető hangot ad.
- A **mozgásriasztás** ikon megjelenik az LCD képernyőn.

HA A KÉSZÜLÉK NEM RIASZT

Előfordulhat, hogy az érzékelő lap folyamatos padlórezgést vagy légáramlatot, illetve egy, a kiságyhoz érő személyt érzékel.

- Ha az érzékelő lap be van kapcsolva, ne érjen a kiságyhoz.
- Helyezze falhoz a kiságyat.
- Módosítsa az érzékelő lap érzékenységi szintjét.

A RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSA:

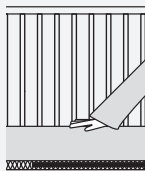

VAGY
Nyomjon meg egy gombot a szülői egységen, hogy **Hold** (tartás) funkcióba állítsa (ld. 6.5. lépés).


Tegye vissza a kezét a matracra.



VAGY



Nyomja meg a babaegység **Tartás (Hold)** gombját (ld. 6.5. lépés).

Tartsa két másodpercig lenyomva a **bal oldali „szárny”** gombot az egység kikapcsolásához (**KI**).

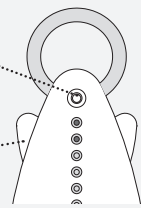



AZ ÉRZÉKELŐLAP ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

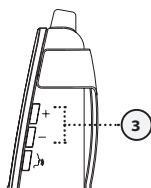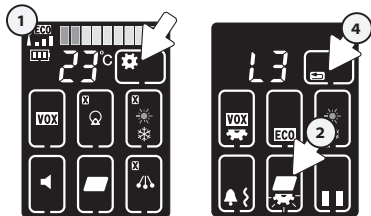

1. szint	L1
2. szint	L2
3. szint	L3
4. szint	L4
5. szint	L5

1) Nyomja meg a **Beállítás (Settings)** ikont a beállítás üzemmód megnyitásához.

2) Nyomja meg a **Mozgásérzékelés (Movement Sensitivity)** ikont.



Az ikon villogni kezd.

3) Használja a (+) vagy (-) gombokat a szülői egység jobb oldalán, hogy kiválassza a kívánt érzékenységi szintet (1 és 5 között).

VAGY

Nyomja meg a **Mozgásérzékelés** ikont, hogy kiválassza a kívánt érzékenységi szintet.

4) Nyomja meg a **Vissza** ikont a kiválasztás megerősítéséhez és a normál képernyőre való visszalépéshez.

MEGJEGYZÉS:

Ha téves riasztásokat kap, módosítsa az érzékenységi szintet.


MEGJEGYZÉS:

Ha **Beállítások** módban 30 másodperc elteltével nem végez módosítást, az egység visszatér normál állapotba, módosítás nélkül.

H

A PITYEGŐ FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA:

Az egység **Pittyegő** hangot ad, amikor a baba mozog (ha a mozgásérzékelés be van kapcsolva).

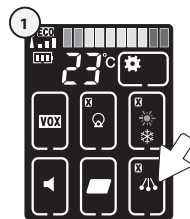

MEGJEGYZÉS:

Ha a Mozgás üzemmód ki van kapcsolva, a **Pittyegő** mód is automatikusan kikapcsolt (KI) állapotban van.

1) Nyomja meg az **inga (TIC)** ikont a „PITYEGŐ” funkció **aktiválásához** vagy **inaktiválásához**.



BE



KI

Ha az **Inga** ikon aktiválva van, a szülői egység **pittyegő** hangot ad.

MEGJEGYZÉS:

Ha az **ECO** üzemmódot használja, a „Pittyegés” kikapcsol.

FONTOS

- Az érzékelő lap nem felnőttek, vagy 24 hónapnál idősebb kisgyermek felügyeletére készült.
- Ha már nem használja az érzékelő lapot, vegye ki a gyerekágyból, és tegye el.



5.2 - HANG


A HANG BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a (+) vagy a (-) gombokat a hangerő szintjének beállításához.

MEGJEGYZÉS:

LO szinten a szintjelző sáv továbbra is látható, és az ikon villog. Ha ismét megnyomja a villogó **Hang** ikont, automatikusan aktiválja a **Némítás** funkciót.

A sáv eltűnik, és helyette megjelenik egy kereszt az ikon képernyőn. A funkció **INAKTIVÁLÁSÁHOZ** nyomja meg ismét a **Hang** ikont. (Olvassa el a **6.6** részt, ha többet szeretne megtudni a **Némítás** módról.)

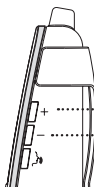


A hangerőszint növelése (+)

A hangerőszint csökkentése (-)


0. szint	LO
1. szint	L1
2. szint	L2
3. szint	L3
4. szint	L4
5. szint	L5

A HANGERŐ CSÖKKENTÉSE LO SZINTRE

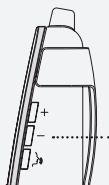

Nyomja meg a (-) gombot, hogy kiválassza az **LO** szintet (lásd a **6.6.** lépést).

VÁLASZ ÜZEMMÓDBA ÁLLÍTÁS

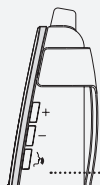

Nyomja meg és tartsa nyomva a **Válasz** gombot, hogy beszélni tudjon a babához.

A HANG ELLENŐRZÉSE:

Kérjen meg valakit arra, hogy beszéljen bele a babaegységbe, vagy tegye az egységet egy bekapcsolt rádiókészülék mellé.

FONTOS

A összehajadás (fűtődés) elkerülése érdekében tartsa a két egységet legalább 3 m távolságra egymástól.

HA NEM HALL HANGOT:

- Ellenőrizze, hogy mindkét egység be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy mindkét egység csatlakozik-e egy működő elektromos aljzathoz.
- Ellenőrizze az elemeket mindkét egységben (ha szükséges, cserélje ki vagy töltsse fel azokat).
- Helyezze közelebb a szülői egységet a babaegységhez.

5.3 - ELEMÉK

AZ AKKUMULÁTOROK ELLENŐRZÉSE

Húzza ki a hálózati adaptereket mindkét egységből.

- Ha nem látható a zöld fény a babaegységen, cserélje ki az elemeket.
- Ha a szülői egység és a képernyője nem világít, cserélje ki az elemeket.

AZ ELEMÉK TÖLTÉSE A SZÜLŐI EGYSÉGBEN

Hagyja a szülői egységet a töltőn, amíg teljesen fel nem töltődik. Bár az akkumulátorok 1/3 kapacitással is megfelelően működnek, javasoljuk, hogy teljesen töltsse fel azokat.



1/3-ig tele 2/3-ig tele Tele



A SZÜLŐI EGYSÉG AKKUMULÁTORSZINTJÉRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

- Megszólal a riasztás, ha az akkumulátorokat tölteni kell
- A szülői egység 20 másodpercenként sípol
- Az akkumulátor ikon villog a szülői egység képernyőjén





MOST MÁR KÉSZEN ÁLL A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA

Az Angelcare® készüléket használhatja az előre beprogramozott gyári beállításokkal, vagy testre is szabhatja a beállításokat.

ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK



Hang mód: BE
Hangszóró hangereje: 3. szint (az 5-ből)



Mozgás mód: BE
Érzékelő lap érzékenysége: 3. szint (az 5-ből)
PITTYEGÉS: KI



Hőmérsékleti riasztás: KI
Hőmérsékleti riasztás beállításai:
Felső hőmérsékleti határérték*: 30°C
Alsó hőmérsékleti határérték*: 19°C

VOX

VOX mód: KI
VOX szint: 2. szint (a 4-ből)

ECO

ECO mód: KI



Riasztás mód: Csak hangos riasztás

* A felső/alsó hőmérsékleti határérték alapértelmezett értékei egyes országokban eltérőek lehetnek.



CH

MEGJEGYZÉS:

Az ismételt csatlakoztatással visszaállítja a készülék gyári alapbeállításait.

FONTOS


- Ellenőrizze a készüléket az első használat előtt.
- Rendszeresen ellenőrizze a készüléket, hogy megfelelően működik-e.
- Minden alkalommal ellenőrizze a készüléket, amikor áthelyezi az érzékelő lapot.



6. LÉPÉS - TOVÁBBI FUNKCIÓK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA


MULTIFUNKCIÓS BERENDEZÉS

Az Angelcare® készülék multifunkciós. Igényei szerint különféle kombinációkban használhatja.

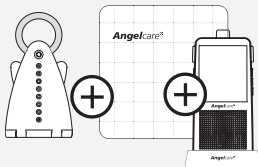


HANG ÉS MOZGÁS:

Lehetővé teszi, hogy megfigyelje a baba **MOZGÁSÁT (légzését) ÉS HANGJÁT** a szülői egység és az érzékelő lap használatával.

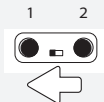


Állítsa a babaegység csatlakozó kapcsolóját **1-es** állásba a hang és mozgás érzékeléséhez.

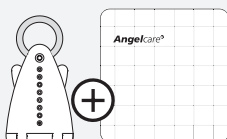


CSAK MOZGÁS:

Lehetővé teszi, hogy **CSAK** a baba **MOZGÁSÁT (légzését)** figyelje meg a szülői egység nélkül. Ez a kombináció akkor hasznos, ha a baba a szülőkkel egy helyiségben tartózkodik.

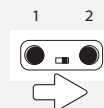


Állítsa a babaegység csatlakozó kapcsolóját **2-es** állásba **CSAK MOZGÁS** érzékeléséhez. Ha a szülői egység be van kapcsolva, azon a Hatókörön kívül ikon látható.

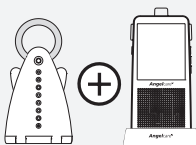

CSAK HANG:

Lehetővé teszi, hogy **CSAK** a baba **HANGJÁT** figyelje meg az érzékelő lap nélkül. Ez a kombináció akkor hasznos, ha nem szeretné használni az érzékelő lapot, vagy ha a baba 24 hónaposnál idősebb (az érzékelő lap használata esetén a maximális életkor).

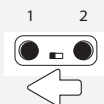

Állítsa a babaegység csatlakozó kapcsolóját **1-es** állásba **CSAK HANG** érzékeléséhez (az érzékelő lap funkciót kapcsolja ki a szülői egységen, majd az érzékelő lapot ki kell húzni a babaegységből).

MEGJEGYZÉS:

A biztonságos tároláshoz távolítsa el az érzékelő lapot és a vezetékeket a gyermekgyűl: válassza le az érzékelő vezetéket a babaegységről és tegye el a dobozába.

Az Angelcare® készülék használható az előre programozott gyári beállításokkal, vagy egyéni igényei szerint testre is szabhatja azokat.



MEGJEGYZÉS:

A **beállítások** üzemmódban végzett módosítások nem aktiválódnak, amíg meg nem erősíti azokat a **Vissza (Return)** ikon megnyomásával. A módosítások jóváhagyását egy sípszó jelzi.

FONTOS

A **beállítások** üzemmódban a szülői- és a babaegység közötti hangátvitel ideiglenesen szünetel. **CSAK** a mozgásérzékelés marad aktív (ha bekapcsolta).






6.1 - HANGRA BEKAPCSOLÓ (VOX) VAGY FOLYAMATOS HANGTOVÁBBÍTÁS ÜZEMMÓD

Tetszése szerint kiválaszthatja a hang megfigyelésének módját:

VOX (a kiválasztott érzékenységi szint szerinti erősségű hangot érzékeli), vagy **Folyamatos** (a hangtovábbítás folyamatos, minden hangot észlel).

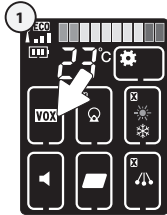

- 1) Nyomja meg a **VOX** ikont a **VOX** funkció **be-** vagy **kikapcsolásához**.




MEGJEGYZÉS:

A **VOX** kikapcsolásával a **Folyamatos** hangtovábbítást bekapcsolja.

H

A VOX ÉRZÉKENYSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA:

Meghatározhatja a hangerőt, ami aktiválja a hangátvitelt a szülői egységhez.

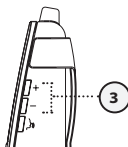

1. szint L1
2. szint L2
3. szint L3
4. szint L4

- 1) Nyomja meg a **Beállítások** ikont, hogy megnyissa a beállítások módot.
- 2) Nyomja meg a **VOX érzékenység** ikont. Az ikon villogni kezd.
 Az ikon villogni kezd.
- 3) Használja a (+) vagy (-) gombokat a szülői egység jobb oldalán, és válassza ki a kívánt érzékenységi szintet (1 és 4 között).
VAGY
Nyomja meg a **VOX érzékenység** ikont, hogy kiválassza a kívánt szintet.
- 4) Nyomja meg a **Vissza** ikont, hogy megerősítse a kiválasztást és visszatérjen a normál képernyőre.

MEGJEGYZÉS:


Ha az **ECO** üzemmódot használja, a készülék automatikusan megváltoztatja a **VOX** beállítást.



6.2 - ECO MÓD

Lehetővé teszi, hogy csökkentse a készülék által kibocsátott sugárzást, és növelje az akkumulátor élettartamát.

AZ ECO MÓD AKTIVÁLÁSA:

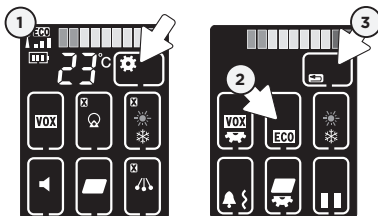

- 1) Nyomja meg a **Beállítások** ikont, a beállítások üzemmód megnyitásához.
- 2) Nyomja meg az **ECO** ikont az **ECO** funkció be- vagy kikapcsolásához.



- 3) Nyomja meg a **Vissza** ikont, hogy megerősítse a kiválasztást és visszatérjen a normál képernyőre.





Ha bekapcsolta az **ECO** üzemmódot, az **ECO** ikon a **Kapcsolat** ikon mellett jelenik meg. Vegye figyelembe, hogy a jelerősség jelző sáv nem jelenik meg.

MEGJEGYZÉS: ECO üzemmódban az átvitel hatótávolsága jelentősen csökken. A **VOX** automatikusan bekapcsol és a **PITTYEGÉS** kikapcsol, de a **mozgás**, a **hang-** és a **hőmérséklet-riasztás a beállítások** szerint működik.

6.3 - HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS

A MÉRTÉKEGYSÉG KIVÁLASZTÁSA:

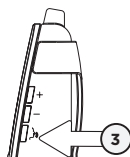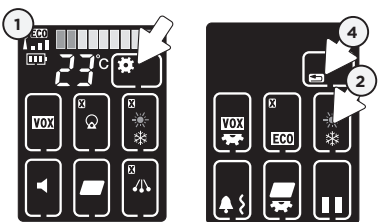


- 1) Nyomja meg a **Beállítások** ikont a beállítások üzemmód megnyitásához.
- 2) Nyomja meg a **Hőmérséklet-beállítás** ikont.
- 3) Nyomja meg a szülői egységen a **válasz gombot**, hogy **Celsius**-ról **Fahrenheit**-re váltson.




- 4) Nyomja meg a **Vissza** ikont, hogy megerősítse a kiválasztást és visszatérjen a normál képernyőre.





A HŐMÉRSÉKLET-RIASZTÁS BEKAPCSOLÁSA:

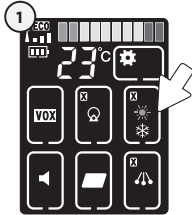

- 1) Nyomja meg a **Hőmérséklet-riasztás** ikont, hogy **be-** vagy **kikapcsolja** az alacsony- és a magas hőmérsékleti riasztást.

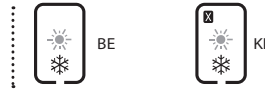

A HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY BEÁLLÍTÁSA:

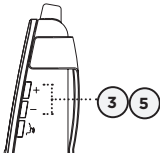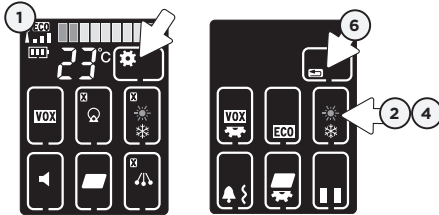

- 1) Nyomja meg a **Beállítások** ikont a beállítások üzemmód megnyitásához.
- 2) Nyomja meg a **Hőmérsékleti riasztás** ikont.
- 3) Ha a **Magas hőmérséklet** (NAP) ikon villogni kezd, nyomja meg a **(+)** vagy a **(-)** gombot a **magas hőmérsékleti riasztás** beállításához (22 - 35°C).
- 4) Nyomja meg ismét a **Hőmérsékleti riasztás** ikont.
- 5) Ha az **Alacsony hőmérséklet** (HÓPEHELY) ikon villogni kezd, nyomja meg a **(+)** vagy a **(-)** gombot az **alacsony hőmérsékleti riasztás** beállításához (5 - 19°C).
- 6) Nyomja meg a **Vissza** ikont, hogy megerősítse a kiválasztást és visszatérjen a normál képernyőre.



HŐMÉRSÉKLETI RIASZTÁS


- A riasztás megszólal, ha a hőmérséklet eléri a beállított maximális vagy minimális értéket.
- A szülői egység a kiválasztott riasztási módtól függően 5 másodpercenként 3-szor sípol és/vagy rezeg egymás után.
- A **Hőmérsékleti riasztás** ikon és a villogó **Alacsony/Magas** hőmérséklet ikon megjelenik az LCD képernyőn.





6.4 - RIASZTÁS

Kiválaszthatja a szülői egység kívánt riasztási módját.

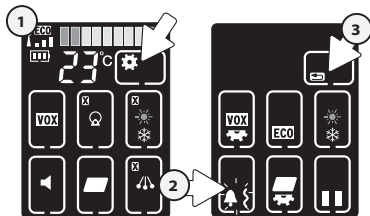

- 1) Nyomja meg a **Beállítások** ikont a beállítások üzemmód megnyitásához.
- 2) Nyomja meg a **Riasztás** ikont – ekkor az aktuális **riasztási mód** ikonja villogni kezd. Nyomja meg ismét, hogy kiválassza a riasztási módot, amint a kijelző vált az egyes módok között.
- 3) Nyomja meg a **Vissza** ikont, hogy megerősítse a kiválasztást és visszatérjen a normál képernyőre.



Hangos riasztás
és rezgés



Csak hangos riasztás



Csak rezgés:

Ha a mozgás riasztás bekapcsol, a szülői egység rezeg,
és a babaegységen megszólal hangos riasztás.




Ha a szülői egység a töltőn van, a
rezgés helyett hangos riasztást hall.

FONTOS


Beállítások módban hang vagy riasztás nem jut el a szülői egységhez, kivéve a **mozgás riasztást** (ha ez a funkció be volt kapcsolva).

6.5 - TARTÁS

Ezzel a funkcióval az Angelcare készüléket **Tartásba** helyezheti.

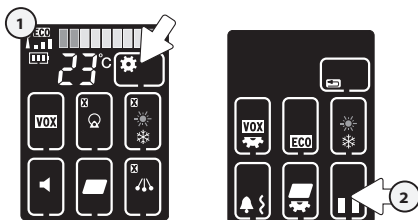

- 1) Nyomja meg a **Beállítások** ikont a beállítások mód megnyitásához.
- 2) Nyomja meg a **Tartás** ikont **VAGY** Tartsa nyomva 4 másodpercig a **babaegység Tartás (Hold) gombját**.
- 3) Nyomja 4 másodpercig a **Tartás (Hold) gombot** vagy a **babaegység Tartás (Hold) gombját**, hogy visszatérjen a normál működéshez.

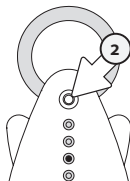

MEGJEGYZÉS:

Ha a babaegység **Tartás (HOLD)** módban van, a **bekapcsolás jelző** villog. A szülői egység 20 másodpercenként sípol és/vagy villog (a kiválasztott riasztási típustól függően), hogy emlékeztesse Önt, hogy a monitor tartásban van.

FONTOS

Ha a készülék **tartás** funkcióba van kapcsolva, a riasztás funkció és a **mozgás riasztás** ki van kapcsolva.






6.6 - NÉMITÁS

Ezzel aktiválhatja a **NÉMA** funkciót.

A NÉMITÁS BEKAPCSOLÁSA:
Nyomja meg a **Hang** ikont.

A NÉMITÁS KIKAPCSOLÁSA:
Nyomja meg a **Hang** ikont a kikapcsoláshoz.

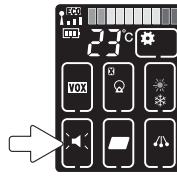

BE



KI


MEGJEGYZÉS:

A **Hang** ikon villog a szülői egységen.


6.7 - ÉJSZAKAI FÉNY

A készüléket éjszakai fényként is használhatja.

AZ ÉJSZAKAI FÉNY BEKAPCSOLÁSA:
Nyomja meg a babaegység **jobb „szárnyát”** vagy a szülői egységen az **Éjszakai fény** ikont, hogy kiválassza a fény erősségét.

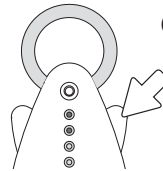

OR

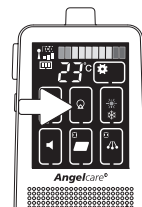

MEGJEGYZÉS:

Az **Éjszakai fény** funkció kikapcsol, ha a babaegység akkumulátorról üzemel.



KI



Alacsony



Magas

6.8 - CSIPOGÓ

Lehetővé teszi a szülői egység megkeresését.

A SZÜLŐI EGYSÉG MEGKERESÉSE:
Nyomja meg a babaegység **Csipogó** gombját. A szülői egység csipogó hangot ad egy percen keresztül.



A CSIPOGÓ HANG LEÁLLÍTÁSA:



Nyomja meg a szülői egység **képernyőjét** vagy bármely gombját

VAGY

Nyomja meg a babaegység **csipogó** gombját






HIBAKERESÉS

AZ ÚJRATÖLTHETŐ ELEMOK KARBATARTÁSA

- Az akkumulátorokat az első használat előtt mindenképpen töltsse 15 órán keresztül.
- A maximális élettartam érdekében javasoljuk, hogy rendszeres időközönként teljesen merítse le az elemeket. Az elemek teljesítménye csökkenhet, ha folyamatosan a töltőn tartja a készüléket. Ha a szülői egységet nem használja, kapcsolja ki.
- A gyenge elemek csökkentik a készülék teljesítményét. Ha nem elégedett a szülői egység/monitor teljesítményével, cserélje ki az újratölthető akkumulátorokat (2 x NiMH tölthető elemek).
- Javasoljuk, hogy fél évente cseréljen akkumulátort.



A KAPCSOLAT MEGSZAKADÁSA

A kapcsolat megszakadása esetén elsőként helyezze közelebb egymáshoz a szülői- és a babaegységet, és ellenőrizze, hogy mindkét egység be van-e **kapcsolva**. Kizárólag akkor végezze el az alábbi újrapcsolódási eljárást, ha ezek után sincs kapcsolat, és nem látható a hatótávolságon kívül figyelmeztetés.

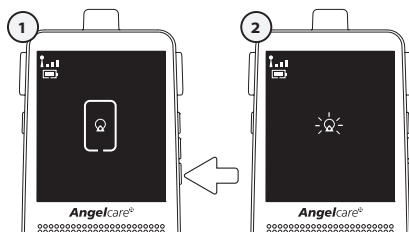

MEGJEGYZÉS:

Ellenőrizze, hogy a babaegység hátulján lévő kapcsolódási kapcsoló 1-es állásban van-e.

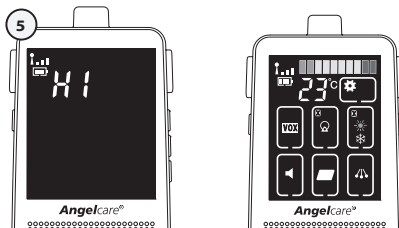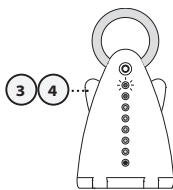

Újrakapcsolódási eljárás:

- Kapcsolja** be a szülői egységet, és tartsa lenyomva a **válasz** gombot 2 másodpercig, amíg a **Babaegység** ikon meg nem jelenik a képernyő közepén.
- A **Babaegység** ikon megnyomásával a szülői egység **Kapcsolódás** módba lép (az ikon villogni kezd).
..... Ha 1 percig nem tesz semmit, a szülői egység kilép a **Kapcsolódás** módból, és Önnek újra kell kezdenie a műveletet.
- Nyomja meg a **bekapcsoló** gombot a babaegység bekapcsolásához. A bekapcsolás jelző LED világítani kezd.
- Nyomja meg 30 másodpercen belül 4-szer a **bekapcsoló** gombot. A bekapcsolás jelző LED villogni kezd. A kapcsolódási folyamat 10 mp alatt befejeződik.
- Ha a szülői egység és a babaegység kapcsolódott, megjelenik a **H1** (vagy **H2**) felirat a szülői egység képernyőjén, amit a normál mód képernyő követ.

MEGJEGYZÉS:

..... Az újrapcsolódási eljárással visszaállítja a rendszer eredeti beállításait.





TÉVES RIASZTÁSOK

- Kapcsolja **KI** a babaegységet.
- Ellenőrizze az érzékelő lap és a babaegység közötti kapcsolatot. Húzza ki, majd dugja vissza a csatlakozószinórt.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön ágynemű a matrac és az érzékelő lap/lapok közé.
- Ha a gyermekágy betétje rugós, vagy lécekből készült, tegyen egy legalább 33x33 cm-es, 6 mm vastag kemény lapot az ágybetét és az érzékelő lap/lapok közé.
- Ügyeljen arra, hogy az érzékelő lap/lapok elhelyezése a beállítási követelményeknél leírtak szerinti legyen. Előfordulhat, hogy állítani kell az érzékelő lap/lapok érzékenységén **(lásd az 5.1 pontot)**.

A KÉSZÜLÉK NEM RIASZT

- A készülék **BEKAPCSOLT** állapotában ne érjen a kiságyhoz.
- Helyezze stabil fal mellé a kiságyat, hogy az érzékelő lap/lapok ne érzékelje a kiságyon kívüli mozgásokat.
- Előfordulhat, hogy állítani kell az érzékelő lapok érzékenységén **(lásd az 5.1 pontot)**.
- Kapcsolja **KI** a kiságy forgó játékeit, ventilátort, hangos zenét és minden egyebet, ami rezgést kelthet.

NINCS HANG

- Ellenőrizze, hogy mindkét egység be van-e **kapcsolva**.
- Ha valamelyik egység nem kapcsolható be, ellenőrizze/cserélje ki az elemeket, töltsse fel a szülői egységet és ellenőrizze az adapterek működését. Szükség esetén cserélje ki az elektromos aljzatokat.
- Ellenőrizze a szülői egység képernyőjén, hogy a készülék nincs-e **NÉMA** módban **normál** mód helyett. A hangerőszint növelését ld. a **6.6. lépésnél**.
- Tegye közelebb egymáshoz a szülői- és a babaegységet.

A BABAEGYSÉG BEKAPCSOLÁSJELZŐJE (ZÖLD) NEM VILÁGÍT

- Ellenőrizze a csatlakozásokat, vagy a hálózati adaptere(ke)t csatlakoztassa másik hálózati konnektorhoz.
- Nyomja meg és tartsa nyomva a babaegység bal oldali „szárnyát” a bekapcsoláshoz.

GYENGE VÉTEL

- Tegye közelebb egymáshoz az egységeket.
- Változtasson az egyik, vagy mindkét egység helyzetén.
- Tegye az egységeket a baba által el nem érhető vízszintes felületre.
- Cserélje ki az elemeket, vagy töltsse fel a szülői egységet.

H
U



STATIKUS TORZÍTÁS, INTERFERENCIA (MÁS KÉSZÜLÉKEK, VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONOK, ADÓVEVŐK, STB. MIATT)

- Fordítsa el vagy vigye odébb a szülői egységet az interferencia forrásától.

VISSZACSATOLÁS (HANGOS ZAJOK A SZÜLŐI EGYSÉGBŐL)

- Vigye távolabb egymástól az egységeket (legalább 3 méter távolságra).
- Csökkentse a szülői egység hangerejét.

A SZÜLŐI EGYSÉG KÉPERNYŐJE FEKETE (A SZÜLŐI EGYSÉG KI VAN KAPCSOLVA)

- Kapcsolja **be** a szülői egységet a **bekapcsoló** gomb megnyomásával és nyomva tartásával.
- Cserélje ki az elemeket, vagy töltsse fel a szülői egységet.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

Az Angelcare® szavatolja e termék eredeti tulajdonosának, Angelcare®, ÉRINTŐKÉPERNYŐS DIGITÁLIS LÉGZÉSFYELŐ ÉS BABAŐRZÓ KÉSZÜLÉK (AC701-es modell) minden anyag- és megmunkálási hibától mentesen működik az eredeti vásárlás napjától számított egy (1) éven keresztül (az akkumulátorok nem tartozékok). Amennyiben ezen egyéves időszak alatt az előírások szerinti és normál körülmények közötti használat esetén a készülék nem megfelelően működik, úgy az Angelcare® saját döntése szerint ingyen megjavítja, vagy kicseréli a terméket. Forduljon a helyi forgalmazóhoz.

A termékhez mellékelni kell a vásárlás igazolását, ami lehet egy nyugta vagy egyéb bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a készülék még garanciális. Az Angelcare® viseli a termék javításának vagy cseréjének, valamint az Önhez történő visszaküldésének költségeit.

A jelen garancia nem érvényes a helytelen karbantartás, baleset, nem megfelelő tápfeszültség, vagy más helytelen használat miatt megsérült termékekre. Akkor is érvénytelen a garancia, ha azon a tulajdonos bármilyen javítást vagy átalakítást végzett. Az Angelcare® nem felel a termékkel kapcsolatos baleseti vagy következményes károkért. A garancia a fent jelzetteken kívüli minden egyéb felelősséget kizár. Semmilyen más garancia nincs.

A jótállás nem vonatkozik olyan termékekre és tartozékokra, amelyek nem Angelcare-márkájúak, vagy olyan problémákra, amelyek a termék használati utasításával összhangban nem levő használatból, a termék használati utasításának be nem tartásából, vagy nem az Angelcare által szállított tartozékok, alkatrészek vagy részegységek használatából erednek.

A TÖRVÉNY SZERINTI JOGOK ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIVEL EGYES ORSZÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A BALESETI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.

SEMILYEN MÓDON NEM FELELÜNK A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

FONTOS!

Ez az Angelcare® készülék pipereterméknek minősül. Ne vigye vissza a terméket az üzletbe. Ha kérdése van vagy segítséget kér, a termék visszavitele előtt forduljon a forgalmazóhoz.





MŰSZAKI ADATOK

Hatótávolság:

Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen):
legfeljebb 250 m

Áramellátás:

2 AA alkáli elem (nem tartozék) vagy 100-240V
AC/5V DC adapter a babaegységhez.

2 AAA tölthető akkumulátor és 100-240V
AC/5V DC AC adapter a szülői egység
töltőállomáshoz.

Figyelem: Az áramütés kockázatának
csökkentése érdekében a terméket ne tegye ki
eső vagy nedvesség hatásának.

A nem megfelelő elemek használata
robbanásveszélyes. A használt elemeket az
utasításoknak megfelelően kezelje.

Az akkumulátorok helytelen behelyezése
robbanást okozhat.

A mellékelt elemek: 2 db AAA NIMH tölthető
elem; gyártó: GPI INTERNATIONAL LIMITED
(GN60AAAHC, 1,2V 600mAh) vagy HIGHPOWER
TECHNOLOGY CO., LTD (HFR-44AAAJ600,
1,2V 600mAh). **Ezeket csak 2 darab AAA
NiMH újratölthető akkumulátorral szabad
kicserélni.**

Elemek:

- NE használja együtt a régi és az új elemeket.
- TILOS a normál alkáli (szén-cink)
szárazelemek és az újratölthető (Ni-Cd, NiMH
stb.) akkumulátorok vegyes használata.

Jeltovábbítás:

A szülői- és a babaegység közötti jeltovábbítás
1880 és 1920 Mhz közötti frekvencián történik
(a pontos frekvencia országonként eltérő).

A készülék megfelel az 1999/05/EK irányelvben
foglalt előírásoknak.

Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a
forgalmazótól kérheti el.

H
U



ÓVJA A KÖRNYEZETET

Ez az elektronikus berendezés újrahasznosítható anyagokat tartalmaz és nem szabad háztartási
hulladékként ártalmatlanítani. Vigye be egy elektromos és elektronikus berendezések gyűjtését
végző helyre (a részletekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál).

ERP MEGFELELÉS

DÉL-AFRIKA-BRAZILIA-ECUADOR-EURÓPAI UNIÓ-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Csak Angelcare® gyártmányú áramforrás használható –
típuszám: T05005V001 / T05005B001

NÉMETORSZÁG

Csak Angelcare® gyártmányú áramforrás használható – típuszám: T05005F002

AUSZTRÁLIA

Csak Angelcare® gyártmányú áramforrás használható – típuszám: T05005S002

ÉSZAK-AMERIKA

Csak Angelcare® gyártmányú áramforrás használható – típuszám: T05005U002





TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy az Angelcare® termékét választotta. Az Angelcare® a termékek fejlesztése és gyártása során a legnagyobb gondossággal jár el, valamennyi termék megfelel a nemzetközi szabványoknak. A cég termékeire a világon mindenütt 12 hónap garanciát vállal, mely a vásárlás napjától számítva él. A vásárlás napján kapott számlát, vagy fizetési blokkot és/vagy a készülék bélyegzett jótállási jegyét okvetlenül őrizze meg, mert jótállási igényét ezekkel érvényesítheti. A jótállás időtartama alatt minden olyan hiba esetén, amelynek eredete gyártási hibára vagy anyaghibára vezethető vissza, a termék hibás főegységét cseréljük. A készülékek utólagos javítását a gyártó a készülék jellege miatt nem engedélyezi.

A csere időtartama a bejelentéstől (a termék beérkezésétől) számított kb. 8nap. Ez a jótállás nem vonatkozik az olyan termékekre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rossz feszültség, helytelen alkalmazás, vagy használat, ill. nem megfelelő elemek használata miatt sérült meg. A garancia szintén nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos javíttatta a készüléket, vagy átalakíttatta.

Meghibásodás esetén a termék főegységeinek cseréjét 3 munkanapon belül az eladó szerv, ezt meghaladóan a forgalmazó végzi, kérjük utóbbi esetben ezt okvetlenül jelezze a megadott elérhetőségeken. (Tel.: 06/20/2557750, info@angelcare.hu) Importőr és szerviz: lsd. Forgalmazók / Distributors: Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

JÓTÁLLÁSI JEGY

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikke a 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet alapján.

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk. 8:1. §). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. § alapján.

2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A termék, vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.

3. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót

4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.

5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.

6. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.

8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) érvényesítheti. Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhöz kell eljuttatni, személyesen, vagy postai úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve ha a fogyasztó a küldeményről és a meghibásodásról előzetesen tájékoztatta.

10. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni.

11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következő jogszabályok és rendeletek szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet; Ptk. XXIV. fejezet; 19/2014 (IV.29) NGM Rend. Hibás teljesítés miatt a fogyasztó a Ptk. 6:159.§ par. alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott kellékszavatossági jog lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

12. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlát/blokkot és/vagy lebélyegzett, kitöltött jótállási jegyét feltétlenül őrizze meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerződés megkötését.





13. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

14. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

15. Jótállási igény nem érvényesíthető a következő esetekben:

- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése esetén a jótállási jegy érvénytelen.
- A használati utasítástól eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
- Átalakítás, hibás, vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
- Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre, vagy tartozékokra.
- Nem a jótállási jegyben feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy az ANGELCARE® AC701 típusú készülékek a CE nemzetközi jelzéssel vannak ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabvány-előírásoknak és irányelveknek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a forgalmazótól kérheti el.

TERMÉK TÍPUSA: ANGELCARE® AC701 típusú készülék	A TERMÉK GYÁRTÁSI SOROZATKÓDJA:
VÁSÁRLÁS DÁTUMA:	ELADÓ SZERV BÉLYEGZŐJE, ALÁÍRÁS:

AZONNALI INTÉZKEDÉSEK CSECSEMŐKORI LÉGZÉSKIMARADÁS ESETÉN

Amennyiben a légzésfigyelő megszólal, azonnal ellenőrizze, hogy a riasztás valós-e. Téves riasztás esetén derítse fel ennek okát, változtasson a gyermek kiságykörülményein, vagy fokozza a készülék érzékenységet.

Riasztás esetén a következő életfunkciókat azonnal ellenőrizze gyermekénél:

- a baba lélegzik-e;
- van-e a csecsemőnek szívverése;
- megfelelő-e a gyermek vérkeringése.

A légzés ellenőrzése a legegyszerűbb, a mellkas emelkedő-süllyedő mozgása szabad szemmel is könnyen látható, a gyermek arcához közel hajolva a száj- és orrnyílásnál légző hang (szuszogás) hallható. A csecsemő szívverését az ismert testpontokon lehet pulzustapintással ellenőrizni, nyaki- vagy csukló- verőér esetén. A vérkeringés ellenőrzésének legegyszerűbb módja a baba arcszínének megvizsgálása. Egészséges keringés esetén a gyermek arcbőre rózsaszínű, megfelelő vérkeringés hiánya esetén a szín kékesszürke.

A három funkció mindegyike fontos, de a készülék riasztása a légzőmozgás kimaradását jelzi. Amennyiben a gyermek nem lélegzik, azonnal hívja a mentőket a 104, vagy 112 telefonszámokon, és a következő ÉLETMENTŐ INTÉZKEDÉSEKET az életfunkciók ismételt beindulásáig, vagy a mentők kiérkezéséig a leírtak szerint végezze.



Ha a gyerek ...	Megfelelő SÜRGŐS intézkedések
...eszméletlen	Kicsit döntjük hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, kb. 40-szer percenként.
...nem lélegzik	Ne alkalmazzon szívmasszázszt!
...van pulzusa	Folytassuk a lélegeztetést addig, amíg a gyermek újra magától lélegzik, vagy amíg a mentők át nem veszik.
...eszméletlen	Kicsit döntjük hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, 3 lélegeztetéssel.
...nem lélegzik	Utána alkalmazzon 15 szívmasszázszt, majd ismét 3 lélegeztetést.
...nincs pulzusa	Csak akkor hagyja abba az intézkedéseket, ha a gyermek ismét maga lélegzik.

MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS

1. Kicsit döntse hátra a baba fejét. Tegye az egyik kezét a baba homlokára, másik kezének két ujját az álla alá. Így döntse hátra a baba fejét. (a. kép) Ha lélegeztetéskor nem emelkedik a baba mellkasa, akkor azonnal ellenőrizze, hogy a megfelelő pozícióban van-e a baba feje. A leggyakoribb hiba a mesterséges lélegeztetéskor a nem megfelelő fejpozíció.



2. Száj és orr körülzárása

Tegye a száját a csecsemő orrára és szájára olyan szorosan, amennyire tudja. (b. kép)



3. Három levegő befúvás

Annyi levegőt fújjon a csecsemőnek, amennyit Ön egy könnyed levegővétellel a szájában tud tartani. A csecsemő mellkasa megemelkedik, amikor befújja a levegőt, és lesüllyed kilégzésnél. Egy befúvás kb. 1-1,5 másodpercig tart. A befúvások között a csecsemő orrát és száját szabadon kell hagyni, így önállóan bekövetkezik a kilégzés. A befúvás után fordítsuk fejünket oldalra úgy, hogy a gyermek légzésmozgását figyelhessük. (c. kép)



Ha nem emelkedik a baba mellkasa, akkor ez abból is következhet, hogy valami elzárja a baba légcsövét. Szüntesse meg az akadályt, fordítsa oldalra a baba fejét és a kisebbik ujjával törölje ki a baba száját, majd fordítsa vissza a gyerek fejét az előző pozícióba és folytassa a lélegeztetést. (d.kép)





SZÍVMASSÁZS

1. Feltételek

Ahhoz, hogy szívmassázst végezhesen, szilárd felületre van szükség. Egy asztal, vagy pelenkázó megfelel erre a célra, de ha nincs a közelben akkor a padló is alkalmas lehet. Nem szabad szívmassázst matracon végezni, mert az utórugózást eredményez. A következő lépésekhez, hogy a helyes nyomási pontot megtaláljuk, a gyermek felsőtestét szabaddá kell tenni.

2. Nyomási pont

Képzelden el egy összekötő vonalat a csecsemő két mellbimbója között. Jobb keze mutatóujját helyezze e vonal alá, és szorosan mellé a középső és gyűrűsujját. (a.kép) Emelje fel a mutatóujját és így a gyűrűs- és középső ujjával meg tudja nyomni a baba mellkasát. A gyűrűs- és középső ujj így 0,5-1 cm-rel a mellbimbókat összekötő vonal alatt vannak.



H
U

3. 15 szívmasszázs

A mellkas csont nyomásával nyomást gyakorol a szívre is, amellyel egy szükségvérvérkeringést indít be, és ezzel eljut az oxigén a létfontosságú szervekhez. Ahhoz, hogy a szív az összenyomás után újra megtelhessen vérrel, figyelni kell arra, hogy a mellkas csont ismét tehermentesítve legyen. Ekkor az ujjat nem kell a mellkasról felemelni, mert elmozdulhat a helyes nyomási pontról. A nyomási mélység a mellkas-keresztmetszet egyharmada kell hogy legyen, ez csecsemők esetében kb. 2 cm. Ahhoz, hogy a szívmasszázs a normál szívizom összehúzódásának megfelelően, nem kell hirtelen nyomással végezni a szívmassázst, hanem finoman úgy, hogy a szív nyomása annyi ideig tartson, mint a szívizom elernyedése. (b. kép)





www.angelcarebaby.com

