



A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MÓDOSÍTÁSA SZERELÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÉRZÉKELŐ LAP KÁBELVÉDŐIHEZ

HU

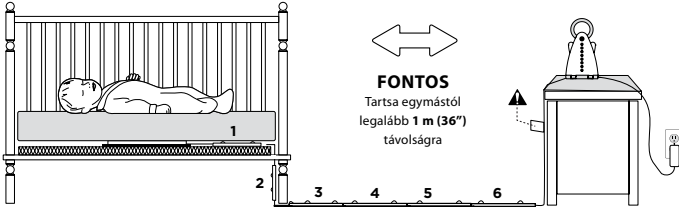

FONTOS
Tartsa egymástól
legalább 1 m (36")
távolságra

A DOBOZ TARTALMA:

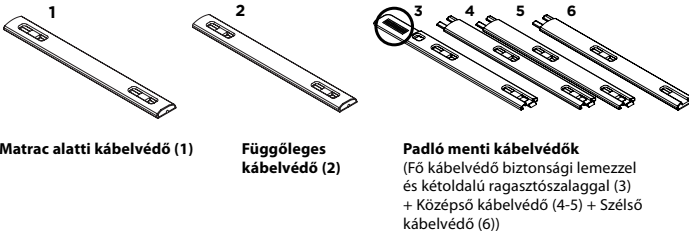

Matrac alatti kábelvédő (1)

Függőleges kábelvédő (2)

Padló menti kábelvédők
(Fő kábelvédő biztonsági lemezzel és kétoldalú ragasztószalaggal (3) + Középső kábelvédő (4-5) + Szélső kábelvédő (6))

⚠ VIGYÁZAT!


FOJTÁSVESZÉLY

A vezetékek a gyermekekre tekeredve FULLADÁST okozhatnak. SOHA ne használja az érzékelő lapot annak kábelvédői nélkül. Minden egyes használat előtt ellenőrizze, hogy a kábelvédő biztonságos helyzetben található a kiságy lába alatt. Ne használja az érzékelő lapokat, ha a kábelvédő sérült, vagy eltört. Ez a termék nem játékszer. Soha ne engedje, hogy gyermekek játszanak vele.




1. LÉPÉS – A MATRAC ALATTI KÁBELVÉDŐ (1) ELHELYEZÉSE

- 1) Helyezzen egy, az érzékelő lap felületénél nagyobb kemény lapot a kiságy alja és az érzékelő lap közé (részletekért ld. a használati útmutatót).
- 2) Vágja le az érzékelő lap kábelén található figyelmeztető címkét.
- 3) Fűzze át az érzékelő lap kábelét a matrac alatti kábelvédőn. Helyezze a matrac alatti kábelvédőt kb. 8 cm-re (3") a kiságy aljának szélétől.

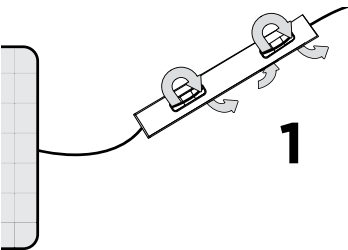


- 4) Helyezze az érzékelő lapot nyomtatott oldalával felfelé a kiságy közepére, a kemény lap tetejére.


- 5) Helyezze a kábelvédőt az érzékelő lap és a javasolt kiságy láb közé, az ábrán látható módon.

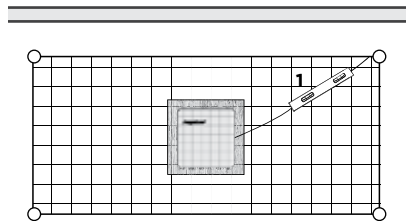

Javasolt kiságyláb: Használja a babaegységhez legközelebbi fal melletti kiságylábát, és vezesse végig a kábelvédőket a fal mentén (1. ábra).
Ha a babaegység a szoba túoldalán található, helyezze a matrac alatti kábelvédőt a kiságnak a babaegységhez legközelebbi lábához, és vezesse át a kábelvédőket a szobán (2. ábra). Minden esetben javasolt, hogy a kábelvédőket egy fal mentén helyezze el.

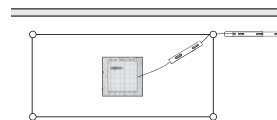


1. ábra

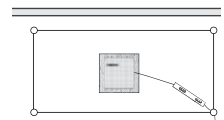


2. ábra

- 6) Helyezze a matracot az érzékelő lapra, és vezesse le a kábelt a kiságy lábának hátoldalán, **a kiságy alja és a kiságy belső pereme között.**
- 7) Nézze meg, hol éri el a kábel a padlót, mely hozzávetőlegesen meghatározza a padlómenti kábelvédők közül a fő kábelvédő (3) kezdetének helyét.

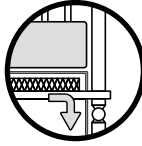

- 3) Fejtse le a kétoldalú ragasztószalagot a fő kábelvédő (3) lapos részéről, és helyezze a biztonsági lemezt a kiságy lába alá

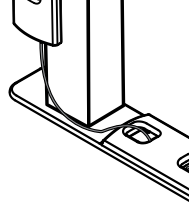


- 4) Fűzze át az esetlegesen lazán lógó kábelszakaszokat a kábelvédőn. Győződjön meg róla, hogy nem maradt lazán lógó kábel.





2. LÉPÉS - A FÜGGŐLEGES KÁBELVÉDŐ (2) ELHELYEZÉSE

- 1) Fűzze át az érzékelő lap kábelét a függőleges kábelvédőn (2)
- 2) Illessze a függőleges kábelvédőt a kábelre, körülbelül a kiságy alja és a padló közötti táv közepére, a kiságy lábának hátoldala mentén, **a kiságy alja és a kiságy belső pereme között.**

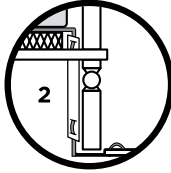


3. LÉPÉS - A PADLÓMENTI KÁBELVÉDŐK (3-4-5-6) ELHELYEZÉSE

- 1) Pattintsa össze a padlómenti kábelvédőket.

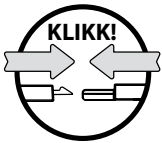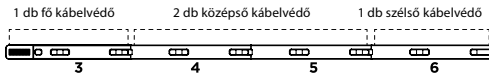

- 2) **Fűzze át** az érzékelő lap kábelét a padlómenti kábelvédőkön az ábrán látható módon.

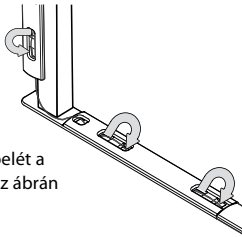

4. LÉPÉS - A TELEPÍTÉS BEFEJEZÉSE

- 1) Tegye a babaegységet egy vízszintes és stabil felületre, a kiságy felé fordítva, attól legalább 92 cm (36") távolságra.
- 2) Ragassza fel az új figyelmeztető címkét az érzékelő lap kábelére, kb. 10 cm-re annak csatlakozásától a babaegységhez.
- 3) Csatlakoztassa az érzékelő lap kábelét a babaegységbe.

FONTOS:

- Amint gyermeke növekedésével párhuzamosan áthelyezi a kiságy alját, csúsztassa el a függőleges kábelvédőt is lefelé, hogy az nagyjából közepén maradjon, és fűzze át a kábelt a kábelvédőn a keletkezett lazán lógó kábelszakasz megszüntetésére.
- Ne használja az érzékelő lapokat felnőtteknél, vagy 24 hónaposnál idősebb gyermekeknél.
- Ha már nem használja az érzékelő lapokat, akkor vegye ki őket a kiságyból és tegye el őket biztonságos helyre.
- ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:** Tesztelje a készüléket a használat előtt, olvassa el a használati útmutatót a tesztelés módjával kapcsolatban.

BÁRMILYEN KÉRDÉS VAGY ÉSZREVÉTEL ESETÉN

forduljon az Angelcare ügyfélszolgálatához az info@angelcare.hu e-mail címen vagy a +36 20 / 255 77 50 telefonszámon.