

Angelcare®

A NYUGODT ÁLOMÉRT

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BABAÓRZÓ

AC420 modell




HU
73

PL
95



TARTALOMJEGYZÉK

 FIGYELMEZTETÉSEK	75
AC420 ÜZEMBEHELYEZÉSI TUDNIVALÓK.....	79
1. LÉPÉS - A szülői egység feltöltése (15 óra).....	80
2. LÉPÉS - A babaegység beállítása.....	82
3. LÉPÉS - A babaőrző bekapcsolása.....	83
4. LÉPÉS - Babaőrző tesztelése és megismerése	84
HIBAELHÁRÍTÁS	88
KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS.....	89
MŰSZAKI ADATOK.....	90
POLSKI	95

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTSA MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS UTASÍTÁSOKAT.

A FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA SÚLYOS SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT, VAGY A TERMÉK KÁROSODÁSÁT OKOZHATJA.

FIGYELMEZTETÉS

Az összeszerelést felnőtt végezze el.
Összeszerelésnél tartsa távol az apró alkatrészeket a gyermekektől.

Az Angelcare® büszke minden termékére.
Amennyiben Ön elégedetlen, vagy kérdései merültek fel,
Egyesült Államok és Kanada: vegye fel a kapcsolatot velünk a következő címen:
angelcare@cdecinc.ca

Más országok: kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.






▲ FIGYELMEZTETÉSEK

1. A TERMÉK NEM HELYETTESÍTI A FELELŐSSÉGTELJES FELNŐTT FIGYELMÉT. A termék célja, hogy segítse gyermeke felügyeletét. Ettől függetlenül azonban Önnek a babaőrző használata mellett is megfelelő figyelmet kell fordítania gyermekére annak biztonsága érdekében.

2. FIGYELMEZTETÉS Fulladásveszély — Előfordult, hogy a kábelekbe belegabalyodott gyermekek MEGFÜLLADTAK. Tartsa távol az adapterkábelt a gyermekektől (legalább 1 méteres távolságban).

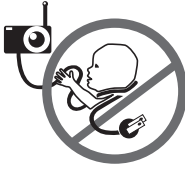

3. Soha ne használjon hosszabbító zsinórt a tápegységhez. **KIZÁRÓLAG** a mellékelt tápegységet használja.

4. NE fogja meg a konnektorba bedugott tápegység csupaszhát végét.

5. MINDIG ügyeljen rá, hogy az adó- és vevőegység megfelelően működjön, és hogy azok egymás hatósugarán belül helyezkedjenek el. Első használat előtt próbálja ki a babaőrt, végezzen rendszeres ellenőrzéseket, és mindig tesztelje működését, ha megváltoztatja a babaegység elhelyezkedését.

6. NE használja a babaőrzőt víz (pl. fürdőkád, mosogató stb.) közelében.



7. Tartsa **TÁVOL** a babaőrzőt hőforrásoktól (pl. sütő, radiátor stb.).

8. MINDIG sík felületen, függőlegesen helyezze el a babaegységet és a szülői egységet, és ügyeljen a megfelelő szellőzésre. **NE** helyezze kanapéra, párnára, ágyra vagy bármilyen olyan felületre, mely akadályozhatja a levegő szabad áramlását.

9. A termék **NEM** játék. **NE** engedje, hogy a gyermekek játszanak vele.

10. A termék apró alkatrészeket tartalmaz. Az összeszerelést felnőtt végezze el. Járjon el óvatosan a termék kicsomagolásánál és összeszerelésénél, és tartsa távol az apró alkatrészeket a gyermekektől.

11. A babaőr 10 °C és 40 °C közötti szobahőmérsékleten használható.

▲ ELEMekre VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

12. A szülői egységben **KIZÁRÓLAG** AAA ÚJRATÖLTETHETŐ elemeket használjon. **NE** használjon együtt régi és új elemeket. **NE** használjon együtt alkáli, hagyományos és újratölthető elemeket. A megfelelő polaritás szerint helyezze be az elemeket. **NE** okozzon rövidzárlatot a betápláló csatlakozókon. **KIZÁRÓLAG** javasolt- vagy azzal (feszültségben és méretben) egyező elemet és megfelelő adaptert használjon. Vegye ki az elemeket a készülékből, ha azt hosszabb ideig tervezi tárolni, vagy ha az elemek lemerültek. A lemerült elemeket megfelelő módon ártalmatlanítsa. **NE** próbálja meg újratölteni az újra nem tölthető elemeket. Az újratölthető elemeket **KIZÁRÓLAG** felnőtt felügyelete mellett szabad újratölteni. Az elemeket tartsa távol a gyermekektől.

H
U





13. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

13.1 Olvassa el ezeket az utasításokat - Minden biztonsági utasítást el kell olvasnia a termék használatá előtt.

13.2 Őrizze meg ezeket az utasításokat. A biztonsági- és működtetési utasításokat későbbi használat céljából meg kell őrizni.

13.3 Tartsa be a figyelmeztetéseket - A terméken és a működtetési utasításokban található minden figyelmeztetést be kell tartani.

13.4 Kövesse az utasításokat - Minden, működtetésre és használatra vonatkozó utasítást követni kell.

13.5 Víz és nedvesség - NE tegye ki nedvességnek a készüléket. Ne helyezze például fürdőkád, lavór, mosogató, mosóteknő közelébe, vagy bármilyen nedves környezetbe, például úszómedence mellé. Ügyeljen arra is, hogy az egységekbe NE essenek be tárgyak és ne fröccsenjen a belsejükbe folyadék nyílásaikon keresztül.

13.6 Tisztítás - Tisztítás előtt kapcsolja ki az egységeket. NE merítse vízbe a babaegység vagy a szülői egység egyetlen részét sem. Kizárólag száraz ruhával tisztítsa.

13.7 Szellőzés - NE zárja le a szellőzőnyílásokat. Ügyeljen rá, hogy a termék használat közben megfelelően szellőzzön. NE takarja le a babaegységet vagy a szülői egységet semmilyen tárggyal (pl. takaró). NE tegye be az egységet fiókba vagy bármilyen olyan helyre, amely tömptíja az általa kiadott hangot vagy megakadályozza a levegő szabad áramlását.

13.8 Hőforrások - NE helyezze hőforrás, pl. radiátor, hősugárzó, sütő, televízió vagy egyéb, hőt kibocsátó berendezés (pl. erősítő) közelébe. A hő károsíthatja a tokot vagy az elektromos alkatrészeket.

13.9 Kábelek védelme - Ügyeljen rá, hogy a termék tápkábelére ne lépjenek rá, és az ne szoruljon be bútorok vagy más tárgyak alá/főlé/közé - A tápkábeleket úgy kell vezetni, hogy minél kisebb legyen a lehetősége annak, hogy rájuk lépnek, vagy hogy azok bútorok vagy más tárgyak alá/főlé/közé beszorulnak. Különös figyelmet kell fordítani a vezetékekre és dugaljakra, elosztókra és arra a pontra, ahol a vezetékek kilépnek a termékből.

13.10 Kiegészítők - Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használja. NE helyezze a terméket instabil kiegészítőre, állványra, háromlábú állványra, konzolra vagy asztalra. A termék leeshet, súlyos

sérülést okozva gyermeknek vagy felnőttnek, és komolyan károsíthatja magát az eszközt is. **KIZÁRÓLAG** a gyártó által javasolt vagy a termékkel együtt árusított kiegészítő, állványt, háromlábú állványt, konzolt vagy asztalt használjon. A termék felszerelését mindig a gyártó utasításainak megfelelően kell végezni.

13.11 Húzza ki a kivehető alkatrésztől a készüléket villámlással járó viharban, vagy ha hosszú ideig nem használja azt.

13.12 Szervizelés - NE kísérelje meg saját kezűleg megjavítani a terméket, mivel a fedél felnyitása vagy eltávolítása (kivéve az elemajtót) veszélyes feszültségnek vagy egyéb veszélynek teheti ki Önt.

13.13 Cserealkatrészek - Kizárólag a gyártó által meghatározott vagy az eredeti alkatrészszel minden szempontból megegyező cserealkatrészt használjon. Nem hivatalos cserealkatrész használata tüzet, áramütést és egyéb veszélyt okozhat.

13.14 Használat - Jelen babaőrző pusztán a szülők munkájának támogatására szolgál. NEM helyettesíti a felelős és megfelelő felnőtt felügyeletet, és nem is szabad ennek kiváltására használni. A készüléket **KIZÁRÓLAG** a jelen használati útmutatóban megadott javaslatok szerint használja.

13.15 Áramforrások - Kizárólag az adapter adattábláján olvasható áramforrásról működtesse a terméket. Érdeklődjön kereskedőjénél vagy a helyi áramszolgáltatónál, ha nem biztos benne, hogy otthonában milyen áramforrás található.

13.16 Túlterhelés - NE terhelje túl a fali aljzatokat, hosszabbító kábeleket vagy egybeépített elosztókat. Ez tűz keletkezésével vagy áramütés veszélyével jár.

13.17 Tárgyak és folyadékok bekerülése - **SOHA** ne nyomjon be tárgyat a termék belsejébe a burkolat résein keresztül, mivel ezek veszélyes feszültségű pontokat érhetnek, vagy kilökhetnek olyan alkatrészeket, melyek tüzet vagy elektrosokkot okozhatnak. **SOHA** ne öntsön folyadékot a termékre.


13.18 Antenna - Az adóegységhez használt antennát úgy kell elhelyezni, hogy legalább 20 cm-es biztonsági távolság álljon fenn közte és a környezetében lévő emberek között. Az antennát nem szabad bővíteni, és tilos bármilyen más antennával vagy adóegységgel együtt használni.





13.19 Elektromos vezeték - A szabad téren elhelyezett antennarendszert TILOS felső elektromos vezeték vagy más elektromos lámpa- vagy áramkör közelébe vagy olyan helyre tenni, ahol ráeshet ilyen vezetékekre vagy áramkörökre. Ezek érintése halálos lehet.

13.20 FIGYELMEZTETÉS Fulladásveszély — Előfordult, hogy a k á b e l e k b e belegabalyodott g y e r m e k e k MEGFULLADTAK. Tartsa távol az adapterkábelt a gyerekektől (legalább 1 méteres távolságban).

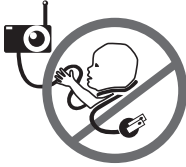

13.21 Interferencia - A babaőrző nyilvános frekvenciákat használ a jelek továbbítására. A szülői egységet érhetik a környéken található más babaőrzőktől származó jelek vagy interferencia. A babaőr jelét akár szomszédos lakásokban is foghatják. Magánélete védelme érdekében mindig kapcsolja KI a két egységet, ha nem használja azokat. Ha interferenciát tapasztal, váltson csatornát mindkét egységen.

14. ELEMÉK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

14.1 KIZÁRÓLAG a használati útmutatóban megadott típusú és méretű elemeket használjon. Nem megfelelő típusú elemek használata robbanást okozhat.

14.2 KIZÁRÓLAG AAA méretű újratölthető elemeket és/vagy a szülői egységhez mellékelt tápegységet használjon. A szülői egységben csak tölthető elemeket használjon. NE használjon alkáli elemeket, mivel ezek súlyos károsodást okozhatnak az egységben.

14.3 Első használat előtt töltsen 15 órán át az elemeket. Erre az időszakra kapcsolja KI a babaőrt. KIZÁRÓLAG a babaőrhez mellékelt tápegységet használja.

14.4 NE használja ezeket az adaptereket más berendezésekkel.

14.5 Kizárólag kikapcsolt állapotban húzza ki a tápegységet a babaegységből. Ha nincs kikapcsolva, az egység elemes módra vált, amennyiben van benne elem.

14.6 NE használjon újratölthető elemeket a babaegységben. KIZÁRÓLAG alkáli elemeket használjon.

14.7 NE dobja tűzbe az elemeket. Felrobbanhatnak. Ellenőrizze, hogy a helyileg hatályos szabályok nem tartalmaznak-e esetleg különleges ártalmatlanítási utasításokat.

14.8 Ügyeljen rá, hogy az elemek kezelésekor ne okozzon bennük rövidzárlatot vezető anyagokkal (pl. gyűrű, karkötő, kulcs). Kerülje az elemek töltését, rövidzárlat okozását, fordított töltését, rongálását vagy elégetését, mivel ezek következtében mérgező anyagok vagy hidrogén- és/vagy oxigéngáz szabadulhat fel, vagy megnövekedhet a felületi hőmérséklet.

14.9 NE próbálja meg tölteni a termékhez mellékelt vagy azzal együtt használható elemeket, ha azok nem újratölthető elemek. Az elemek ez esetben felrobbanhatnak, vagy maró hatású elektrolyt folyhat ki belőlük.

14.10 NE próbálja meg melegítéssel megújítani a termékhez mellékelt vagy azzal együtt használható elemeket. Ennek következtében hirtelen elektrolyt folyhat ki az elemekből, ami égési sérüléseket vagy irritációt okozhat a szemben vagy a bőrön.

14.11 Szükség esetén az elemeket ugyanolyan- vagy velük (feszültségben és méretben) megegyező elemekre kell cserélni. Amennyiben egy lecserélendő elem sorozatba van kapcsolva más elemekkel, akkor vele együtt cserélje le a sorozat többi elemét is. NE használjon együtt régi és új elemeket.

14.12 Kerülje az elemek fordított polaritású behelyezését. Az elemek fordított behelyezése esetén töltés jöhet létre, ami szivárgást vagy robbanást okozhat.

14.13 Ha a terméket 30 napnál hosszabb ideig tárolja, vegye ki belőle az elemeket, mivel azok szivároghatnak, és ezzel károsíthatják a berendezést.

14.14 A lemerült elemeket a lehető leghamarabb távolítsa el, mivel ezek nagyobb valószínűséggel folynak ki a termék belsejében. A szivárgó vagy eresztő elemeket védőkesztyű használata mellett azonnal le kell cserélni.

14.15 NE tárolja a terméket, vagy a termékhez mellékelt vagy azzal együtt használható elemeket magas hőmérsékletű helyen.



15. FIGYELMEZTETÉS

(Csak Észak-Amerikára vonatkozik)

15.1 A felhasználó elveszítheti a készülék működtetésének jogát, amennyiben a gyártó által nem engedélyezett módosításokat végez.

15.2 MEGJEGYZÉS: Ezt a készüléket úgy tervezték és fejlesztették, hogy megfeleljen az FCC szabályok 15. fejezetének és az Industry Canada engedélyköteles RSS szabvány(ok)nak. Ezen feltételek lakossági felhasználás esetén megfelelő védelmet biztosítanak a káros interferenciákkal szemben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát fejleszt és sugároz, ezért ha nem az utasításoknak megfelelően szerelik be és használják, káros interferenciát (vételi zavart) okozhat a rádiókommunikációban.

15.3 Mindamellett nincs rá garancia, hogy egy adott beüzemelés esetén nem fordulhat elő interferencia. Ha a készülék zavaró interferenciát okoz rádió vagy televízió vételében, amely véget ér a készülék ki- vagy bekapcsolásával, akkor próbálja meg kiküszöbölni ezt az interferenciát a következő megoldások valamelyikével:

- Állítsa új irányba vagy helyezze más helyre a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőantenna között.
- Dugja be a berendezést egy másik áramkörön elhelyezkedő konnektorba.
- Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió/tévéyszerelőtől.

15.4 A berendezés megfelel az FCC szabályok 15. fejezetének és az Industry Canada engedélyköteles RSS szabvány(ok)nak. Ezek alapján a termék működése a következő két feltételnek tesz eleget:

(1) A készülék nem okozhat ártalmas interferenciát, és

(2) A készüléknek el kell fogadnia az elismert interferenciákat, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést eredményeznek.

FCC ÉS IC SZABÁLYOK

RF sugárterhelési nyilatkozat

A babaegység megfelel az FCC RF nem ellenőrzött környezetre érvényes sugárterhelési korlátozásainak. **Figyelem:** A berendezés akkor felel meg az FCC RF terhelési útmutatásának, ha MINDEN embertől legalább 20 cm-es távolságra helyezi el azt. Az antennát tilos bármilyen más antennával vagy adóegységgel egy helyen vagy együtt használni.

Industry Canada

A termék megfelel a vonatkozó Industry Canada műszaki előírásoknak. CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)



ÜZEMBEHELYEZÉSI TUDNIVALÓK

BABAÓRZÓ
AC420 modell

TARTOZÉKOK:



Szülői egység




Dokkoló



Babaegység



2 tápegység

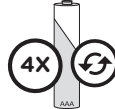

4 újratölthető AAA elem
a szülői egységhez

H

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ (NINCS MELLÉKELVE):



4 db AAA alkáli elem a
babaegységhez




Mini csillagfejű
csavarhúzó

BABASZOBA:


FONTOS

Helyezze a babaegységet sík, stabil felületre úgy, hogy a kiságy felé nézzen, és attól legalább **1 méterre** legyen. Az adaptert mindig a berendezéshez legközelebb eső, könnyen elérhető fali aljzathoz csatlakoztassa.

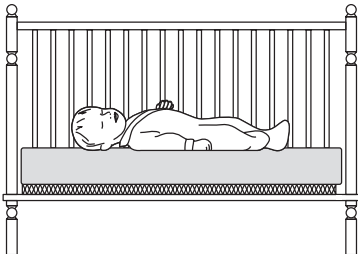


FONTOS

Tartsa be az
1 méteres
minimális
távolságot.

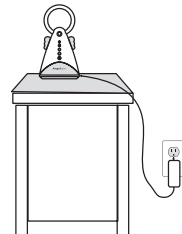




1. LÉPÉS - A SZÜLŐI EGYSÉG FELTÖLTÉSE

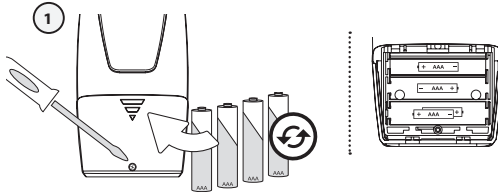

FONTOS

Sose használjon alkáli elemeket a szülői egységben, mivel ezek felrobbanhatnak.

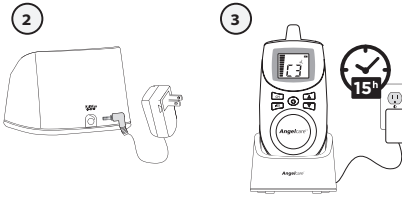

- 1) Távolítsa el az elemtartó fedelét és helyezze be az újratölthető elemeket (mellékelve).
- 2) Csatlakoztassa a tápegységet a szülői egységhez, és dugja be a konnektorba.
- 3) Töltse **15 órán át folyamatosan** az egységet (első használat előtt).

MEGJEGYZÉS:


Az elem teljesítményének optimalizálása érdekében tekintse át az Elemmel kapcsolatos útmutatások szakaszt a Hibaelhárítás fejezetben.

▲ FIGYELMEZTETÉS

FULLADÁSVESZÉLY.

Előfordult, hogy a kábelekbe belegabalyodott gyermekek **MÉGFULLADTAK**.

- Tartsa távol az adapterkábelt a gyermekektől (legalább 1 méteres távolságban).
- A csecsemőkre és kisgyermekekre vonatkozó súlyos fulladásveszély miatt a szülők és gondozók soha ne helyezték a babaegységet kevesebb mint 1 méterre a kiságytól.
- **SOHA** ne használjon hosszabbító zsinórt a tápegységhez. **KIZÁRÓLAG** a mellékelt tápegységet használja. A termék nem játék. Soha ne engedjen gyermeket játszani vele.

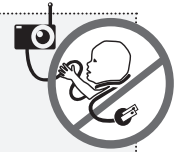





1.1 - ELEMEEK

AZ ELEMEEK ELLENŐRZÉSÉHEZ:

Húzza ki az adaptert mindkét egységből.

- Cseréljen elemet, ha a babaegység Bekapcsolásjelzője nem kapcsol be, vagy ha a babaegység zöld lámpája villog.
- Ha a szülői egység és képernyője nem kezd világítani, cseréljen elemet.

  A babaegység Bekapcsolásjelzője

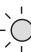  A babaegység Alacsony töltöttségi szint jelzője





ELEM-LEMERÜLÉSI RIASZTÁS

- A riasztás bekapcsol, ha az elemeket fel kell tölteni.
- A szülőegység 15 másodpercenként sípoló hangot hallat.
- A képernyőn villogni kezd az Elem-lemerülési riasztás ikon.

A SZÜLŐI EGYSÉG ELEMEINEK TÖLTÉSE:


Helyezze a szülői egységet a töltőállomásba, és hagyja ott. Az elemek már 1/2 kapacitáson is megfelelően működnek, javasoljuk azonban, hogy töltsse fel őket teljesen.




CH



SZÜLŐI EGYSÉG:

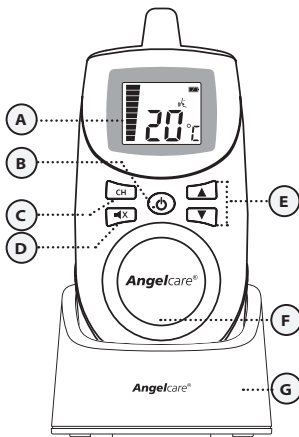

Elülső oldal

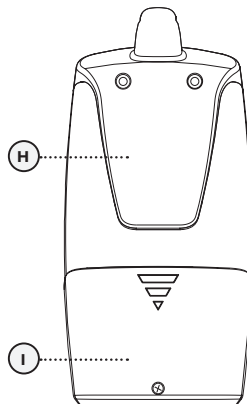



Hátsó oldal

- A) LCD-képernyő
- B) BE-/KIKAPCSOLÁS
- C) Csatornaváltó gomb (8 csatorna)
- D) Ideiglenes némitás gombja
- E) Hangerő fel/le
- F) Hangszóró
- G) Dokkoló
- H) Övcsipesz
- I) Elemtartó fedele







2. LÉPÉS - A BABAEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

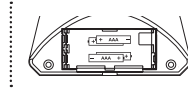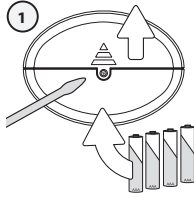

1) Távolítsa el az elemtartó fedelét, és helyezzen be 4 AAA alkáli elemet (nincs mellékelve).

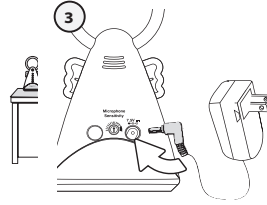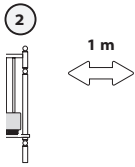


2) Helyezze el a babaegységet **legalább 1 méterre** a kiságytól.

3) Csatlakoztassa a tápegységet a babaegységhez, és dugja be a konnektorba.


MEGJEGYZÉS:

Az elemek áramszünet esetén is biztosítják az áramellátást.

BABAEGYSÉG:

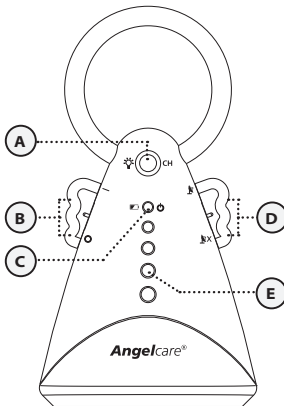

Eiülső oldal

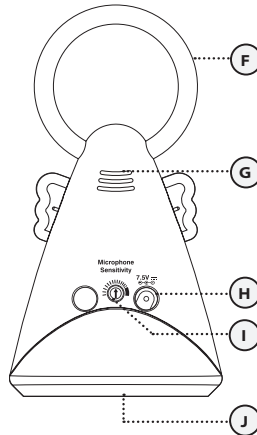

Hátsó oldal

A) Csatornaválasztó BE/KI éjszakai lámpa gombja

B) BE-/KIKAPCSOLÁS

C) Alacsony töltöttség / Bekapcsolásjelző

D) Hatótávolságon belül BE/KI

E) Mikrofon

F) Éjszakai lámpa

G) Szellőzés

H) Tápegység kimenete


I) Mikrofon érzékenység beállító

J) Elemtartó fedele (nem látszik)





3. LÉPÉS - A BABAŐRZŐ BEKAPCSOLÁSA

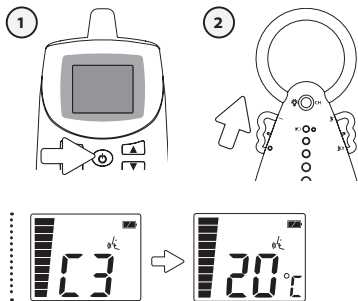

- 1) Nyomja meg a szülői egység **BE/KI** gombját 2 másodpercre.
- 2) Csúsztassa **BE** állásra a babaegység **BE/KI** gombját.

MEGJEGYZÉS:

A szülői egység képernyőjén megjelenik az átviteli csatorna (C1 és C8 között), majd 5 másodperc elteltével a szobahőmérsékletet és funkciókat jelző ikonok is.



Ha a szülői egység **BE**, a babaegység **KI** van kapcsolva


VAGY

Ha a két egység elveszíti a kapcsolatot egymással (tekintse át a hibaelhárítás szakaszt):

A képernyőn villogni kezd a Hatótávolságon kívül ikon, és a szülői egység sípolni kezd.

CH

CSATORNA KIVÁLASZTÁSA

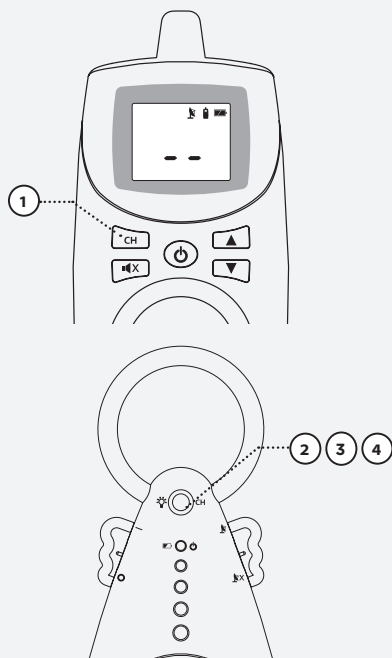

A CSATORNA KIVÁLASZTÁSA:

- 1) Nyomja meg a „CH” (bal felső) gombot egyszer a szülői egységen a **Csatornaválasztás** módba való belépéshez. Megjelenik a „--” szimbólum a kijelzőn, és a Hatótávolságon belül ikon (parabola antenna) villogni kezd.
- 2) Nyomja addig a csatornaválasztó gombot a babaegységen (glória között, CH-val jelölve), amíg villogni nem kezd az **Éjszakai lámpa** glóriája.
- 3) Válassza ki a csatornát ugyanezen csatornaválasztó gomb nyomkodásával (nyomja meg és engedje el, majd újra) a babaegységen (ezt követően látni fogja, hogy a csatorna száma a szülői egységen is módosul).
- 4) Ha kiválasztotta a csatornát, nyomja meg és tartsa nyomva a **Csatornaválasztó** gombot a babaegységen a választás megerősítéséhez (a glória nem villog tovább, ezzel jelzi a kiválasztás jóváhagyását).

MEGJEGYZÉS:

A két egység mindig egyazon csatornán működik. Ha a vétel nem tiszta, vagy interferenciát hall, váltson csatornát. Ha az interferencia ekkor sem szűnik meg, tekintse át a Hibaelhárítás szakaszt.



FONTOS IKONOK



Babaegység:

Ha ezt az ikont látja, elemet kell cserélnie a babaegységben.



Hatótávolságon kívül:

A szülői egység és a babaegység közötti kapcsolatvesztést jelez.

Csatornaválasztás módban az ikon villogni kezd a szülői egység képernyőjén a csatorna számával.



Szülői egység:

Ez az ikon kizárólag **Csatornaválasztás** módban aktív.

Hőmérséklet-kijelző:

A szobahőmérsékletet mutatja

20°C



Csatornakijelző:

A kiválasztott csatornát mutatja



Hangerőjelző:

A szülői egységen beállított hangerőt mutatja.

Töltöttségi szint ikon:

A töltöttségi szintet mutatja



Lemerült



1/2 töltöttség



Tele



Töltés alatt

4. LÉPÉS - BABAŐRZŐ TESZTELÉSE ÉS MEGISMERÉSE


4.1 - HATÓTÁVOLSÁGON KÍVÜL FUNKCIÓ

A babaőr rendelkezik Hatótávolságon kívül funkcióval, mely tájékoztatja Önt, ha a két egység nem kommunikál egymással. A hatótávolságon kívüli állapotot okozhatja távolság vagy fizikai interferenciák.

HATÓTÁVOLSÁG:

Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen): legfeljebb 250 méter.

A FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA:

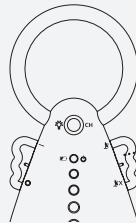

Csúsztassa fel a kapcsolót, ha szeretne értesítést kapni róla, ha a babaegység jele nem éri el a szülői egységet.

HATÓTÁVOLSÁGON KÍVÜL RIASZTÁS

- A riasztás akkor kapcsol be, ha a két egység nem kommunikál.
- A szülői egység 8 másodpercenként dupla sípolást ad ki.
- A képernyőn villogni kezd a Hatótávolságon kívül ikon.

- A Hatótávolságon kívül ikon akkor is villog, amikor csatornát vált vagy áthelyezi az egységet.






FONTOS


Ha bekapcsolja a Hatótávolságon kívül funkciót, és kikapcsolja a babaegységet, megszólal a Hatótávolságon kívül riasztás. A funkció visszakapcsolásához kapcsolja BE a babaegységet.

A HATÓTÁVOLSÁGON KÍVÜL RIASZTÁS ELNÉMÍTÁSA:

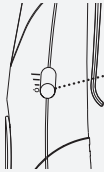

Kapcsolja **KI** a szülői egységet

VAGY

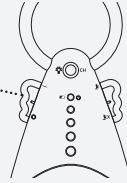


Kapcsolja **BE** a babaegységet

CH

4.2 - HANGÁTVITEL (VOX)

Az Angelcare® babaőr hang által aktiválható rendszerrel van felszerelve. A babaegység csak akkor kezd el hangot továbbítani a szülőegység felé, ha hangot észlel. Az érzékenységi tárcsa segítségével állíthatja be, hogy milyen szintű hangot kezdjen el továbbítani a babaegység.

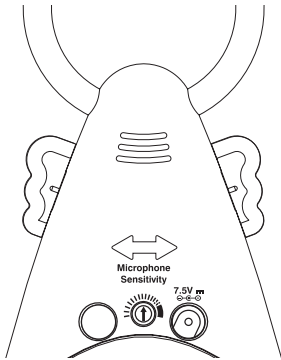

HANG TESZTELÉSÉHEZ:

Kérjen meg valakit, hogy beszéljen bele a babaegységbe, vagy helyezze az egységet bekapcsolt rádió mellé a hangátvitel ellenőrzéséhez.

FONTOS

A visszacsatolás (füttyülő hang) elkerülése érdekében tartsa egymástól legalább 3 méteres távolságban az egységeket.

HA NINCS HANG:

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva mindkét egység.
- Ellenőrizze, hogy az egységek működő konnektorba vannak-e bedugva.
- Ellenőrizze az egységekbe helyezett elemeket (cserélje vagy töltsse fel őket mindkét egységben, ha szükséges).
- Hozza közelebb a szülői egységet a babaegységhez.






HANGERŐJELZŐ:


A szülői egységen beállított hangerőt jelzi. 5 különböző hangerőszint érhető el.

HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

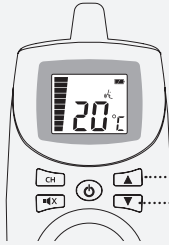

Hangerő növelése
Hangerő csökkentése

IDEIGLENES NÉMÍTÁS MÓD BEKAPCSOLÁSA

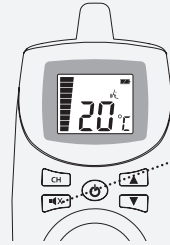

Nyomja meg a hangszóró elnémításához.
(Lásd: 4.3 lépés)



Hangerőjelző
(5 szint)

Ha a **Fel** és **Le** billentyűk segítségével beállította a kívánt hangerőszintet, a csíkok eltűnnek, és elkezdnek mozogni a babaegység által továbbított hangnak megfelelően. A hangerőjelző segítségével megállapíthatja, milyen erősségű hang érkezik a baba szobájából. Minél erősebb hangot hallat a baba, annál több csík jelenik meg.

4.3 - IDEIGLENES NÉMÍTÁS


Segítségével **Ideiglenes némítás** módba állíthatja a babaórt.

NÉMÍTÁS BEKAPCSOLÁSA:


Nyomja meg az **Ideiglenes némítás** gombot.

NÉMÍTÁS KIKAPCSOLÁSA:

A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét az **Ideiglenes némítás** gombot.

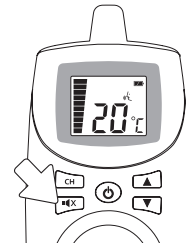

2 perc elteltével a hang automatikusan visszakapcsol.

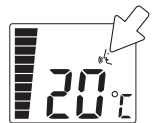

MEGJEGYZÉS:


A szülői egységen villogni fog a **Némítás** ikon.





4.4 - ÉJSZAKAI LÁMPA

Nyomja meg a babaegységen az **Éjszakai lámpa** gombot az éjszakai lámpa **BE-** vagy **KIKAPCSOLÁSÁHOZ**.

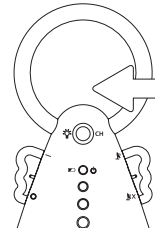

KÉSZEN ÁLL A BABAŐR HASZNÁLATÁRA

Az Angelcare® babaőrző a gyári- és a felhasználó által beállított beállításokkal egyaránt használható.

CH

ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK

20°C

Hőmérséklet mértékegysége: Celsius-fok



Hatótávolságon kívül riasztás: KI



Hangerő-érzékenység: Közepes

Szülői egység hangszórója: 3. szint

Babaegység éjszakai lámpája: KI



FONTOS

- Első használat előtt tesztelje a babaőrt.
- Tesztelje rendszeresen a babaőr megfelelő működését.





HIBAEHÁRÍTÁS

AZ ÚJRATÖLTHETŐ ELEMEEK KEZELÉSE

- Első használat előtt mindig 15 órán át töltsse az elemeket.
- Az elemek élettartamának maximalizálása érdekében ajánlott időnként teljesen lemeríteni az elemeket. Az elemek teljesítménye csökkenhet, ha folyamatosan tölti őket. Ha nem használja a szülői egységet, kapcsolja **KI**.
- A lemerülőben lévő elemek ronthatják a babaőrző teljesítményét. Ha nem elégedett a szülői egység / babaőrző működésével, cserélje le az újratölthető elemeket (4 db NiMH újratölthető elem).
- Ajánlott félévente lecserélni az elemeket.

NINCS HANGTOVÁBBÍTÁS

- Hozza közelebb a szülői egységet a babaegységhez.
- Ellenőrizze/cserélje az elemeket, vagy töltsse fel a szülői egységet.
- Ellenőrizze a kapcsolódást, vagy váltson másik konnektorra.
- Ellenőrizze, hogy mindkét egység **BE** van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy aktív-e a hálózati tápegység.
- Ellenőrizze a szülői egység képernyőjét, hogy nincs-e **„Némítás”** módban a babaőrző.

NEM VILÁGÍT A BABAEGYSÉG BEKAPCSOLÁS-JELZŐJE (ZÖLD FÉNY)

- Ellenőrizze a kapcsolódást, vagy váltson másik konnektorra.
- Csúsztassa FEL a babaegység bal szárnyát a babaegység **bekapcsolásához**.

GYENGE VÉTEL

- Vigye közelebb egymáshoz az egységeket.
- Változtassa meg az egyik, vagy mindkét egység helyzetét.
- Helyezze az egységeket lapos felületre, úgy, hogy a baba ne érje el őket.
- Cserélje az elemeket, vagy töltsse fel a szülői egységet.

STATIKUS ZAJ, TORZÍTÁS, INTERFERENCIA (MÁS BABAŐRZÓKTÓL, VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONOKTÓL, ADÓ-VEVŐKTÓL STB.)

- Fordítsa el a szülői egységet, vagy vigye el az interferencia forrásának közeléből.

GERJEDÉS (A SZÜLŐI EGYSÉG HANGOS ZAJT AD KI)

- Helyezze el egymástól távolabb az egységeket (legalább 3 méteres távolságra).
- Csökkentse a szülői egység hangerejét.

A SZÜLŐI EGYSÉG KÉPERNYŐJE FEKETE (A SZÜLŐI EGYSÉG KI VAN KAPCSOLVA)

- Kapcsolja vissza a szülői egységet a **Bekapcsolás** gomb benyomásával és nyomva tartásával.
- Cserélje az elemeket, vagy töltsse fel a szülői egységet.





Amennyiben az útmutatóban nem szereplő problémát tapasztal, kérjük, ne vigye vissza a terméket az üzletbe. Amennyiben Ön elégedetlen, vagy kérdései merültek fel:

Egyesült Államok és Kanada: vegye fel a kapcsolatot velünk a következő címen: angelcare@cdecinc.com

Más országok: kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

Lehetséges, hogy a problémára rendkívül egyszerű a megoldás.

KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

Az Angelcare® a termék vásárlásának dátumától számított egy (1) éven át garantálja (kivétel: újrátölthető elemek) a termék eredeti tulajdonosa felé, hogy az Angelcare® babaórázó (AC420 modell) mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Amennyiben a babaórázó egy éven belül az utasításoknak megfelelő, rendeltetészerű használat esetén hibás működést tapasztal, az Angelcare® saját döntése szerint ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a terméket, vagy a termék főegységét. Kérjük, ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A termékhez mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot, ami lehet a termékről kapott számla, vagy bármilyen más dokumentum, mely igazolja, hogy a babaórázóre vonatkozó jótállási időszak még nem múlt el. A termék vagy főegység javításának vagy cseréjének és a vásárlóhoz történő visszaszállításának díját az Angelcare® viseli.

A jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, mely nem megfelelő karbantartás, baleset, nem megfelelő feszültségen történő használat vagy más, nem rendeltetészerű használat következtében sérült meg. A jótállás semmivé válik abban az esetben is, ha a tulajdonos bármilyen javítást vagy módosítást végez a terméken. Az Angelcare® a termék használatára kapcsán az ebből adódó esetleges következményekért semminemű felelősséget nem vállal. A jótállás kizár minden, fent nem ismertetett felelősséget. Semminemű más jótállás nem érvényes.

A jótállás nem vonatkozik a nem az Angelcare márka alá tartozó termékekre és kiegészítőkre, vagy azokra a problémákra, melyek a termékhez tartozó utasításokkal ellenkező használatból vagy azok figyelmen kívül hagyásából adódnak, vagy amelyeket nem az Angelcare által mellékelte vagy gyártott kiegészítők, alkatrészek vagy tartozékok használata okozott.

A TÖRVÉNYBEN BIZTOSÍTOTT JOGOK ORSZÁGRÓL ORSZÁGRA VÁLTOZNAK. EGYES ORSZÁGOKBAN TILOS A VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK UTÁNI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA, TEHÁT LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM ÉRVÉNYESEK.

AZ ANGELCARE SEMMILYEN MÓDON ÉS ESETBEN NEM FELELŐS A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZMÉNYEIÉRT.

FONTOS!

Ez az Angelcare® babaórázó higiéniai terméknek minősül. Kérjük, ne vigye vissza az üzletbe. Ha kérdése merült fel, vagy segítségre van szüksége, hívja a forgalmazót, mielőtt visszavinné a terméket az üzletbe.

CH





MŰSZAKI ADATOK

Hatótávolság:

Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen):
legfeljebb 250 méter.

Csatornák száma:

USA/Canada: 8 csatorna.
Európa: 8 csatorna.

Áramellátás:

4 db AAA alkáli elem (nincs mellékelve)
vagy 220–240 V AC/7,5 V DC adapter a
babaegységhez.

4 db AAA újratölthető elem és 220–240 V AC/7,5
V DC adapter a szülői egység dokkolójához.

Vigyázat: Az áramütés veszélyének enyhítése
érdekében ne tegye ki a terméket esőnek vagy
nedvességnek.

Az elemek nem megfelelő behelyezése esetén
robbanásveszély áll fenn. A csomagban
található 4 AAA NIMH újratölthető elem,
melyeket a GPI INTERNATIONAL LIMITED
(GN60AAAHC, 1,2 V 600 mAh) vagy a
HIGHPOWER TECHNOLOGY CO., LTD (HFR-
44AAAJ600, 1,2 V 600 mAh) állít elő.

**Ezeket kizárólag 4 AAA NIMH újratölthető
elemre cserélje.**

Elemek:

- NE használjon együtt régi és új elemeket.
- NE használjon együtt alkáli, szabványos
(szén-cink) és újratölthető (NI-CD, NIMH stb.)
elemeket.

Átvitel:

A babaegység a szülői egység felé a 864 MHz-
es frekvencián (Európa) vagy a 927 MHz-es
frekvencián (más helyek) közvetít.

Az Angelcare Monitors Inc ezúton nyilatkozik,
hogy jelen babaőrző megfelel az 1999/5/EK
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
releváns rendelkezéseinek.

Az EU megfelelési nyilatkozat a helyi
forgalmazótól szerezhető be. A címet a
használati útmutatóban találja.



VÉDJE A KÖRNYEZETET

Ez az elektromos berendezés újrahasznosítható anyagokat tartalmaz, nem szabad a háztartási
hulladék közé dobni. Kérjük, vigye el elektromos- és elektronikus berendezések fogadására
fenntartott gyűjtőpontba (kérje a helyi hatóságok tanácsát a részletekről).

ERP-MEGFELELŐSÉG

DÉL-AFRIKA-BRAZÍLIA-ECUADOR-EURÓPAI UNIÓ

Kizárólag az Angelcare® márkájú, T07505V001 modellszámmal rendelkező tápegységet használja

NÉMETORSZÁG

Kizárólag az Angelcare® márkájú, T07505F002 modellszámmal rendelkező tápegységet használja

AUSZTRÁLIA

Kizárólag az Angelcare® márkájú, T07505S002 modellszámmal rendelkező tápegységet használja

ÉSZAK-AMERIKA

Kizárólag az Angelcare® márkájú, T07505U002 modellszámmal rendelkező tápegységet használja

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG-MÁLTA-ÁZSIA-CIPRUS

Kizárólag az Angelcare® márkájú, T07505B001 modellszámmal rendelkező tápegységet használja





TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy az Angelcare® termékét választotta. Az Angelcare® a termékek fejlesztése és gyártása során a legnagyobb gondossággal jár el, valamennyi terméke megfelel a nemzetközi szabványoknak. A cég termékeire a világon mindenütt 12 hónap garanciát vállal, mely a vásárlás napjától számítva él. A vásárlás napján kapott számlát, vagy fizetési blokkot és/vagy a készülék bélyegzett jótállási jegyét okvetlenül őrizze meg, mert jótállási igényét ezekkel érvényesítheti. A jótállás időtartama alatt minden olyan hiba esetén, amelynek eredete gyártási hibára vagy anyaghibára vezethető vissza, a termék hibás főegységét cseréljük. A készülékek utólagos javítását a gyártó a készülék jellege miatt nem engedélyezi.

A csere időtartama a bejelentéstől (a termék beérkezésétől) számított kb. 8nap. Ez a jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rossz feszültség, helytelen alkalmazás, vagy használat, ill. nem megfelelő elemek használata miatt sérült meg. A garancia szintén nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos javította a készüléket, vagy átalakította.

Meghibásodás esetén a termék főegységeinek cseréjét 3 munkanapon belül az eladó szerv, ezt meghaladóan a forgalmazó végzi, kérjük utóbbi esetben ezt okvetlenül jelezze a megadott elérhetőségeken. (Tel.: 06/20/2557750, info@angelcare.hu) Importőr és szerviz: Isd. Forgalmazók / Distributors: Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

H

JÓTÁLLÁSI JEGY

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkre a 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet alapján.

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk. 8:1. §). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. § alapján.
2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A termék, vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.
3. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót.
4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.
5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.
6. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.
8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) érvényesítheti. Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.
9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhöz kell eljuttatni, személyesen, vagy postai úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve ha a fogyasztó a küldeményről és a meghibásodásról előzetesen tájékoztatta.
10. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni.
11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következő jogszabályok és rendeletek szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet; Ptk. XXIV. fejezet; 19/2014 (IV.29) NGM Rend. Hibás teljesítés miatt a fogyasztó a Ptk. 6:159.§ par. alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott kellékszavatossági jog lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
12. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlát/blokkot és/vagy lebélyegzett, kitöltött jótállási jegyét feltétlenül őrizze meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerződés megkötését.





13. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

14. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

15. Jótállási igény nem érvényesíthető a következő esetekben:

- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése esetén a jótállási jegy érvénytelen.
- A használati utasítástól eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
- Átalakítás, hibás, vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
- Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre, vagy tartozékokra.
- Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bármинemű beavatkozás esetén.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy az ANGELCARE® AC420 típusú készülékek a CE nemzetközi jelzéssel vannak ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabvány-előírásoknak és irányelveknek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a forgalmazótól kérheti el.

TERMÉK TÍPUSA: ANGELCARE® AC420 típusú készülék	A TERMÉK GYÁRTÁSI SOROZATKÓDJÁ:
VÁSÁRLÁS DÁTUMA:	ELADÓ SZERV BÉLYEGZŐJE, ALÁÍRÁS:

AZONNALI INTÉZKEDÉSEK CSECSEMŐKORI LÉGZÉSKIMARADÁS ESETÉN

Amennyiben a légzésfigyelő megszólal, azonnal ellenőrizze, hogy a riasztás valós-e. Téves riasztás esetén derítse fel ennek okát, változtasson a gyermek kiságykörülményein, vagy fokozza a készülék érzékenységet.

Riasztás esetén a következő életfunkciókat azonnal ellenőrizze gyermekénél:

- a baba lélegzik-e;
- van-e a csecsemőnek szívverése;
- megfelelő-e a gyermek vérkeringése

A légzés ellenőrzése a legegyszerűbb, a mellkas emelkedő-süllyedő mozgása szabad szemmel is könnyen látható, a gyermek arcához közel hajolva a száj- és ornyílásnál légző hang (szuszogás) hallható. A csecsemő szívverését az ismert testpontokon lehet pulzustapintással ellenőrizni, nyaki- vagy csukló- verőér esetén. A vérkeringés ellenőrzésének legegyszerűbb módja a baba arcszínének megvizsgálása. Egészséges keringés esetén a gyermek arcbőre rózsaszínű, megfelelő vérkeringés hiánya esetén a szín kékesszürke.

A három funkció mindegyike fontos, de a készülék riasztása a légzőmozgás kimaradását jelzi. Amennyiben a gyermek nem lélegzik, azonnal hívja a mentőket a 104, vagy 112 telefonszámokon, és a következő ÉLETMENTŐ INTÉZKEDÉSEKET az életfunkciók ismételt beindulásáig, vagy a mentők kiérkezéséig a leírtak szerint végezze.





Ha a gyerek ...	Megfelelő SÜRGŐS intézkedések
...eszmeletlen ...nem lélegzik ...van pulzusa	Kicsit döntse hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, kb. 40-szer percenként. Ne alkalmazzon szívmasszázszt! Folytassuk a lélegeztetést addig, amíg a gyermek újra magától lélegzik, vagy amíg a mentők át nem veszik.
...eszmeletlen ...nem lélegzik ...nincs pulzusa	Kicsit döntse hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, 3 lélegeztetéssel. Utána alkalmazzon 15 szívmasszázszt, majd ismét 3 lélegeztetést. Csak akkor hagyja abba az intézkedéseket, ha a gyermek ismét maga lélegzik.

MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS

1. Kicsit döntse hátra a baba fejét. Tegye az egyik kezét a baba homlokára, másik kezének két ujját az álla alá. Így döntse hátra a baba fejét. (a. kép) Ha lélegeztetéskor nem emelkedik a baba mellkasa, akkor azonnal ellenőrizze, hogy a megfelelő pozícióban van-e a baba feje. A leggyakoribb hiba a mesterséges lélegeztetéskor a nem megfelelő feje pozíció.



H

2. Száj és orr körülzárása

Tegye a száját a csecsemő orrára és szájára olyan szorosan, amennyire tudja. (b. kép)



3. Három levegő befúvás

Annál levegőt fújjon a csecsemőnek, amennyit Ön egy könnyed levegővétellel a szájában tud tartani. A csecsemő mellkasa megemelkedik, amikor befújja a levegőt, és lesüllyed kilégzésnél. Egy befúvás kb. 1-1,5 másodpercig tart. A befúvások között a csecsemő orrát és száját szabadon kell hagyni, így önállóan bekövetkezik a kilégzés. A befúvás után fordítsuk fejünket oldalra úgy, hogy a gyermek légzésmozgását figyelhessük. (c. kép)



Ha nem emelkedik a baba mellkasa, akkor ez abból is következhet, hogy valami elzárja a baba légcsövét. Szüntesse meg az akadályt, fordítsa oldalra a baba fejét és a kisebbik ujjával törölje ki a baba száját, majd fordítsa vissza a gyerek fejét az előző pozícióba és folytassa a lélegeztetést. (d.kép)





SZÍVMASSÁZS

1. Feltételek

Ahhoz, hogy szívmasszázst végezhesen, szilárd felületre van szükség. Egy asztal, vagy pelenkázó megfelel erre a célra, de ha nincs a közelben akkor a padló is alkalmas lehet. Nem szabad szívmasszázst matracon végezni, mert az utórugózást eredményez. A következő lépésekhez, hogy a helyes nyomási pontot megtaláljuk, a gyermek felsőtestét szabadbá kell tenni.

2. Nyomási pont

Képzelen el egy összekötő vonalat a csecsemő két mellbimbója között. Jobb keze mutatóujját helyezze e vonal alá, és szorosan mellé a középső és gyűrűsujját. (a.kép) Emelje fel a mutatóujját és így a gyűrűs- és középső ujjával meg tudja nyomni a baba mellkasát. A gyűrűs- és középső uja így 0,5-1 cm-rel a mellbimbókat összekötő vonal alatt vannak.



3. 15 szívmasszázs

A mellkas csont nyomásával nyomást gyakorol a szívre is, amellyel egy szükségvérkeringést indít be, és ezzel eljut az oxigén a létfontosságú szervekhez. Ahhoz, hogy a szív az összenyomás után újra megtelhessen vérrrel, figyelni kell arra, hogy a mellkas csont ismét tehermentesítve legyen. Ekkor az ujjat nem kell a mellkasról felemelni, mert elmozdulhat a helyes nyomási pontról. A nyomási mélység a mellkas-keresztmetszet egyharmada kell hogy legyen, ez csecsemők esetében kb. 2 cm. Ahhoz, hogy a szívmasszázs a normál szívizom összehúzódásának megfeleljen, nem kell hirtelen nyomással végezni a szívmasszázst, hanem finoman úgy, hogy a szív nyomása annyi ideig tartson, mint a szívizom elernyedése. (b. kép)





www.angelcarebaby.com

