

Angelcare®

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

KAMERÁS LÉGZÉSFIGYELŐ KÉTIRÁNYÚ

BABAÓRZÓVEL

AC1100 modell



HU
113

PL
145



TARTALOMJEGYZÉK

 FIGYELMEZTETÉSEK	115
AC1100 ÜZEMBEHELYEZÉSI TUDNIVALÓK	119
1. LÉPÉS - A szülői egység feltöltése	120
2. LÉPÉS - Az érzékelő lap/lapok elhelyezése	121
3. LÉPÉS - A babaegység beállítása	124
4. LÉPÉS - A készülék bekapcsolása	125
5. LÉPÉS - A készülék tesztelése és megismerése	126
6. LÉPÉS - Aktiválás és letiltás további funkciók	130
Hibaelhárítás	136
Korlátozott jótállás	138
Műszaki adatok	139
ENGLISH	29
FRANÇAIS	29
ESPAÑOL	57
PORTUGUÊS	85
POLSKI	145

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

ŐRIZZE MEG A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁRA

GONDOSAN OLVASSA EL A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS UTASÍTÁSOKAT, MIELŐTT A TERMÉKET ÖSSZEÁLLÍTJA ÉS HASZNÁLATBA VESZI

A FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA SÚLYOS VAGY HALÁLOS SÉRÜLÉST, VAGY A TERMÉK KÁROSODÁSÁT OKOZHATJA

A MOZGÁSÉRZÉKELÉS ÜZEMMÓD NEM HASZNÁLHATÓ FELNŐTTEK VAGY 24 HÓNAPOSNÁL IDŐSEBB KISGYERMEKEK RÉSZÉRE

A MOZGÁSÉRZÉKELÉS ÜZEMMÓD NEM ALKALMAZHATÓ ANNAK MEGHATÁROZÁSÁRA, HOGY A GYERMEK A GYERMEKÁGYON KÍVÜL VAN-E.

FIGYELMEZTETÉS

Az összeszerelést felnőtt végezze el!

Az összeszerelés közben a kis alkatrészeket tartsa távol a gyermekektől

Mi, az Angelcare®-nél, kiállunk a termékeinkért.

Ha nincs teljesen megelégedve vagy kérdései vannak,

az Egyesült Államokban és Kanadában: lépjen kapcsolatba velünk az: angelcare@cdecinc.ca címen

Más országokban: lépjen kapcsolatba helyi márkakereskedőjével






▲ FIGYELMEZTETÉS

1. EZ A TERMÉK NEM HELYETTESÍTI A FELELŐS FELNŐTT FELÜGYELETÉT. Ez a termék arra készült, hogy segítse gyermekének megfigyelését. A készülék használata közben továbbra is biztosítani kell a gyermek folyamatos biztonságához szükséges felügyeletet. A koraszülött, illetve veszélyeztetettnek tekintett csecsemőket mindig egészségügyi szakszemélyzet felügyelete mellett figyelje. A monitort TILOS orvosi megfigyelőeszközként vagy a bőschohalál (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS) megelőzésére szolgáló eszközként használni.

2. FIGYELMEZTETÉS Fulladásveszély — A gyermekek MEGFÜLLADHATNAK a kábelektől.

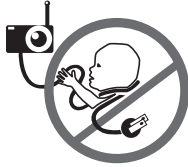

Tartsa az adapter kábeleit gyermekektől távol (legalább 1 méter távolságra). SOHASE használja az Érzékelő lapo(ka)t a kábelvédő burkolat nélkül. Minden használat előtt ellenőrizze a kábelvédő burkolatot. Ne használja az érzékelő lapo(ka)t, ha a védőburkolat sérült vagy törött.

3. Tilos hosszabbítót használni a hálózati tápegységekhez. KIZÁRÓLAG a készülékhez kapott hálózati tápegységet használja.

4. Ha a hálózati tápegységet egy fali konnektorba csatlakoztatta, NE érintse meg a vezeték áram alatt álló szabad végét.

5. MINDIG győződjön meg arról, hogy az adó- és a vevőkészülék megfelelően működjön, és egymáshoz legyen hangolva. A készüléket tesztelje az első használatba vétel előtt, rendszeresen, és minden alkalommal, amikor áthelyezi a készüléket.

6. MINDIG ellenőrizze azonnal a babát, ha megszólal a riasztás.

7. TILOS a készüléket víz (pl. fürdőkád, mosogató, stb.) közelében használni.



8. Tartsa TÁVOL a készüléket minden hőforrástól (kályhától, radiátortól, stb.).

9. A babaegységet és a szülői egységet MINDIG sík felületre helyezze függőleges helyzetben, és biztosítsa jó szellőzésüket. NE helyezze kanapéra, párnára, ágyra, stb. ahol akadályozva lehet a szellőzés.

10. A készülék nyilvános rádiófrekvenciákat használ a jelek továbbítására. A szülői egység foghatja a közelben működő többi babaőrző jeleit vagy zavarhatja azokat. Az ön készülékének a jeleit is foghatja más háztartás készüléke. A magánszférájának védelme érdekében használaton kívül kapcsolja KI mindkét egységet. Ha interferenciát észlel, váltson csatornát mindkét egységen.

11. A termék NEM játékszer. NE engedje, hogy gyerekek játsszanak vele.

12. A termékben kis alkatrészek vannak. Az összeállítást felnőtteknek kell végezni. Óvatosan csomagolja ki és szerelje össze a terméket, és a kis alkatrészeket tartsa távol a gyerekektől.

13. A készülék üzemeléséhez a szobahőmérsékletnek 10°C és 40°C között kell lennie.

▲ FIGYELMEZTETÉS A TÖLTHETŐ ELEMEREKRE

14. KIZÁRÓLAG AAA ÚJRATÖLTHETŐ ELEMEREKET használjon a szülői egységben. NE használjon együtt, és ne keverje a régi és új elemeket. NE keverje az alkáli, szabványos és újratölthető elemeket. Az elemeket helyes polaritással helyezze be. NE zárja rövidre az elemtartó kapcsait. CSAK az ajánlott elemeket, vagy ezzel egyenértékűket (feszültség és méret) használja, ill. a megfelelő hálózati tápegységet. Vegye ki az elemeket, ha a terméket hosszabb ideig kívánja tárolni, vagy ha az elemek lemerültek. A lemerült elemeket ártalmatlanítsa szakszerűen. TILOS újratölteni a nem tölthető elemeket. Az újratölthető elemeket KIZÁRÓLAG felnőtt felügyelete mellett töltsé. Minden elemet tartson távol a gyerekektől.

H
U



15. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

15.1 Olvassa el ezeket az utasításokat - Minden biztonsági utasítást el kell olvasni a termék használatba vétele előtt.

15.2 Tartsa be ezeket az utasításokat. A kezelési és biztonsági utasításokat meg kell őrizni későbbi felhasználás esetére.

15.3 Figyelje a figyelmeztetéseket – A terméken és a kezelési utasításokban található valamennyi figyelmeztetést el kell fogadnia.

15.4 Tartson be minden utasítást – Az összes kezelési és használati utasítást be kell tartania.

15.5 Víz és nedvesség - NE használja ezt a készüléket víz közelében. Például, ne használja kád, lavór vagy mosdókagyló közelében, nedves környezetben, vagy medence, stb. mellett. Ügyeljen rá, hogy semmi NE essen az egységre, és ne kerülhessen folyadék az egységekbe vagy az érzékelő lapokra.

15.6 Tisztítás - Tisztítás előtt kapcsolja ki az egységeket. NE merítse vízbe sem a babaőrzt, sem a szülői egységet egyetlen alkatrészét sem. Csak száraz ruhával tisztítsa.

15.7 Szellőzés - NE zárjon el egyetlen szellőzőnyílást sem. Biztosítsa a megfelelő szellőzést, amikor az egységeket használja. NE takarja le sem a babaegységet, sem a szülői egységet semmilyen tárggyal, például takaróval. NE tegye a készüléket fiókba vagy bármilyen olyan helyre, mely tompítaná a hangot, vagy zavarná a normál légáramlást.

15.8 Hőforrások - NE telepítse hőforrás, pl. radiátorok, hőleadó rács, kályhák, TV-k vagy olyan készülékek közelébe (erősítőket is beleértve), amelyek hőt fejlesztenek. A hő károsíthatja a készülékek házát vagy elektromos alkatrészeit.

15.9 Tápkábel védelme - Védje az érzékelő lap kábelét és a hálózati tápegység erősáramú kábelét attól, hogy ráleljenek vagy a bútorok vagy más tárgyak becsípjék – A tápkábeleket úgy kell vezetni, hogy ne lehessen rálepní vagy a tárgyak ne csípjék be, és külön figyelmet kell fordítani a kábelekre és dugókra, dugaljakra, valamint azokra a pontokra, ahol kilépnek a termékből.

15.10 Tartozékok - Csak a gyártó műszaki leírásában szereplő kiegészítőket / tartozékokat szabad használni. NE helyezze a terméket instabil kocsira, állványra, háromlábra, keretre vagy asztalra. A termék leeshet, és súlyos sérülést okozhat gyermeknek vagy felnőttnek, és súlyosan károsíthatja a terméket. KIZÁRÓLAG a gyártó által ajánlott, vagy a termékkel együtt

eladott kocsira, állványra, háromlábra, keretre vagy asztalra állítsa a terméket. A termék felfüggesztése során kövesse a gyártó előírásait!

15.11 Húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból, ha villámlik, vihar van, vagy ha hosszabb ideig nem használja.

15.12 Szervizelés - TILOS megkísérelni a termék szervizelését, a burkolatok megnyitását vagy eltávolítását (kivéve az elemtartó fedelét), mert veszélyes feszültségnek vagy egyéb veszélynek teheti ki magát.

15.13 Pótalkatrészek - Pótalkatrészek szükségessé válásakor győződjön meg arról, hogy a gyártó által javasolt alkatrész jellemzői megegyeznek az eredeti alkatrészével. A jóváhagyás nélküli alkatrészcsere tüzzel, áramütéssel, vagy más veszéllyel járhat.

15.14 Használat - Ez a készülék segédeszköz! NEM HELYETTESÍTI a felnőttek általi felügyeletet, és nem használható erre a célra. A készüléket CSAK a jelen kézikönyvben leírt célra szabad használni.

15.15 Áramforrások - Csak az adapteren jelzettnek megfelelő áramforrást használjon! Amennyiben nem tudja biztosan, milyen áramforrás van az otthonában, egyeztessen a kereskedővel vagy a helyi szolgáltatóval!

15.16 Túlterhelés - TILOS túlterhelni a fali csatlakozókat, hosszabbítókat vagy a kombinált dugaljakat, mert tüzet vagy áramütést okozhat.

15.17 Tárgy és folyadék behatolása - TILOS bármilyen tárgyat bejuttatni a termék házának nyílásaiba, mivel ezek veszélyes feszültség alatt álló pontokat érhetnek meg vagy alkatrészeket zárhatnak rövidre és tüzet vagy áramütést okozhatnak. TILOS bármilyen folyadékot önteni a termékre.


15.18 Antenna - Az adóegység antennáját úgy kell telepíteni, hogy legalább 20 cm-re legyen minden személytől, és nem lehet közös vagy nem üzemelhet közösen más antennával vagy adóegységgel.

15.19 Erősáramú távvezetékek - A külső antennarendszert TILOS nagyfeszültségű szabadvezetékek, közvilágítási vagy egyéb erősáramú táphálózatok szomszédságába telepíteni, ahol ráeshet a vezetékekre vagy áramkörökre, mert a velük való érintkezés halálos lehet.





15.20 FIGYELMEZTETÉS Fulladásveszély — A gyermekek MEGFULLADHATNAK a kábelektől. Tartsa az adapter kábeleit gyermekektől

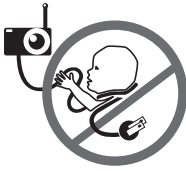

távol (legalább 1 méter távolságra). SOHASE használja az Érzékelő lapo(ka)t a kábelvédő burkolat nélkül. Minden használat előtt ellenőrizze a kábelvédő burkolatot. Ne használja az érzékelő lapo(ka)t, ha a védőburkolat sérült vagy törött.

15.21 Interferencia - A készülék nyilvános rádiófrekvenciákat használ a jelek továbbítására. A szülői egység foghatja a közelben működő többi babaórzó jeleit vagy zavarhatja azokat. Az Ön készülékének a jeleit is foghatja más háztartás készüléke. A magánszférájának védelme érdekében használaton kívül kapcsolja KI mindkét egységet. Ha zavarást észlel, váltson csatornát mindkét egységen.

15.22 Rezgések forrásai - Ha a készülék használatban van, NE használjon gyerekágymozgatót vagy más gyerekágyi tartozékot, amely rezgéseket kelthet. Egyéb rezgéskeltők lehetnek ventilátorok, mosógépek, hangos zene, stb. Ezek a rezgéskeltők zavarhatják az ön Angelcare® készülékének a teljesítményét, és a riasztás nem fog megszólalni, ha folyamatosan más mozgásokat észlel, mint a babáét. Győződjön meg arról, hogy kiküszöbölt-e minden rezgéskeltő forrást a készülék használata előtt.

Téves riasztásokat több okból is kaphat. A leggyakoribb ok, hogy a babaegységet nem kapcsolta KI azt követően, hogy a csecsemőjét kivette a gyermekágyból. Egy másik ok lehet, hogy az érzékelő lapo(ka)t nem megfelelően helyezte el a matrac alatt.

Ellenőrizze, hogy az érzékelő lapo(ka)t egy kemény sík felületre helyezte-e a nyomtatott oldalával felfelé. Az érzékenységi szintet is szükséges lehet beállítani. Lásd az 5.1 lépést.

15.23 Érzékelő lap - Az érzékelő táblát minden olyan gyermekágyhoz használhatja, amely rögzítetten áll. Ha a gyermekágy rugós vagy léces alapú, helyezzen egy legalább 133 x 33 cm-es és 6 mm vastag kemény lapot a gyermekágy alapja és az érzékelő lap közé. Az ön Angelcare® készülékét csak lerögzített alvókörnyezetben használja, azaz egy olyan gyermekágyhoz, amelyben az érzékelő lap megmaradhat egy teljesen sík, kemény felületen.

16. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ELEMEEK HASZNÁLATÁHOZ

16.1 KIZÁRÓLAG a felhasználói kézikönyvben megadott típusú és méretű elemeket használja. Robbanásveszély áll fenn, ha az elemeket nem megfelelő típusúra cseréli.

16.2 KIZÁRÓLAG újratölthető AAA elemeket használjon, és/vagy a szülői egységgel szállított hálózati adaptert a szülői egységhez. A szülői egységhez csak tölthető elemeket szabad használni. NE használjon alkáli elemeket, különben súlyosan károsítja az egységet.

16.3 Az első használatba vétel előtt 15 óra hosszat töltsé az elemeket. Ez alatt az idő alatt a készüléknek Kikapcsolt állapotban kell lennie. CSAK a készülékhez kapott hálózati adaptereket használja.

16.4 NE használja ezeket az adaptereket más berendezésekhez!

16.5 A hálózati adapter babaegységről való leválasztása után győződjön meg arról, hogy kikapcsolt állapotban van-e az egység. Amennyiben nem, akkor az egység elemes üzemmódba kapcsol, ha az elemeket is behelyezte az egységbe.

16.6 NE használjon tölthető elemeket a babaegységben. Ide CSAK alkáli elemeket használjon.

16.7 Az elemeket TILOS tűzbe dobni. Ott felrobbanhatnak. Nézzon utána a helyi rendeletekben az esetleges speciális ártalmatlanítási utasításoknak.

16.8 Gondosan járjon el az elemek kezelésénél, nehogy rövidre zárjon elemeket olyan vezető anyagokkal, mint gyűrűk, karkötők, vagy kulcsok. Kerülje az elemek túlterhelését, rövidre zárását, felcserélt polaritással töltését, az elemek rongálását vagy tűzbe dobását, nehogy az egyik alábbi esemény következzen be: mérgező gázok kibocsátása, hidrogén- és/vagy oxigéngáz fejlesztés, felületi hőmérséklet növekedése.

16.9 Tilos megkísérelni a termékkel szállított vagy a termék használatára alkalmasnak minősített olyan elemek újra töltését, melyeket rendeltetésszerűen tilos újratölteni. Az elemekből korrozív elektrolit szivároghat, vagy felrobbanhatnak.

16.10 TILOS megkísérelni a termékkel szállított vagy a termék használatára alkalmasnak minősített elemek melegítéssel történő felfrissítését. Az elem elektrolit tartalmának hirtelen kifreccsenése égési sérüléseket, szem- vagy bőrirritációt okozhat.

U





16.11 Ha és amikor szükséges, cserélje az elemeket új, azonos, vagy egyenértékű (feszültségű és méretű) típusúakra. Ha a cserélendő elem sorba van kapcsolva más elemekkel, az összes elemet egyszerre kell cserélni. NE használjon együtt, és ne keverje a régi és új elemeket.

16.12 A megfelelő polaritást figyelembe véve helyezze be az elemeket! Az elemek fordított polaritással történő behelyezése olyan töltést indít meg, amely szivárgást vagy robbanást okozhat.

16.13 Vegye ki az elemeket a termékből, ha a termék 30 napnál hosszabb ideig tárolja, mert az elemek elkezdhetnek szivárogni, és károsíthatják a terméket.

16.14 Mielőbb távolítsa el az elhasznált elemeket, mivel azok szivárgása nagyobb valószínűséggel következhet be. Amennyiben a szivárgás megtörtént, védőkesztyű segítségével távolítsa el az elemet!

16.15 TILOS a terméket, vagy a termékkel szállított vagy a termék használatára alkalmasnak minősített elemeket magas hőmérsékletű helyiségben tárolni.

FC FIGYELMEZTETÉS

(csak Észak-Amerikára érvényes)

17.1 A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé teszik a felhasználó készülék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

17.2 MEGJEGYZÉS: A berendezést bevizsgálták, és megállapították, hogy kielégíti az FCC Szabályzat 15. részét és az RSS szabvány(ok) kivételével a Canada-i ipari licenc előírásait. Ezeket a határértékeket úgy tervezték meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak az ártalmas sugárzások ellen a lakásban telepített berendezés esetében. A berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ, és sugározhat, és, ha nem az utasításokkal összhangban telepítik és használják, kellemetlenül zavarhatja a rádióvételeket.

17.3 Mindazonáltal, nincs garancia arra, hogy egy adott berendezés esetében nem keletkezik interferencia. Ha a berendezés károsan zavarja a rádió vagy televízió vételt, ezt úgy lehet meghatározni, hogy a készüléket KI majd BE kapcsolják. A felhasználó az interferenciát próbálja meg elhárítani az alábbi módszerek segítségével:

- A vevőantennát fordítsa el vagy helyezze át máshová.
- Növelje meg a távolságot a berendezés és a vevő között.
- A berendezést kösse át egy olyan áramkör csatlakozójához, amelybe a vevőkészülék nincs bekötve.
- Forduljon segítségért a kereskedőhöz, vagy tapasztalt rádió-, vagy TV-szerelőhöz.

17.4 A készülék megfelel az FCC sugárvédelmi szabályok 15. pontjának, valamint a kanadai ipari engedélyköteles RSS szabványának / szabványainak. A készülék működése megfelel az alábbi két feltételnek:

(1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá

(2) A készüléknek el kell viselnie bármilyen vett interferenciát, beleértve azt az interferenciát is, mely nem kívánatos működést idézhet elő.

FCC ÉS IC SZABÁLYOZÁSOK

RF sugárzásra vonatkozó nyilatkozat

A babaegység megfelel az FCC RF sugárzás szabályozatlan környezetben való kitétségre vonatkozó határértékeinek. **Figyelem:** Az FCC RF (rádiófrekvenciás) kitétségre vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében a babaegységet legalább 20 cm-re helyezze el a babától és a helyiségben tartózkodóktól. A szülői egység megfelel az FCC RF kitétségre vonatkozó irányelveknek testre szerelt használat esetén. Előfordulhat, hogy az esetleges tartozékok nem felelnek meg az FCC RF kitétségre vonatkozó irányelveknek.

Industry Canada

A termék megfelel a vonatkozó Industry Canada műszaki követelményeknek.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)





ÜZEMBEHELYEZÉSI TUDNIVALÓK

KAMERÁS LÉGZÉSFIGYELŐ
KÉTIRÁNYÚ BABAÓRZÓVEL

AC1100 modell

TARTOZÉKOK:



Újratölthető szülői
egység




Babaegység




Töltőkészülék




Övcsipesz

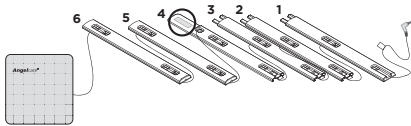

1 érzékelő lap (AC1100) vagy 2 érzékelő lap (AC1100-2SP)
az előszerelt kábeltakarókkal

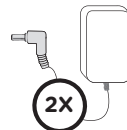

2 db hálózati adapter

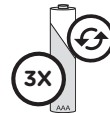

3 újratölthető AAA akku
a szülői gységhez

H

ÖNNEK ELŐ KELL KÉSZÍTENI:

Egy kemény lapot (nem szállítjuk)

Vastagsága legyen **6 mm**

Minimális mérete :

33 cm x 33 cm

Maximális mérete :

a matrac méretével megegyező



Kemény lap

FONTOS

A kemény lap legyen nagyobb, mint az érzékelő
lap felülete, illetve az AC1100-2SP modellnél
mint a két érzékelő lap együttes felülete.

AMIRE MÉG SZÜKSÉGE LESZ (NEM SZÁLLÍTJUK):



3 db AAA alkáli Elem a
babaegységhez




Miniatűr
csillagcsavarhúzó


A BABASZOBÁBA:

FONTOS

A gyermekágyat helyezze támfal mellé, huzattól távol. A
babaegységet helyezze el egy sík, stabil felületre a gyermekágygal
szemben legalább **1 méter** távolságra. Győződjön meg arról, hogy az
adaptert a készülékhez legközelebbi fali aljzatba csatlakoztatta, ahol
az könnyen hozzáférhető.

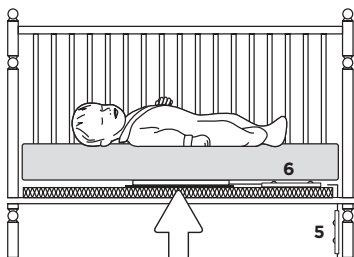


Érzékelő lap

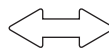

FONTOS


Tartson
legalább
1 m távolságot

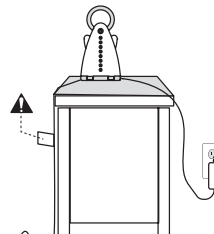




1. LÉPÉS - A SZÜLŐI EGYSÉG FELTÖLTÉSE

1

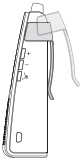


2

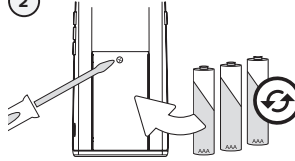


FONTOS

Sohase használjon közösleges alkáli elemeket a szülői egységben; ezek felrobbanhatnak.

3

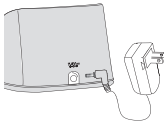

4

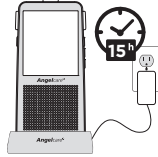

1) Vegye le az övcsatot.

2) Vegye le az elemtartó fedelét és helyezze be az újratölthető elemeket (tartozék)


3) Csatlakoztassa az adaptert a töltőkészülékhez, és dugja be egy konnektorba.

4) Töltse az egységet **15 órán át folyamatosan** (az első használatba vétel előtt).


MEGJEGYZÉS:

A tölthető elem teljesítményének optimalizálásához olvassa el az Akku Karbantartási Irányelveket a Hibaelhárítási fejezetben.

SZÜLŐI EGYSÉG:

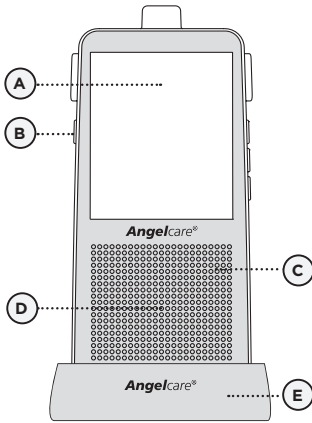

Előoldal

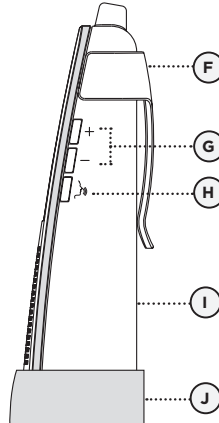

Baloldal

A) LCD érintő képernyő

B) BE-/KIKAPCSOLÓ  GOMB

C) Mikrofon

D) Hangszóró

E) Töltőkészülék

F) Övcsipesz

G) Hangszóró Hangerő-szabályozó gombok


H) Válaszoló gomb

I) Elemtartó fedél

J) Hálózati adapter kimenet (nem látható az ábrán)



2. LÉPÉS - AZ ÉRZÉKELŐ LAP/LAPOK ELHELYEZÉSE

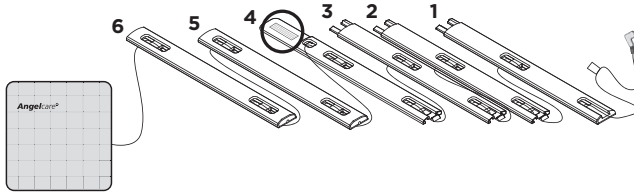

Érzékelő lap az felszerelt kábelvédővel

Kábelvédők: 1, 2, 3, 4:
Elhelyezése a padlón

4. sz kábelvédő:
Kétoldalas ragasztóval, hogy biztonságosan rögzíteni tudja a kiságy lábához.

5. sz kábelvédő:
Függőleges helyzetű a matrac tartója és a padló között

6. sz kábelvédő:
Helyezze el a matrac alá

⚠ FIGYELMEZTETÉS

FULLADÁSVESZÉLY

A gyermekek MEGFULLADHATNAK a kábelektől


- Úgy helyezze el a vezetékeket, hogy a gyermekek ne érhessek el (hagyjon legalább 1 méter távolságot).
- A csecsemők és kisgyermekek fokozott fulladásveszélye miatt, a szülők és gondozók sohase helyezték a babaegységet a gyermekágyhoz 1 méternél közelebb.
- **SOHA** ne használja az érzékelő lapot a kábelvédők nélkül. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a kábelvédők biztonságos helyen, a gyermekágy lába alatt legyenek rögzítve. Ne használja az érzékelő lapot, ha a kábelvédők megsérültek vagy eltörték.
- **TILOS** hosszabbítót használni a hálózati adapterekhez. **KIZÁRÓLAG** a készülékhez kapott hálózati adaptert használja. A termék **NEM** játékszer. **NE** engedje, hogy gyermekek játszanak vele.



H

2.1 - VÁLASZSON HELYET A BABAEGYSÉG SZÁMÁRA

A babaegység számára kiválasztott hely legyen legalább **1 méterre a gyermekágytól**.

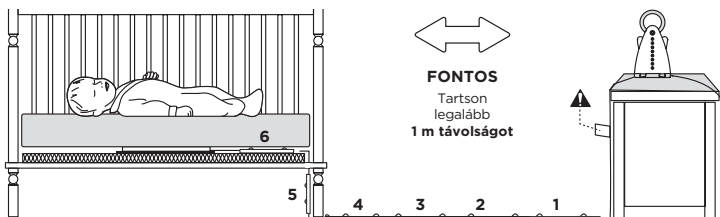


FONTOS
Tartszon
legalább
1 m távolságot






2.2 - VÁLASZSA KI A GYERMEKÁGYNAK AZT A LÁBAT, AMELYHEZ RÖGZÍTI A KÁBELVÉDŐT


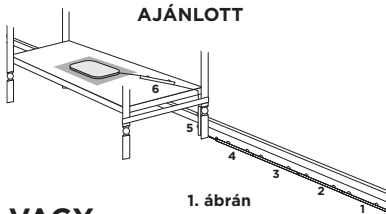


VAGY


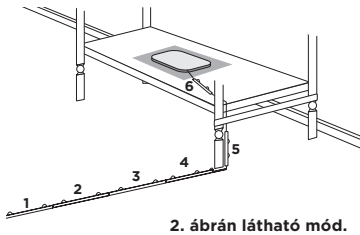







- 1) Használja azt a fal melletti lábat, amely a legközelebb esik a babaegységhez **(1. ábra)**. Abban az esetben, ha a babaegység a szoba túloldalán van, használja a babaegységhez legközelebb eső lábat a kábelvédővel ellátott vezeték elhelyezésére **(2. ábra)**. Mindig előnyösebb, ha a fal mentén lehet elhelyezni a burkolt vezetéket.

2.3 - AZ ÉRZÉKELŐ LAP(OK) ELHELYEZÉSE A MATRAC DESZKALAPJÁN

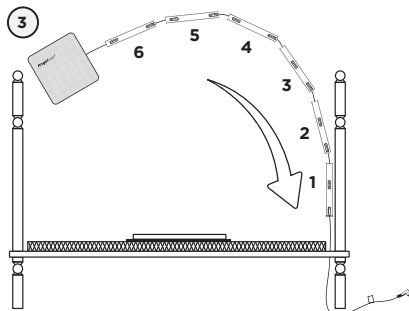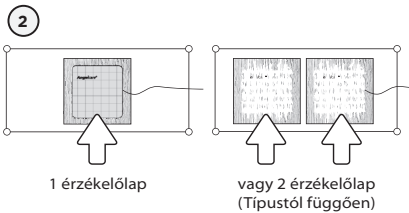

- 1) Vegye ki a matracot a gyermekágyból.
- 2) Helyezze az érzékelő táblá(ka)t – nyomtatott oldallal felfelé a kemény lapra.
- 3) Vezesse végig a csatlakozót, a figyelmeztető címkét és az első 5 kábelvédőt a gyermekágy kiválasztott lábának hátoldalán lefelé, **a matractartó és a gyermekágy belső éle között**.
- 4) Vigye le az első négy kábelvédőt a padlóra, míg az ötödiket függőlegesen vigye tovább a kiságy lábának belső szélé mentén, **(a matrac és a gyermekágy belső szélé között)**.
- 5) Egyenszege el a kábeleket úgy, hogy mindenhol feszesek legyenek

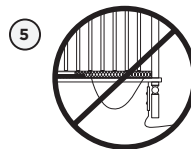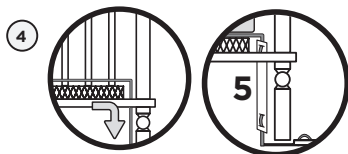

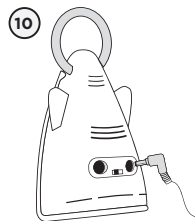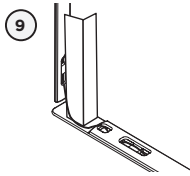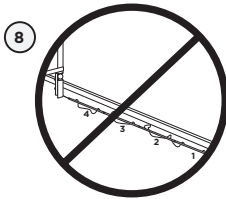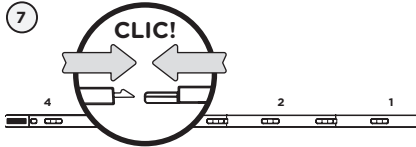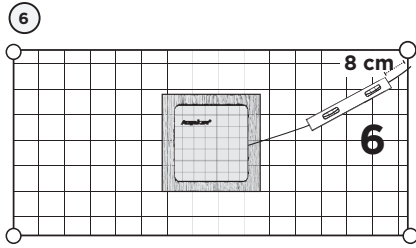

- 6) Helyezze el a hatodik kábelvédőt kb. 8 cm-re a matractartó szélétől.
- 7) Kattintsa össze a többi kábelvédőt elemeit, amelyek a padlón fognak futni.
- 8) Feszítse meg a vezetékét, ne maradjon sehol laza.
- 9) Válassza szét a negyedik kábelvédő kétoldali ragasztószalagját, és rögzítse azzal a kiságy lába alá!
- 10) A babaegységet helyezze el egy sík, stabil felületre a gyermekágygal szemben, legalább 1 m távolságra, és csatlakoztassa be az érzékelő lap vezetékét a babaegységbe.
- 11) Ellenőrizze, hogy az érzékelő lap nem mozdult-e el a helyzetéből.
- 12) Helyezze vissza a matracot a gyermekágyba.

H

• Az érzékelő lap használható bármilyen méretű és típusú matraccal, kivéve a memóriahabos matraccokat és az üreges keretű matraccokat.

• A kemény lap állandó nyomást gyakorol az érzékelő lapra, és lehetővé teszi a baba mozgásainak érzékelését még akkor is, ha a baba a gyermekágy szélénél fekszik.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

FULLADÁSVESZÉLY


- Húzza meg az érzékelő tábla vezetékét, sehol ne maradjon laza.
- Ahogy gyermeke növekszik, a matrac deszkalap lejjebb helyezése során a függőleges kábeltakarót (5) csúsztassa felfelé, így az megközelítőleg közepén marad a matraccégység és a talaj között. Csúsztassa az érzékelőlap vezetékét keresztül a talajon levő takarón, hogy elkerülje a kábel tekeredését.

- Az érzékelő lap nem használható felnőttek vagy 24 hónaposnál idősebb kisgyermekek esetében.
- Hagyja el az Érzékelő lap használatát, ha a gyermek eléri a 24 hónapos kort. Vegye ki az érzékelő lapot a gyermekágyból és tegye félre későbbi felhasználásra.
- AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT: Ellenőrizze, hogy az egység üzemkész-e, olvassa el a felhasználói kézikönyvben, hogyan kell ellenőrizni a helyes üzembehelyezést







3. LÉPÉS - A BABAEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

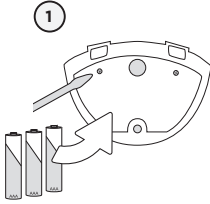

2

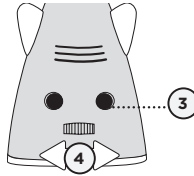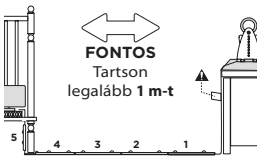


- 1) Vegye le az elemtartó fedelét és helyezzen be 3 db AAA alkáli elemet (nem tartozék).
- 2) A babaegységet helyezze el **legalább 1 m** távolságra a gyermekágytól.
- 3) Csatlakoztassa a hálózati adaptert a babaegységbe és egy konnektorba.
- 4) Állítsa be a kamera szögét a tekerő gomb segítségével.


MEGJEGYZÉS:

Az elemek fenntartják az áramellátást áramkimaradás esetén.

BABAEGYSÉG:

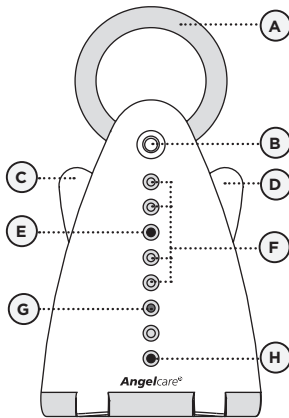

Előoldal



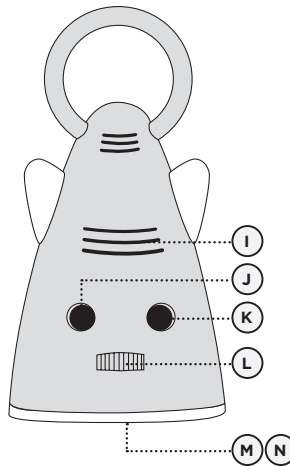


Hátoldal

- A) Éjszakai fény
- B) Főkapcsoló gomb
- C) **BE-/KIKAPCSOLÓ GOMB** (Bal'szárny)
- D) Éjszakai fény BE/KI kapcsoló (Jobb'szárny)
- E) Kamera
- F) 4 db infravörös LED (éjjellátó kamera)
- G) Bekapcsolást jelző lámpa (zöld) elem lemerültség jelző (vörös)
- H) Mikrofon
- I) Hangszóró
- J) Érzékelő lap kimenet
- K) Hálózati adapter kimenet
- L) Tekerőgomb a kameraszög beállításához
- M) Elemtartó fedél (nincs az ábrán)
- N) Állvány kimenet* (nincs az ábrán)



4. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

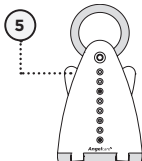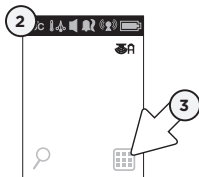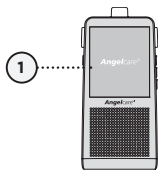

- 1) Nyomja meg a szülői egység **BE/KI** gombját 2 másodpercre, amíg a kék képernyő meg nem jelenik.
- 2) A szülői egység kijelzi a kamera üzemmód képernyőt.
- 3) Nyomja meg a **Menü** ikont a főmenübe történő belépéshez.
- 4) A szülői egység kijelzi a menü üzemmódot.
- 5) Nyomja meg és tartsa nyomva a babaőrző egység **bal 'szárny'** gombját 2 másodpercre



Ha a szülői egység BE van kapcsolva, és a babaőrző egységet Kikapcsolta, a szülői egység kikapcsolt üzemmódot jelez ki, és önmagát is Kikapcsolja 60 másodperc múlva.



Ha megszűnt a kapcsolat a két egység között (lásd a hibaelhárítási részt):

- A Hatókörön Kívül ikon jelenik meg a képernyőn.
- A Kapcsolat Elveszett ikon jelenik meg a kijelző sávjában.

FONTOS IKONOK KIJELEZŐ SÁVJA

23°C

Hőmérséklet ikon:

Kijelzi a szobahőmérsékletet.



Hőmérsékletriasztás ikon: Kijelzi, ha a hőmérsékletriasztás aktív



Inga ikon: Kijelzi, ha a mozgásérzékelő aktív



Hang ikon: Kijelzi, ha a hang funkció aktív

Riasztás ikon: Kijelzi a kiválasztott riasztási üzemmódot



Hangriasztás



Hang- és rezgés-riasztás



Csak rezgés

Kapcsolat ikon: Kijelzi a kapcsolat minőségét a szülői egység és a babaegység között



Jó kapcsolat



Gyenge kapcsolat



Elveszett kapcsolat



Hatókörön kívül

Elem töltöttség ikon:

Kijelzi az elem töltöttségét.



Lemerült



1/3 töltöttség



2/3 töltöttség



Teljesen feltöltve



5. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK TESZTELÉSE ÉS MEGISMERÉSE

Az Angelcare® készüléket használhatja a gyári alapbeállításokkal, de testre szabhatja beállításait a tetszése szerint.




A főmenüben és almenüben végrehajtott változások és beállítások nem lesznek aktíválva, ha nem nyugtázza őket az **OK** ikon megnyomásával.

FONTOS

A menü és almenü üzemmódban a szülői egység és a babaegység közötti hangátvitel ideiglenesen szünetel. CSAK a mozgásérzékelő riasztása marad aktív (ha a funkciót aktiválta).

5.1 - ÉRZÉKELŐ LAP

AZ ÉRZÉKELŐ LAP AKTIVÁLÁSÁHOZ:

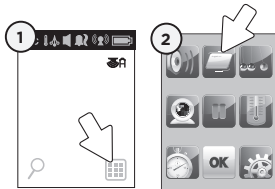

- 1) **Nyomja meg a Menü** ikont a főmenübe történő belépéshez.
- 2) Nyomja meg a **Mozgás** ikont a mozgás riasztás aktiválásához vagy letiltásához.




BE



KI

- 3) Nyomja meg az **OK** ikont a nyugtázáshoz.

AZ ÉRZÉKELŐ LAP TESZTELÉSÉHEZ:

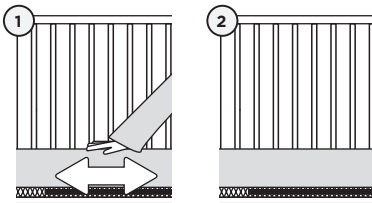

- 1) Mozgassa a kezét könnyedén a matracon.

Az inga ikon jelenik meg a szülői egység kijelző sávjában. Úgy fog mozogni, ahogyan a kezét mozgatja és 'TIC' hangot hallat.

- 2) Vegye el a kezét a matracról. 15 másodperc múlva hallani fog egy 'TIC' előriasztási hangot, majd 5 másodperccel később megszólal a mozgás-riasztás.



MOZGÁS-RIASZTÁS:

- A riasztás aktiválódik, ha az Érzékelő lap nem érzékel mozgást 20 másodpercig.
- Mind a szülő- mind a babaegység hangszórói hangos riasztási hangot bocsátanak ki.
- A Mozgás-riasztás ikon jelenik meg az LCD képernyőn.

HA A RIASZTÁS NEM SZÓLAL MEG

- Ne nyúljon a gyermekágyba, amíg az érzékelő lap működik.
- A gyermekágyat helyezze fal mellé.
- Állítsa be az érzékelő lap érzékenységi szintjét.
- Kapcsolja KI a gyermekágy mozgató-készüléket, a ventilátorokat, a hangos zenét, és mindent, ami rezgést kelthet. Távolodjon el a kiságytól, menjen ki a szobából.






A RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSA:





Nyomja meg a szülői egység mozgás-riasztási ikonját.

VAGY

Nyomja meg a babaőrző egység főkapcsoló gombját.
Tartsa nyomva a bal 'szárny' gombot két másodpercre, az egység kikapcsolásához

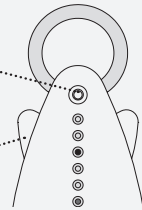

AZ ÉRZÉKELŐ LAP ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJÉNEK BEÁLLÍTÁSÁHOZ:

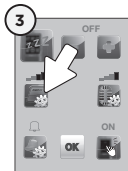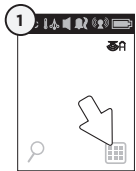

MEGJEGYZÉS:

Ha téves riasztást kap, állítsa be az érzékenységi szintet.

1) **Nyomja meg a Menü** ikont a főmenübe történő belépéshez.

2) **Nyomja meg a beállítások** ikont az almenübe történő belépéshez.

3) **Nyomja meg a Mozgás érzékenység** ikont a kívánt érzékenységi szint (1-5) beállításához.



4) **Nyomja meg az OK** ikont a nyugtázáshoz.

A TIC FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSÁHOZ:

Ahhoz, hogy TIC hangot halljon, ha a mozgásérzékelés funkció aktív.



1) **Nyomja meg a Menü** ikont a főmenübe történő belépéshez.

2) **Nyomja meg a TIC** ikont a funkció aktiválásához vagy letiltásához.



3) **Nyomja meg az OK** ikont a nyugtázáshoz.

Rendszeres TIC hang hallatszik a szülői egység felől, és a mozgó inga ikon jelenik meg a szülői egység kijelző sávjában


FONTOS

- A mozgásérzékelés funkció nem használható felnőttek vagy 24 hónaposnál idősebb kisgyermek részére.
- Ha befejezte az érzékelő lap használatát, vegye ki a baba gyermekágyából, és tegye félre.



5.2 - HANGTOVÁBBÍTÁS

A HANGTOVÁBBÍTÁS AKTIVÁLÁSÁHOZ:

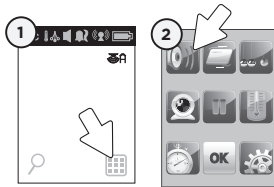

1) Nyomja meg a **Menü** ikont a főmenübe történő belépéshez.

2) Nyomja meg a **Hang** ikont a hang aktiválásához vagy letiltásához.



3) Nyomja meg az **OK** ikont a nyugtázáshoz.

A HANGPRÓBÁHOZ:

Kérjen meg valakit, hogy beszéljen a babaegységbe vagy helyezze az egységet egy rádió mellé, hogy biztosan felvegye a hangot.


FONTOS

A visszacsatolás (sípolás) elkerülése érdekében a két egységet legalább 3 m (10 láb) távolságra kell elhelyezni egymástól.

HA NEM HALL HANGOT:


- Ellenőrizze, hogy mindkét egység be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy mindkét egység működő konnektorba van-e bekötve.
- Ellenőrizze az elemeket mindkét egységben (cserélje vagy töltsse fel, ha szükséges).
- Hozza a szülői egységet közelebb a babaegységhez.

ÁLLÍTSA BE A HANGERŐT

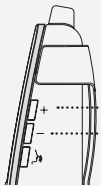


..... a hangerőt növeli (+)
..... a hangerőt csökkenti (-)

CSENDES ÜZEMMÓDBA ÁLLÍTÁS / NÉMÍTÁS

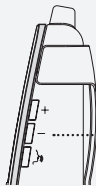

Nyomja meg a (-) gombot a némításhoz 2 másodpercre.

PÁRBESZÉD ÜZEMMÓDBA ÁLLÍTÁS

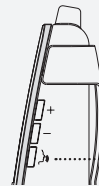

Nyomja meg és tartsa nyomva a beszélőgombot, hogy beszélhessen a babával.

5.3 - ELEMEEK


AZ ELEMEEK ELLENŐRZÉSE:

Húzza ki az adaptereket mindkét egységből.

- Ha a babaegységen nem világít a zöld fény, cserélje az elemeket.
- Ha a szülői egység és képernyője nem világít, töltsse fel az elemeket.

HOGYAN TÖLTSE FEL AZ ELEMÉKET A SZÜLŐI EGYSÉGBEN:

Hagyja a szülői egységet a töltőn, hogy teljesen feltöltsse az egységet. Bár az akkuk még 1/3 kapacitással is normálisan működnek, ajánlatos ezeket teljesen feltölteni.

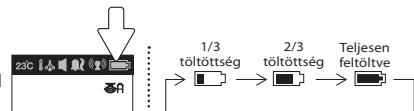

SZÜLŐI EGYSÉG LEMERÜLTSGÉI RIASZTÁS

- A riasztás bekapcsol, ha az akkukat újra fel kell tölteni.
- A szülői egység bip-hangot bocsát ki 15 másodpercenként.
- A lemerültségi riasztási ikon jelenik meg az LCD képernyőn.





MOST MÁR ÜZEMKÉSZ A KÉSZÜLÉK

Az Angelcare® készüléket használni lehet a gyári alapbeállításokkal, de testre szabhatja beállításait a tetszése szerint.

ALAPBEÁLLÍTÁSI ÉRTÉKEK



Hang üzemmód: BE
Hangszóró hangereje: 3-as szint (6-ból)



Mozgás üzemmód: BE
Érzékelő lap érzékenysége: 3-as szint (5-ből)
TIC: BE



Hőmérő egység: Celsius
Hőmérséklet riasztás: KI



HANGERŐ szint: 2-es szint (4-ből)



Időzítő: KI



Riasztás üzemmód: Csak hangriasztás



Kamera: BE



Képernyő--kímélő időzítő: KI



Éjjellátó üzemmód: AUTO



Billentyűhang: BE



CH

FONTOS

- Az első használatba vétel előtt ellenőrizze a készüléket.
- Rendszeresen ellenőrizze a készüléket, hogy kifogástalanul üzemel-e.
- Minden alkalommal ellenőrizze a készüléket, ha áthelyezi az érzékelő lapot egy másik helyre.



6. LÉPÉS - TOVÁBBI FUNKCIÓK AKTIVÁLÁSA ÉS LETILTÁSA



A főmenüben és almenüben végrehajtott változások és beállítások nem lesznek aktiválva, ha nem nyugtázza őket az **OK** ikon megnyomásával.

FONTOS

A menü és almenü üzemmódban a szülői egység és a babaegység közötti hangátvitel ideiglenesen le van tiltva. CSAK a mozgásérzékelő riasztása marad aktív (ha a funkciót aktiválta).


6.1 - HANGÁTVITEL (VOX)

Az ön készüléke 'Hangra bekapcsoló' (Sound Activated). Ez azt jelenti, hogy csak akkor továbbít hangot, ha hangot észlelt. Felismeri a sírás legalacsonyabb szintjét is.

Energia-takarékosság kedvéért, 10 másodperc után a hangátvitel lekapcsol, ha nem érzékel hangot. Ha hangot érzékel, az átvitel automatikusan aktiválódik.

A HANGÉRZÉKELÉS ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJÉNEK (VOX) BEÁLLÍTÁSÁHOZ:

Lehetővé teszi, hogy meghatározza azt a hangerőt, amelynél a hangátvitel megindul a szülői egység felé. Ez azt jelenti, hogy csak akkor továbbít hangot, ha a hangerő meghaladja az ön által beállított szintet.

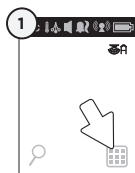


- 1) Nyomja meg a **Menü** ikont a főmenübe történő belépéshez.
- 2) Nyomja meg a **beállítások** ikont az almenübe történő belépéshez.
- 3) Nyomja meg a VOX ikont a hang érzékenységi szint (1-4) beállításához.
- 4) Nyomja meg az **OK** ikont a nyugtázáshoz.





6.2 - RIASZTÁS

Lehetővé teszi, hogy kiválassza a riasztási üzemmódot a szülői egységen.

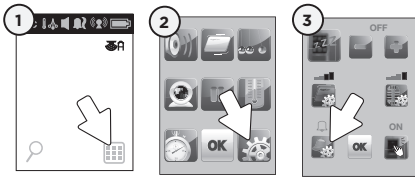

- 1) Nyomja meg a **Menü** ikont a főmenübe történő belépéshez.
- 2) Nyomja meg a **beállítások** ikont az almenübe történő belépéshez.
- 3) Nyomja meg a **Riasztás** ikont a riasztás üzemmódjának átváltásához.
- 4) Nyomja meg az **OK** ikont a nyugtázáshoz.



Csak hangriasztás:



Hang- és rezgés-
riasztás:



Csak rezgés (A riasztás nem szól a szülői egységen, de hangosan riaszt a babaegységen).



A riasztási üzemmód ikon megjelenik a szülői egység felső sávjában.


A hangriasztás felváltja a rezgés üzemmódot, ha a szülői egység töltőn van.

FONTOS

Beállítási üzemmódban a szülői egységre nem érkezik hang vagy riasztás, kivéve a mozgás-riasztást (ha ezt a funkciót már aktiválta).

6.3 - TARTÁS

Lehetővé teszi az Angelcare készülék TARTÁSBA kapcsolását.

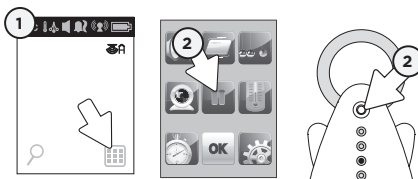

A babaegység éjszakai fénye villogni kezd. A szülői egység 3 egymás utáni .bip-hangot bocsát ki 30 másodpercenként, hogy figyelmeztessen a készülék tartásba kapcsolt állapotára.

- 1) Nyomja meg a **Menü** ikont a főmenübe történő belépéshez.
- 2) Nyomja meg a **Tartás** ikont
VAGY
Nyomja meg és tartsa nyomva a **babaegység főkapcsoló gombját legalább 2 másodpercre**
- 3) A **Tartás** ikon jelenik meg a képernyőn.
- 4) Nyomja meg a **Tartás** ikont vagy a **babaegység főkapcsoló gombját** újra a normál üzemhez történő visszatéréshez.


FONTOS

Ha a készülék tartásba van kapcsolva, a mozgásérzékelés és a mozgás-riasztás le vannak tiltva.





6.4 - HŐMÉRŐ

A MÉRTÉKEGYSÉG MEGVÁLTOZTATÁSA:

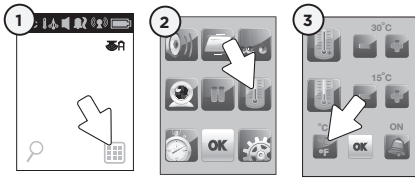

- 1) Nyomja meg a **Menü** ikont a főmenübe történő belépéshez.
- 2) Nyomja meg a **hőmérséklet** ikont az almenübe történő belépéshez.
- 3) Nyomja meg a **°C °F** ikont az átváltáshoz **Celsius-ról Fahrenheit fokra**.
- 4) Nyomja meg az **OK** ikont a nyugtázáshoz.


A HŐMÉRSÉKLETI RIASZTÁS AKTIVÁLÁSÁHOZ:

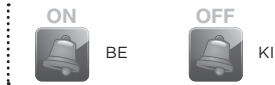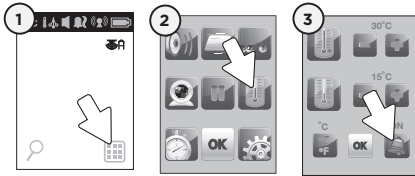

- 1) Nyomja meg a **Menü** ikont a főmenübe történő belépéshez.
- 2) Nyomja meg a **hőmérséklet** ikont az almenübe történő belépéshez.
- 3) Nyomja meg a **Hőmérséklet riasztás** ikont a hőmérsékleti riasztás **aktiválásához** vagy **letiltásához**.
- 4) Nyomja meg az **OK** ikont a nyugtázáshoz.

Hőmérséklet riasztás ikon:
Kijelzi, ha a hőmérséklet riasztás aktív

A HŐMÉRSÉKLETI TARTOMÁNY BEÁLLÍTÁSA:

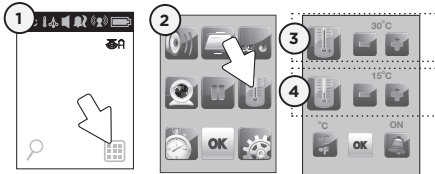

A minimum és maximum hőmérsékleti értékek közötti tartománynak legalább 4°C/7°F-nek kell lennie. Hibaüzenet hang szólal meg, ha megpróbál a minimális szint alá menni a beállítással

- 1) Nyomja meg a **Menü** ikont a főmenübe történő belépéshez.
- 2) Nyomja meg a **hőmérséklet** ikont az almenübe történő belépéshez.
- 3) Nyomja meg a (+ vagy -) gombot a **maximális** hőmérsékleti tartomány beállításához (15 - 32 °Celsius/59 - 90 ° Fahrenheit).
- 4) Nyomja meg a (+ vagy -) gombot a **minimális** hőmérsékleti tartomány beállításához (5 - 20 °Celsius/41 - 68 ° Fahrenheit).
- 5) Nyomja meg az **OK** ikont a nyugtázáshoz.

HŐMÉRSÉKLET RIASZTÁS


- A riasztás bekapcsol, ha a hőmérséklet eléri a beállított minimális vagy maximális értéket.
- A szülői egység 4 egymás utáni bip-hangot bocsát ki 5 másodpercenként.
- A hőmérsékleti riasztási ikon jelenik meg az LCD képernyőn.





6.5 - KAMERA

Lehetővé teszi a KAMERA FUNKCIÓ BE- és Kikapcsolását.

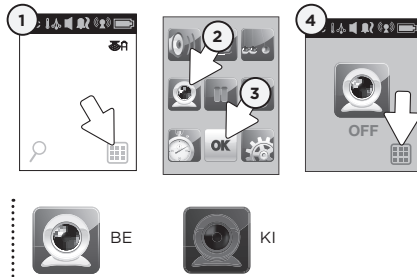


- 1) Nyomja meg a **Menü** ikont a főmenübe történő belépéshez.
- 2) Nyomja meg a Kamera ikont kamera funkció aktiválásához vagy **letiltásához**.
- 3) Nyomja meg az **OK** ikont a nyugtázáshoz.
- 4) Nyomja meg a **Menü** ikont a főmenübe történő belépéshez.

H
U

6.6 - KÉPERNYŐVÉDŐ

Lehetővé teszi a képernyővédő késleltetésének a beállítását.

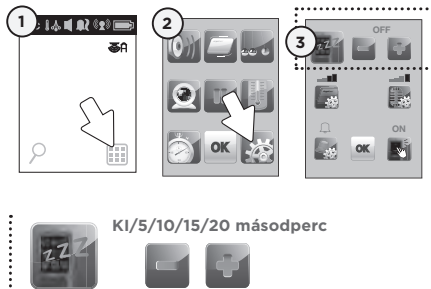

- 1) Nyomja meg a **Menü** ikont a főmenübe történő belépéshez.
- 2) Nyomja meg a **beállítások** ikont az almenübe történő belépéshez.
- 3) Nyomja meg a **Képernyővédő** ikont a késleltetés beállításához, amikor a kamera üzemmódról átvált képernyővédő üzemmódba.
- 4) Nyomja meg az **OK** ikont a nyugtázáshoz.

MEGJEGYZÉS:


A Képernyővédő ikon megjelenik, amikor a kamera képernyővédő üzemmódban van.

KÉZI BEÁLLÍTÁS:

A képernyővédő üzemmód kézi bekapcsolásához nyomja meg a szülői egység **Bekapcsoló gombját**. Ne nyomja 2 másodpercnél tovább, mert ezzel kikapcsolja a szülői egységet.

VISSZATÉRÉS A KAMERA ÜZEMMÓDHOZ

Nyomja meg a képernyőt
VAGY
Nyomja meg a BE/KI kapcsolót (de ne tartsa nyomva 2 másodpercnél tovább, mert ezzel kikapcsolja az egységet.).

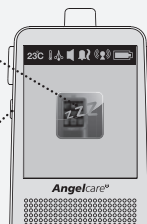

VAGY

Nyomja meg a beszélőgombot




6.7 - INFRAVÖRÖS ÉJJELLÁTÓ BERENDEZÉS

Lehetővé teszi képtovábbítást rossz világítási körülmények között is.

AZ ÉJJELLÁTÓ ÜZEMMÓD AKTIVÁLÁSÁHOZ:

nyomja meg az **Éjjellátó** ikont a rendelkezésre álló üzemmódok kiválasztásához.

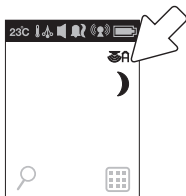

AUTO: Az infravörös LED-ek automatikusan bekapcsolnak, ha a megvilágítás nem elegendő. A képtáttnés 20 másodpercet igényel



BE: Az infravörös LED-ek mindig BEkapcsolnak.



KI: Az infravörös LED-ek mindig Kikapcsolnak.



Az Hold ikon jelenik meg, ha az infravörös LED-ek BE vannak kapcsolva.




A babaőrző egységen 4 beépített infravörös LED található a világos fekete-fehér képek készítéséhez A képtáttnés 20 másodpercet igényel

6.8 - ÉJJELI FÉNY

Lehetővé teszi a készülék használatát éjszakai fényként.

A FÉNY AKTIVÁLÁSÁHOZ:

Nyomja meg a **jobb 'szárny'** gombot a babaegységen az éjszakai fény BE- vagy Kikapcsolásához.

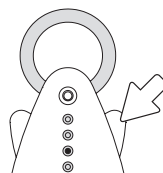


6.9 - KERESŐ

Lehetővé teszi a szülői egység megtalálását

A SZÜLŐI EGYSÉG MEGTALÁLÁSÁHOZ:

Nyomja meg a babaegység főkapcsoló gombját legfeljebb 2 másodpercre A szülői egység kereső hangot bocsát ki egy percig.

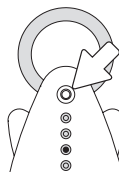

FONTOS

Ha a főkapcsoló gombot 2 másodpercnél tovább nyomja, tartásba viszi át a mozgásfigyelőt. A tartás kikapcsolásához nyomja meg a gombot még egyszer.

A KERESŐ HANG LEÁLLÍTÁSA:



Nyomja meg a szülői egység képernyőjét.

VAGY


Nyomja meg a babaegység főkapcsoló gombját.





6.10 - ZOOM ÜZEMMÓD

Lehetővé teszi a zoomolást a normál kép kétszeres nagyításáig.

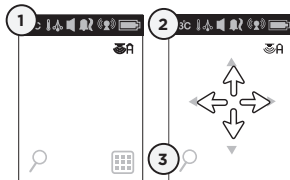

- 1) **Nyomja meg a zoom** ikont
- 2) **Nyomja meg az irányba állító nyilakat** az arra a tárgyra zoomoláshoz, melyet közelebből akar megnézni.
- 3) **Nyomja meg a zoom** ikont újra a normál nézethez történő visszatéréshez.

6.11 - NÉMÍTÁS


Lehetővé teszi a készülék csendes / némított üzemmódba kapcsolását.

NÉMÍTÁS:

Nyomja meg a (-) gombot és tartsa nyomva 2 másodpercig a hang elnémításához.

A NÉMÍTÁS KIKAPCSOLÁSA:

Nyomja meg a (-) gombot ismét és tartsa nyomva 2 másodpercig a hang némításának kikapcsolásához.

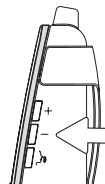

H




MEGJEGYZÉS:

A szülői egységen a némítás IKON villog.

6.12 - BILLENTYŰHANG


Lehetővé teszi a billentyűhang aktiválását és letiltását.

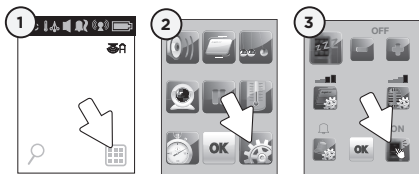

- 1) Nyomja meg a **Menü** ikont a főmenübe történő belépéshez.
- 2) Nyomja meg a **beállítások** ikont az almenübe történő belépéshez.
- 3) Nyomja meg az ikont, hogy **aktiválja vagy letiltsa** a billentyű hangot.
- 4) Nyomja meg az **OK** ikont a nyugtázáshoz.

6.13 - IDŐZÍTŐ

Lehetővé teszi egyes tevékenységek időzítését

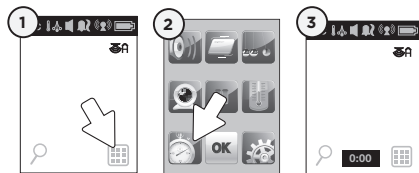

- 1) Nyomja meg a **Menü** ikont a főmenübe történő belépéshez.
 - 2) Nyomja meg az **Időzítő** ikont az időzítés indításához vagy leállításához.
 - 3) Nézze az **Időzítőt** a kamera üzemmódban. (csak a perceket mutatja).
- Automatikusan leáll 5 óra 59 perc után.
 - Automatikusan leáll, ha a szülői egységet Kikapcsolják.





HIBAEHÁRÍTÁS

ÚJRATÖLTHETŐ ELEMEINEK KARBANTARTÁSA

- Az első használatba vétel előtt 10 óra hosszat töltse fel teljesen az elemeket.
- Az elemek maximális élettartamának fenntartásához ajánlatos időnként teljesen kisütni az elemeket. Az elem teljesítményét csökkenti, ha az elemeket állandóan rajta hagyja töltésen a töltőn. Ha a szülői egység nincs használatban, kapcsolja KI.
- A nem megfelelő elemfeszültség károsíthatja a készülék teljesítményét. Ha nincs megelégedve a szülői egység/készülék teljesítményével, cserélje ki a tölthető elemeket (3 db NIMH újra tölthető elem).
- Tanácsos az elemeket hathavonta kicserélni.

TÉVES RIASZTÁSOK

- Kapcsolja KI a babaegységet.
- Ellenőrizze a kapcsolatot az érzékelő lap/lapok és a babaegység között. Húzza ki és csatlakoztassa újra a kábelt
- Ellenőrizze, hogy nincs-e ágynemű a matrac és az érzékelő lap/lapok között.
- Ha a gyermekágy rugós vagy léces alapú, helyezzen egy legalább 33 x 33 cm-es és 6 mm vastag kemény lapot a gyermekágy alapja és az érzékelőlap közé.
- Ellenőrizze, hogy az érzékelő lap/lapok a elhelyezési előírások szerint van-e elhelyezve. Szükséges lehet az érzékenység beállítása, lásd az 5.1 lépést.

HA A RIASZTÁS NEM SZÓLAL MEG

- Ne nyúljon a kiságyhoz, ha a készülék BE van kapcsolva.
- A gyermekágyat helyezze egy szilárd fal mellé, hogy az érzékelő lap ne érzékeljen nem a gyermekágyból származó mozgásokat.
- Szükséges lehet az érzékenység csökkentése, lásd az 5.1 lépést.

NINCS HANGÁTVITEL

- Hozza a szülői egységet közelebb a babaegységhez.
- Ellenőrizze/cserélje vagy töltse fel az elemeket a szülői egységben.
- Ellenőrizze a csatlakozók, és adapterek érintkezését vagy csatlakoztassa másik konnektorba.
- Ellenőrizze, hogy mindkét egység BE van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy az adapterek csatlakoztatva vannak-e.
- Ellenőrizze a szülői egység felső lécnén, hogy a készülék nincs-e "NÉMÍTVÁ" a "BE"-kapcsolás helyett. Lásd az 5.2 lépést.

BABAEGYSÉG FESZÜLTSGJELZŐ LÁMPÁJA (ZÖLD SZÍNŰ) NEM VILÁGÍT

- Ellenőrizze a csatlakozók, és adapterek érintkezését vagy csatlakoztassa másik konnektorba.
- Nyomja meg és tartsa nyomva a bal 'szárny' gombot két másodpercre, a babaegység BEkapcsolásához.

GYENGE VÉTEL

- Hozza az egységeket közelebb egymáshoz.
- Változtassa meg az egyik vagy mindkét egység helyzetét.
- A babaegységet helyezze el egy sík felületre, amelyet a gyermek nem érhet el.
- Cserélje vagy töltse fel az elemeket a szülői egységben.





SZTATIKUS FELTÖLTŐDÉS, TORZÍTÁS, ZAVARÁSOK (MÁS MONITOROK, RÁDIÓTELEFONOK, HORDOZHATÓ ADÓVEVŐK, STB. MIATT...)

- Forgassa el a szülői egységet, vagy vigye el a zavarforrás közeléből.

VISSZACSATOLÁS (HANGOS ZAJ A SZÜLŐI EGYSÉGBŐL)

- Létesítsen nagyobb távolságot (legalább 3 métert) az egységek között.
- Csökkentse a hangerőt a szülői egységben.

HA A SZÜLŐI EGYSÉG KÉPERNYŐJE SÖTÉT (A SZÜLŐI EGYSÉG KI VAN KAPCSOLVA)

- Nyomja meg és tartsa nyomva a szülői egység bekapcsoló (bal 'szárny') gombját 2 másodpercre az egység visszakapcsolásához.
- Cserélje vagy töltsé fel az elemeket a szülői egységben.

H
U





KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

Az Angelcare® az eredeti vásárlás dátumától számított egy (1) évig szavatolja a termék eredeti tulajdonosának, hogy az Angelcare® kamerás légzésfigyelő kétirányú babaőrzővel (AC1100-as modell) minden anyagi és gyártási hibától mentes. Amennyiben a figyelőrendszer az előírásoknak megfelelő használat mellett, rendes körülmények között nem működik megfelelően az egy éves időtartam alatt, az Angelcare® díjmentesen megjavítja vagy kicseréli a terméket, saját megítélése szerint. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi márkakereskedőjével.

A termékhez csatolnia kell egy vásárlást igazoló dokumentumot: egy számlát vagy egyéb dokumentumot, ami igazolja, hogy a figyelőrendszer szavatossági ideje még nem járt le. Az Angelcare® állja a javítás vagy csere, illetve a termék vásárlóhoz való visszajuttatásának a költségét.

Ez a szavatosság nem vonatkozik olyan termékekre, amely nem megfelelő karbantartás, baleset, nem megfelelő hálózati feszültség vagy bármilyen más helytelen használat miatt sérült meg. A szavatosság akkor is érvényét veszti, ha a tulajdonos bármilyen javítást vagy módosítást végez a terméken. Az Angelcare® nem felelős a termékben bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért. A szavatosság egyúttal minden, a fentiekben fel nem sorolt felelősséget kizár. Egyéb szavatosság nincsen.

A szavatosság nem vonatkozik a nem Angelcare márkájú termékekre és tartozékokra, a termék nem előírás szerinti használatából eredő problémákra, valamint olyan problémákra, amik abból adódtak, hogy nem Angelcare tartozékokat vagy alkatrészeket használtak.

A TÖRVÉNYES JOGOK ORSZÁGONKÉNT VÁLTOZNAK. EGYES ORSZÁGOK NEM ENGEDIK A JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EBBEN AZ ESETBEN A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM ALKALMAZHATÓK.

SEMMLYEN FORMÁBAN SEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ SEMMLYEN KÖVETKEZMÉNYÉRT.

FONTOS

Ez az Angelcare® készülék egy személyes felügyeleti eszköz. Kérjük, ne vigye vissza a terméket az üzletbe. Ha kérdései vannak, vagy segítségre van szüksége, forduljon a márkakereskedőjéhez a termék visszaküldése előtt.





MŰSZAKI ADATOK

Hatótávolság:

Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen):
max. 200 méter.

Csatornák száma:

USA/Kanada: 19 csatorna.
Európa: 64 csatorna:

Energia-ellátás:

3 AAA alkáli elem (nem szállítjuk) vagy 7,5 V DC
adapter a babaegységhez.

3 AAA újratölthető elem és 7,5 V DC adapter a
szülői egység töltőkészülékéhez.

VIGYÁZAT: Az elektromos áramütésveszély
csökkentése érdekében, a terméket ne tegye ki
esőnek vagy nedvességnek.

Robbanásveszély áll fenn, ha az elemeket
nem megfelelő típusúra cseréli. A tartozék
elemek: 3 db AAA NIMH újratölthető elem,
GPI INTERNATIONAL LIMITED gyártmányú
(GN60AAAHC, 1,2 V 600 mAó) vagy HIGHPOWER
TECHNOLOGY CO., LTD gyártmányú (HFR-
44AAAJ600, 1,2 V 600 mAó).

**Ezeket csak 3 db AAA NIMH újratölthető elemre
szabad cserélni.**

Elemek:

- NE keverje a régi és új elemeket.
- NE keverje az alkáli, szabvány (szén-cink) és
újratölthető (NI-CD, NIMH, stb.) elemeket.

Vezeték nélküli átvitel:

Az adatátvitel a szülői és a babaegység között
2,4 GHz frekvencián történik.

Az Angelcare Monitors Rt. ezennel kijelenti,
hogy a jelen készülék megfelel az 1999/5/EK
irányelv lényeges követelményeinek és más
fontos rendelkezéseinek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat megszerezhető
az Ön helyi márkakereskedőjénél. Kérjük,
olvassa el a címét ebben a kézikönyvben.

CH



VÉDJE KÖRNYEZETÉT

Ez az elektromos készülék újrahasznosítható anyagokat tartalmaz, és nem szabad a háztartási
hulladékba dobni. Kérjük, vigye el egy elektromos készülékek számára fenntartott gyűjtőhelyre
(a részletekért forduljon a helyi hatóságokhoz).

ERP MEGFELELŐSÉG

DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG-BRAZÍLIA-ECUADOR-EURÓPAI UNIÓ
Használjon kizárólag Angelcare® márkájú adaptert - típuszáma: T07505V001

NÉMETORSZÁG
Használjon kizárólag Angelcare® márkájú adaptert - típuszáma: T07505F002

AUSZTRÁLIA
Használjon kizárólag Angelcare® márkájú adaptert - típuszáma: T07505S002

ÉSZAK-AMERIKA
Használjon kizárólag Angelcare® márkájú adaptert - típuszáma: T07505U002





TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy az Angelcare® termékét választotta. Az Angelcare® a termékek fejlesztése és gyártása során a legnagyobb gondossággal jár el, valamennyi termék megfelel a nemzetközi szabványoknak. A cég termékeire a világon mindenütt 12 hónap garanciát vállal, mely a vásárlás napjától számítva él. A vásárlás napján kapott számlát, vagy fizetési blokkot és/vagy a készülék bélyegzett jótállási jegyét okvetlenül őrizze meg, mert jótállási igényét ezekkel érvényesítheti. A jótállás időtartama alatt minden olyan hiba esetén, amelynek eredete gyártási hibára vagy anyaghibára vezethető vissza, a termék hibás főegységét cseréljük. A készülékek utólagos javítását a gyártó a készülék jellege miatt nem engedélyezi.

A csere időtartama a bejelentéstől (a termék beérkezésétől) számított kb. 8nap. Ez a jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rossz feszültség, helytelen alkalmazás, vagy használat, ill. nem megfelelő elemek használata miatt sérült meg. A garancia szintén nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos javíttatta a készüléket, vagy átalakíttatta.

Meghibásodás esetén a termék főegységeinek cseréjét 3 munkanapon belül az eladó szerv, ezt meghaladóan a forgalmazó végzi, kérjük utóbbi esetben ezt okvetlenül jelezze a megadott elérhetőségeken. (Tel.: 06/20/2557750, info@angelcare.hu) Importőr és szerviz: lsd. Forgalmazók / Distributors: Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

JÓTÁLLÁSI JEGY

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkre a 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet alapján.

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk. 8:1. §). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. § alapján.

2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A termék, vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.

3. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót.

4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.

5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.

6. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.

8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) érvényesítheti. Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhöz kell eljuttatni, személyesen, vagy postai úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve ha a fogyasztó a küldeményről és a meghibásodásról előzetesen tájékoztatta.

10. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni.

11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következő jogszabályok és rendeletek szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Kormányrend.; Ptk. XXIV. fejezet; 19/2014 (IV.29) NGM Rend. Hibás teljesítés miatt a fogyasztó a Ptk. 6:159.§ par. alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott kellékszavatossági jog lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

12. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlát/blokkot és/vagy lebélyegzett, kitöltött jótállási jegyét feltétlenül őrizze meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerződés megkötését.





13. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

14. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

15. Jótállási igény nem érvényesíthető a következő esetekben:

- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése esetén a jótállási jegy érvénytelen.
- A használati utasítástól eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
- Átalakítás, hibás, vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
- Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre, vagy tartozékokra.
- Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy az ANGELCARE® AC1100 típusú készülékek a CE nemzetközi jelzéssel vannak ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabvány-előírásoknak és irányelveknek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a forgalmazótól kérheti el.

CH

TERMÉKTÍPUSA: ANGELCARE® AC1100 típusú készülék	A TERMÉK GYÁRTÁSI SOROZATKÓDJÁ:
VÁSÁRLÁS DÁTUMA:	ELADÓ SZERV BÉLYEGZŐJE, ALÁÍRÁS:

AZONNALI INTÉZKEDÉSEK CSECSEMŐKORI LÉGZÉSKIMARADÁS ESETÉN

Amennyiben a légzésfigyelő megszólal, azonnal ellenőrizze, hogy a riasztás valós-e. Téves riasztás esetén derítse fel ennek okát, változtasson a gyermek kiságykörülményein, vagy fokozza a készülék érzékenységét.

Riasztás esetén a következő életfunkciókat azonnal ellenőrizze gyermekénél:

- a baba lélegzik-e;
- van-e a csecsemőnek szívverése;
- megfelelő-e a gyermek vérkeringése

A légzés ellenőrzése a legegyszerűbb, a mellkas emelkedő-süllyedő mozgása szabad szemmel is könnyen látható, a gyermek arcához közel hajolva a száj- és orrnyílásnál légző hang (szuszogás) hallható. A csecsemő szívverését az ismert testpontokon lehet pulzustapintással ellenőrizni, nyaki- vagy csukló- verőér esetén. A vérkeringés ellenőrzésének legegyszerűbb módja a baba arcszínének megvizsgálása. Egészséges keringés esetén a gyermek arcbőre rózsaszínű, megfelelő vérkeringés hiánya esetén a szín kékesszürke.

A három funkció mindegyike fontos, de a készülék riasztása a légzőmozgás kimaradását jelzi. Amennyiben a gyermek nem lélegzik, azonnal hívja a mentőket a 104, vagy 112 telefonszámokon, és a következő ÉLETMENTŐ INTÉZKEDÉSEKET az életfunkciók ismételt beindulásáig, vagy a mentők kéréséig a leírtak szerint végezze.



Ha a gyerek ...	Megfelelő SÜRGŐS intézkedések
...eszméletlen ...nem lélegzik ...van pulzusa	Kicsit döntjük hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, kb. 40-szer percenként. Ne alkalmazzon szívmasszázst! Folytassuk a lélegeztetést addig, amíg a gyermek újra magától lélegzik, vagy amíg a mentők át nem veszik.
...eszméletlen ...nem lélegzik ...nincs pulzusa	Kicsit döntjük hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, 3 lélegeztetéssel. Utána alkalmazzon 15 szívmasszázst, majd ismét 3 lélegeztetést. Csak akkor hagyja abba az intézkedéseket, ha a gyermek ismét maga lélegzik.

MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS

1. Kicsit döntse hátra a baba fejét. Tegye az egyik kezét a baba homlokára, másik kezének két ujját az álla alá. Így döntse hátra a baba fejét. (a. kép) Ha lélegeztetéskor nem emelkedik a baba mellkasa, akkor azonnal ellenőrizze, hogy a megfelelő pozícióban van-e a baba feje. A leggyakoribb hiba a mesterséges lélegeztetéskor a nem megfelelő fejpozíció.



2. Száj és orr körülzárása

Tegye a száját a csecsemő orrára és szájára olyan szorosan, amennyire tudja. (b. kép)




3. Három levegő befúvás

Annyi levegőt fújjon a csecsemőnek, amennyit Ön egy könnyed levegővétellel a szájában tud tartani. A csecsemő mellkasa megemelkedik, amikor befújja a levegőt, és lesüllyed kilélegzésnél. Egy befúvás kb. 1-1,5 másodpercig tart. A befúvások között a csecsemő orrát és száját szabadon kell hagyni, így önállóan bekövetkezik a kilégzés. A befúvás után fordítsuk fejünket oldalra úgy, hogy a gyermek légzésmozgását figyelhessük. (c. kép)



Ha nem emelkedik a baba mellkasa, akkor ez abból is következhet, hogy valami elzárja a baba légcsövét. Szüntesse meg az akadályt, fordítsa oldalra a baba fejét és a kisebbik ujjával törölje ki a baba száját, majd fordítsa vissza a gyerek fejét az előző pozícióba és folytassa a lélegeztetést. (d.kép)

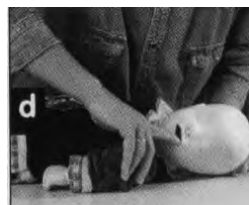



SZÍVMASSÁZS

1. Feltételek

Ahhoz, hogy szívmassázst végezhesen, szilárd felületre van szükség. Egy asztal, vagy pelenkázó megfelel erre a célra, de ha nincs a közelben akkor a padló is alkalmas lehet. Nem szabad szívmassázst matracon végezni, mert az utórugózást eredményez. A következő lépésekhez, hogy a helyes nyomási pontot megtaláljuk, a gyermek felsőtestét szabadabbá kell tenni.

2. Nyomási pont

Képzelden el egy összekötő vonalat a csecsemő két mellbimbója között. Jobb keze mutatóujját helyezze e vonal alá, és szorosan mellé a középső és gyűrűsujját. (a.kép) Emelje fel a mutatóujját és így a gyűrűs- és középső ujjával meg tudja nyomni a baba mellkasát. A gyűrűs- és középső ujjá így 0,5-1 cm-rel a mellbimbókat összekötő vonal alatt vannak.

3. 15 szívmasszázs

A mellkas csont nyomásával nyomást gyakorol a szívre is, amellyel egy szükségvérkeringést indít be, és ezzel eljut az oxigén a létfontosságú szervekhez. Ahhoz, hogy a szív az összenyomás után újra megtelhesen vérrel, figyelni kell arra, hogy a mellkas csont ismét tehermentesítve legyen. Ekkor az ujjat nem kell a mellkasról felemelni, mert elmozdulhat a helyes nyomási pontról. A nyomási mélység a mellkas-keresztmetszet egyharmada kell hogy legyen, ez csecsemők esetében kb. 2 cm. Ahhoz, hogy a szívmasszázs a normál szívizom összehúzódásának megfelelően, nem kell hirtelen nyomással végezni a szívmassázst, hanem finoman úgy, hogy a szív nyomása annyi ideig tartson, mint a szívizom elernyedése. (b. kép)



CU





www.angelcarebaby.com

