

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### AC115 modell

Légzésfigyelő készülék kétirányú babaőrzővel



## ⚠ FIGYELMEZTETÉSEK

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, HOGY KÉSŐBB IS ELOLVASHASSA. A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT. A FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA SÜLYÖS SÉRÜLÉST, HALÁLT VAGY A TERMÉK KÁROSODÁSÁT OKOZHATJA.

### TARTALOMJEGYZÉK

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| <b>⚠ FIGYELMEZTETÉSEK</b>                     | 2  |
| ÜZEMBEHELYEZÉSI TUDNIVALÓK                    | 4  |
| A szülői egység töltése (10 óra)              | 5  |
| Az érzékelőlap elhelyezése                    | 6  |
| A babaegység beállítása                       | 8  |
| A készülék bekapcsolása                       | 9  |
| A készülék tesztelése és megismerése          | 11 |
| További funkciók bekapcsolása és kikapcsolása | 16 |
| Hibaelhárítás                                 | 18 |
| Korlátozott jótállás                          | 21 |
| Műszaki adatok                                | 21 |



Ez a babaőrő megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes szabványnak, és a használati útmutatónak megfelelő használata esetén biztonságos.

## FIGYELMEZTETÉSEK

A csecsemőkre és kisgyermekre vonatkozó súlyos fulladásveszély miatt a szülők és gondozók tartsák be az alábbi FIGYELMEZTETÉSEKET:

### FIGYELMEZTETÉSEK Fulladásveszély Előfordult, hogy a kábelekbe belegabalyodott gyermekek MEGFULLADTAK.



- **TARTSA TÁVOL** a babaegységet és az adapter kábeleit a gyermekektől (legalább 1 méteres távolságban).
- **SOHA** ne használjon vezetékes érzékelőlapot a mellékelt kábelvédője nélkül.
- A kábelvédőt minden használat előtt **ELLENŐRÍZZE**:
  - Gondoskodjon arról, hogy a kábelek ne legyenek lazák, és hogy a gyermek lehetőleg ne férjen hozzájuk (bővebben lásd az alábbi utasításokat).
  - Ne használja az érzékelőlapot, ha a kábelvédő sérült vagy törött.
- **SOHA** ne használjon hosszabbítókábeleket az adapterekhez. **KIZÁRÓLAG** a mellékelt adaptereket használja.
- A termék **NEM** játék. **SOHA** ne engedjen gyermeket játszani vele.

1. Az érzékelőlap nem használható 24 hónapos kor fölött.
2. A termék nem helyettesíti a felelősségteljes felnőtt felügyeletét.
  - A termék célja, hogy segítse gyermeke felügyeletét. Ettől függetlenül azonban önnek a készülék használata mellett is megfelelő felügyelet kell fordítania gyermekére annak biztonsága érdekében.
  - A készüléket **KIZÁRÓLAG** a jelen használati útmutatóban megadott javaslatok szerint használja.
3. Az érzékelőlapot ne használja annak ellenőrzésére, hogy a gyermek a kiságyban van-e.
4. A készülék nem orvosi eszköz, és nem alkalmas a bółsóhalál (SIDS) megelőzésére.
  - A koraszülött vagy veszélyeztetett gyermekek felügyeletét mindig egy egészségügyi szakértő által előírt módon végezze.
5. **MINDIG** azonnal ellenőrizze a gyermeket, ha riasztást hall.
6. Tartsa távol a kábeleket **MINDEN** gyermektől.
7. **KIZÁRÓLAG** a mellékelt töltőket és adaptereket használja. Ne használjon más típusú töltőket és tápadaptereket, mivel ez károsíthatja a készüléket és az elemét (ha van a készülékben).
8. Az összeszerelést felöltött végezze el. Összeszerelésnél tartsa távol az apró alkatrészeket a gyermekektől.
9. Az utasításokat követve tesztelje a készüléket és a funkcióit, hogy a tényleges használata előtt már ismerje a működését. **MINDIG** ügyeljen arra, hogy az adó- és vevőegység megfelelően működjön, és hogy egymás hatósugarán belül helyezkedjenek el. Ellenőrizze rendszeresen a babaegység működését, illetve akkor is, ha megváltoztatja a helyét.
10. **NE** érintse meg a csatlakozó érintkezőt, különösen ne éles vagy fém tárgyakkal.
11. **NE** használja a készüléket víz közelében. Ügyeljen arra is, hogy az egységekre **NE** essenek tárgyak, és ne forraszenjen folyadék a nyílásokon keresztül az érzékelőlapba és az egységbe.



12. Tartsa **TÁVOL** a készüléket hőforrásoktól (pl. sütő, radiátor stb.). A hő károsíthatja a készülék házat vagy az elektromos alkatrészeket.

13. **MINDIG** sík és száraz felületen, függőlegesen helyezze el a babaegységet és a szülői egységet, és ügyeljen a megfelelő **SZELLŐZÉSÜKRE**. **NE** helyezze a készüléket kanapéra, párnára, ágyra vagy bármilyen olyan felületre, amely tömptíti az általa kiadott hangot, vagy akadályozza a levegő szabad áramlását.
14. A készülék 10 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten használható.

### FIGYELMEZTETÉSEK és biztonsági intézkedések az elemekkel kapcsolatban

15. Az elemeket **MINDIG** tartsa távol a gyermekektől.
16. A szülői egységben csak tölthető, AAA méretű NiMH-elemeket használjon. **NE** használjon alkáli-elemeket, mivel ezek súlyos károsodást okozhatnak az egységben. Csak az Angelcare által javasolt csereelemeket használja (lásd a műszaki adatokat).
  - A nem megfelelő elemek használata, illetve a nem megfelelő behelyezésük esetén robbanásveszély áll fenn. Az elemek megfelelő behelyezésével kapcsolatban lásd a használati útmutatót.
  - **NE** okozzon rövidzárlatot a tápcsatlakozókon.
17. **NE** használjon együtt régi és új elemeket, és csak az Angelcare által javasolt csereelemeket használja (lásd a műszaki adatokat).
18. A használt elemeket a használati útmutatónak megfelelően ártalmatlanítsa.
19. Első használat előtt töltsön 10 órán át az elemeket. Erre az időszakra kapcsolja ki a készüléket.
20. **Kizárólag** kikapcsolt állapotban húzza ki az adaptert a babaegységéből. Ha nincs kikapcsolva, az egység elemes módra vált, amennyiben van benne elem.
21. **NE** használjon újratölthető elemeket a babaegységben. Használjon a műszaki adatokban megjelölt alkáli-elemeket.
22. Ügyeljen rá, hogy az elemek kezelésakor ne okozzon bennük rövidzárlatot vezető anyagokkal (pl. gyűrű, karkötő, kulcs).
23. Kerülje az elemek túltöltését, rövidzárlat okozását, fordított töltését, rongálását vagy elégetését, mivel ezek következtében mérgező anyagok vagy hidrogén- és/vagy oxigéngáz szabadulhat fel, vagy megnövekedhet a felületi hőmérséklet.
24. **NE** próbálja meg tölteni a termékhez mellékelt vagy azzal együtt használható elemeket, ha azok nem újratölthető elemek. Az elemek ez esetben felrobbanhatnak, vagy maró hatású elektrolit folyhat ki belőlük.
25. Kerülje az elemek fordított polaritású behelyezését. Az elemek fordított behelyezése esetén töltés jöhet létre, ami szivárgást vagy robbanást okozhat.
26. Ha a terméket 30 napnál hosszabb ideig tervezte tárolni, vegye ki belőle az elemeket, mivel szívároghatnak, ami károsíthatja a berendezést.





27. A lemerült elemeket a lehető leghamarabb távolítsa el, mivel ezek nagyobb valószínűséggel folynak ki a termék belsejében. A szivárgó vagy eresztő elemeket selejtezze ki úgy, hogy ne károsítsa a környezetet.

28. NE tárolja a terméket vagy a termékhez mellékelt vagy azzal együtt használható elemeket magas hőmérsékletű vagy páratartalmú, illetve közvetlen napfénynek kitett helyen.

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

29. A babaőrző nyilvános frekvenciákat használ a jelek továbbítására. A szülői egységet érhetik a környéken található más babaőrzőktől származó jelek vagy interferencia. A babaőrző jelét akár szomszédos lakásokban is foghatják. Magánélete védelme érdekében mindig kapcsolja ki a két egységet, ha nem használja azokat.

30. Kábelek védelme – Ügyeljen arra, hogy az érzékelőlap és az adapter kábelére ne lépjenek rá, és ne szoruljon be bútorok vagy más tárgyak alá, fölé vagy közé. A tápkábeleket úgy kell vezetni, hogy minél kisebb legyen a lehetősége annak, hogy rájuk lépnek, vagy hogy bútorok vagy más tárgyak alá/föle/közé szorulnak. Különös figyelmet kell fordítani a vezetékekre és dugaljakra, elosztókra és arra a pontra, ahol a vezetékek kilépnek a termékből. A berendezést helyezze egy könnyen elérhető konnektor közelébe. Az adaptert mindig a berendezéshez legközelebb eső, könnyen elérhető fali aljzathoz csatlakoztassa. A táphálózatról való leválasztáshoz húzza ki az adaptert.

31. Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat, kiegészítőket és cserealkatrészeket használja. A termék felszerelését mindig a gyártó utasításainak megfelelően kell végezni.

- NE helyezze a terméket instabil kézikocsira, állványra, háromlábú állványra, konzolra vagy asztalra. A termék leeshet, súlyos sérülést okozva a gyermeknek vagy felnőtteknek, és komolyan károsíthatja magát az eszközt is.
- KIZÁRÓLAG a gyártó által javasolt vagy a termékkel együtt árusított kézikocsit, állványt, háromlábú állványt, konzolt vagy asztalt használjon.
- Kizárólag az Angelcare által meghatározott vagy az eredeti alkatrészszel minden szempontból megegyező cserealkatrészt használjon. Nem hivatalos cserealkatrész használata tüzet vagy áramütést okozhat.

32. Húzza ki a konnektorból a készüléket villámlással járó viharban, vagy ha hosszú ideig nem használja azt.

33. Szervizelés – NE kísérelje meg saját kezűleg megjavítani a terméket, mivel a fedél felnyitása vagy eltávolítása (kivéve az elemtartó ajtaját) veszélyes feszültségnek vagy egyéb veszélynek teheti ki önt.

34. Áramellátás – lásd az útmutató műszaki adatait.

35. Tűlterhelés – NE terhelje túl a fali aljzatokat, hosszabbítókábeleket vagy egybeépített elosztókat. Ez tűz vagy áramütés veszélyével jár.

36. Babaegység antennája – Az adóegységhez használt antennát úgy kell elhelyezni, hogy legalább 20 cm-es biztonsági távolság legyen közte és a környezetében lévő emberek között. Az antennát nem szabad bővíteni, és tilos bármilyen más antennával vagy adóegységgel együtt használni.

37. Tisztítás – Tisztítás előtt válassza le az egységeket. A készülék egyik alkatrészét SE merítse vízbe. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa.

38. Érzékelőlap –

- **Rezgés és interferencia** – Az érzékelőlap használata során NE használjon körforgót vagy bármely más olyan kiegészítőt, amely rezgést okozhat. Rezgést egy ventilátor, mosógép, hangos zene stb. is okozhat. Ezek a rezgésforrások akadályozhatják az Angelcare® készülék működését, így az nem riaszt, ha a gyermekken kívül tartósan más mozgást is érzékel. A készülék használata során minden rezgésforrást szüntessen meg.
- Az érzékelőlap csak nem mozgó kiságyban használható teljesen lapos, szilárd felületen. Ha a kiságy alja rugós vagy rácsos, helyezzen rá egy legalább 33 x 33 cm méretű, 6 mm vastag kemény fa lapot, és ezen használja az érzékelőlapot.
- Az érzékelőlap műanyagból készült, és nem engedi át a levegőt. Ezért előfordulhat, hogy az érzékelőlap környéke penészedni kezd a matrac alatt. A penészedés elkerülése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen forgassa meg a matracot.


39. Téves riasztások számos ok miatt bekövetkezhetnek:

- A leggyakoribb ok, hogy a babaegységet nem kapcsolják ki, miután a gyermeket kivették a kiságyból.
- További ok lehet, hogy az érzékelőlapot nem megfelelően helyezte az ágymatrac alá. Gondoskodjon arról, hogy az érzékelőlap sík, stabil felületen legyen, és a nyomtatott oldala felfelé nézzen.
- Előfordulhat, hogy módosítania kell az érzékenységi szintet. Lásd a használati útmutatót. Mindig azonnal ellenőrizze a gyermeket, ha riasztást hall.




## ÜZEMBEHELYEZÉSI TUDNIVALÓK


### TARTOZÉKOK:

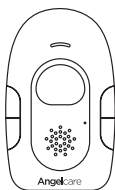

SZÜLŐI EGYSÉG

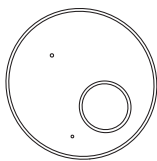

Babaegység

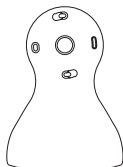


Asztali állvány  
(a babaegységhez)




6 előre befűzött kábelvédő osztott  
USB-kábellel



Vezetékes mozgásérzékelő lap  
\* Mindig úgy helyezze el, hogy az  
Angelcare® embléma felfele nézzen.\*

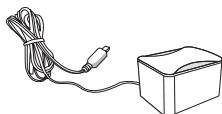

Hálózati adapter  
(a szülői egységhez)

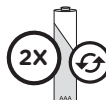

2 újratölthető AAA-elem  
(a szülői egységhez)



Hálózati adapter  
(a babaegységhez)

### AMIT ELŐ KELL KÉSZÍTENIE:

Egy kemény fa lap (nincs mellékelve)  
Vastagság: **6 mm**  
Minimális méretek:  
**33 x 33 cm**  
Maximális méretek:  
a matrac méretével egyenlő



kemény fa lap

#### FONTOS

A kemény fa lapnak nagyobbtnak  
kell lennie az érzékelőlapnál.

### AMIRE SZÜKSÉGE LESZ (NINC S A CSOMAGBAN):




2 db AAA alkálielem  
(a babaegységhez)




Mini csillagfejű  
csavarhúzó

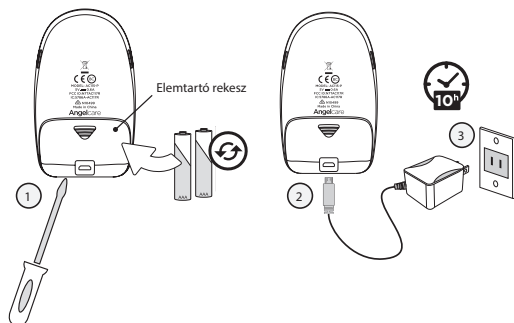

**1. LÉPÉS - A SZÜLŐI EGYSÉG TÖLTÉSE (10 ÓRA)**

- 1) Távolítsa el a hátlapon lévő elemtartó fedelét. Helyezze be a mellékelt újratölthető elemeket a rekeszbe, és helyezze vissza a fedelet.
- 2) Csatlakoztassa az USB-kábelt a szülői egységhez.
- 3) Csatlakoztassa az adaptert egy konnektorba.
- 4) Az első használata előtt **töltse 10 órán át folyamatosan az egységet.**

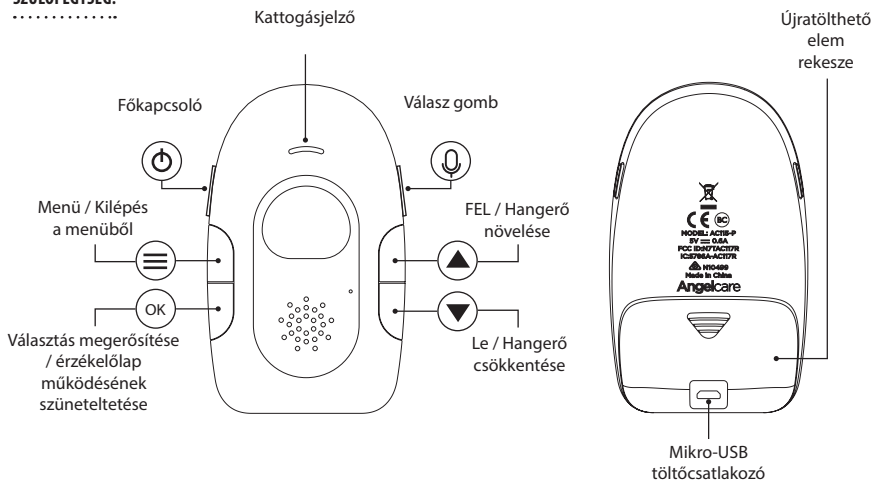**SZÜLŐI EGYSÉG:****⚠ FIGYELMEZTETÉSEK** Fulladásveszély –  
Előfordult, hogy a kábelekbe belegabalyodott gyermekek  
MEGFULLADTAK.

- **TARTSA TÁVOL** a babaegységet és az adapter kábeleit a gyermekektől (legalább 1 méteres távolságban).
- **SOHA** ne használjon vezetékes érzékelőlapot a mellékelt kábelvédője nélkül.
- A kábelvédőt minden használat előtt **ELLENŐRIZZE**:
  - Gondoskodjon arról, hogy a kábelek ne legyenek lazák, és hogy a gyermek lehetőleg ne férjen hozzájuk (bővebben lásd az alábbi utasításokat).
  - Ne használja az érzékelőlapot, ha a kábelvédő sérült vagy törött.
- **SOHA** ne használjon hosszabbítókábeleket az adapterekhez. **KIZÁRÓLAG** a mellékelt adaptereket használja.
- **A termék NEM játék. SOHA ne engedjen gyermekek játszani vele.**






## 2. LÉPÉS - AZ ÉRZÉKELŐLAP ELHELYEZÉSE


### 2.1 – VÁLASSZON EGY HELYET A BABAEGYSÉGNEK

#### FONTOS


A kiságyat fal mellett, a légáramlatoktól távol helyezze el. Helyezze a babaegységet sík, stabil felületre úgy, hogy a kiságy felé nézzen, és attól legalább **1 méterre** legyen. Az adaptert mindig a berendezéshez legközelebb eső, könnyen elérhető fali aljzathoz csatlakoztassa.

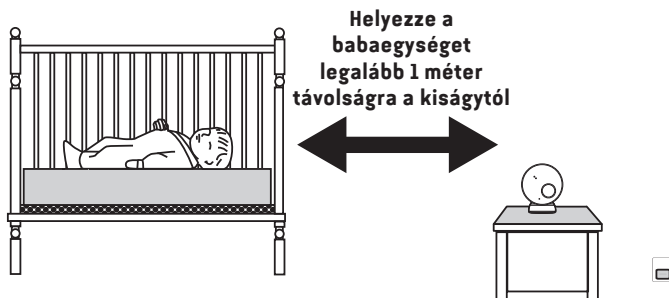


- 1) Csatlakoztassa az 1. csatlakozódugót az érzékelőlaphoz, és a zárolásához forgassa el jobbra. Óvatosan húzza meg a kábelt, így ellenőrizve, hogy valóban zárolta a csatlakozódugót.

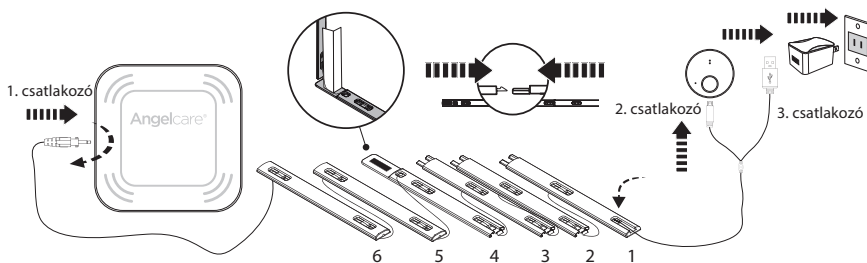

### 2.2 – VÁLASSZA KI A KISÁGY AZON LÁBÁT, AMELYHEZ A KÁBELVÉDŐKET RÖGZÍTI

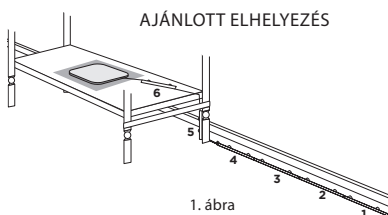

VAGY

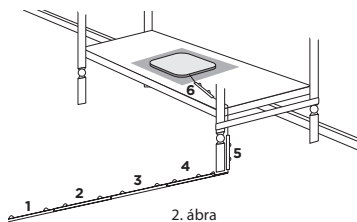

Használja a kiságy babaegységhez közelebb eső, fal mellett lévő lábát (1. ábra). Amennyiben a babaegység a szoba egy másik pontján található, a babaegységhez legközelebb eső lábhoz helyezze a kábelvédővel borított vezetékét (2. ábra). A kábelvédővel borított kábelt lehetőleg mindig a fal mentén vezesse el.













### 2.3 – HELYEZZE EL AZ ÉRZÉKELŐLAPOT AZ ÁGYRÁCSRA

#### FONTOS

- Ha a kiságyban nincs szilárd, teljesen sima, stabil felület az érzékelőlap számára – például rugós vagy rácsos aljzat –, egy kemény fa lapot kell ez alá helyezni a megfelelő működése érdekében. A kemény fa lap legyen legalább 33 x 33 cm és 6 mm vastag. A kemény fa lapnak nagyobbnak kell lennie az érzékelőlapnál.
- Az érzékelőlap memóriahabos matracok, üreges belsejű matracok és vízágyak kivételével bármilyen méretű és típusú matraccal használható. A kemény fa lap állandó nyomást biztosít az érzékelőlapnak, így az akkor is képes érzékelni a baba mozgását, ha az a kiságy szélén tartózkodik.

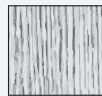

kemény fa lap

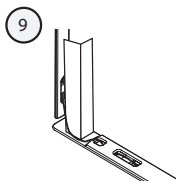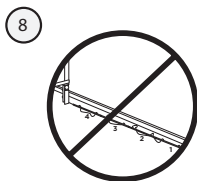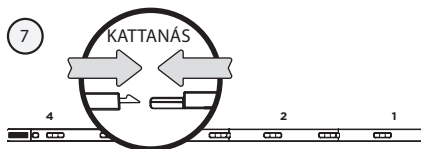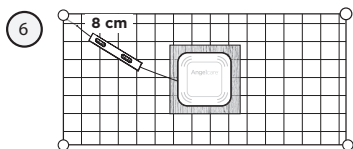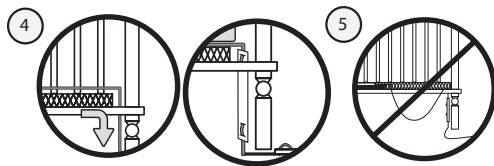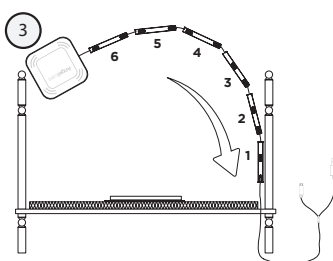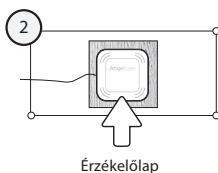

- 1) Vegye ki a matracot a kiságyból.
- 2) Helyezze az érzékelőlapot a kemény fa lapra úgy, hogy az Angelcare® embléma felfelé nézzen.
- 3) Vezesse át a csatlakozót, a figyelmeztető címkét és az első 5 kábelvédőt a matractartó és a kiságy belső szegélye között, a kiságy lábának belső oldala mentén.
- 4) Helyezze az első 4 kábelvédőt a padlóra, az 5. kábelvédőt pedig állítsa függőleges helyzetbe a kiságy lábának hátsó oldalához, a matrac és a kiságy belső szegélye közé.
- 5) Feszítse meg a kábelt, hogy ne lógjon ki a kábelvédők között.
- 6) Helyezze a 6. kábelvédőt nagyjából 8 cm távolságra a matractartó szélétől.
- 7) Pattintsa össze a padlón lévő kábelvédőket.
- 8) Feszítse meg a kábelt, hogy ne lógjon ki a kábelvédők között.
- 9) Húzza le a kétoldali ragasztószalag felső rétegét a 4. kábelvédőn, majd rögzítse a kábelvédőt a kiságy lába alá.






## **⚠ FONTOS! A KÁBELVÉDŐT VEZESSE EL BIZTONSÁGOSAN A KISÁGY LÁBAI ALATT.**

- **SOHA** ne használjon vezetékes érzékelőlapot a mellékelt kábelvédője nélkül.
- Minden használat előtt **ellenőrizze**, hogy az érzékelőlap kábele biztonságosan csatlakozik-e az érzékelőlaphoz.
- Helyezze az érzékelőlapot a kiságy közepére úgy, hogy a nyomtatott címkét vagy emblémát tartalmazó oldala felfele nézzen. Minden használat előtt **bizonyosodjon meg** arról, hogy az érzékelőlap közepén van.
- Ha a növekvő gyermek miatt lejjebb engedi a matractartót, állítsa be a függőleges kábelvédőt (a kiságy lábán) úgy, hogy keresztül-fűzi a kábelt a védőn, hogy az továbbra is az ágy lábának közepén maradjon. Feszítse meg a kábelt.
- **AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:** Ellenőrizze, hogy az egység készen áll-e a használatra. A teljes használati útmutatóban talál információt arról, hogyan ellenőrizheti a telepítés helyességét.

### 3. LÉPÉS - A BABAEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

A babaegységnek olyan helyet válasszon, amely legalább **1 méter** távolságra van a kiságtól.

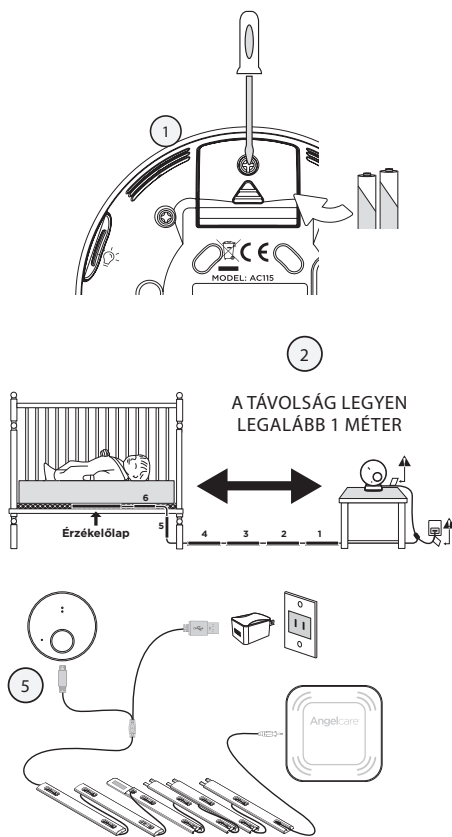

- 1) Távolítsa el az elemtartó fedelét, és helyezzen be 2 db AAA alkáli elemet (nem tartozék).

#### **Megjegyzés:**

Az elemek tartalék áramforrásként áramszünet esetén is biztosítják az áramellátást. Kizárólag kikapcsolt állapotban húzza ki az adaptert a babaegységből. Ha nincs kikapcsolva, az egység elemes módra vált, amennyiben van benne elem.

- 2) A babaegységet sík, stabil felületre helyezze, a kiságy felé fordítva és legalább 1 méter távolságra, majd csatlakoztassa az érzékelőlap kábelét a babaegységhez.
- 3) Ellenőrizze, hogy az érzékelőlap nem mozdult-e el.
- 4) Helyezze vissza a matract a kiságyba.

- 5) Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a babaegységhez, a másikat a tápadapterhez, majd az adaptert egy konnektorhoz.





**Megjegyzés:** Minden alkalommal, amikor bekapcsolja a babaegységet, az automatikusan kalibrálja a belső hőmérőjét a pontosságának biztosítása érdekében. Ez kb. 30 másodpercet vesz igénybe. A színváltási hőmérsékletjelzés alapértelmezetten ki van kapcsolva. Ezt a szülői egység beállításai között kapcsolhatja vissza.

#### BABAEGYSÉG:

Bekapcsolásjelző lámpa  
Alacsony töltöttség jelzése

Mikrofon

Érzékelőlap jelzőlámpája /  
Hőmérsékletjelzés

Hőmérsékletjelzés  
be- vagy  
kikapcsolása /  
Szülői egység  
kereső

Főkapcsoló

Hangszóró

Elemtartó  
rekesz

Érzékelőlap  
működésének  
szüneteltetése

Érzékelőlap  
érzékenységi  
kapcsolója

Mikro-USB  
csatlakozó

## 4. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

### KÉSZEN ÁLL A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA

Az Angelcare® készülék gyári és a felhasználó által megadott beállításokkal egyaránt használható.

#### ALAPÉRTTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK



Érzékelési mód:



Mozgás:

Hang:

bekapcsolva

bekapcsolva



Hangátvitel (VOX):

kikapcsolva



Kattogás funkció:

kikapcsolva



VOX érzékenysége:

2. szint (a 4-ből)



Hőmérséklet mértékegysége:

Celsius



Hőmérsékleti riasztás:

Hőmérsékleti riasztás beállítása:


kikapcsolva

Magas: 30 °C

Alacsony: 19 °C



## A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

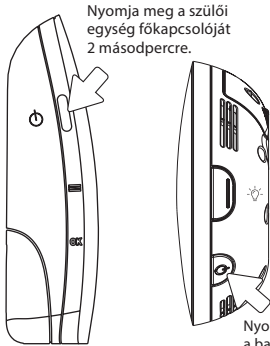


Nyomja meg a szülői egység főkapcsolóját 2 másodpercre.

Nyomja meg a babaegység főkapcsolóját 2 másodpercre.

### MEGJEGYZÉS:

A szülői egység képernyőjén villogni kezd a „Hatótávolságon kívül” ikon, majd a helyiség hőmérsékletét és funkciókat jelző ikonok is. A kapcsolódási folyamat 30 másodpercen belül befejeződik. Ha ez nem ér véget 30 másodpercen belül, ki kell kapcsolni az egységeket, majd meg kell ismételni a folyamatot.

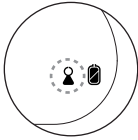

Amikor a szülői egység be van kapcsolva, míg a babaegység nincs, vagy a két egység között megszakad a kapcsolat:

- Villog a **Hatótávolságon kívül** ikon a szülői egységen.
- A szülői egység 15 másodpercenként 3-at sípol.

### FONTOS IKONOK

**Hőmérséklet jelzése**

**Hőmérsékleti riasztások ikonja:**

- Túl meleg
- Túl hideg

**Érzékelési mód ikonjai:** azt jelzi, hogy melyik funkciók vannak bekapcsolva

- Csak mozgás
- Csak hang
- Hang, mozgás és kattogás
- Mozgás és hang
- Mozgás és kattogás

**VOX ikon:** jelzi, ha a babaegység VOX módban van

- Hangra aktiválódó átvitel (VOX bekapcsolva)
- Folyamatos hangátvitel (VOX kikapcsolva)

**Kapcsolat ikonja:** a szülői egység és a babaegység közötti kapcsolat minőségét jelzi

- Jó kapcsolat
- Közepes erősségű kapcsolat
- Gyenge kapcsolat
- Hatótávolságon kívül

**Töltöttségi szint ikonja:** a szülői egység elemének töltöttségét jelzi

- Feltöltve
- 1/2
- Lemerült
- Töltés alatt

**Hangtovábbítás érzékenységeinek jelzése**





## 5. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK TESZTELÉSE ÉS MEGISMERÉSE

Az Angelcare® készülék gyári és a felhasználó által megadott beállításokkal egyaránt használható.



A főmenüben végzett módosítások csak akkor lépnek érvénybe, ha a **KILÉPÉS** gomb megnyomásával megerősíti őket.

### FONTOS

Menü módban a rendszer ideiglenesen kikapcsolja a szülő- és babaegység közötti hangátvitelt. Ha a rendszer nem érzékel mozgást, a kattogásjelző gyorsan villog.

### 5.1 – A MENÜ MEGNYITÁSA ÉS A BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA



A MENÜ a szülői egység MENÜ gombjának lenyomásával és NYOMVA TARTÁSÁVAL nyitható meg. A menüpontok egymás után választhatók ki. Amikor röviden megnyomja az **OK** gombot, a következő lehetőségre ugrik. Miután kiválasztotta a kívánt lehetőséget, nyomja meg a **KILÉPÉS A MENÜBŐL** gombot, különben a módosítások elvesznek. A menüpontok sorrendje a következő:

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| LENYOMÁS ÉS NYOMVA TARTÁS: mozgás és kattogás | 5.2-ES LÉPÉS |
| EGYSZERI LENOYOMÁS: hang                      | 5.5-ÖS LÉPÉS |
| KÉTSZERI LENOYOMÁS: hangátvitel (VOX)         | 5.6-OS LÉPÉS |
| NÉGYSZERI LENOYOMÁS: hőmérséklet              | 5.7-ES LÉPÉS |

### 5.2 – AZ ÉRZÉKELŐLAP KI- VAGY BEKAPCSOLÁSA

#### A LÉGZÉSFIGYELŐ BEÁLLÍTÁSA

Lehetővé teszi a baba mozgásának érzékelését.

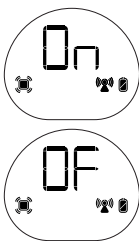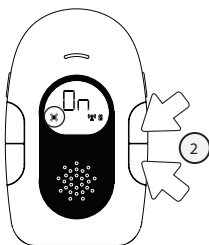



- 1) Nyomja le és **TARTSA LENYOMVA** a **MENÜ** gombot, amíg a **MOZGÁSÉRZÉKELÉS** ikon villogni nem kezd.
- 2) A **FEL** vagy **LE** nyilakkal kapcsolja be vagy ki a mozgásérzékelést.
- 3) Nyomja meg az **OK** gombot a következő lehetőségre való ugráshoz vagy a **KILÉPÉS** gombot a választott lehetőség megerősítéséhez.

#### A KATTOGÁS FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

Ez a funkció kattogó hangot ad ki, amikor a baba megmozdul

### FONTOS



A kattogó funkció bekapcsolásakor a mozgásérzékelésnek bekapcsolt állapotban kell lennie.

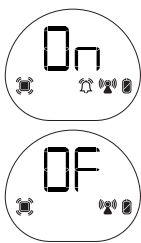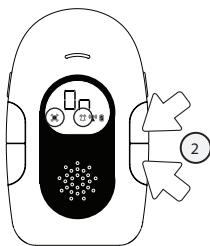

- 1) Nyomja le és **TARTSA LENYOMVA** a **MENÜ** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot, amíg a **Kattogás**  ikon villogni nem kezd.
- 2) A **FEL** vagy **LE** nyíl gombbal kapcsolja be vagy ki a Kattogás funkciót.
- 3) Nyomja meg az **OK** gombot a következő lehetőségre való ugráshoz vagy a **KILÉPÉS** gombot a választott lehetőség megerősítéséhez.

#### AZ ÉRZÉKELŐLAP TESZTELÉSÉHEZ

Be kell kapcsolni a Mozgásérzékelés funkciót:

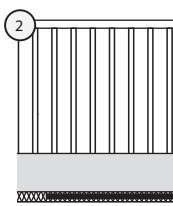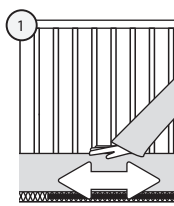

- 1) Finoman mozgassa a kezét a matracra.  
**MEGJEGYZÉS:**  
A szülői egység kattog (amikor be van kapcsolva), és 5 másodpercenként villog.
- 2) Vegye el a kezét a matracról és távolodjon el a kiságytól, 15 másodperc elteltével riasztás előtti kattogó hangot hall, majd 5 másodperc elteltével bekapcsol a mozgáskimaradás miatti riasztás.
- 3) Ismételje meg a mozgulatsort a matrac mind a négy sarkában.

#### MOZGÁSKIMARADÁS MIATTI RIASZTÁS


- Ha a babaegység 15 másodperc elteltével **NEM** érzékel mozgást, egyetlen riasztás előtti figyelmeztető hangot ad ki.
- Ha további 5 másodperc elteltével **SEM** észlel mozgást a matrac felületén, a szülői egység és a babaegység hangszórói folyamatos sípolást adnak ki: ez a mozgáskimaradás miatti riasztás.
- A babaegység pirosan villog.
- Az érzékelőlapp ikonja és a hangerő ikonja villog a szülői egységen.



#### HA A RIASZTÁS NEM SZÓLAL MEG

- Amikor az érzékelőlapp üzemel, ne érintkezzen a kiságygal.
- A kiságyat támassza falnak.
- Állítsa be az érzékelőlapp érzékenységi szintjét.
- Kapcsolja ki a körforgót, a ventilátort, a hangos zenét és minden mást, amely rezgést okozhat.

#### A RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSA

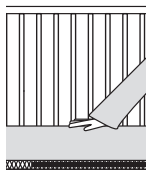


Tegye a kezét a matracra.

**VAGY**



Nyomja meg a babaegység **SZÜNETELTETÉS** gombját.

**VAGY**

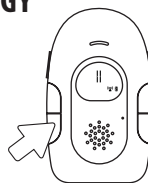


Nyomjon meg bármilyen gombot a szülői egységen.





### 5.3 – AZ ÉRZÉKELŐLAP SZÜNETELTETÉSE ÉS ÚJRAINDÍTÁSA

Lehetővé teszi az érzékelőlap működésének szüneteltetését, amikor kiveszi a babát a kiságyból például etetéshez vagy dédelgetéshez.

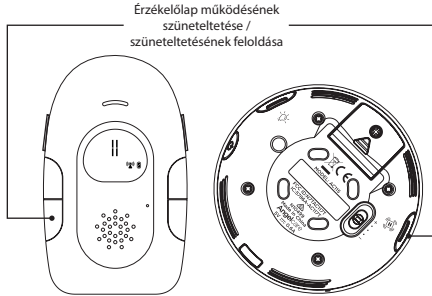

- 1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a szülői egységen az **Érzékelőlap működésének szüneteltetése** gombot legalább 2 másodpercig.

#### VAGY

A babaegységen nyomja meg a **Szüneteltetés** gombot.

- 1) Az érzékelőlap újbóli bekapcsolásához a szülői egységen nyomja meg az **Érzékelőlap működésének szüneteltetése** gombot.

#### VAGY

A babaegységen nyomja meg a **Szüneteltetés** gombot.

#### FONTOS

- Ha nem szünetelteti az érzékelőlap működését, és az a baba matracán nem észlel mozgást 20 másodpercig, megszólal a riasztás.
- Mielőtt visszatenné a babát a babaágyba, indítsa el újra az érzékelőlapot.


### 5.4 – AZ ÉRZÉKELŐLAP ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A baba, a kiságy és az üzembe helyezési körülményeknek megfelelően beállíthatja az érzékelőlap érzékenységét. Állítson be magas érzékenységet újszülött, illetve alacsonyabbat az idősebb és súlyban gyarapodó baba számára. Vastagabb matrac esetében szintén magasabb érzékenységre van szükség. Húzza a babaegység érzékenységi szintjét állító gombot az alacsony, közepes és magas szintek közötti váltáshoz.

Az optimális eredmények érdekében használja először a közepes érzékenységi szintet, és csak szükség esetén emelje vagy csökkentse azt.

#### MEGJEGYZÉS:

Ha téves riasztásokat kap, állítsa magasabbra az érzékenységi szintet.

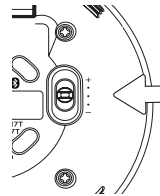


#### FONTOS

- Az érzékelőlapot nem használhatják felnőttek és 24 hónaposnál idősebb gyermekek.
- Miután befejezte az érzékelőlap használatát, kapcsolja ki a mozgásérzékelő funkciót, vegye ki az érzékelőlapot a kiságyból, és tegye el.



## 5.5 – HANG

### HANG AKTIVÁLÁSÁHOZ:

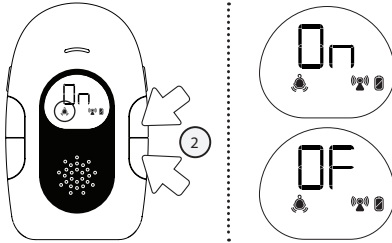

#### HANG TESZTELÉSÉHEZ:

Kérjen meg valakit, hogy beszéljen bele a babaegységbe, vagy helyezze az egységet bekapcsolt rádió mellé a hangátvitel ellenőrzéséhez.

#### FONTOS

A visszacsatolás (sípolás) elkerülése érdekében tartsa egymástól legalább 3 méteres távolságban az egységeket.

- 1) Nyomja le és tartsa lenyomva a **MENÜ** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot, amíg a **Hangtovábbítás**  ikon villogni nem kezd.
- 2) A **FEL** vagy **LE** nyíl gombbal kapcsolja be vagy ki a funkciót.
- 3) Nyomja meg az **OK** gombot a következő lehetőségre való ugráshoz vagy a **KILÉPÉS** gombot a választott lehetőség megerősítéséhez.


#### HA NINCST HANG:

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva mindkét egység.
- Ellenőrizze, hogy az egységek működő konnektorba vannak-e bedugva.
- Ellenőrizze a szülői egységbe helyezett elemeket (cserélje vagy töltsön fel őket, ha szükséges).
- Vigye közelebb a szülői egységet a babaegységhez.

#### A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

#### NÉMA ÜZEMMÓD AKTIVÁLÁSA


#### PÁRBESZÉD MÓD BEKAPCSOLÁSA

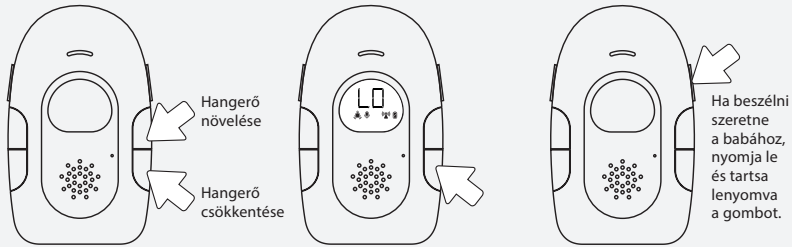

Nyomja meg a **HANGERŐ CSÖKKENTÉSE** gombot, amíg az **L0** meg nem jelenik. A néma üzemmódot a villogó hangszóró ikon jelzi.

## 5.6 – HANG ÁLTALI AKTIVÁLÁS (VOX BEKAPCSOLVA) VAGY FOLYAMATOS HANG (VOX KIKAPCSOLVA) MÓD

Segítségével beállíthatja, hogy hogyan adjon hangot a babaőrő: **VOX bekapcsolva** (hang általi aktiválás, amely a kiválasztott érzékenységi szint alapján kezdi el továbbítani a hangot) vagy **VOX kikapcsolva** (folyamatos hangfigyelés, amely állandóan továbbítja a hangot).


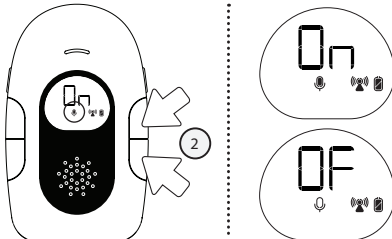


- 1) Nyomja le és tartsa lenyomva a **MENÜ** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot, amíg a **VOX**  ikon villogni nem kezd.
- 2) A **FEL** vagy **LE** nyíl gombbal kapcsolja be vagy ki a **VOX** funkciót.
- 3) Nyomja meg az **OK** gombot a következő lehetőségre való ugráshoz vagy a **KILÉPÉS** gombot a választott lehetőség megerősítéséhez.





**A HANGÉRZÉKENYSÉG (VOX) BEÁLLÍTÁSÁHOZ:**

A mikrofon érzékenysége 4 fokozatban állítható (a legérzékenyebb a 4-es fokozat). Tehát a rendszer csak akkor továbbít hangot, ha az eléri az ön által meghatározott szintet.

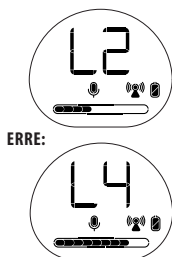
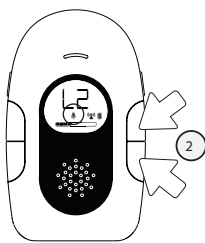


ERRE:

- 1) Amikor a Hangátvitel be van kapcsolva (VOX bekapcsolva), nyomja le és tartsa lenyomva a **MENÜ** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot, amíg a **VOX bekapcsolva** ikon villogni nem kezd.
- 2) A **FEL** és **LE** nyílombokkal válassza ki a kívánt mikrofonérzékenységi szintet.
- 3) Nyomja meg az **OK** gombot a következő lehetőségre való ugráshoz vagy a **KILÉPÉS** gombot a választott lehetőség megerősítéséhez.

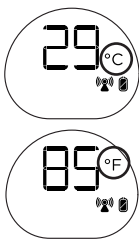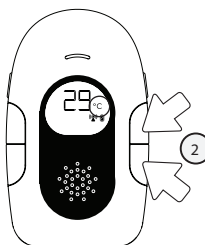**5.7 – HŐMÉRSÉKLET****A HŐMÉRSÉKLET MEGADÁSÁHOZ CELSIUS VAGY FAHRENHEIT FOKBAN:**



- 1) Nyomja le és tartsa lenyomva a **MENÜ** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot, amíg a °C / °F ikon villogni nem kezd.
- 2) A **FEL** és **LE** nyílombokkal válassza ki a hőmérsékletet Celsius- vagy Fahrenheit-fokban.
- 3) Nyomja meg az **OK** gombot a következő lehetőségre való ugráshoz vagy a **KILÉPÉS** gombot a választott lehetőség megerősítéséhez.

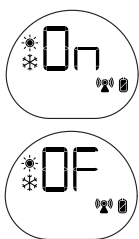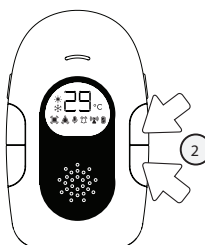**A HŐMÉRSÉKLETI RIASZTÁS BEKAPCSOLÁSA:**

- 1) Nyomja le és tartsa lenyomva a **MENÜ** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot, amíg a **Hőmérsékletjelzés** ikon villogni nem kezd.
- 2) A **FEL** vagy **LE** nyílombbal kapcsolja be vagy ki a hőmérsékletriasztást.
- 3) Nyomja meg az **OK** gombot a választása megerősítéséhez, és állítsa be a hőmérséklet tartományát az alábbiaknak megfelelően.

**A HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY BEÁLLÍTÁSÁHOZ:****MEGJEGYZÉS:**

A hőmérséklet-tartomány beállításához be kell kapcsolni a hőmérsékleti riasztást.

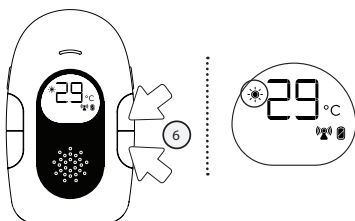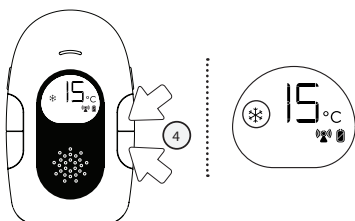

Az alacsony hőmérséklettartomány 5–19 °C között, míg a magas hőmérséklettartomány 22–37 °C között van.

4) Villogni kezd az **Alacsony hőmérséklet** ikon. A **FEL** vagy **LE** nyíl gombbal állítsa be az **ALACSONY** hőmérséklet riasztását (5–19 °C között).

5) Ezután a választása megerősítéséhez koppintson az **OK** gombra.

6) Villogni kezd a **Magas hőmérséklet** ikon. A **FEL** vagy **LE** nyíl gombbal állítsa be a **MAGAS** hőmérséklet riasztását (22–37 °C között).

7) Nyomja meg az **OK** gombot a következő lehetőségre való ugráshoz vagy a **KILÉPÉS** gombot a választott lehetőség megerősítéséhez.


#### HŐMÉRSÉKLETI RIASZTÁS

- A riasztás akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet eléri a beállított maximális vagy minimális hőmérsékletet.
- A szülői egység 5 másodpercenként egymás után 3-szor sípol, ha a hőmérséklet túllépi a beállított tartományok valamelyikét. A megfelelő ikon a szülői egységen is villog, így értesítve őnt.

## 6. LÉPÉS - TOVÁBBI FUNKCIÓK BEKAPCSOLÁSA ÉS KIKAPCSOLÁSA

### 6.1 – A HŐMÉRSÉKLETI RIASZTÁS BE- VAGY KIKAPCSOLÁSA A BABAEGYSÉGEN

Ezzel a beállítással a babaegység hőmérsékletjelzése szint vált, ha az általa mért hőmérséklet a megadott értékek alá esik vagy fölé emelkedik. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a hőmérsékletjelzés piros lesz az alapértelmezett fehér helyett, ha a hőmérséklet a felső riasztási érték fölé emelkedik, illetve kék, ha az alsó riasztási érték alá esik.

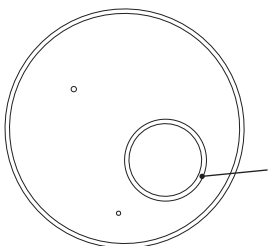

- Piros** – A szoba hőmérséklete túl magas.
- Kék** – A szoba hőmérséklete túl alacsony.
- Fehér** – A szoba hőmérséklete a meghatározott paramétereken belül van.





## 6.2 – „HATÓTÁVOLSÁGON KÍVÜL” RIASZTÁS

A készülék rendelkezik Hatótávolságon kívül riasztással, mely tájékoztatja önt, ha a két egység nem kommunikál egymással. A Hatótávolságon kívüli állapotot okozhatja távolság vagy fizikai interferenciák.

### HATÓTÁVOLSÁG:

Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen): akár 250 méter.

#### HATÓTÁVOLSÁGON KÍVÜL RIASZTÁS


- A riasztás akkor kapcsol be, ha a két egység nem kommunikál.
- A szülői egység 15 másodpercenként hármas síphangot ad ki.
- A képernyőn villogni kezd a Hatótávolságon kívül ikon.



#### FONTOS

Ha kikapcsolja a babaegységet és nem kapcsolja ki a szülői egységet, megszólal a Hatótávolságon kívül riasztás. A kapcsolatot visszaállításához kapcsolja újra be a babaegységet.

### A HATÓTÁVOLSÁGON KÍVÜL RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSÁHOZ:

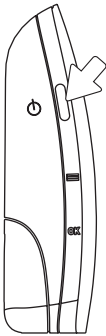

A szülői egység  
kikapcsolásához nyomja  
le 2 másodpercre

VAGY



Bekapcsolja  
a babaegységet.

## 6.3 – SZÜLŐI EGYSÉG KERESŐ FUNKCIÓ

Lehetővé teszi a szülői egység megtalálását.

Nyomja le és  
tartsa lenyomva  
a Hőmérsékletnek  
megfelelő  
világítás  
gombot.



### A SZÜLŐI EGYSÉG MEGKERESÉSÉHEZ:

Nyomja le és tartsa lenyomva a babaegység oldalán található „Hőmérsékletnek megfelelő világítás” gombot. A szülői egység sípoló hangot ad ki.

### A SÍPOLÁS KIKAPCSOLÁSÁHOZ:


Nyomja le bármelyik gombot a szülői egységen vagy a Szülői egység kereső gombot a babaegységen.



## HIBAELHÁRÍTÁS

### AZ ÚJRA TÖLTETHETŐ ELEMEK KEZELÉSE

- Első használat előtt mindig 10 órán át töltsé az elemeket.
- Az elemek élettartamának maximalizálása érdekében ajánlott időnként teljesen lemeríteni az elemeket. Az elemek teljesítménye csökkenhet, ha folyamatosan tölti őket. Ha nem használja a szülői egységet, kapcsolja ki.
- A lemerülőben lévő elemek ronthatják a babaőrző teljesítményét. Ha nem elégedett a szülői egység/ babaőrző teljesítményével, cserélje ki az újratölthető elemeket (2 db NiMH újratölthető elem).
- Ajánlott félévente kicserélni az elemeket.

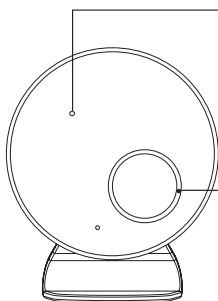

#### Bekapcsolásjelző lámpa Alacsony töltöttség jelzése


|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Zölden villog  | A babaegység a tartalék elemekről üzemel. |
| Sárgán villog  | A babaegység elemei lemerülőben vannak.   |
| Zölden világít | A készülék be van kapcsolva               |

#### Érzékelőlap jelzőlámpája Hőmérsékletjelzés


|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pirosan villog  | Nem érzékel mozgást, vagy megszakadt az érzékelőlap kapcsolata. |
| Fehéren villog  | A készülék működése szünetel                                    |
| Pirosan világít | A szoba hőmérséklete túl magas.                                 |
| Kéken világít   | A szoba hőmérséklete túl alacsony.                              |
| Fehéren világít | A szoba hőmérséklete a meghatározott paramétereken belül van.   |

### KAPCSOLAT MEGSZAKADÁSA A SZÜLŐI EGYSÉG ÉS A BABAEGYSÉG KÖZÖTT

- Ha megszakad a kapcsolat, első lépésként vigye közelebb egymáshoz a szülői egységet és a babaegységet, és ellenőrizze, hogy mindkét egység be van-e kapcsolva, így visszaállhat a kapcsolat. Ha továbbra sincs kapcsolat, és a Hatótávolságon kívül figyelmeztetés sem jelenik meg, akkor és csak akkor kezdje meg az alább részletezett újrapcsolódási műveletet.

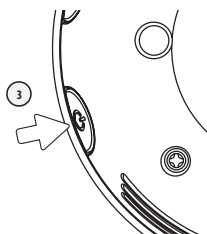


- 1) Kapcsolja ki a szülői egységet.
- 2) Kapcsolja ki, majd vissza a babaegységet.
- 3) Nyomja meg a babaegység főkapcsolóját 4-szer egymás után.

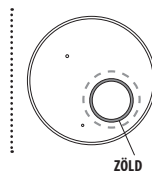


A babaegység érzékelőlap-jelzője gyorsan zölden villog (azt jelzi, hogy a babaegység kapcsolódási módban van).



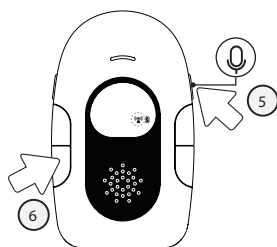

- 4) Kapcsolja be a szülői egységet. A **Hatótávolságon kívül** ikon villogni kezd.
- 5) Nyomja le és tartsa lenyomva a szülői egységen a **Válasz** gombot, amíg egy sípszót nem hall.
- 6) Nyomja meg a szülői egységen az **OK** gombot. A **Hatótávolságon kívül** ikon gyorsabban kezd villogni, jelezve, hogy a szülői egység kapcsolódási módban van.

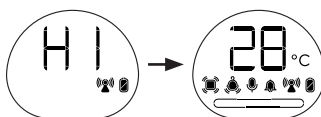

A szülői egység az újrapcsolódás során a H1–H2 ikont jeleníti meg. Az újracsatlakozás akkor sikeres, ha a szülői egységen a szokásos képernyő jelenik meg.

#### TÉVES RIASZTÁSOK

- Kapcsolja ki a babaegységet.
- Győződjön meg arról, hogy nincsen ágynemű a matrac és az érzékelőlap között, illetve hogy nem szorul-e a matrac a kiságyban.
- Ha a kiságy alja rugós vagy rácsos, helyezzen rá egy 6 cm vastag, 33 cm széles és 33 cm hosszú kemény fa lapot, és ezen használja az érzékelőlapot.
- Győződjön meg arról, hogy az érzékelőlap az üzembehelyezési tudnivalóknak megfelelően van elhelyezve.
- Lehet, hogy növelnie kell az érzékenységet (lásd az **5.4-es lépést**).

#### NEM SZÓLAL MEG A RIASZTÁS

- Ne érintse meg a kiságyat, amikor a légzésfigyelő be van kapcsolva, távolodjon el a kiságytól legalább 3m-re.
- Helyezze a kiságyat egy szilárd támaszfal mellé, hogy az érzékelőlap ne érzékelje a kiságyon kívüli mozgásokat.
- Tegyen filcet a kiságy lábaira.
- Kapcsolja ki a körforgót, a ventilátort, a hangos zenét és minden mást, amely rezgést okozhat.
- Lehet, hogy csökkentenie kell az érzékenységet (lásd az **5.4-es lépést**).

#### NEM VILÁGÍT A BABAEGYSÉG BEKAPCSOLÁSÁT JELZŐ LÁMPA (ZÖLD LÁMPA)

- Ellenőrizze a kapcsolódást, vagy váltson másik konnektorra.
- Kapcsolja be a babaegységet úgy, hogy 2 másodpercig lenyomva tartja a főkapcsolóját.

#### GYENGE VÉTEL

- Vigye közelebb egymáshoz az egységeket.
- Változtassa meg az egyik vagy mindkét egység helyzetét.
- Helyezze az egységeket lapos felületre, úgy, hogy a baba ne érje el őket.
- Cserélje ki az elemeket, vagy töltsse fel a szülői egységet.

#### STATIKUS ZAJ, TORZÍTÁS, INTERFERENCIA (MÁS BABAŐRZÓKTÓL, Vezeték nélküli telefonoktól, Adó-vevőktől stb.)

- Fordítsa el a szülői egységet, vagy vigye el az interferencia forrásának közeléből.

#### GERJEDÉS (A SZÜLŐI EGYSÉG HANGOS ZAJT AD KI)

- Helyezze egymástól távolabb az egységeket (legalább 3 méteres távolságra).
- Csökkentse a szülői egység hangerejét.



#### A SZÜLŐI EGYSÉG KÉPERNYŐJE FEKETE (A SZÜLŐI EGYSÉG KI VAN KAPCSOLVA)

- Kapcsolja vissza a szülői egységet a főkapcsoló lenyomásával és nyomva tartásával.
- Cserélje ki az elemeket, vagy töltsé fel a szülői egységet.

#### AZ ÉRZÉKELŐLAP JELZŐLÁMPÁJA PIROSAN VILLOG (A MOZGÁSÉRZÉKELŐ ALIG ÉRZÉKEL MOZGÁST)

- Győződjön meg róla, hogy nincsen ágynemű a matrac és az érzékelőlap között, illetve hogy nem szorul-e a matrac a kiságyban.
- Az érzékelőlapnak teljesen lapos és szilárd felületen kell feküdnie. Ha a kiságy alja rugós vagy rácsos, helyezzen rá egy 6 cm vastag, 33 cm széles és 33 cm hosszú kemény fa lapot, és ezen használja az érzékelőlapot.
- Győződjön meg arról, hogy az érzékelőlap az üzembehelyezési tudnivalóknak megfelelően van elhelyezve.
- Lehet, hogy növelnie kell az érzékenységet (lásd az **5.4-es lépést**).

#### NINCS ÁRAMELLÁTÁS

- Ellenőrizze és ha szükséges, cserélje az elemeket.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.



## ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

Az Angelcare® a termék eredeti tulajdonosa felé a jótállási időszak (lásd a jótállási időszakokat országokként mutató táblázat) alatt garantálja, hogy az Angelcare® készülék megfelel az anyag- és gyártási hibáktól. Amennyiben a készüléknél a jótállási időszak alatt az utasításoknak megfelelő, rendeltetésszerű használat esetén hibás működést tapasztal, az Angelcare® saját döntése szerint ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a terméket. A jótállás és a jótállási időszak érvényesítéséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

A termékhez mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot, ami lehet a termékről kapott számla vagy bármilyen más dokumentum, mely igazolja, hogy a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem múlt el. A termék javításának vagy cseréjének valamint az Önhez történő visszaküldésének költségét az Angelcare® viseli.

**A jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, mely nem megfelelő karbantartás, baleset, nem megfelelő feszültségen történő használat vagy más, nem rendeltetésszerű használat következtében sérült meg. A jótállás semmissé válik abban az esetben is, ha a tulajdonos bármilyen javítást vagy módosítást végez a terméken. Az Angelcare® a termék használatá kapcsán az ebből adódó esetleges következményekért semminemű felelősséget nem vállal. A jótállás kizár minden, fent nem ismertetett felelősséget. Semminemű más jótállás nem érvényes.**

A jótállás nem vonatkozik a nem Angelcare® márkájú termékekre és kiegészítőkre és azokra a problémákra, amelyek a termékhez tartozó utasításokkal ellenkező használatból vagy azok figyelmen kívül hagyásából adódnak, vagy amelyeket nem az Angelcare által mellékelt vagy gyártott kiegészítők, alkatrészek vagy tartozékok használata okozott.

A TÖRVÉNYBEN BIZTOSÍTOTT JOGOK ORSZÁGONKÉNT VÁLTOZNAK. EGYES ORSZÁGOKBAN TILOS A VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKERT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA, TEHÁT LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM ÉRVÉNYESEK.

AZ ANGELCARE SEMMILYEN MÓDON ÉS ESETBEN NEM FELELŐS A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZMÉNYEIÉRT.

| JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKOK ORSZÁGONKÉNT                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Észak-Amerika                                                        | 1 év |
| Egyesült Királyság, Dél-Afrika, Oroszország, Magyarország, Szlovénia | 1 év |
| Más országok                                                         | 2 év |

**FONTOS!** Ez az Angelcare® készülék higiéniai terméknek minősül. Kérjük, ne vigye vissza az üzletbe. Ha kérdése merült fel, vagy segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, mielőtt visszavinné a terméket az üzletbe.

**Az Angelcare® büszke minden termékére. Ha nem elégedett maradektalanul a termékkel, vagy kérdése merült fel, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, mielőtt visszavinné a terméket az üzletbe:**

### Egyesült Államok és Kanada:

Vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen:  
angelcare@cdecinc.ca

### Más országok:

A helyi forgalmazó elérhetőségét a webhelyünkön találja:  
international.angelcarebaby.com

## MŰSZAKI ADATOK

### Hatótávolság:

Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen):  
akár 250 méter.

### Áramellátás:

2 db AAA alkalielem (nem tartozékok) vagy 100–240 V AC / 5 V DC-adapter a babaegységhez.  
2 db AAA újratölthető elem és 100–240 V AC / 5 V DC adapter a szülői egységhez.

**Vigyázat:** Az áramütés veszélyének enyhítése érdekében ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek.

Az elemek nem megfelelő behelyezése esetén robbanásveszély áll fenn. A szülői egységhez mellékelünk 2 db AAA NIMH újratölthető elemet, amelyeket a GPI INTERNATIONAL LIMITED (GN60AAAHC, 1,2 V, 600 mAh) gyártott. Csak az Angelcare® által javasolt csereelemeket használja. Ha a csereelemekkel kapcsolatos információkat szeretne, vegye fel a kapcsolatot az Angelcare® ügyfélszolgálatával: [www.angelcarebaby.com](http://www.angelcarebaby.com), vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval. A csereelemek mellett megtalálja a használati útmutatójukat. A használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Az elemeket tartsa távol a gyermekektől.

### Elemek:

- NE használjon együtt régi és új elemeket.
- NE használjon együtt szabványos (szén-cink) alkalielemezeket és újratölthető (NI-CD, NIMH stb.) elemeket.

### VIGYÁZAT:

- A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ ELEMOK HASZNÁLATA ROBBANÁST OKOZHAT. A HASZNÁLT ELEMOKET AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN ÁRTALMATLANÍTSA.

### Adatátvitel:

A szülői egység és a babaegység közötti adatátvitel a 1,8–1,9 GHz-es frekvencián valósul meg Európában, Ázsiában, Afrikában és Ausztráliában.

A rádiófrekvenciás jel maximális erőssége = 24 dBm (250 mW)

RF-csatorna száma: 10

Az Angelcare Monitors Inc. ezúton nyilatkozik, hogy ez a készülék teljesíti a 2014/53/EU irányelv előírásait. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon található: <https://international.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>

### VÉDJE A KÖRNYEZETET

Az áthúzott kereskes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvények és szabályozások szerint a terméket és/vagy az elemét vagy akkumulátorát nem szabad a háztartási hulladék-gyűjtőbe tenni. Amikor a termék, illetve az eleme vagy akkumulátora elérte az élettartama végét, vigye el egy, a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás segít megőrizni a természeti erőforrásokat és megvédeni az emberek egészségét és a környezetet. Az elemek vagy akkumulátor eltávolításáért lásd a használati útmutatót.

### ErP-MEGFELELÉS

KIZÁRÓLAG A KÖVETKEZŐ MODELLSZÁMÚ ANGELCARE® MÁRKÁJÚ TÁPEGYSégeket használja: EURÓPAI UNIÓ (IDEÉRTVE NÉMETORSZÁGOT) – K05S05 0060G

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG – K05S050060B

A készülék megfelelőségét a rajta található jelzések mutatják.





#### FÜGGELÉK: INFORMÁCIÓK A RÁDIÓHULLÁMOKNAK VALÓ KITETTSÉGRŐL ÉS A FAJLAGOSAN ELYNYELT TELJESÍTMÉNYRŐL (SAR)

A szülői egység tervezése megfelel a rádióhullámoknak való kitettségére vonatkozó jelenlegi szabályozásoknak. Ezek a szabályozások tudományos irányelveken alapulnak, amelyek olyan biztonsági korlátokat állítanak fel, amelyek mindenki biztonságát szolgálják, függetlenül az életkoruktól vagy az egészségi állapotuktól. Ezek az irányelvek a rádióhullámoknak való kitettséget a fajlagosan elnyelt teljesítmény (Specific Absorption Rate, SAR) alapján mérik. A SAR-teszteket szabványos módszerekkel hajtottuk végre úgy, hogy a szülői egység minden általa használt frekvenciasávon a legmagasabb engedélyezett teljesítményt sugározta. A Nem-ionizáló Sugárvédelem Nemzetközi Bizottsága (ICNIRP) által javasolt maximális SAR-szint  $2 \text{ W/kg}$ , amelyet  $10 \text{ g}$  szöveten mérnek. A szülői egység által mért SAR-szintek a következők: A testtel közvetlenül érintkezve az  $1,8 \text{ GHz}$ -es DECT-kibocsátás  $0,042 \text{ W/kg}$  ( $10 \text{ g}$ ) teljesítményt eredményezett. Az arc elé helyezve az  $1,8 \text{ GHz}$ -es DECT-kibocsátás  $0,021 \text{ W/kg}$  ( $10 \text{ g}$ ) teljesítményt eredményezett. Ezen eredmények szerint ez az eszköz megfelel a rádióhullámoknak való kitettségére vonatkozó irányelveknek, amikor a testtől  $0 \text{ mm}$ -re vagy az arc elé helyezik.



## EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



**Kiadás dátuma:** 2017. június 30.

**Eszköz(ök):** az alább felsorolt típusszámú Angelcare készülékek

**Leírás:** az alábbi készüléklistában leírt készülékek

**Gyártó:** Angelcare Monitors Inc.  
201 boul. De L'industrie Local 104  
Candiac, QC J5R 6A6, Kanada

Saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az itt felsorolt termékek megfelelnek a vonatkozó harmonizált uniós jogszabály alapvető követelményeinek:

**a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó 2014/53/EU irányelv (RED).**

Felhasznált harmonizált szabványok:

**3.1(a) cikk – Egészség és biztonság**

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62471:2008

**3.1(b) cikk – Elektromágneses összeférhetőség**

EN301 489-1 V2.2.0

EN301 489-6 V2.1.1

**3.2(b) cikk – Rádióberendezések**

EN 301 406 V2.2.2

**Eszközök listája –**

AC117 típusú légzésfigyelő készülék babaőrzővel

AC115 típusú légzésfigyelő készülék babaőrzővel

AC110 típusú babaőrző készülék

Hivatalos aláírás:

Roxane Popoviciu, VP Marketing Europe, Angelcare Monitors Inc.



## TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy az Angelcare® termékét választotta. Az Angelcare® a termékek fejlesztése és gyártása során a legnagyobb gondossággal jár el, valamennyi terméke megfelel a nemzetközi szabványoknak. A cég termékeire 12 hónap garanciát vállal, mely a vásárlás napjától számítva él. A vásárlás napján kapott számlát, vagy fizetési blokkot és/vagy a készülék bélyegzett jótállási jegyét okvetlenül őrizze meg, mert jótállási igényét ezekkel érvényesítheti. A jótállás időtartama alatt minden olyan hiba esetén, amelynek eredete gyártási hibára vagy anyaghibára vezethető vissza, a termék hibás főegységét cseréljük. A készülékek utólagos javítását a gyártó a készülék jellege miatt nem engedélyezi.

A csere időtartama a bejelentéstől (a termék beérkezésétől) számított kb. 8nap. Ez a jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rossz feszültség, helytelen alkalmazás, vagy használat, ill. nem megfelelő elemek használata miatt sérült meg. A garancia szintén nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos javíttatta a készüléket, vagy átalakíttatta.

Meghibásodás esetén a termék főegységeinek cseréjét 3 munkanapon belül az eladó szerv, ezt meghaladón a forgalmazó végzi, kérjük utóbbi esetben ezt okvetlenül jelezze a megadott elérhetőségeken. (info@angelcare.hu) Importőr és szervíz: Isd. Forgalmazók / Distributors: Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

## JÓTÁLLÁSI JEGY

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkekre a 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet alapján.

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk. 8:1. §). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítotttnak kell tekinteni a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. § alapján.

2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A termék, vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.

3. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót.

4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.

5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.

6. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.

8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) érvényesítheti. Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhöz kell eljuttatni, postai úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve ha a fogyasztó a küldeményről és a meghibásodásról előzetesen tájékoztatta.

10. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni.

11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következő jogszabályok és rendeletek szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet; Ptk. XXIV. fejezet; 19/2014 (IV.29) NGM Rend. Hibás teljesítés miatt a fogyasztó a Ptk. 6:159.§ par. alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott kellékszavatossági jog lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.





**12.** Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlát/blokkot és/vagy lebélyegzett, kitöltött jótállási jegyét feltétlenül őrizze meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerződés megkötését.

**13.** A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

**14.** Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

**15.** Jótállási igény nem érvényesíthető a következő esetekben:

- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése esetén a jótállási jegy érvénytelen.
- A használati utasítástól eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
- Átalakítás, hibás, vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
- Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre, vagy tartozékokra.
- Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bármilyen beavatkozás esetén.

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

.....

A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy az ANGELCARE® AC115 típusú készülék a CE nemzetközi jelzéssel vannak ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabvány-előírásoknak és irányelveknek.

Az EU megfelelési nyilatkozatot a forgalmazótól kérheti el.

|                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>TERMÉK TÍPUSA:</b><br>ANGELCARE® AC115 típusú készülék | <b>A TERMÉK GYÁRTÁSI SOROZATKÓDJA:</b>  |
| <b>VÁSÁRLÁS DÁTUMA:</b>                                   | <b>ELADÓ SZERV BÉLYEGZŐJE, ALÁÍRÁS:</b> |

## AZONNALI INTÉZKEDÉSEK CSECSEMŐKORI LÉGZÉSKIMARADÁS ESETÉN

.....

Amennyiben a légzésfigyelő megszólal, azonnal ellenőrizze, hogy a riasztás valós-e. Téves riasztás esetén derítse fel ennek okát, változtasson a gyermek kiságykörülményein, vagy fokozza a készülék érzékenységét.

Riasztás esetén a következő életfunkciókat azonnal ellenőrizze gyermekénél:

- a baba lélegzik-e,
- van-e a csecsemőnek szívverése;
- megfelelő-e a gyermek vérkeringése.

A légzés ellenőrzése a legegyszerűbb, a mellkas emelkedő-süllyedő mozgása szabad szemmel is könnyen látható, a gyermek arcához közel hajolva a száj- és orrnyílásnál légző hang (szuszogás) hallható. A csecsemő szívverését az ismert testpontokon lehet pulzustapintással ellenőrizni, nyaki- vagy csukló- verőér esetén. A vérkeringés ellenőrzésének legegyszerűbb módja a baba arcszínének megvizsgálása. Egészséges keringés esetén a gyermek arcbőre rózsaszínű, megfelelő vérkeringés hiánya esetén a szín kékeszürke.

A három funkció mindegyike fontos, de a készülék riasztása a légzőmozgás kimaradását jelzi.

Amennyiben a gyermek nem lélegzik, azonnal hívja a mentőket a 104, vagy 112 telefonszámokon, és a következő ÉLETMENTŐ INTÉZKEDÉSEKET az életfunkciók ismételt beindulásáig, vagy a mentők kéréséig a leírtak szerint végezze.





| Ha a gyerek ...                                                            | Megfelelő SÜRGŐS intézkedések                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>...eszméletlen</b><br><b>...nem lélegzik</b><br><b>...van pulzusa</b>   | Kicsit döntsek hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, kb. 40-szer percenként.<br>Ne alkalmazzon szívmasszázszt!<br>Folytassuk a lélegeztetést addig, amíg a gyermek újra magától lélegzik, vagy amíg a mentők át nem veszik. |
| <b>...eszméletlen</b><br><b>...nem lélegzik</b><br><b>...nincs pulzusa</b> | Kicsit döntsek hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, 3 lélegeztetéssel<br>Utána alkalmazzon 15 szívmasszázszt, majd ismét 3 lélegeztetést.<br>Csak akkor hagyja abba az intézkedéseket, ha a gyermek ismét maga lélegzik.   |

### MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS

1. Kicsit döntse hátra a baba fejét. Tegye az egyik kezét a baba homlokára, másik kezének két ujját az álla alá. Így döntse hátra a baba fejét. (a. kép) Ha lélegeztetéskor nem emelkedik a baba mellkasa, akkor azonnal ellenőrizze, hogy a megfelelő pozícióban van-e a baba feje. A leggyakoribb hiba a mesterséges lélegeztetéskor a nem megfelelő fejpozíció.



### 2. Száj és orr körülzárása

Tegye a száját a csecsemő orrára és szájára olyan szorosan, amennyire tudja. (b. kép)



### 3. Három levegő befúvás

Annyi levegőt fújjon a csecsemőnek, amennyit Ön egy könnyed levegővétellel a szájában tud tartani. A csecsemő mellkasa megemelkedik, amikor befújja a levegőt, és lesüllyed kilégzésnél. Egy befúvás kb. 1-1,5 másodpercig tart. A befúvások között a csecsemő orrát és száját szabadon kell hagyni, így önállóan bekövetkezik a kilégzés. A befúvás után fordítsuk fejünket oldalra úgy, hogy a gyermek légzésmozgását figyelhessük. (c. kép)





Ha nem emelkedik a baba mellkasa, akkor ez abból is következhet, hogy valami elzárja a baba légcsövét. Szüntesse meg az akadályt, fordítsa oldalra a baba fejét és a kisebbik ujjával törölje ki a baba száját, majd fordítsa vissza a gyerek fejét az előző pozícióba és folytassa a lélegeztetést. (d.kép)



## SZÍVMASSÁZS

### 1. Feltételek

Ahhoz, hogy szívmassázst végezhesen, szilárd felületre van szükség. Egy asztal, vagy pelenkázó megfelel erre a célra, de ha nincs a közelben akkor a padló is alkalmas lehet. Nem szabad szívmassázst matracon végezni, mert az utórugózást eredményez. A következő lépésekhez, hogy a helyes nyomási pontot megtaláljuk, a gyermek felsőtestét szabaddá kell tenni.

### 2. Nyomási pont

Képzelsen el egy összekötő vonalat a csecsemő két mellbimbója között. Jobb keze mutatóujját helyezze e vonal alá, és szorosan mellé a középső és gyűrűsujját. (a.kép) Emelje fel a mutatóujját és így a gyűrűs- és középső ujjával meg tudja nyomni a baba mellkasát. A gyűrűs- és középső ujj így 0,5-1 cm-rel a mellbimbókat összekötő vonal alatt vannak



### 3. 15 szívmasszázs

A mellkas csont nyomásával nyomást gyakorol a szívre is, amellyel egy szükségvérvérkeringést indít be, és ezzel eljut az oxigén a létfontosságú szervekhez. Ahhoz, hogy a szív az összenyomás után újra megtelhesen vérrrel, figyelni kell arra, hogy a mellkas csont ismét tehermentesítve legyen. Ekkor az ujjat nem kell a mellkasról felemelni, mert elmozdulhat a helyes nyomási pontról. A nyomási mélység a mellkas keresztmetszet egyharmada kell hogy legyen, ez csecsemők esetében kb. 2 cm. Ahhoz, hogy a szívmasszázs a normál szívizom összehúzódásának megfelelően, nem kell hirtelen nyomással végezni a szívmasszázszt, hanem finoman úgy, hogy a szív nyomása annyi ideig tartson, mint a szívizom elernyedése. (b. kép)



[www.angelcarebaby.com](http://www.angelcarebaby.com)



IMJIS-ROW-120318

