


**AC027 típusú**  
légzésfigyelő készülék

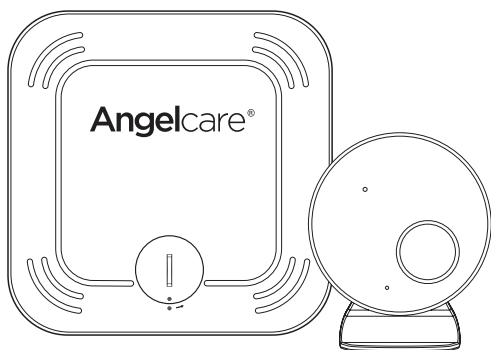

**! VIGYÁZAT!**

Őrizze meg ezt a használati útmutatót, hogy később is elolvashassa. A termék összeszerelése és használata előtt olvassa el figyelmesen a figyelmeztetéseket és a biztonsági utasításokat. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést, halált vagy a termék károsodását okozhatja.

**FONTOS – RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT**

Ez a termék **NEM** alkalmas és **NEM** használható a bűcsőhalál (SIDS) megelőzésére.

Ez a termék **NEM** alkalmas semmilyen betegség vagy állapot diagnosztizálására, kezelésére, enyhítésére, gyógyítására vagy megelőzésére.

Ez a termék egészséges csecsemők mozgásának ellenőrzésére szolgál, és nem helyettesíti a szülői felügyeletet.

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes szabványnak, és a használati útmutatónak megfelelő használata esetén biztonságos

## FIGYELMEZTETÉSEK

1.

### VIGYÁZAT!

- **TARTSA távol** a babaegységet a gyermekektől (legalább 1 méteres távolságban)
- **A termék NEM játék. SOHA ne engedjen gyermeket játszani vele**

2.

### VIGYÁZAT! – MOZGÁSÉRZÉKELŐ LAP – RIASZTÁS ELMARADÁSA

- Az érzékelőlap a gyermekek kívül más rezgést vagy mozgást is érzékelhet. Ezek a rezgésforrások akadályozhatják az Angelcare® készülék működését
- A készülék nem riaszt, ha a gyermekek kívül más mozgást is érzékel
- Magas érzékenységu beállítás esetén a készülék más rezgéseket és mozgásokat is érzékelhet. Az érzékenységu megfelelő beállításáról olvassa el az utasításokat
- Az eszköz érzékelhet a helyiségben lévő más csecsemőket vagy gyermekeket, ilyenkor nem szólal meg a riasztás
- Az érzékelőlap használatakor ügyeljen arra, hogy a csecsemő környezetében **NE** legyen mozgás vagy rezgés. Lásd az alábbi, 3–10. figyelmeztetést

3. NE használjon körforgót vagy bármely más olyan kiegészítőt, amely mozgást vagy rezgést okozhat.

4. Mozgást és rezgést okoz a ventilátor (a mennyezeti is), a mosógép, a padlódeszkák, a központi fűtés és a hangos zene is, ezeket érzékelheti az érzékelőlap, és így zavarhatja a működését.

5. Ha egynél több babaegységet használnak, a második babaegységnek legalább 2 méter távolságban kell lennie az elsőtől, különben zavarhatja egymás működését.

6. NE használja a szülő/felügyelő ágyával érintkező babaöbölben, mert az érzékelőlap az Ön mozgásait fogja érzékelni.

7. A kiságy **NEM** érintkezhet a fallal vagy a szegélyléccel, mert a készülék érzékelheti annak rezgéseit.

8. Miután kivette a babát az ágyból, bizonyos matracokon továbbra is mozgás lehet érzékelhető, miközben a matrac visszanyeri az eredeti alakját, és ilyenkor lehetséges, hogy nem szól a riasztás.

9. A mozgás megszüntetéséhez ügyeljen arra, hogy a kiságy stabilan álljon.

10. A kisagyat nem szabad más kisagytól vagy ágytól elérhető távolságba helyezni.

11. Abban a helyiségben, amelyben a készüléket használja, NE használjon más vezetékes nélküli eszközöket (beleértve a mobiltelefonokat, mikrohullámú adókat stb.). Ezek zavarhatják a készülék jelét és a működését.

12. Az érzékelőlap műanyagból készült, és **nem engedi át a levegőt**. Ezért penészedés alakulhat ki a matrac alatt az érzékelőlap területén.

A penészedés elkerülése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen forgassa és levegőn szárítsa meg a matracot. **NE HAGYJA NEDVESSÉGGEL ÉRINTKEZNI.** Szárász, szőszmentes kendővel törölje tisztára.

13. Az érzékelőlap **nem használható 24 hónapos kor fölött.**

14. A termék **nem helyettesíti a felelősségteljes felnőtt figyelmét.**

- A termék célja, hogy segítse gyermeke felügyeletét. Ettől függetlenül azonban önnek a készülék használata mellett is megfelelő figyelmet kell fordítania gyermekére annak biztonsága érdekében.
- A készüléket **KIZÁRÓLAG** a jelen használati útmutatóban megadott javaslatok szerint használja.

15. Az érzékelőlapot **ne használja annak ellenőrzésére, hogy a gyermek a kisagyban van-e.**

16. **MINDIG** azonnal ellenőrizze a gyermeket, ha riasztást hall.

17. Az összeszerelést **felnőtt végezze el.** Összeszerelésnél **tartsa távol az apró alkatrészeket a gyermekektől.**

18. Az utasításokat **követve tesztelje a készüléket és a funkcióit, hogy a tényleges használata előtt már ismerje a működését.** **MINDIG** ügyeljen arra, hogy az adó- és vevőegység megfelelően működjön, és hogy egymás hatósugarán belül helyezkedjenek el.

Ellenőrizze rendszeresen a babaegység működését, illetve akkor is, ha megváltoztatja a helyét.

**19. NE használja a készüléket víz közelében**  
Ügyeljen arra is, hogy az egységekbe NE essenek be tárgyak, és ne fröccsenjen folyadék a nyílásokon keresztül az egységekbe vagy az érzékelőlapra.



**20. Tartsa TÁVOL a készüléket hőforrásoktól (pl. sütő, radiátor stb.).** A hő károsíthatja a tokot vagy az elektromos alkatrészeket.

**21. MINDIG sík és szilárd felületen, felállítva helyezze el a babaegységet, és ügyeljen a megfelelő SZELLŐZÉSRE.** NE helyezze a készüléket kanapéra, párnára, ágyra vagy bármilyen olyan felületre, amely tompítja az általa kiadott hangot, vagy akadályozza a levegő szabad áramlását.

**22. A készülék 10 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten használható.**

## FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK AZ AKKUMULÁTOROKKAL KAPCSOLATBAN

**23. Az akkumulátorokat MINDIG tartsa távol a gyermekektől.**

**24. A vezeték nélküli érzékelőlap akkumulátora cserélhető lítium gombelem. Csak az Angelcare® által ajánlott csereakkumulátort használjon (lásd a műszaki adatokat).**

- A nem megfelelő akkumulátor használata, illetve a nem megfelelő behelyezése esetén robbanásveszély áll fenn. Az elemek megfelelő behelyezésével kapcsolatban lásd a használati útmutatót.

- NE okozzon rövidzárlatot a tápcsatlakozókon.

**25. NE használjon együtt régi és új akkumulátorokat, és csak az Angelcare® által ajánlott csereakkumulátort használjon (lásd a műszaki adatokat).**

**26. A termék gombelemet tartalmaz, amely lenyelés esetén mindössze két óra alatt belső kémiai égési sérüléshez vezethet, és halált okozhat. A használt elemeket azonnal ártalmatlanítsa. Az új és a használt elemeket tartsa távol a gyermekektől. Ha úgy gondolja, hogy a gyermek esetleg lenyelt egy elemet, vagy bármilyen módon elem került a testébe, forduljon orvoshoz.**

**27. A gombelem kis méretű, és fulladást okozhat, ezért TARTSA TÁVOL a gyermekektől.**

**28. Ügyeljen rá, hogy az elemek kezelésekor ne okozzon bennük rövidzárlatot vezető anyagokkal (pl. gyűrű, karkötő, kulcs).**

**29. Kerülje az elemek túltöltését, rövidzárlat okozását, fordított töltését, rongálását vagy elégetését,** mivel ezek következtében mérgező anyagok vagy hidrogén- és/vagy oxigéngáz

szabadulhat fel, vagy megnövekedhet a felületi hőmérséklet.

**30. NE próbálja meg tölteni a termékhez mellékelt vagy azzal együtt használható elemet, ha az nem újratölthető.** Az elemek esetben felrobbanhatnak, vagy maró hatású elektrolit folyhat ki belőlük.

**31. Kerülje az elemek fordított polaritását behelyezését.** Az elemek fordított behelyezése esetén töltés jöhet létre, ami szivárgást vagy robbanást okozhat.

**32. Ha a terméket 30 napnál hosszabb ideig tervezti tárolni, vegye ki belőle az elemeket,** mivel szivároghatnak, ami károsíthatja a berendezést.

**33. A lemerült elemeket a lehető leghamarabb távolítsa el, mivel ezek nagyobb valószínűséggel folynak ki a termék belsejében. A szivárgó vagy eresztő akkumulátorokat selejtezze ki úgy, hogy ne károsítsa a környezetet.**

**34. NE tárolja a terméket vagy a termékhez mellékelt vagy azzal együtt használható akkumulátorokat magas hőmérsékletű vagy páratartalmú, illetve közvetlen napfénynek kitett helyen.**

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

**35. Érzékelőlap –**

- Ha a kiságyban nincs szilárd, teljesen síma, stabil felület az érzékelőlap számára – például rugós vagy rácsos aljzat –, egy kemény lapot kell ez alá helyezni a megfelelő működése érdekében (lásd a 2. LÉPÉSBEN leírtakat).

- Az érzékelőlap használható hagyományos rugós és habmatracclal, de nem használható memória-habmatracclal (akár részben, akár teljesen memóriahab), üreges belsejű matracclal vagy vízágygal. Ha nem biztos a matrac kompatibilitásában, forduljon az Angelcare® ügyfélszolgálatához.

**36. Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat, kiegészítőket és cserealkatrészeket használja. A termék felszerelését mindig a gyártó utasításainak megfelelően kell végezni.**

- NE helyezze a terméket instabil kézikocsi, állványra, háromlábú állványra, konzolra vagy asztalra. A termék leeshet, súlyos sérülést okozva a gyermeknek vagy felnőttnek, és komolyan károsíthatja magát az eszközt is.

- CSAK a termékkel együtt szállított állványt használja.

- Kizárólag az Angelcare® által meghatározott vagy az eredeti alkatrészrel minden szempontból megegyező cserealkatrészt használjon. Nem hivatalos cserealkatrész használata tüzet vagy áramütést okozhat.

**37. Babaegység antennája –** Az adóegységhez használt antennát úgy kell elhelyezni, hogy legalább 20 cm-es biztonsági távolság álljon fenn közte és a környezetében lévő emberek között. Az antennát nem szabad bővíteni, és tilos bármilyen más antennával vagy adóegységgel együtt használni.

**38. Tisztítás –** Tisztítás előtt válassza le az egységeket. A készülék semmilyen alkatrészét NE merítse vízbe. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa.


# TELEPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

## A DOBOZ TARTALMA

- 1 Babaegység
- 2 Állvány (babaegységhez)
- 3 Érzékelőlap
- 4 CR2450 elem  
(az érzékelőlaphoz)


## AMIRE SZÜKSÉGE VAN

- Kemény lap, ha a kiságyban nincs szilárd felülete (lásd az 1. lépésnél a „FONTOS” című megjegyzést)
- 2 db AAA elem (a babaegységhez)
- Pozitív típusú csavarhúzó

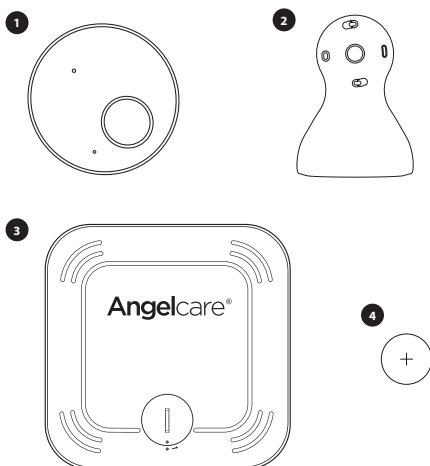


## 1- AZ ÉRZÉKELŐLAP BEÁLLÍTÁSA

Az érzékelőlap a baba finom mozgásait érzékeli a matrac felületén. A riasztás csak akkor szólal meg, ha a készülék **NEM** észlel mozgást 20 másodpercig.

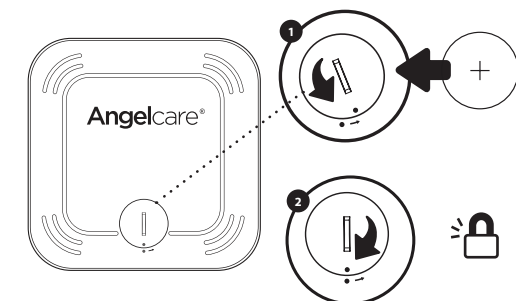

1. Távolítsa el az elemfedelelet, és helyezze be az elemet a + jellel felfelé.
2. Helyezze vissza az elemfedelelet, és a rögzítéshez fordítsa úgy, hogy a 2 pont egy vonalban legyen

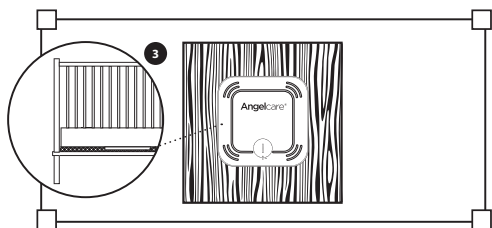


3. Vegye ki a matracot a kiságyból, helyezze az érzékelőlapot – az **Angelcare® emblémával felfelé** – az ágy aljába, körülbelül a matrac közepe alá. Ha alsó kemény lapra is szüksége van, akkor ennek a közepére kell helyezni (lásd az alábbi „FONTOS” című megjegyzést)
4. Helyezze vissza a matracot





**Megfelelő elhelyezés lécekből álló ágyrács esetén**

## ! FONTOS

- Ha a kiságyban nincs szilárd, teljesen sima, stabil felület az érzékelőlap számára – például rugós vagy rácsos aljzat –, egy kemény lapot kell ez alá helyezni a megfelelő működése érdekében. A kemény lap legyen legalább 30 x 30 cm és 6 mm vastag. A kemény lapnak nagyobbnak kell lennie az érzékelőlapnál
- Az érzékelőlap használható hagyományos rugós és habmatracral, de nem használható memória-habmatracral (akár részben, akár teljesen memóriahab), üreges belsejű matracral vagy vízágygal. Ha nem biztos a matrac kompatibilitásában, forduljon az Angelcare® ügyfélszolgálatához. A kemény lap állandó nyomást biztosít az érzékelőlapnak, így az akkor is képes érzékelni a baba mozgását, ha az a kiságy szélén tartózkodik

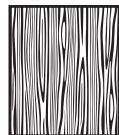


## 2- A BABAEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

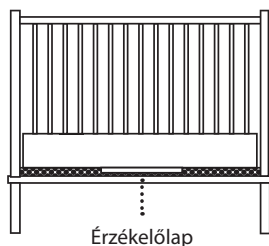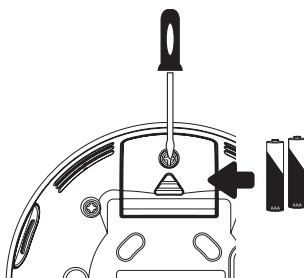

Helyezze el a babaegységet legalább **1 méterre** a kiságytól



## 3- A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

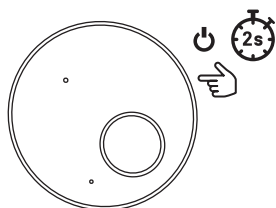


### Megjegyzés:

- A babaegység hangot ad ki, és kéken villog, így megerősítve a párosítását az érzékelőlappal
- Ha nem a zöld fény, hanem a piros villog, vagy téves riasztások fordultak elő, állítsa be az érzékenységi szintet (3. LÉPÉS, AZ ÉRZÉKELŐLAP ELLENŐRZÉSE)


## AZ ÉRZÉKELŐLAP MŰKÖDÉSNEK SZÜNETELTETÉSE ÉS ÚJRAINDÍTÁSA

- Lehetővé teszi az érzékelőlap működésének szüneteltetését, amikor kiveszi a babát a kiságyból például etetéshez vagy dédelgetéshez. Mielőtt visszatenné a babát a babaágyba, indítsa el újra az érzékelőlapot

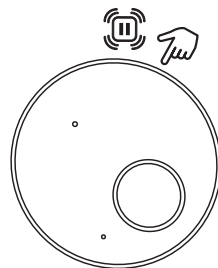

## AZ ÉRZÉKELŐLAP ELLENŐRZÉSE

1. Az érzékelőlap a gyermekén kívül más rezgést vagy mozgást is érzékelhet. Ezek a rezgésforrások akadályozhatják az Angelcare® készülék működését. A készülék nem riaszt, ha a gyermekén kívül más mozgást is érzékel
2. 3-féle érzékenységi beállítás van: alacsony, közepes és magas. Az egység közepes érzékenységre van beállítva (alapbeállítás), és szükség szerint átállítható
3. Az érzékelőlap hibásan az Ön mozgásait fogja érzékelni, ha megérinti a kiságyat
4. Ha a készülék 15 másodpercen keresztül nem érzékel mozgást, egy sípszóból álló előriasztást ad, hogy a baba megmozduljon. Ha továbbra sem érzékel mozgást, 20 másodperc után megszólal a fő riasztás: folyamatosan ismétlődő hosszú sípszók

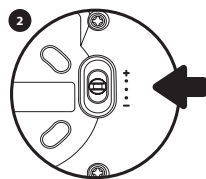

## AZ ÉRZÉKELŐLAP MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

1. Helyezze az érzékelőlapot a baba alvóterületének hozzávetőleges középpontjába, és helyezze vissza a matracot
2. Kapcsolja BE a babaegységet, majd ellenőrizze, hogy a babaegység és az érzékelőlap párosítva van-e (össze van-e kapcsolva)
3. Finoman, egyenletes mozgással simítson végig a matrac egyik sarkán a kezével, majd ezt tegye meg **másodszor** is, hogy az érzékelő mozgást érzékeljen
4. Lépjen távolabb a kiságytól
5. 20 másodperc elteltével a babaegység riasztást ad. Ha **nem szólal meg** a riasztás, ellenőrizze, hogy minden megfelelően van-e beállítva, és próbálja újra. Ellenőrizze az elemszinteket minden egységen, és kövesse a „NINCS RIASZTÁS” című részben leírtakat. Lehetséges, hogy az érzékenységi szintjét egy szinttel lejjebb kell állítani, hogy ne érzékeljen más rezgéseket és mozgásokat
6. Ha a riasztás megszólal, finoman simítson végig a matrac egyik sarkán a kezével, majd ezt tegye meg **másodszor** is, hogy az érzékelő mozgást érzékeljen. A mozgás érzékeléséig és a riasztás elhallgatásáig akár 8 másodperc is eltelhet
7. Ha a riasztás folytatódik annak ellenére, hogy kétszer finoman végigsimította a matrac sarkát, állítsa az érzékenységet magasabbra, és ismétlje meg ezt a tesztet




## ! FONTOS

- Első használat előtt tesztelje a készüléket
- Használat előtt és utána rendszeresen (mielőtt a gyermeket a kiságyba helyezi) ellenőrizni kell, hogy az érzékelőlap nem érzékel-e a környezetből származó mozgást vagy rezgést
- Tesztelje a készüléket minden alkalommal, ha új helyre teszi az érzékelőlapot

## 4- A KÉSZÜLÉK MEGISMERÉSE

### BABAEGYSÉG


- 1 Bekapcsolásjelző / alacsony töltöttség jelzője
- 2 Mozgásérzékelő lap jelzőlámpája
- 3 Mozgásérzékelő lap működésének szüneteltetése Lehetővé teszi az érzékelőlap működésének szüneteltetését, amikor kiveszi a babát a kiságyból például etetéshez vagy dédelgetéshez. Mielőtt visszatenné a babát a babaágyba, indítsa el újra az érzékelőlapot/ Párosító gomb (lenyomni és nyomva tartani)
- 4 BE-/KIKAPCSOLÁS (lenyomni és nyomva tartani)
- 5 Mozgásérzékelő lap érzékenységi kapcsolója A gyerek mozgásának megfelelő felügyelete érdekében beállíthatja az érzékelőlap érzékenységét (3. LÉPÉS, AZ ÉRZÉKELŐLAP ELLENŐRZÉSE)
- 6 Elemtartó fedele (2 db AAA)

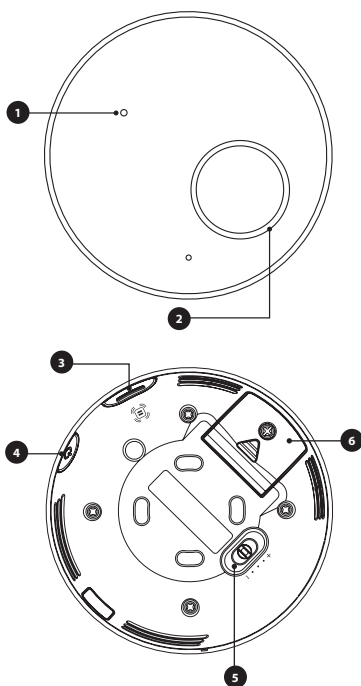

## 5- A BABAEGYSÉG RIASZTÁSAI

### BABAEGYSÉG

- 1 **BEKAPCSOLÁS**jelző és **alacsony töltöttség** jelzője  
**Zölden villog:** A készülék be van kapcsolva  
**Sárgán villog:** A készülék eleme kifogyóban van
- 2 **Mozgásérzékelő lap**  
**Pirosan villog:** Nem észlel mozgást  
  - A babaegység hangos, ismétlődő sípszót ad ki: ez a mozgáskimaradás miatti riasztás**Fehéren villog:** A készülék működése szünetel.  
  - A babaegység egyetlen sípszót ad ki 20 másodpercenként**Világoskékén villog:** Megszakadt a kapcsolat a babaegység és az érzékelőlap között  
  - A babaegység egyetlen sípszót ad ki 20 másodpercenként**Sárgán villog:** Az érzékelőlap eleme merülőben van  
  - A babaegység egyetlen sípszót ad ki 20 másodpercenként

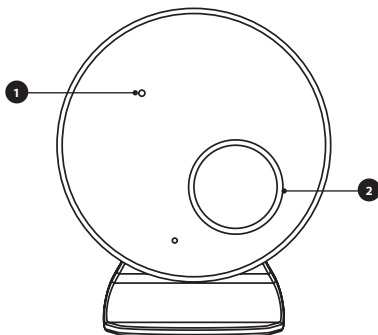

### Megjegyzés:

A riasztás leállításához nyomja meg a babaegység Szüneteltetés gombját

# 6- HIBAEMLÉKÍTÉS

## MOZGÁSÉRZÉKELŐ LAP – NINCS RIASZTÁS

- Lehetséges, hogy az érzékelőlap a gyermekek kivételével más rezgést vagy mozgást érzékel, és nem szólal meg a riasztás.
- Lásd: 3–10. figyelemztetés, illetve 3. LÉPÉS, AZ ÉRZÉKELŐLAP ELLENŐRZÉSE.

## MOZGÁSÉRZÉKELŐ LAP – TÉVES RIASZTÁSOK, AZ ÉRZÉKELŐLAP JELZŐLÁMPÁJA PIROSAN VILLOG

- Az érzékelőlap többféle okból adhat téves riasztást. Ha riasztás hallható, mindig azonnal ellenőrizze a baba állapotát:
  - A leggyakoribb ok, hogy a babaegységet nem kapcsolják ki, miután a gyermeket kivették a kiságyból
  - Győződjön meg róla, hogy nincsen ágynemű a matrac és az érzékelőlap között
  - További ok lehet, hogy az érzékelőlapot nem megfelelően helyezte az ágymatrac alá. Gondoskodjon arról, hogy az érzékelőlap sík, stabil felületen legyen, és a nyomtatott oldala felfelé nézzen
  - Előfordulhat, hogy módosítania kell az érzékenységi szintet

## MEGSZAKAD A KAPCSOLAT (A BABAEGYSÉG KÉK LÁMPÁJA VILLOG, ÉS 20 MÁSODPERCENKÉNT HANGJELZÉST HALLAT)

- Vigye közelebb egymáshoz az egységeket.
- Nyomja le és 2 másodpercig tartsa lenyomva a babaegység BE-/KIKAPCSOLÁS gombját. A babaegység hangjelzést ad ki, és a lámpája kéken villog, így megerősítve a csatlakozást.

## NINCS ÁRAMELLÁTÁS

- Ellenőrizze és ha szükséges, cserélje az elemeket.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék BE van kapcsolva.

## ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

Az Angelcare® a termék eredeti tulajdonosa felé a jótállási időszak (lásd a jótállási időszakokat országunként mutató táblázat) alatt garantálja, hogy az Angelcare® készülék mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Amennyiben a készüléknél a jótállási időszak alatt az utasításoknak megfelelő, rendeltetésszerű használat esetén hibás működést tapasztal, az Angelcare® saját döntése szerint ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a terméket. A jótállás és a jótállási időszak érvényesítéséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóinkkal.

A termékhez mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot, ami lehet a termékről kapott számla vagy bármilyen más dokumentum, mely igazolja, hogy a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem múlt el. A termék javításának vagy cseréjének és az Önhöz történő visszaküldésének díját az Angelcare® viseli.

**A jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, mely nem megfelelő karbantartás, baleset, nem megfelelő feszültségen történő használat vagy más, nem rendeltetésszerű használat következtében sérült meg. A jótállás semmissé válik abban az esetben is, ha a tulajdonos bármilyen javítást vagy módosítást végez a termékben. Az Angelcare® a termék használata kapcsán az ebből adódó esetleges következményekért semminemű felelősséget nem vállal. A jótállás kizár minden, fent nem ismertetett felelősséget. Semminemű más jótállás nem érvényes.**

A jótállás nem vonatkozik a nem az Angelcare® márka alá tartozó termékekre és kiegészítőkre, vagy azokra a problémákra, melyek a termékhez tartozó utasításokkal ellenkező használatból vagy azok figyelmen kívül hagyásából adódnak, vagy amelyek nem az Angelcare® által mellékelte vagy gyártott kiegészítők, alkatrészek vagy tartozékok használata okozott.

A TÖRVÉNYBEN BIZTOSÍTOTT JOGOK ORSZÁGONKÉNT VÁLTOZNAK. EGYSÉGES ORSZÁGOKBAN TILOS A VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA, TEHÁT LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM ÉRVÉNYESEK. AZ ANGELCARE® SEMMILYEN MÓDON ÉS ESETBEN NEM FELELŐS A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZMÉNYEIÉRT.

**FONTOS!** Ez az Angelcare® készülék higiéniai terméknek minősül. Kérjük, ne vigye vissza az üzletbe. Ha kérdése merül fel, vagy segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, mielőtt visszavinné a terméket az üzletbe.

A jótállással kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval. A helyi forgalmazó elérhetőségét a webhelyünkön találja:

[www.angelcarebaby.com/distributors/](http://www.angelcarebaby.com/distributors/)

Jótállási időszak országunként	
Egyesült Királyság, Dél-Afrika, Oroszország, Magyarország, Szlovénia	1 év
Más országok	2 év



## MŰSZAKI ADATOK

### Hatótávolság:

Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen): legfeljebb 8 méter.

### Áramellátás:

2 db AAA alkáli elem a babaegységhez (nincs mellékelve)

1 db 3 V-os CR2450 elem (mellékelve) a vezeték nélküli érzékelőlaphoz

**Figyelem!** Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek.

Az elemek nem megfelelő behelyezése esetén robbanásveszély áll fenn. Az érzékelőlap eleme felhasználó által cserélhető lítium- (nem lítiumion) elem, és NEM tölthető újra. Csak az Angelcare® által ajánlott csereakkumulátort használjon. Ha a csereakkumulátorokkal és -elemekkel kapcsolatos információkat szeretne, vegye fel a kapcsolatot az Angelcare® ügyfélszolgálatával a [www.angelcarebaby.com](http://www.angelcarebaby.com) címen, illetve a helyi forgalmazókkal. A csereakkumulátorok mellett megtalálja a használati útmutatójukat. A használt akkumulátorokat és elemeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Az elemeket tartsa távol a gyermekektől.

### Elemek:

- NE használjon együtt régi és új elemeket.
- NE használjon együtt szabványos alkáli (szén-cink) és újratölthető (NI-CD, NIMH stb.) elemeket.

**FIGYELEM!** A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ ELEMOK HASZNÁLATA ROBBANÁST OKOZHAT.

### Adatátvitel:

Az érzékelőlap és a babaegység közötti adatátvitel a 2,402–2,480 GHz-es frekvencián valósul meg.

a rádiófrekvenciás jel maximális erőssége = 4 dBm (2,5 mW)

RF-csatorna száma a babaegység és az érzékelőlap között: 79

Az Angelcare® Monitors Inc ezúton nyilatkozik, hogy ez a készülék teljesíti a 2014/53/EU irányelv előírásait. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon található:

[www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity](http://www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity)

**Rádiófrekvenciás expozíció:** Ez a készülék úgy van tervezve és gyártva, hogy megfeleljen az EU nem ellenőrzött környezetre érvényes rádiófrekvenciás (RF) sugárterhelési korlátozásainak. A megfelelőség fenntartásához a normál működés során nem szabad a babaegységhez 20 cm-nél közelebb tartózkodni.

### VÉDJE A KÖRNYEZETET!

Az áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvények és szabályozások szerint a terméket és/vagy az akkumulátorát nem szabad a háztartási hulladék-gyűjtőbe tenni. Amikor a termék vagy az eleme elérte az élettartama végét, vigye el egy, a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás segít megőrizni a természeti erőforrásokat és megvédeni az emberek egészségét és a környezetet. Az akkumulátor eltávolításáért lásd a használati útmutatót.

A készülék megfelelőségét a rajta található jelzések mutatják.



## TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy az Angelcare® termékét választotta. Az Angelcare® a termékek fejlesztése és gyártása során a legnagyobb gondossággal jár el, valamennyi terméke megfelel a nemzetközi szabványoknak. A cég termékeire 12 hónap garanciát vállal, mely a vásárlás napjától számítva él. A vásárlás napján kapott számlát, vagy fizetési blokkot és/vagy a készülék bélyegzett jótállási jegyét okvetlenül őrizze meg, mert jótállási igényét ezekkel érvényesítheti. A jótállás időtartama alatt minden olyan hiba esetén, amelynek eredete gyártási hibára vagy anyaghibára vezethető vissza, a termék hibás főegységét cseréljük. A készülékek utólagos javítását a gyártó a készülék jellege miatt nem engedélyezi.

A csere időtartama a bejelentéstől (a termék beérkezésétől) számított kb. 15 nap. Ez a jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rossz feszültség, helytelen alkalmazás, vagy használat, ill. nem megfelelő elemek használata miatt sérült meg. A garancia szintén nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos javíttatta a készüléket, vagy átalakította.

Meghibásodás esetén a termék főegységeinek cseréjét 3 munkanapon belül az eladó szerv, ezt meghaladóan a forgalmazó végzi, kérjük utóbbi esetben ezt okvetlenül jelezze írásban az alábbi elérhetőségen: info@angelcare.hu.

## JÓTÁLLÁSI JEGY

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkre a 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet alapján.

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk. 8:1. §). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. § alapján.
2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A termék, vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.
3. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót.
4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.
5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.
6. A jótállási igény a teljeskörűen kitöltött, eredeti jótállási jeggyel érvényesíthető.
7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importórt terheli.
8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) érvényesítheti. Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.
9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhöz kell eljuttatni, postai úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve ha a fogyasztó a küldeményről és a meghibásodásról előzetesen írásban tájékoztatta. Személyes leadásra, átvételre nincs mód.
10. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni.
11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következő jogszabályok és rendeletek szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Kormányrend.; Ptk. XXIV. fejezet; 19/2014 (IV.29) NGM Rend. Hibás teljesítés miatt a fogyasztó a Ptk. 6:159.§ par. alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott kellékszavatossági jog lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

**12.** Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlát/blokkot és/vagy lebélyegzett, kitöltött jótállási jegyét feltétlenül őrizze meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerződés megkötését.

**13.** A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

**14.** Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

**15.** Jótállási igény nem érvényesíthető a következő esetekben:

- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése esetén a jótállási jegy érvénytelen.
- A használati utasítástól eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
- Átalakítás, hibás, vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
- Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre, vagy tartozékokra.
- Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bármilyen beavatkozás esetén.

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy az ANGELCARE® AC027 típusú készülékek a CE nemzetközi jelzéssel vannak ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabvány-előírásoknak és irányelveknek.

Az EU megfeleléségi nyilatkozatot a forgalmazótól kérheti el.

<b>TERMÉK TÍPUSA:</b> ANGELCARE® AC027 típusú készülék	<b>A TERMÉK GYÁRTÁSI SOROZATKÓDJÁ:</b>
<b>VÁSÁRLÁS DÁTUMA:</b>	<b>ELADÓ SZERV BÉLYEGZŐJE, ALÁÍRÁS:</b>

## AZONNALI INTÉZKEDÉSEK CSECSEMŐKORI LÉGZÉSKIMARADÁS ESETÉN

Amennyiben a légzésfigyelő megszólal, azonnal ellenőrizze, hogy a riasztás valós-e. Téves riasztás esetén derítse fel ennek okát, változtasson a gyermek kiságykörülményein, vagy fokozza a készülék érzékenységét.

Riasztás esetén a következő életfunkciókat azonnal ellenőrizze gyermekénél:

- a baba lélegzik-e,
- van-e a csecsemőnek szívverése;
- megfelelő-e a gyermek vérkeringése.

A légzés ellenőrzése a legegyszerűbb, a mellkas emelkedő-süllyedő mozgása szabad szemmel is könnyen látható, a gyermek arcához közel hajolva a száj- és orrnyílásnál légző hang (szuszogás) hallható. A csecsemő szívverését az ismert testpontokon lehet pulzustapintással ellenőrizni, nyaki- vagy csukló- verőér esetén. A vérkeringés ellenőrzésének legegyszerűbb módja a baba arcszínének megvizsgálása. Egészséges keringés esetén a gyermek arcbőre rózsaszínű, megfelelő vérkeringés hiánya esetén a szín kékeszürke.

A három funkció mindegyike fontos, de a készülék riasztása a légzőmozgás kimaradását jelzi.

Amennyiben a gyermek nem lélegzik, azonnal hívja a mentőket a 104, vagy 112 telefonszámokon, és a következő ÉLETMENTŐ INTÉZKEDÉSEKET az életfunkciók ismételt beindulásáig, vagy a mentők kiérkezéséig a leírtak szerint végezze.

Ha a gyerek ...	Megfelelő SÜRGŐS intézkedések
...eszméletlen	Kicsit döntse hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, kb. 40-szer percenként.
...nem lélegzik	Ne alkalmazzon szívmasszázst!
...van pulzusa	Folytassuk a lélegeztetést addig, amíg a gyermek újra magától lélegzik, vagy amíg a mentők át nem veszik.
...eszméletlen	Kicsit döntse hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, 3 lélegeztetéssel
...nem lélegzik	Utána alkalmazzon 15 szívmasszázst, majd ismét 3 lélegeztetést.
...nincs pulzusa	Csak akkor hagyja abba az intézkedéseket, ha a gyermek ismét maga lélegzik.

## MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS

1. Kicsit döntse hátra a baba fejét. Tegye az egyik kezét a baba homlokára, másik kezének két ujját az álla alá. Így döntse hátra a baba fejét. (a. kép) Ha lélegeztetéskor nem emelkedik a baba mellkasa, akkor azonnal ellenőrizze, hogy a megfelelő pozícióban van-e a baba feje. A leggyakoribb hiba a mesterséges lélegeztetéskor a nem megfelelő fejpozíció.



### 2. Száj és orr körülzárása

Tegye a száját a csecsemő orrára és szájára olyan szorosan, amennyire tudja. (b. kép)



### 3. Három levegő befúvás

Annyi levegőt fújjon a csecsemőnek, amennyit Ön egy könnyed levegővétellel a szájában tud tartani. A csecsemő mellkasa megemelkedik, amikor befújja a levegőt, és lesüllyed kilégzésnél. Egy befúvás kb. 1-1,5 másodpercig tart. A befúvások között a csecsemő orrát és száját szabadon kell hagyni, így önállóan bekövetkezik a kilégzés. A befúvás után fordítsuk fejünket oldalra úgy, hogy a gyermek légzésmozgását figyelhessük. (c. kép)



Ha nem emelkedik a baba mellkasa, akkor ez abból is következhet, hogy valami elzárja a baba légcsövét. Szüntesse meg az akadályt, fordítsa oldalra a baba fejét és a kisebbik ujjával törölje ki a baba száját, majd fordítsa vissza a gyerek fejét az előző pozícióba és folytassa a lélegeztetést. (d.kép)



## SZÍVMASSZÁZS

### 1. Feltételek

Ahhoz, hogy szívmasszázst végezhesen, szilárd felületre van szükség. Egy asztal, vagy pelenkázó megfelel erre a célra, de ha nincs a közelben akkor a padló is alkalmas lehet. Nem szabad szívmasszázst matracon végezni, mert az utórugózást eredményez. A következő lépésekhez, hogy a helyes nyomási pontot megtaláljuk, a gyermek felsőtestét szabadná kell tenni.

### 2. Nyomási pont

Képzeld el egy összekötő vonalat a csecsemő két mellbimbója között. Jobb keze mutatóujját helyezze e vonal alá, és szorosan mellé a középső és gyűrűsujját. (a.kép) Emelje fel a mutatóujját és így a gyűrűs- és középső ujjával meg tudja nyomni a baba mellkasát. A gyűrűs- és középső uja így 0,5-1 cm-rel a mellbimbókat összekötő vonal alatt vannak



### 3. 15 szívmasszázs

A mellkas csont nyomásával nyomást gyakorol a szívre is, amellyel egy szükségvérkeringést indít be, és ezzel eljut az oxigén a létfontosságú szervekhez. Ahhoz, hogy a szív az összenyomás után újra megtelhesen vérrrel, figyelni kell arra, hogy a mellkas csont ismét tehermentesítve legyen. Ekkor az ujjat nem kell a mellkasról felemelni, mert elmozdulhat a helyes nyomási pontról. A nyomási mélység a mellkas-keresztmetszet egyharmada kell hogy legyen, ez csecsemők esetében kb. 2 cm. Ahhoz, hogy a szívmasszázs a normál szívizom összehúzódásának megfelelően, nem kell hirtelen nyomással végezni a szívmasszázst, hanem finoman úgy, hogy a szív nyomása annyi ideig tartson, mint a szívizom elernyedése. (b. kép)





## Elérhetőség

**FONTOS!** Ez az Angelcare® készülék higiéniai terméknek minősül. Kérjük, ne vigye vissza az üzletbe.

Ha kérdése merült fel, vagy segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, mielőtt visszavinné a terméket az üzletbe.

**Az Angelcare® büszke minden termékére. Ha nem elégedett maradéktalanul a termékkel, vagy kérdése merült fel, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, mielőtt visszavinné a terméket az üzletbe:**

**Egyesült Államok és Kanada:** Vegye fel a kapcsolatot velünk a következő címen:  
**info@angelcarebaby.com**

**Más országok:** A helyi forgalmazó elérhetőségét a webhelyünkön találja:  
**angelcarebaby.com/distributors**

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További tájékoztatásért lásd a honlapunkon található **beállítási videókat** és egyéb funkciókat.

<https://angelcare.zendesk.com/hc/>

---

**www.angelcarebaby.com**

**Angelcare Monitors Inc.**

201, boulevard de l'Industrie, local 104  
Candiac (Quebec) J5R 6A6  
Kanada