


AC127 típusú

Légzésfigyelő készülék kétirányú
babaőrzővel

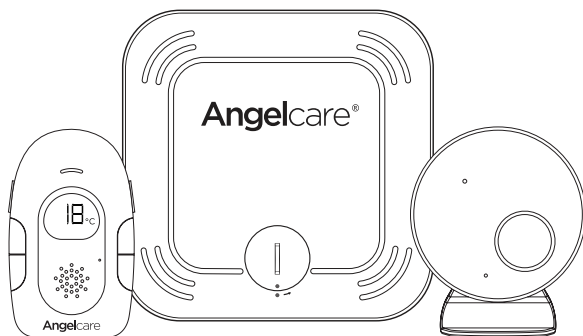

⚠ VIGYÁZAT!

Őrizze meg ezt a használati útmutatót, hogy később is elolvashassa. A termék összeszerelése és használata előtt olvassa el figyelmesen a figyelmeztetéseket és a biztonsági utasításokat. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést, halált vagy a termék károsodását okozhatja.

FONTOS – RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a termék NEM alkalmas és NEM használható a bölcsőhalál (SIDS) megelőzésére.

Ez a termék NEM alkalmas semmilyen betegség vagy állapot diagnosztizálására, kezelésére, enyhítésére, gyógyítására vagy megelőzésére.

Ez a termék egészséges csecsemők mozgásának ellenőrzésére szolgál, és nem helyettesíti a szülői felügyeletet.

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes szabványnak, és a használati útmutatónak megfelelő használata esetén biztonságos

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A csecsemőkre és kisgyermekekre vonatkozó súlyos fulladásveszély miatt a szülők és gondozók tartsák be az alábbi figyelmeztetéseket:



VIGYÁZAT! – Fulladásveszély – Előfordult, hogy a kábelekbe belegabalyodott gyermekek MEGFULLADTAK

- **TARTSA TÁVOL** a babaegységet és az adapterkábeleket a gyermekektől (legalább 1 méteres távolságban).
- **SOHA** ne használjon hosszabbítókábeleket az adapterekhez. **KIZÁRÓLAG** a mellékelt adaptereket használja
- A termék **NEM** játék. **SOHA** ne engedjen gyermeket játszani vele

2.

VIGYÁZAT! – MOZGÁSÉRZÉKELŐ LAP – RIASZTÁS ELMARADÁSA

- Az érzékelőlap a gyermekén kívül más rezgést vagy mozgást is érzékelhet. Ezek a rezgésforrások akadályozhatják az Angelcare® készülék működését
- A készülék nem riaszt, ha a gyermekén kívül más mozgást is érzékel
- Magas érzékenységu beállítás esetén a készülék más rezgéseket és mozgásokat is érzékelhet. Az érzékenységu megfelelő beállításáról olvassa el az utasításokat
- Az eszköz érzékelhet a helyiségben lévő más csecsemőket vagy gyermekeket, ilyenkor nem szólal meg a riasztás
- Az érzékelőlap használatakor ügyeljen arra, hogy a csecsemő környezetében **NE** legyen mozgás vagy rezgés. Lásd az alábbi, 3–11. figyelmeztetést

3. NE használjon körforgót vagy bármely más olyan kiegészítőt, amely mozgást vagy rezgést okozhat

4. Mozgást és rezgést okoz a ventilátor (a mennyezeti is), a mosógép, a padlódeszkák, a központi fűtés és a hangos zene is, ezeket érzékelheti az érzékelőlap, és így zavarhatja a működését

5. Ha egyenél több babaegységet használnak, a második babaegységnek legalább 2 méter távolságban kell lennie az elsőtől, különben zavarhatja egymás működését

6. NE használja a szülő/felügyelő ágyával érintkező babaöbölben, mert az érzékelőlap az Ön mozgásait fogja érzékelni

7. A kiságy **NEM** érintkezhet a fallal vagy a szegélyléccel, mert a készülék érzékelheti annak rezgéseit

8. Miután kivette a babát az ágyból, bizonyos matracokon továbbra is mozgás lehet érzékelhető, miközben a matrac visszanyeri az eredeti alakját, és ilyenkor lehetséges, hogy nem szól a riasztás

9. A mozgás megszüntetéséhez ügyeljen arra, hogy a kiságy stabilan álljon

10. A kiságyat nem szabad más kiságytól vagy ágytól elérhető távolságra helyezni

11. Abban a helyiségben, amelyben a készüléket használja, **NE** használjon más vezeték nélküli eszközöket (beleértve a mobiltelefonokat, mikrohullámú adókat stb.). Ezek zavarhatják a készülék jelét és a működését

12. **Az érzékelőlap műanyagból készült, és nem engedi át a levegőt.** Ezért penészedés alakulhat ki a matrac alatt az érzékelőlap területén

A penészedés elkerülése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen forgassa és levegőn szárítsa meg a matracot. **NE HAGYJA NEDVESSÉGGEL ÉRINTKEZNI.** Száraz, szőszmentes kendővel törölje tisztára

13. **Az érzékelőlap nem használható 24 hónapos kor fölött**

14. **A termék nem helyettesíti a felelősségteljes felnőtt figyelmét.**

• A termék célja, hogy segítse gyermeke felügyeletét. Ettől függetlenül azonban önnek a készülék használata mellett is megfelelő figyelmet kell fordítania gyermekeire annak biztonsága érdekében

• A készüléket **KIZÁRÓLAG** a jelen használati útmutatóban megadott javaslatok szerint használja

15. Az érzékelőlapot ne használja annak ellenőrzésére, hogy a gyermek a kiságyban van-e

16. MINDIG azonnal ellenőrizze a gyermeket, ha riasztást hall

17. Tartsa távol a kábeleket MINDEN gyermektől

18. KIZÁRÓLAG a mellékelt töltőket és adaptereket használja. Ne használjon más típusú töltőket és tápadaptereket, mivel ez károsíthatja a készüléket és az akkumulátorát (ha van a készülékben).

19. Az összeszerelést felnőtt végezze el. Összeszerelésnél tartsa távol az apró alkatrészeket a gyermekektől

20. Az utasításokat követve tesztelje a készüléket és a funkcióit, hogy a tényleges használata előtt már ismerje a működését. MINDIG ügyeljen arra, hogy az adó- és vevőegység megfelelően működjön, és hogy egymás hatósugarán belül helyezkedjenek el. Ellenőrizze rendszeresen a babaegység működését, illetve akkor is, ha megváltoztatja a helyét

21. NE érintse meg a csatlakozó érintkezőit, különösen ne éles vagy fémtárgyakkal

22. Ne használja a készüléket víz közelében Ügyeljen arra is, hogy az egységekbe NE essenek be tárgyak, és ne fröccsenjen folyadék a nyílásokon keresztül az egységekre vagy az érzékelőlapra



23. Tartsa TÁVOL a készüléket hőforrásoktól (pl. sütő, radiátor stb.). A hő károsíthatja a tokot vagy az elektromos alkatrészeket

24. MINDIG sík és szilárd felületen, felállítva helyezze el a babaegységet és a szülői egységet, és ügyeljen a megfelelő SZELLŐZÉSÜKRE. NE helyezze a készüléket kanapéra, párnára, ágyra vagy bármilyen olyan felületre, amely tömpti az általa kiadott hangot, vagy akadályozza a levegő szabad áramlását

25. A készülék 10 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten használható

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK AZ AKKUMULÁTOROKKAL KAPCSOLATBAN

26. Az akkumulátorokat MINDIG tartsa távol a gyermekektől.

27. A szülői egység akkumulátorai cserélhető nikkél-fémhidrid akkumulátorok. A vezeték nélküli érzékelőlap akkumulátora cserélhető lítium gombelem. Csak az Angelcare® által ajánlott csereakkumulátort használjon (lásd a műszaki adatokat)

- A nem megfelelő akkumulátor használata, illetve a nem megfelelő behelyezése esetén robbanásveszély áll fenn. Az elemek megfelelő behelyezésével kapcsolatban lásd a használati útmutatót
- NE okozzon rövidzárlatot a tápcsatlakozókon

28. NE használjon együtt régi és új akkumulátorokat, és csak az Angelcare® által ajánlott csereakkumulátort használjon (lásd a műszaki adatokat).

29. A termék gombelemet tartalmaz, amely lenyelés esetén mindössze két óra alatt belső kémiai égési sérüléshez vezethet, és halált okozhat. A használt elemeket azonnal ártalmatlanítsa. Az új és a használt elemeket tartsa távol a gyermekektől. Ha úgy gondolja, hogy a gyermek esetleg lenyelt egy elemet, vagy bármilyen módon elem került a testébe, forduljon orvoshoz.

30. A gombelem kis méretű, és fulladást okozhat, ezért TARTSA TÁVOL a gyermekektől.

31. Ügyeljen rá, hogy az elemek kezelésekor ne okozzon bennük rövidzárlatot vezető anyagokkal (pl. gyűrű, karkötő, kulcs)

32. Kerülje az elemek túltöltését, rövidzárlat okozását, fordított töltését, rongálását vagy elégetését, mivel ezek következtében mérgező anyagok vagy hidrogén- és/vagy oxigéngáz szabadulhat fel, vagy megnövekedhet a felületi hőmérséklet.

33. NE próbálja meg tölteni a termékhez mellékelt vagy azzal együtt használható elemeket, ha azok nem újratölthető elemek. Az elemek ez esetben felrobbanhatnak, vagy maró hatású elektrolit folyhat ki belőlük

34. Kerülje az akkumulátorok fordított polaritású behelyezését. Az elemek fordított behelyezése esetén töltés jöhet létre, ami szívárgást vagy robbanást okozhat

35. Ha a terméket 30 napnál hosszabb ideig tervezzi tárolni, vegye ki belőle az elemeket, mivel szívároghatnak, ami károsíthatja a berendezést

36. A lemerült elemeket a lehető leghamarabb távolítsa el, mivel ezek nagyobb valószínűséggel fognak ki a termék belsejében. A szívárgó vagy eresztő akkumulátorokat selejtezze ki úgy, hogy ne károsítsa a környezetet

37. NE tárolja a terméket vagy a termékhez mellékelt vagy azzal együtt használható akkumulátorokat magas hőmérsékletű vagy páratartalmú, illetve közvetlen napfénynek kitétt helyen.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

38. Érzékelőlap –

- Ha a kiságyban nincs szilárd, teljesen sima, stabil felület az érzékelőlap számára – például rugós vagy rácsos aljzat –, egy kemény lapot kell ez alá helyezni a megfelelő működése érdekében (lásd a 2. LÉPÉSBEN leírtakat)
- Az érzékelőlap használható hagyományos rugós és habmatracral, de nem használható memória-habmatracral (akár részben, akár teljesen memóriahab), üreges borselyű matracral vagy vízágygal. Ha nem biztos a matrac kompatibilitásában, forduljon az Angelcare® ügyfélszolgálatához.

39. A babaőrök nyilvános frekvenciákat használ a jelek továbbítására. A szülői egységet érhetik a környéken található más babaőröktől származó jelek vagy interferencia. A babaőrök jelét akár szomszédos lakásokban is foghatják. Magánélete védelme érdekében mindig kapcsolja ki a két egységet, ha nem használja azokat

40. Kábelek védelme – Ügyeljen arra, hogy az adapter kábelére ne lépjenek rá, és az ne szoruljon be bútorok vagy más tárgyak alá, főleg vagy közé. A tápkábeleket úgy kell vezetni, hogy minél kisebb legyen a lehetősége annak, hogy rájuk lépnek, vagy hogy bútorok vagy más tárgyak alá/főlé/közé szorulnak. Különös figyelmet kell fordítani a vezetékekre és dugaljakra, elosztókra és arra a pontra, ahol a vezetékek kilépnek a termékből. A berendezést helyezze egy könnyen elérhető konnektor közelébe. Az adaptert mindig a berendezéshez legközelebb eső, könnyen elérhető fali aljzathoz csatlakoztassa. A táphálózatról való leválasztáshoz húzza ki az adaptert

41. Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat, kiegészítőket és cserealkatrészeket használja. A termék felszerelését mindig a gyártó utasításainak megfelelően kell végezni

- NE helyezze a terméket instabil kézikocsira, állványra, háromlábú állványra, konzolra vagy asztalra. A termék leeshet, súlyos sérülést okozva a gyermeknek vagy felnőttnek, és komolyan károsítva magát az eszközt is
- CSAK a termékkel együtt szállított állványt használja
- Kizárólag az Angelcare® által meghatározott vagy az eredeti alkatrészrel minden szempontból megegyező cserealkatrészt használjon. Nem

hivatalos cserealkatrész használata tüzet vagy áramütést okozhat

42. Húzza ki a konnektorból a készüléket villámlással járó viharban, vagy ha hosszú ideig nem használja azt

43. Szervizelés – NE kísérelje meg saját kezűleg megjavítani a terméket, mivel a fedél felnyitása vagy eltávolítása (kivéve az akkumulátortartó ajtaját) veszélyes feszültségnek vagy egyéb veszélynek teheti ki önt.

- Áramellátás – lásd az útmutató műszaki adatait

44. Túlterhelés – NE terhelje túl a fali aljzatokat, hosszabbítókábeleket vagy egybeépített elosztókat. Ez tűz vagy áramütés veszélyével jár


45. Babaegység antennája – Az adóegységhez használt antennát úgy kell elhelyezni, hogy legalább 20 cm-es biztonsági távolság álljon fenn közte és a környezetében lévő emberek között. Az antennát nem szabad bővíteni, és tilos bármilyen más antennával vagy adóegységgel együtt használni

46. Tisztítás – Tisztítás előtt válassza le az egységeket. A készülék semmilyen alkatrészét NE merítse vízbe. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa

TELEPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK


A DOBOZ TARTALMA

- 1 Szülői egység
- 2 Babaegység
- 3 Állvány (babaegységhez)
- 4 Érzékelőlap
- 5 CR2450 elem (az érzékelőlaphoz)
- 6 2 db hálózati adapter
- 7 2 db AAA újratölthető akkumulátor (a szülői egységhez)

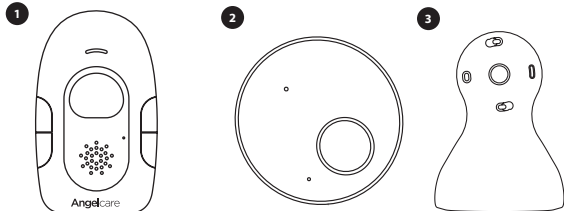


AMIRE SZÜKSÉGE VAN

- Kemény lap, ha a kiságnak nincs szilárd felülete (lásd az 2. lépésnél a „FONTOS” című megjegyzést)
- 2 db AAA tartalék alkáli elem (a babaegységhez)
- Pozitív típusú csavarhúzó

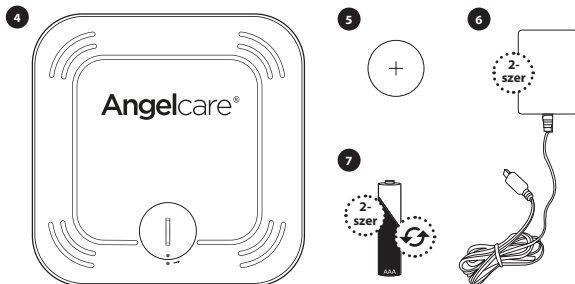


1- A SZÜLŐI EGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

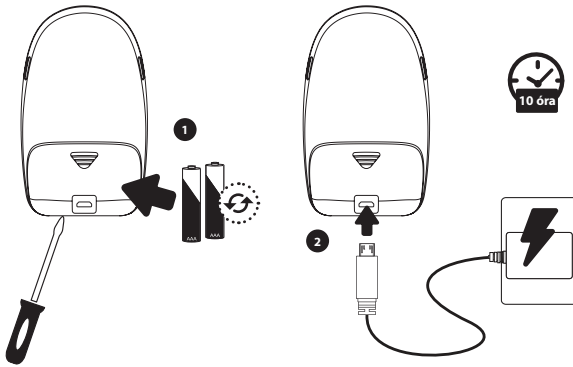


Első használat előtt töltsse a szülői egységet 10 órán keresztül A normál töltési idő 8 óra

2- AZ ÉRZÉKELŐLAP BEÁLLÍTÁSA

Az érzékelőlap a baba finom mozgásait érzékeli a matrac felületén. A riasztás csak akkor szólal meg, ha a készülék **NEM** észlel mozgást 20 másodpercig.

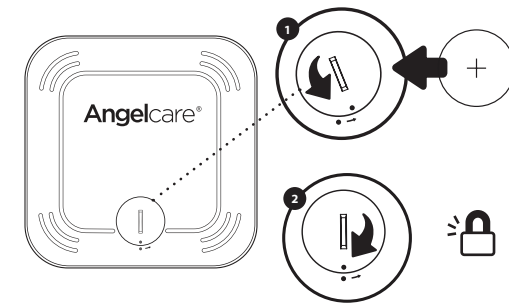

1. Távolítsa el az elemfedelelet, és helyezze be az elemet a + jellel felfelé.
2. Helyezze vissza az elemfedelelet, és a rögzítéshez fordítsa úgy, hogy a 2 pont egy vonalban legyen

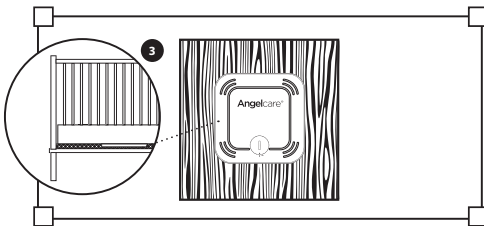

3. Vegye ki a matracot a kiságyból, helyezze az érzékelőlapot – **az Angelcare® emblémával felfelé** – az ágy aljába, körülbelül a matrac közepe alá. Ha alsó kemény lapra is szüksége van, akkor ennek a közepére kell helyezni (lásd az alábbi „FONTOS” című megjegyzést)
4. Helyezze vissza a matracot




Megfelelő elhelyezés lécekből álló ágyrács esetén

⚠ FONTOS


- Ha a kiságyban nincs szilárd, teljesen síma, stabil felület az érzékelőlap számára – például rugós vagy rácsos aljzat –, egy kemény lapot kell ez alá helyezni a megfelelő működése érdekében. A kemény lap legyen legalább 30 x 30 cm és 6 mm vastag.

A kemény lapnak nagyobbak kell lennie az érzékelőlapnál

- Az érzékelőlap használható hagyományos rugós és habmatracral, de nem használható memória-habmatracral (akár részben, akár teljesen memóriahab), üreges belsejű matracral vagy vízágygal. Ha nem biztos a matrac kompatibilitásában, forduljon az Angelcare® ügyfélszolgálatához. A kemény lap állandó nyomást biztosít az érzékelőlapnak, így az akkor is képes érzékelni a baba mozgását, ha az a kiságy szélén tartózkodik

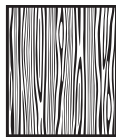


3-A BABAEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

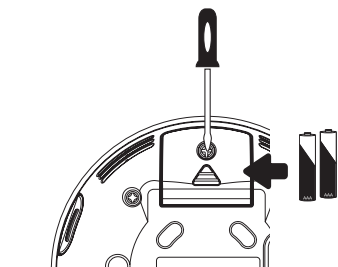

Megjegyzés:

- Az alkáli elemek (nincsenek mellékelve) tartalék áramforrásként áramszünet esetén is biztosítják az áramellátást

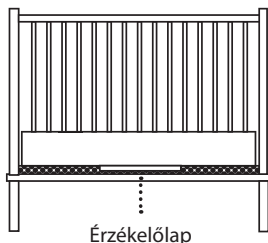


Helyezze el a babaegységet és az adapterkábelét legalább **1 méterre** a kiságytól




4-A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

SZÜLŐI EGYSÉG

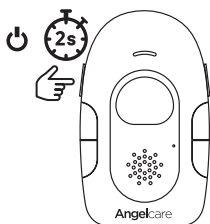


BABAEGYSÉG

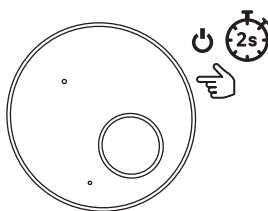

AZ ÉRZÉKELŐLAP MŰKÖDÉSÉNEK SZÜNETELTETÉSE ÉS ÚJRAINDÍTÁSA

- Lehetővé teszi az érzékelőlap működésének szüneteltetését, amikor kivesszi a babát a kiságyból például etetéshez vagy dédelgetéshez. Mielőtt visszatenné a babát a babaágyba, indítsa el újra az érzékelőlapot

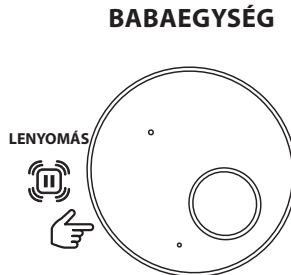


Megjegyzés:

- A babaegység és a szülői egység előre párosítva vannak
- Minden alkalommal, amikor bekapcsolja a babaegységet, az automatikusan kalibrálja a belső hőmérőjét a pontosságának biztosítása érdekében. Ez kb. 30 percet vesz igénybe
- A szülői egység képernyőjén villogni kezd a „Hatótávolságon kívül” ikon, majd a helyiség hőmérsékletét és funkciókat jelző ikonok is. A kapcsolódási folyamat 30 másodpercen belül befejeződik. Ha ez nem ér véget 30 másodpercen belül, ki kell kapcsolni, majd újra kell indítani az egységet
- Ha kikapcsolja a babaegységet, megszólal a Hatótávolságon kívül riasztás. A kapcsolat visszaállításához kapcsolja újra be a babaegységet

AZ ÉRZÉKELŐLAP ELLENŐRZÉSE

- Az érzékelőlap a gyermekeken kívül más rezgést vagy mozgást is érzékelhet. Ezek a rezgésforrások akadályozhatják az Angelcare® készülék működését. A készülék nem riaszt, ha a gyermekeken kívül más mozgást is érzékel
- 3-féle érzékenységi beállítás van: alacsony, közepes és magas. Az egység közepes érzékenységre van beállítva (alapbeállítás), és szükség szerint átállítható
- Az érzékelőlap hibásan az Ön mozgásait fogja érzékelni, ha megérinti a kiságyat
- Ha a készülék 15 másodpercen keresztül nem érzékel mozgást, egy sípszóbból álló előriasztást ad, hogy a baba megmozduljon. Ha továbbra sem érzékel mozgást, 20 másodperc után megszólal a fő riasztás: folyamatosan ismétlődő hosszú sípszók

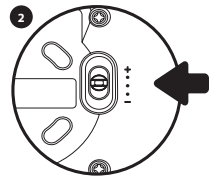

AZ ÉRZÉKELŐLAP MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

- Helyezze az érzékelőlapot a baba alvóterületének hozzávetőleges középpontjába, és helyezze vissza a matracot
- Kapcsolja BE a babaegységet és a szülői egységet, majd ellenőrizze, hogy mindkét egység párosítva van-e (össze van-e kapcsolva)
- Finoman, egyenletes mozgással simítson végig a matrac egyik sarkán a kezével, majd ezt tegye meg **másodszer** is, hogy az érzékelő mozgást érzékeljen. Ha mozgást érzékel, 5 másodpercenként „TIKK” hangot ad ki.
- Lépjén távolabb a kiságytól
- 20 másodperc elteltével a babaegység és a szülői egység riasztást ad. Ha **nem szólal meg** a riasztás, ellenőrizze, hogy minden megfelelően van-e beállítva, és próbálja újra. Ellenőrizze az elemszinteket minden egységen, és kövesse a „NINCS RIASZTÁS” című részben leírtakat. Lehetséges, hogy az érzékenységi szintjét egy szinttel lejjebb kell állítani, hogy ne érzékeljen más rezgéseket és mozgásokat.
- Ha a riasztás megszólal, finoman simítson végig a matrac egyik sarkán a kezével, majd ezt tegye meg **másodszer** is, hogy az érzékelő mozgást érzékeljen. A mozgás érzékeléséig és a riasztás elhallgatásáig akár 8 másodperc is eltelhet.
- Ha a riasztás folytatódik annak ellenére, hogy kétszer finoman végigsimította a matrac sarkát, állítsa az érzékenységet magasabbra, és ismétlje meg ezt a tesztet




⚠ FONTOS

- Első használat előtt tesztelje a készüléket
- Használat előtt és utána rendszeresen (mielőtt a gyermeket a kiságyba helyezi) ellenőrizni kell, hogy az érzékelőlap nem érzékel-e a környezetből származó mozgást vagy rezgést
- Tesztelje a készüléket minden alkalommal, ha új helyre teszi az érzékelőlapot

5- A KÉSZÜLÉK MEGISMERÉSE

BABAEGYSÉG

- 1 Bekapcsolásjelző / alacsony töltöttség jelzője
- 2 Mikrofon
- 3 Mozgásérzékelő lap jelzőlámpája / Hőmérsékletjelzés
- 4 Hőmérséklet-jelzőfény BE-/KIKAPCSOLÁSA
Lehetővé teszi a gyűrű alakú LED kikapcsolását. / Hívó (lenyomni és nyomva tartani) Lehetővé teszi a szülői egység megkeresését.
- 5 Hangszóró
- 6 BE-/KIKAPCSOLÁS
- 7 Mikro-USB csatlakozó
- 8 Mozgásérzékelő lap érzékenységi kapcsolója
- 9 Mozgásérzékelő lap működésének szüneteltetése
- 10 Elemtartó rekesz

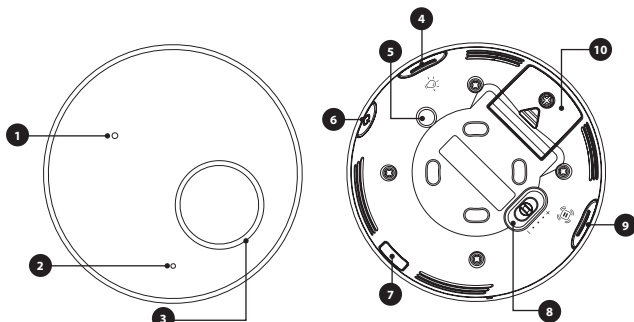


ELÜLSŐ OLDAL

HÁTLAG


SZÜLŐI EGYSÉG

- 1 Mozgásérzékelés jelzője (TIKK)
- 2 BE-/KIKAPCSOLÁS
- 3 Menü (megnyomni és nyomva tartani) / Kilépés a menüből
- 4 Választás megerősítése vagy funkció megváltoztatása / Érzékelőlap működésének szüneteltetése (megnyomni és nyomva tartani)
- 5 Válaszgomb (a beszéléshez nyomja meg és tartsa benyomva)
- 6 Hangerő növelése / FEL
- 7 Hangerő csökkentése (NÉMA üzemmódban a hangszóró ikon villog, és a szülői egység kijelzőjén L0 látható) / Le
- 8 Újratölthető akkumulátor rekesz
- 9 Mikro-USB töltőcsatlakozó

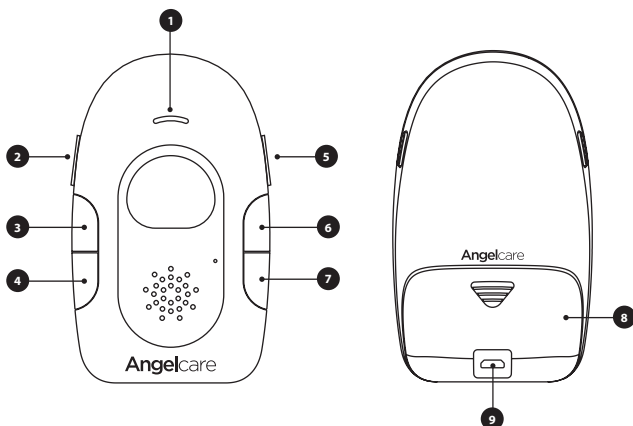

A SZÜLŐI EGYSÉG KÉPERNYŐJÉN TALÁLHATÓ IKONOK

- 1 Hőmérséklet-kijelző
- 2 Hőmérséklet-riasztások
- 3 Érzékelési mód kijelzői
- 4 Hangfunkció jelzőlámpája
- 5 Vételi minőség kijelzője
- 6 Szülői egység elemöltöltés-jelzője
- 7 VOX mód kijelzője
- 8 Celsius vagy Fahrenheit fok kijelzője

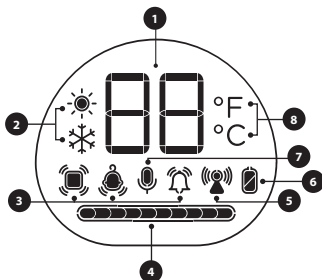

A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI



Megjegyzés:

- A beállítások a szülői egység MENÜ gombjának ≡ lenyomásával és nyomva tartásával nyithatók meg.
- A menüpontok egymás után választhatók ki. Amikor röviden megnyomja az OK gombot, a következő menüfunkcióra ugrik

Mozgásérzékelés be-/kikapcsolása



Az érzékelőlap riasztást ad, ha 20 másodpercig nincs mozgás. Ha 20 másodperc elteltével NEM észlel mozgást, mind a szülői egység, mind a babaegység hangszórói egymást követő sípszókat adnak ki: ez a légzéskimaradás miatti riasztás

Ha a baba idősebb, KI lehet kapcsolni a mozgásérzékelést, és a babaőrző használható csak a hang továbbítására



TIKK funkció be-/kikapcsolása

Ha a mozgásérzékelés be van kapcsolva, 5 másodpercenként TIKK hang hallható



Hang (a babaegység felől a szülői egység felé) be-/kikapcsolása

Lehetővé teszi a készülék használatát csak légzésfigyelésre



VOX funkció beállítása

Hangra aktiválódó (VOX bekapcsolva): Ez azt jelenti, hogy csak hang észlelése esetén kezd el hangot továbbítani, a beállított érzékenységi szintnek megfelelően.

Energiatakarékosság céljából az átvitel leáll, ha 10 másodpercen át nem érzékel hangot. Hang észlelése esetén a továbbítás automatikusan újraindul



Folyamatos hang (VOX kikapcsolva): Azt jelenti, hogy a hangfigyelés folyamatosan be van kapcsolva, és a készülék továbbítja az összes hangot

VOX érzékenységének beállítása (ha a VOX be van kapcsolva)

A mikrofon érzékenysége állítható (4 fokozatban). Tehát a rendszer csak akkor továbbít hangot, ha az eléri az Ön által meghatározott szintet



Celsius vagy Fahrenheit fok kijelzésének beállítása

Hőmérséklet-riasztás be-/kikapcsolása

Akkor történik riasztás, ha a hőmérséklet eléri a beállított maximális vagy minimális hőmérsékletet



Alsó riasztási hőmérséklet beállítása (ha a hőmérsékleti riasztás aktív)




Felső riasztási hőmérséklet beállítása (ha a hőmérsékleti riasztás aktív)

! FONTOS

KILÉPÉS



- A főmenüben végzett módosítások csak akkor lépnek érvénybe, ha a KILÉPÉS gomb megnyomásával megerősíti őket
- Menü módban a rendszer ideiglenesen kikapcsolja a szülői és babaegység közötti hangátvitelt

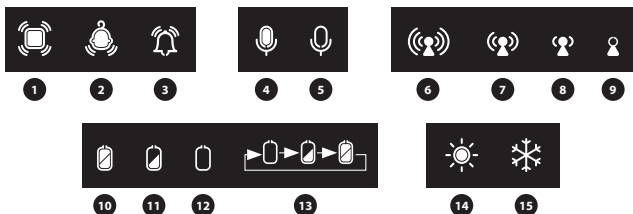

- 1 Az érzékelőlap mozgásérzékelő funkciója be van kapcsolva
 - 2 A hang be van kapcsolva
 - 3 A „TIKK” funkció be van kapcsolva
 - 4 A hangra aktiválódó (VOX ON) funkció működik
 - 5 Folyamatos hang (VOX OFF) van bekapcsolva
- Vételi minőség:
- 6 Jó kapcsolat
 - 7 Közepes erősségű kapcsolat
 - 8 Gyenge kapcsolat
 - 9 Hatótávolságon kívül

Szülői egység elemtöltöttség-jelzői:

- 10 Tele
- 11 1/2
- 12 Lemerült
- 13 Töltés alatt


Hőmérséklet-riasztások

- 14 Túl meleg
- 15 Túl hideg

6-RIASZTÁSI ÉRTESEK

SZÜLŐI EGYSÉG

- 1 Légzéskimaradás miatti riasztás**
 - Ha a babaegység 15 másodperc elteltével NEM érzékel mozgást, egyetlen riasztás előtti TIKK hangot ad ki – ez az előriasztás
 - Ha 5 további másodperc elteltével SEM érzékel mozgást, a szülői egység és a babaegység hangszórói egymást követő sípszókat adnak ki: ez a légzéskimaradás miatti riasztás
 - Az érzékelőlap ikonja és a hangerő ikonja villog a szülői egységen
- 2 Hatótávolságon kívül riasztás**
 - A riasztás akkor kapcsol be, ha a két egység nincs kapcsolatban egymással
 - A szülői egység 15 másodpercenként hármas síphangot ad ki
 - A képernyőn villogni kezd a Hatótávolságon kívül ikon
- 3 Szülői egység eleme merülöbön**
 - A szülői egység 30 másodpercenként egymás után 2-szer sípol, és az alacsony elemtöltöttség ikon villog
- 4 Hőmérséklet-riasztások**
 - A szülői egység 5 másodpercenként egymás után 3-szor sípol, és a hőmérséklet ikon villog (túl alacsony hőmérséklet esetén hópehely, túl magas esetén nap)

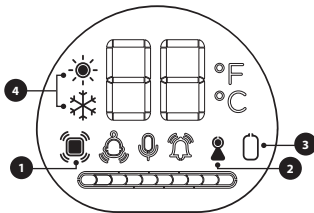

BABAEGYSÉG

1 Bekapcsolásjelző és alacsony töltöttségi szint lámpája

Zölden világít: A készülék be van kapcsolva

Zölden villog: A készülék a tartalékelemeket használja

Sárgán villog: A készülék elemei lemerülőben vannak

2 Mozgásérzékelő lap és hőmérséklet jelzője

Pirosan villog: Nem érzékelhető mozgás

• Mind a szülői egység, mind a babaegység hangszórója folyamatosan, hangosan sípol: ez a lézégskimaradás miatti riasztás

Fehéren villog: A készülék működése szünetel.

• Mind a szülői egység, mind a babaegység egyetlen sípszót ad ki 20 másodpercenként

Világoskéken villog: Megszakadt a kapcsolat a babaegység és az érzékelőláp között

• Mind a szülői egység, mind a babaegység folyamatosan, hangosan sípol


Pirosan világít: Túl magas a szoba hőmérséklete

• A szülői egység 5 másodpercenként egymás után 3-szor sípol

Kéken világít: Túl alacsony a szoba hőmérséklete

• A szülői egység 5 másodpercenként egymás után 3-szor sípol

Fehéren világít: A szoba hőmérséklete megfelelő

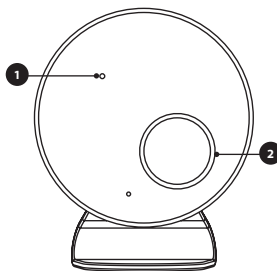

Megjegyzés:

A riasztás leállításához nyomja meg a szülői egység bármelyik gombját vagy a babaegységen az Érzékelőláp működésének szüneteltetése gombot

Az érzékelőláp riasztása esetén, ha megnyomta bármelyik gombot, akkor a készülék szünetelteti az érzékelőláp működését. Szüneteltetési módban a mozgásérzékelési funkció ki van kapcsolva. A mozgásérzékelés visszakapcsolásához egyszerűen nyomja meg a szülői egység bármelyik gombját.

7- HIBAEHÁRÍTÁS

AZ ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOR KEZELÉSE

- Első használat előtt mindig 10 órán át töltsz az elemeket.
- Az elemek élettartamának maximalizálása érdekében ajánlott időnként teljesen lemeríteni az elemeket. Az elemek teljesítménye csökkenhet, ha folyamatosan tölti őket. Ha nem használja a szülői egységet, kapcsolja ki.
- A lemerülőben lévő elemek ronthatják a babaórzó teljesítményét. Ha nem elégedett a szülői egység/babaórzó teljesítményével, cserélje ki az újratölthető elemeket (2 db NiMH újratölthető elem).
- Ajánlott félévente kicserélni az elemeket.

KAPCSOLAT MEGSZAKADÁSA A SZÜLŐI EGYSÉG ÉS A BABAEGYSÉG KÖZÖTT


- Ha megszakad a kapcsolat, első lépésként vigye közelebb egymáshoz a szülői egységet és a babaegységet, és ellenőrizze, hogy mindkét egység be van-e kapcsolva, így visszaállhat a kapcsolat. Ha továbbra sincs kapcsolat, és hatótávolságon kívüli figyelemztetés sem jelenik meg, akkor, és csak akkor kezdje meg az alább részletezett újrapcsolódási műveletet.



1. Kapcsolja **KI** mindkét egységet
2. Kapcsolja **BE** a babaegységet
3. Nyomja meg a babaegység **főkapcsolóját** 4-szer egymás után





ZÖLD

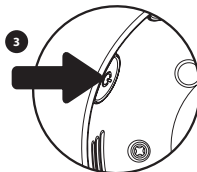A babaegység érzékelőláp-jelzője gyorsan zölden villog (azt jelzi, hogy a babaegység kapcsolódási módban van)



4. Kapcsolja **BE** a szülői egységet. Villog a Hatótávolságon kívül  ikon, amely jelzi, hogy a szülői egység kapcsolódási módban van)
5. Nyomja le és tartsa lenyomva a szülői egységen a **Válasz** gombot, amíg egy sípszót nem hall
6. Nyomja meg a szülői egységen az **OK** gombot. A Hatótávolságon kívül ikon  gyorsabban kezd villogni, jelezve, hogy a szülői egység kapcsolódási módban van

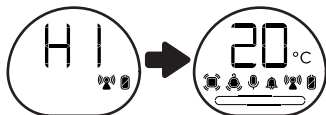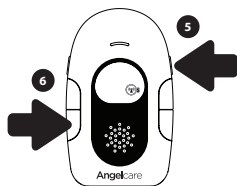


- A szülői egység az újrapcsolódás során a H1–H2 ikont jeleníti meg
- Az újracsatlakozás akkor sikeres, ha a szülői egységen a szokásos képernyő jelenik meg

KAPCSOLAT MEGSZAKADÁSA AZ ÉRZÉKELŐLAP ÉS A BABAEGYSÉG KÖZÖTT

- Ha megszakad a kapcsolat, első lépésként vigye közelebb egymáshoz az érzékelőlapot és a babaegységet, és ellenőrizze, hogy mindkét egység be van-e kapcsolva, így visszaállhat a kapcsolat. Ha továbbra sincs kapcsolat, akkor, és csak akkor kezdje meg az alább részletezett újrapcsolódási műveletet. Az újrapcsolódási művelet idejére gondoskodjon arról, hogy ne legyen más vezeték nélküli érzékelőlap a szobában.

1. A babaegység és a szülői egység kikapcsolása
2. Távolítsa el és helyezze vissza az érzékelőlap elemét
3. Kapcsolja be a babaegységet úgy, hogy 2 másodpercig lenyomva tartja a főkapcsolóját

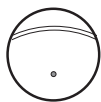


A babaegység bekapcsolásjelzője zölden világít

4. Nyomja le és tartsa lenyomva a babaegység Szüneteltetés gombját 3 másodpercig



A babaegységen érzékelőlap-jelzője kéken világít

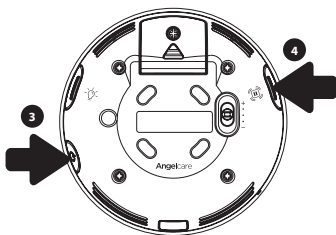

- Az újrapcsolódási művelet 30 másodpercen belül befejeződik.
- Az újrapcsolódás akkor sikeres, amikor a babaegység egy megerősítő hangot ad ki.

MOZGÁSÉRZÉKELŐ LAP – NINCS RIASZTÁS

- Lehetséges, hogy az érzékelőlap a gyermekon kívül más rezgést vagy mozgást érzékel, és nem szólal meg a riasztás.
- Lásd: 3–11. figyelmeztetés, illetve 4. LÉPÉS, AZ ÉRZÉKELŐLAP ELLENŐRZÉSE.

MOZGÁSÉRZÉKELŐ LAP – TÉVES RIASZTÁSOK (AZ ÉRZÉKELŐLAP JELZŐLÁMPÁJA PIROSAN VILLOG)

- Cserélje ki az érzékelőlap CR2450 típusú elemét.
- Kapcsolja KI a babaegységet.
- Az érzékelőlap többféle okból adhat téves riasztást. Ha riasztás hallható, mindig azonnal ellenőrizze a baba állapotát:
 - A leggyakoribb ok, hogy a babaegységet nem kapcsolják ki, miután a gyermeket kivették a kiságyból
 - Győződjön meg róla, hogy nincsen ágynemű a matrac és az érzékelőlap között
 - További ok lehet, hogy az érzékelőlapot nem megfelelően helyezte az ágymatrac alá. Gondoskodjon arról, hogy az érzékelőlap sík, stabil felületen legyen, és a nyomtatott oldala felfelé nézzen
 - Előfordulhat, hogy módosítania kell az érzékenységi szintet
- Lásd: 3–11. figyelmeztetés, illetve 4. LÉPÉS, AZ ÉRZÉKELŐLAP ELLENŐRZÉSE

NEM VILÁGÍT A BABAEGYSÉG BEKAPCSOLÁSJELZŐJE (ZÖLD LÁMPA)

- Ellenőrizze a kapcsolódást, vagy váltson másik konnektorra.
- Kapcsolja be a babaegységet úgy, hogy 2 másodpercig lenyomva tartja a főkapcsolóját.

GYENGE VÉTEL

- Vigye közelebb egymáshoz az egységeket.
- Változtassa meg az egyik vagy mindkét egység helyzetét.
- Helyezze az egységeket lapos felületre, úgy, hogy a baba ne érje el őket.
- Cserélje ki az elemeket, vagy töltsse fel a szülői egységet.

HA NINCS HANG

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva mindkét egység.
- Ellenőrizze, hogy az egységek működő konnektorba vannak-e bedugva.
- Ellenőrizze az egységekbe helyezett elemeket (cserélje vagy töltsse fel őket, ha szükséges).
- Hozza közelebb a szülői egységet a babaegységhez.

STATIKUS ZAJ, TORZÍTÁS, INTERFERENCIA (MÁS BABAŐRZŐKTŐL, VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONOKTÓL, ADÓ-VEVŐKTŐL STB.)

- Fordítsa el a szülői egységet, vagy vigye el az interferencia forrásának közeléből.

GERJEDÉS (A SZÜLŐI EGYSÉG HANGOS ZAJT AD KI)

- Helyezze egymástól távolabb az egységeket (legalább 3 méteres távolságra).
- Csökkentse a szülői egység hangerejét.

A SZÜLŐI EGYSÉG KÉPERNYŐJE FEKETE (A SZÜLŐI EGYSÉG KI VAN KAPCSOLVA)

- Kapcsolja vissza a szülői egységet a főkapcsoló lenyomásával és nyomva tartásával.
- Cserélje ki az elemeket, vagy töltsse fel a szülői egységet.

NINCS ÁRAMELLÁTÁS

- Ellenőrizze és ha szükséges, cserélje az elemeket.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

Az Angelcare® a termék eredeti tulajdonosa felé a jótállási időszak (lásd a jótállási időszakokat országonként mutató táblázatot) alatt garantálja, hogy az Angelcare® készülék mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Amennyiben a készüléknél a jótállási időszak alatt az utasításoknak megfelelő, rendeltetésszerű használat esetén hibás működést tapasztal, az Angelcare® saját döntése szerint ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a terméket. A jótállás és a jótállási időszak érvényesítéséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazónkkal.

A termékhez mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot, ami lehet a termékről kapott számla vagy bármilyen más dokumentum, mely igazolja, hogy a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem múlt el. A termék javításának vagy cseréjének és az Önhöz történő visszaküldésének díját az Angelcare® viseli.

A jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, mely nem megfelelő karbantartás, baleset, nem megfelelő feszültségen történő használat vagy más, nem rendeltetésszerű használat következtében sérült meg. A jótállás semmissé válik abban az esetben is, ha a tulajdonos bármilyen javítást vagy módosítást végez a terméken. Az Angelcare® a termék használata kapcsán az ebből adódó esetleges következményekért semminemű felelősséget nem vállal. A jótállás kizár minden, fent nem ismertetett felelősséget. Semminemű más jótállás nem érvényes.

A jótállás nem vonatkozik a nem az Angelcare® márka alá tartozó termékekre és kiegészítőkre, vagy azokra a problémákra, melyek a termékhez tartozó utasításokkal ellenkező használatból vagy azok figyelmen kívül hagyásából adódnak, vagy amelyeket nem az Angelcare® által mellékelt vagy gyártott kiegészítők, alkatrészek vagy tartozékok használata okozott.

A TÖRVÉNYBEN BIZTOSÍTOTT JOGOK ORSZÁGONKÉNT VÁLTOZNAK. EGYES ORSZÁGOKBAN TILOS A VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA, TEHÁT LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM ÉRVÉNYESEK. AZ ANGELCARE® SEMMILYEN MÓDON ÉS ESETBEN NEM FELELŐS A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZMÉNYEIÉRT.

FONTOS! Ez az Angelcare® készülék higiéniai terméknek minősül. Kérjük, ne vigye vissza az üzletbe. Ha kérdése merült fel, vagy segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, mielőtt visszavinné a terméket az üzletbe.

A jótállással kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A helyi forgalmazó elérhetőségét a webhelyünkön találja: <https://international.angelcarebaby.com/>

Jótállási időszak országonként	
Egyesült Királyság, Dél-Afrika, Oroszország, Magyarország, Szlovénia	1 év
Más országok	2 év

MŰSZAKI ADATOK

Hatótávolság:

Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen):

- A szülői egység és a babaegység között:
akár 250 méter.
- Az érzékelőlap és a babaegység között:
akár 6 méter.

Hőmérsékleti ajánlások:

Magas hőmérséklet riasztás: 22 °C

Alacsony hőmérséklet riasztás: 16 °C

Áramellátás:

2 db AAA alkáli elem (nincs mellékelve) vagy 100–240 V AC / 5 V DC, 0,6 A adapterek a babaegységhez.

2 db AAA újratölthető elem és 100–240 V AC / 5 V DC, 0,6 A adapterek a szülői egységhez.

1 db 3 V-os CR2450 elem (mellékelve) a vezeték nélküli érzékelőlaphoz

Figyelem! Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek.

Az elemek nem megfelelő behelyezése esetén robbanásveszély áll fenn. A szülői egységben található elem a felhasználó által cserélhető, újratölthető lítiumion-akkumulátor. Csak az Angelcare® által ajánlott csereakkumulátort használjon. Ha a csereakkumulátorokkal és -elemekkel kapcsolatos információkat szeretne, vegye fel a kapcsolatot az Angelcare® ügyfélszolgálatával a www.angelcarebaby.com címen, illetve a helyi forgalmazónkkal. A csereakkumulátorok mellett megtalálja a használati útmutatójukat. Az elemeket tartsa távol a gyermekektől.

Elemek:

- NE használjon együtt szabványos alkáli (szén-cink) és újratölthető (NI-CD, NIMH stb.) elemeket.
- FIGYELEM! A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ ELEMOK HASZNÁLATA ROBBANÁST OKOZHAT

ErP-megfelelés

KIZÁRÓLAG A KÖVETKEZŐ MODELLSZÁMÚ ANGELCARE® MÁRKÁJÚ TÁPEGYSÉGEKET HASZNÁLJA:

EURÓPAI UNIÓ (IDEÉRTVE NÉMETORSZÁGOT) – K055050060G

az Egyesült Királyságban – K055050060B

Adatátvitel:

A szülői egység és a babaegység közötti adatátvitel a 1,8 GHz-es frekvencián valósul meg Európában, Ázsiában, Afrikában és Ausztráliában.

A babaegység és az érzékelőlap közötti adatátvitel a 2,4 GHz-es frekvencián valósul meg Európában, Ázsiában, Afrikában és Ausztráliában.

Rádiófrekvenciás jel maximális erőssége:

• 24 dBm (250 mW) a szülői egység és a babaegység között

• 4 dBm (2,5 mW) a babaegység és az érzékelőlap között

RF-csatorna száma a szülői egység és a babaegység között: 5

RF-csatorna száma a szülői egység és az érzékelőlap között: 79

Az Angelcare Monitors Inc. ezúton nyilatkozik, hogy ez a készülék teljesíti a 2014/53/EU irányelv előírásait. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon található: <https://angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>

Rádiófrekvenciás expozíció: Ez a készülék úgy van tervezve és gyártva, hogy megfeleljen az EU nem ellenőrzött környezetre érvényes rádiófrekvenciás (RF) sugárterhelési korlátozásainak. A megfelelőség fenntartásához a normál működés során nem szabad a babaegységhez 20 cm-nél közelebb tartózkodni.

VÉDJE A KÖRNYEZETET!

Az áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvények és szabályozások szerint a terméket és/vagy az akkumulátorát nem szabad a háztartási hulladék-gyűjtőbe tenni. Amikor a termék vagy az eleme elérte az élettartama végét, vigye el egy, a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás segít megőrizni a természeti erőforrásokat és megvédeni az emberek egészségét és a környezetet. Az akkumulátor eltávolításáért lásd a használati útmutatót.

A készülék megfelelőségét a rajta található jelzések mutatják.



TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy az Angelcare® termékét választotta. Az Angelcare® a termékek fejlesztése és gyártása során a legnagyobb gondossággal jár el, valamennyi terméke megfelel a nemzetközi szabványoknak. A cég termékeire 12 hónap garanciát vállal, mely a vásárlás napjától számítva él. A vásárlás napján kapott számlát, vagy fizetési blokkot és/vagy a készülék bélyegzett jótállási jegyét okvetlenül őrizze meg, mert jótállási igényét ezekkel érvényesítheti. A jótállás időtartama alatt minden olyan hiba esetén, amelynek eredete gyártási hibára vagy anyaghibára vezethető vissza, a termék hibás főegységét cseréljük. A készülékek utólagos javítását a gyártó a készülék jellege miatt nem engedélyezi.

A csere időtartama a bejelentéstől (a termék beérkezéséig) számított kb. 15 nap. Ez a jótállás nem vonatkozik az olyan termékekre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rossz feszültség, helytelen alkalmazás, vagy használat, ill. nem megfelelő elemek használata miatt sérült meg. A garancia szintén nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos javíttatta a készüléket, vagy átalakította.

Meghibásodás esetén a termék főegységeinek cseréjéért 3 munkanapon belül az eladó szerv, ezt meghaladóan a forgalmazó végzi, kérjük utóbbi esetben ezt okvetlenül jelezze írásban az alábbi elérhetőségen: info@angelcare.hu.

JÓTÁLLÁSI JEGY

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkre a 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet alapján.

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk. 8:1. §). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. § alapján.

2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A termék, vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.

3. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót.

4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.

5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.

6. A jótállási igény a teljeskörűen kitöltött, eredeti jótállási jeggyel érvényesíthető.

7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.

8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) érvényesítheti. Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhöz kell eljuttatni, postai úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve ha a fogyasztó a küldeményről és a meghibásodásról előzetesen írásban tájékoztatta. Személyes leadásra, átvételre nincs mód.

10. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a forgalmazó a fogyasztó kívánására köteles azt kicserélni.

11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következő jogszabályok és rendeletek szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Kormányrend.; Ptk. XXIV. fejezet; 19/2014 (IV.29) NGM Rend. Hibás teljesítés miatt a fogyasztó a Ptk. 6:159.§ par. alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott kellekszavatossági jog lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

12. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlát/blokkot és/vagy lebélyegzett, kitöltött jótállási jegyét feltétlenül őrizze meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerződés megkötését.

13. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

14. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

15. Jótállási igény nem érvényesíthető a következő esetekben:

- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése esetén a jótállási jegy érvénytelen.
- A használati utasítástól eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
- Átalakítás, hibás, vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
- Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre, vagy tartozékokra.
- Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bármilyen beavatkozás esetén.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy az ANGELCARE® AC127 típusú készülékek a CE nemzetközi jelzéssel vannak ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabvány-előírásoknak és irányelveknek.

Az EU megfeleléségi nyilatkozatot a forgalmazótól kérheti el.

TERMÉK TÍPUSA: ANGELCARE® AC127 típusú készülék	A TERMÉK GYÁRTÁSI SOROZATKÓDJA:
VÁSÁRLÁS DÁTUMA:	ELADÓ SZERV BÉLYEGZŐJE, ALÁÍRÁS:

AZONNALI INTÉZKEDÉSEK CSECSEMŐKORI LÉGZÉSKIMARADÁS ESETÉN

Amennyiben a légzésfigyelő megszólal, azonnal ellenőrizze, hogy a riasztás valós-e. Téves riasztás esetén derítse fel ennek okát, változtasson a gyermek kiságykörülményein, vagy fokozza a készülék érzékenységet.

Riasztás esetén a következő életfunkciókat azonnal ellenőrizze gyermekénél:

- a baba lélegzik-e,
- van-e a csecsemőnek szívverése;
- megfelelő-e a gyermek vérkeringése.

A légzés ellenőrzése a legegyszerűbb, a mellkas emelkedő-süllyedő mozgása szabad szemmel is könnyen látható, a gyermek arcához közel hajolva a száj- és ornyílásnál légző hang (szuszogás) hallható. A csecsemő szívverését az ismert testpontokon lehet pulzustapintással ellenőrizni, nyaki- vagy csukló- verőér esetén. A vérkeringés ellenőrzésének legegyszerűbb módja a baba arcszínének megvizsgálása. Egészséges keringés esetén a gyermek arcbőre rózsaszínű, megfelelő vérkeringés hiánya esetén a szín kékeszürke.

A három funkció mindegyike fontos, de a készülék riasztása a légzőmozgás kimaradását jelzi.

Amennyiben a gyermek nem lélegzik, azonnal hívja a mentőket a 104, vagy 112 telefonszámokon, és a következő ÉLETMENTŐ INTÉZKEDÉSEKET az életfunkciók ismételt beindulásáig, vagy a mentők kéréséig a leírtak szerint végezze.

Ha a gyerek ...	Megfelelő SÜRGŐS intézkedések
...eszméletlen	Kicsit döntse hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, kb. 40-szer percenként. Ne alkalmazzon szívmasszázst! Folytassuk a lélegeztetést addig, amíg a gyermek újra magától lélegzik, vagy amíg a mentők át nem veszik.
...nem lélegzik	
...van pulzusa	
...eszméletlen	Kicsit döntse hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, 3 lélegeztetéssel Utána alkalmazzon 15 szívmasszázst, majd ismét 3 lélegeztetést. Csak akkor hagyja abba az intézkedéseket, ha a gyermek ismét maga lélegzik.
...nem lélegzik	
...nincs pulzusa	

MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS

1. Kicsit döntse hátra a baba fejét. Tegye az egyik kezét a baba homlokára, másik kezének két ujját az álla alá. Így döntse hátra a baba fejét. (a. kép) Ha lélegeztetéskor nem emelkedik a baba mellkasa, akkor azonnal ellenőrizze, hogy a megfelelő pozícióban van-e a baba feje. A leggyakoribb hiba a mesterséges lélegeztetéskor a nem megfelelő fejpozíció.



2. Száj és orr körülzárása

Tegye a száját a csecsemő orrára és szájára olyan szorosan, amennyire tudja. (b. kép)



3. Három levegő befúvás

Anyi levegőt fújjon a csecsemőnek, amennyit Ön egy könnyed levegővétellel a szájában tud tartani. A csecsemő mellkasa megemelkedik, amikor befújja a levegőt, és lesüllyed kilégzésnél. Egy befúvás kb. 1-1,5 másodpercig tart. A befúvások között a csecsemő orrát és száját szabadon kell hagyni, így önállóan bekövetkezik a kilégzés. A befúvás után fordítsuk fejünket oldalra úgy, hogy a gyermek légzésmozgását figyelhessük. (c. kép)



Ha nem emelkedik a baba mellkasa, akkor ez abból is következhet, hogy valami elzárja a baba légcsövét. Szüntesse meg az akadályt, fordítsa oldalra a baba fejét és a kisebbik ujjával törölje ki a baba száját, majd fordítsa vissza a gyerek fejét az előző pozícióba és folytassa a lélegeztetést. (d.kép)



SZÍVMASSZÁZS

1. Feltételek

Ahhoz, hogy szívmasszázszt végezhesen, szilárd felületre van szükség. Egy asztal, vagy pelenkázó megfelel erre a célra, de ha nincs a közelben akkor a padló is alkalmas lehet. Nem szabad szívmasszázszt matracon végezni, mert az utórugózást eredményez. A következő lépésekhez, hogy a helyes nyomási pontot megtaláljuk, a gyermek felsőtestét szabaddá kell tenni.

2. Nyomási pont

Képzelden el egy összekötő vonalat a csecsemő két mellbimbója között. Jobb keze mutatóujját helyezze e vonal alá, és szorosan mellé a középső és gyűrűsujját. (a.kép) Emelje fel a mutatóujját és így a gyűrűs- és középső ujjával meg tudja nyomni a baba mellkasát. A gyűrűs- és középső ujjá így 0,5-1 cm-rel a mellbimbókat összekötő vonal alatt vannak



3. 15 szívmasszázs

A mellkas csont nyomásával nyomást gyakorol a szívre is, amellyel egy szükségvértkeringést indít be, és ezzel eljut az oxigén a létfontosságú szervekhez. Ahhoz, hogy a szív az összenyomás után újra megtelhesen vérrel, figyelni kell arra, hogy a mellkas csont ismét tehermentesítve legyen. Ekkor az ujjat nem kell a mellkasról felemelni, mert elmozdulhat a helyes nyomási pontról. A nyomási mélység a mellkas keresztmetszet egyharmada kell hogy legyen, ez csecsemők esetében kb. 2 cm. Ahhoz, hogy a szívmasszázs a normál szívizom összehúzódásának megfelelően, nem kell hirtelen nyomással végezni a szívmasszázszt, hanem finoman úgy, hogy a szív nyomása annyi ideig tartson, mint a szívizom elernyedése. (b. kép)

Elérhetőség

FONTOS! Ez az Angelcare® készülék higiéniai terméknek minősül. Kérjük, ne vigye vissza az üzletbe.

Ha kérdése merült fel, vagy segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, mielőtt visszavinné a terméket az üzletbe.

Az Angelcare® büszke minden termékére. Ha nem elégedett maradéktalanul a termékkel, vagy kérdése merült fel, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, mielőtt visszavinné a terméket az üzletbe:

Egyesült Államok és Kanada: Vegye fel a kapcsolatot velünk a következő címen:
info@angelcarebaby.com

Más országok: A helyi forgalmazó elérhetőségét a webhelyünkön találja:
angelcarebaby.com/distributors

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További tájékoztatásért lásd a honlapunkon található **beállítási videókat** és egyéb funkciókat.

<https://angelcare.zendesck.com/hc/>

www.angelcarebaby.com

Angelcare Monitors Inc.

201, boulevard de l'Industrie, local 104
Candiac (Quebec) J5R 6A6
Kanada