



AC527 típusú

Kamerás légzésfigyelő készülék
kétirányú babaórzóval és vezeték
nélküli érzékelőlappal

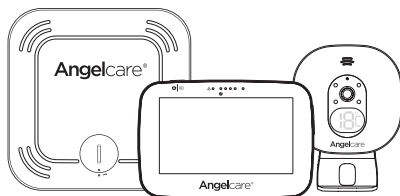

AC507 típusú

Kamerás légzésfigyelő készülék
kétirányú babaórzóval és vezeték
nélküli érzékelőlappal

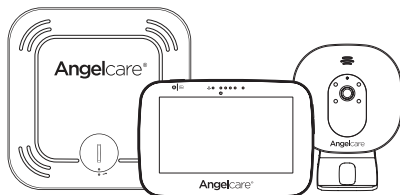

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Őrizze meg ezt a használati útmutatót, hogy később is elolvashassa. A termék összeszerelése és használata előtt olvassa el figyelmesen a figyelmeztetéseket és a biztonsági utasításokat. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést, halált vagy a termék károsodását okozhatja.

FONTOS – RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a termék NEM alkalmas és NEM használható a bölcsőhalál (SIDS) megelőzésére.

Ez a termék NEM alkalmas semmilyen betegség vagy állapot diagnosztizálására, kezelésére, enyhítésére, gyógyítására vagy megelőzésére.

Ez a termék egészséges csecsemők mozgásának ellenőrzésére szolgál, és nem helyettesíti a szülői felügyeletet.

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes szabványnak, és a használati útmutatónak megfelelő használata esetén biztonságos.

⚠ FIGYELMEZTETÉSEK

1. A csecsemőkre és kisgyermekekre vonatkozó súlyos fulladásveszély miatt a szülők és gondozók tartsák be az alábbi figyelmeztetéseket:



⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély – Előfordult, hogy a kábelekbe belegabalyodott gyermek MEGFULLADTAK

- **TARTSA TÁVOL** a babaegységet és az adapterkábeleket a gyermekektől (legalább 1 méteres távolságbán).
- **SOHA** ne használjon hosszabbítókábelt az adapterekhez!
KIZÁRÓLAG a mellékelt adaptereket használja
- **A termék NEM játék. SOHA** ne engedjen gyermeket játszani vele

2.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – MOZGÁSÉRZÉKELŐ LAP - RIASZTÁS ELMARADÁSA

- Az érzékelőlap a gyermekén kívül más rezgést vagy mozgást is érzékelhet. Ezek a rezgésforrások akadályozhatják az Angelcare® készülék működését
- A készülék nem riaszt, ha a gyermekén kívül más mozgást is érzékel
- Ha nagy érzékenységre állítja be, akkor a készülék más rezgést és mozgást is érzékelhet. Kérjük, olvassa el az érzékenység beállítására vonatkozó útmutatásokat, és azoknak megfelelően állítsa be az érzékenységet
- Az eszköz érzékelhet a helyiségben lévő más csecsemőket vagy gyermekeket, ilyenkor nem szólal meg a riasztás
- Az érzékelőlap használatakor ügyeljen arra, hogy a csecsemő környezetében NE legyen mozgás vagy rezgés. Lásd az alábbi, 3–11. figyelmeztetést

3. NE használjon körforgót vagy bármely más olyan kiegészítőt, amely mozgást vagy rezgést okozhat

4. Mozgást és rezgést okoz a ventilátor (a mennyezeti is), a mosógép, a padlódeszkák, a központi fűtés és a hangos zene is, ezeket érzékelheti az érzékelőlap, és így zavarhatják a működését

5. Ha egyenlő több babaegységet használnak, a második babaegységnek legalább 2 méter távolságbán kell lennie az elsőtől, különben zavarhatják egymás működését

6. NE használja a szülő/felügyelő ágyával érintkező kiságyban, mert az érzékelőlap az Ön mozgásait fogja érzékelni

7. A kiságy NEM érintkezhet a fallal vagy a szegélyléccel, mert a készülék annak a rezgésait érzékelheti

8. Miután kivette a babát az ágyból, bizonyos matracokon továbbra is mozgás lehet érzékelhető, miközben a matrac visszanyeri az eredeti alakját, és ilyenkor lehetséges, hogy nem szól a riasztás

9. A mozgás megszüntetéséhez ügyeljen arra, hogy a kiságy stabilan álljon

10. A kiságyat nem szabad más kiságytól vagy ágytól elérhető távolságra helyezni

11. Abban a helyiségben, amelyben a készüléket használja, NE használjon más vezeték nélküli eszközöket (beleértve a mobiltelefonokat, mikrohullámú adókat stb.). Ezek zavarhatják a készülék jelét és a működését

12. **Az érzékelőlap műanyagból készült, és nem engedni át a levegőt.** Ezért penészesedés alakulhat ki a matrac alatt az érzékelőlap területén
A penészesedés elkerülése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen forgassa és levegőt szárítsa meg a matracot. **NE HAGYJA NEDVESSÉGGEL ÉRINTKEZNI.** Száraz, szomszemes kendővel törölje tisztára

13. **Az érzékelőlap nem használható 24 hónapos kor fölött**

14. **A termék nem helyettesíti a felelősségteljes felnőtt figyelmét.**

- A termék célja, hogy segítse gyermeke felügyeletét. Ettől függetlenül azonban önmaguk a készülék használata mellett is megfelelő figyelmet kell fordítani gyermekeire annak biztonsága érdekében

• A készüléket KIZÁRÓLAG a jelen használati útmutatóban megadott javaslatok szerint használja

15. Az érzékelőlapot ne használja annak ellenőrzésére, hogy a gyermek a kiságyban van-e

16. MINDIG azonnal ellenőrizze a gyermeket, ha riasztást hall

17. Tartsa távol a kábeleket MINDEN gyermektől

18. KIZÁRÓLAG a mellékelt töltőket és adaptereket használja. Ne használjon más típusú töltőket és tápadaptereket, mivel ez károsíthatja a készüléket és az akkumulátorát (ha van a készülékben).

19. Az összeszerelést felnőtt végezze el. Összeszerelésnél tartsa távol az apró alkatrészeket a gyermekektől

20. Az utasításokat követve tesztelje a készüléket és a funkcióit, hogy a tényleges használata előtt már ismerje a működését. MINDIG ügylejen arra, hogy az adó- és vevőegység megfelelően működjön, és hogy egymás hatóugarán belül helyezkedjenek el. Ellenőrizze rendszeresen a babaegység működését, illetve akkor is, ha megváltoztatja a helyét

21. NE érintse meg a csatlakozó érintkezőit, különösen ne éles vagy fémtárgyakkal

22. Ne használja a készüléket víz közelében Ügylejen arra is, hogy az egységekbe NE essenek be tárgyak, és ne fröccsenjen folyadék a nyílásokon keresztül az egységekbe vagy az érzékelőlapra



23. Tartsa TÁVOL a készüléket hőforrásoktól (pl. sütőtől, radiátortól stb.). A hő károsíthatja a készülék házát vagy az elektromos alkatrészeket

24. MINDIG sík és szilárd felületen, felállítva helyezze el a babaegységet és a szülői egységet, és ügylejen a megfelelő SZELLŐZÉSÜKRE. NE essen a készülék kanapéra, párnára, ágyra vagy bármilyen olyan felületre, amely tömptíja az általa kiadott hangot, vagy akadályozza a levegő szabad áramlását

25. A készülék 10 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten használható

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK AZ AKKUMULÁTOROKKAL/ ELEMekkel KAPCSOLATBAN

26. Az akkumulátorokat/elemeket MINDIG tartsa távol a gyermekektől.

27. A szülői egység akkumulátora cserélhető lítiumion akkumulátor. A vezeték nélküli érzékelőlap akkumulátora cserélhető lítium gommelem. Csak az Angelcare® által javasolt csereakkumulátorokat/elemeket használja (lásd a műszaki adatokat)

• A nem megfelelő akkumulátor/elem használata, illetve az akkumulátor/elem nem megfelelő behelyezése esetén robbanásveszély áll fenn. Az akkumulátorok/elemek megfelelő behelyezésével kapcsolatban lásd a használati útmutatót

• NE okozzon rövidzárlatot a tápcsatlakozókon

28. Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat/elemeket, és csak az Angelcare® által javasolt csereakkumulátorokat/elemeket használja (lásd a műszaki adatokat).

29. A termék gommelem tartalmaz, amely lenyelés esetén mindössze két óra alatt belső kémiai égési sérüléshez vezethet, és halált okozhat. A használt elemeket azonnal ártalmatlanítsa. Az új és a használt elemeket tartsa távol a gyermekektől. Ha úgy gondolja, hogy a gyermek esetleg lenyelt egy elemet, vagy bármilyen módon elem került a testébe, forduljon orvoshoz.

30. A gommelem kis méretű, és fulladást okozhat, ezért TARTSA TÁVOL a gyermekektől.

31. Ügylejen arra, hogy az akkumulátorok/elemek kezelésekor ne okozzon bennük rövidzárlatot vezető anyagokkal (pl. gyűrű, karkötő, kulcs)

32. Kerülje az akkumulátorok/elemek túltöltését, rövidzárlat okozását, fordított töltését, rongálását vagy elégetését, mivel ezek következtében mérgező anyagok hidrogén- és/vagy oxigéngáz szabadulhat fel, vagy megnövekedhet a felületi hőmérséklet.

33. NE próbálja meg tölteni a termékhez mellékelt vagy azzal együtt használható elemet, ha az nem újratölthető Az elemek ez esetben felrobbanhatnak, vagy maró hatású elektrolit folyhat ki belőlük

34. Kerülje az akkumulátorok/elemek fordított polaritású behelyezését Az akkumulátorok/elemek fordított behelyezése esetén töltés jöhet létre, ami szívárgást vagy robbanást okozhat

35. Ha a termék 30 napnál hosszabb ideig tervezte tárolni, vegye ki belőle az akkumulátorokat/ elemeket, mivel szívároghatnak, ami károsíthatja a berendezést

36. A lemerült akkumulátorokat/elemeket a lehető leghamarabb távolítsa el, mivel ezek nagyobb valószínűséggel folynak ki a termék belsejében.

A szívárgó vagy erőszt akkumulátorokat/elemeket úgy selejtezze ki, hogy ne károsítsa a környezetet

37. NE tárolja a terméket vagy a termékhez mellékelt vagy azzal együtt használható akkumulátorokat/elemeket magas hőmérsékletű vagy páratartalmú, illetve közvetlen napfénynek kitett helyen.

FONTOS BIZTONSÁGI ÖVINTÉZKEDÉSEK

38. Érzékelőlap –

• Ha a kiságyban nincs szilárd, teljesen sima, stabil felület az érzékelőlap számára – például rugós vagy rácsos aljzat –, egy kemény lapot kell ez alá helyezni a megfelelő működése érdekében (lásd a 2. LÉPÉSBEN leírtakat)

• Az érzékelőlap használható hagyományos rugós és habmatracccal, de nem használható memória-habmatracccal (akár részben, akár teljesen memóriahab), üreges belsejű matracccal vagy vízágygal. Ha nem biztos a matrac kompatibilitásában, forduljon az Angelcare® ügyfélszolgálatához.

39. A babaőrző nyilvános frekvenciákat használ a jelek továbbítására. A szülői egységet érhetik a környéken található más babaőrzőktől származó jelek vagy interferencia is. A babaőrző jelét akár szomszédos lakásokban is foghatják. Magánélete védelme érdekében mindig kapcsolja ki a két egységet, ha nem használja őket

40. Kábelek védelme – Ügylejen arra, hogy az adapter kábelére ne lépjenek rá, és az ne szoruljon be bútorok vagy más tárgyak alá, fölé vagy közé. A tápkábeleket úgy kell vezetni, hogy minél kisebb legyen a lehetősége annak, hogy rájuk

lépnek, vagy hogy bútorok vagy más tárgyak alá/főlé/közé szorulnak. Különös figyelmet kell fordítani a vezetékekre és dugaljakra, elosztókra és arra a pontra, ahol a vezetékek kilépnek a termékből. A berendezést helyezze egy könnyen elérhető konnektor közelébe. Az adaptert mindig a berendezéshez legközelebb eső, könnyen elérhető fali aljzathoz csatlakoztassa. A táphálózatról való leválasztáshoz húzza ki az adaptert

41. Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat, kiegészítőket és cserealkatrészeket használja. A termék felszerelését mindig a gyártó utasításainak megfelelően kell végezni

- NE helyezze a terméket instabil kizikocsira, állványra, háromlábú állványra, konzolra vagy asztalra. A termék leeshet, súlyos sérülést okozva gyermekeknek vagy felnőtteknek, és komolyan károsítva magát az eszközt is
- CSAK a termékkel együtt szállított állványt használja
- Kizárólag az Angelcare® által meghatározott vagy az eredeti alkatrészrel minden szempontból megegyező cserealkatrészt használjon. Nem engedélyezett cserealkatrész használata tüzet vagy áramütést okozhat

42. Húzza ki a konnektorból a készüléket villámlással járó viharban, vagy ha hosszú ideig nem használja azt

43. Szervizelés – NE kísérelje meg saját kezűleg megjavítani a terméket, mivel a fedél felnyitása vagy eltávolítása (kivéve az akkumulátortartó/elemtartó fedelét) veszélyes feszültségnek vagy egyéb veszélynek teheti ki önt.

- Áramellátás – lásd az útmutató műszaki adatait

44. Túlterhelés – NE terhelje túl a fali aljzatokat, hosszabbítókábeleket vagy egybeépített elosztókat. Ez tűz vagy áramütés veszélyével jár

45. Babaegység antennája – Az adóegységhez használt antennát úgy kell elhelyezni, hogy legalább 20 cm-es (8 hüvelykes) biztonsági távolság álljon fenn közte és a környezetében lévő emberek között. Az antennát nem szabad megtoldani, és tilos bármilyen más antennával vagy adóegységgel együtt használni

46. Tisztítás – Tisztítás előtt válassza le az egységeket. A készülék semelyik részét SE merítse vízbe! Kizárólag száraz kendővel tisztítsa


ÜZEMBE HELYEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

A DOBOZ TARTALMA



- 1 Babaegység
- 2 Állvány (babaegységhez)
- 3 2 db hálózati adapter
- 4 Szülői egység
- 5 Lítiumion akkumulátor (a szülői egységhez)
- 6 Érzékelőlap
- 7 CR2450 típusú elem (az érzékelőlaphoz)
- 8 Csavar (falra történő felszereléshez)

AMIRE SZÜKSÉGE VAN

Kemény lap, ha a kiságynak nincs szilárd felülete (méréteit lásd a 2. LÉPÉSNÉL)

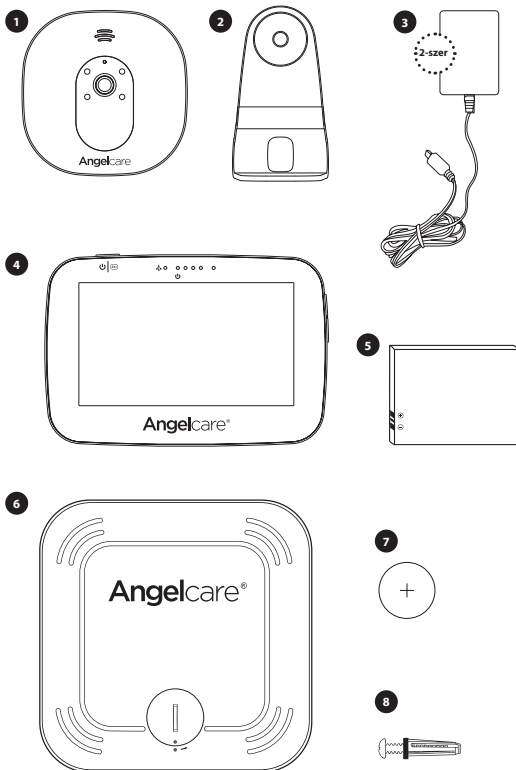

1- A SZÜLŐI EGYSÉG ÜZEMBE HELYEZÉSE

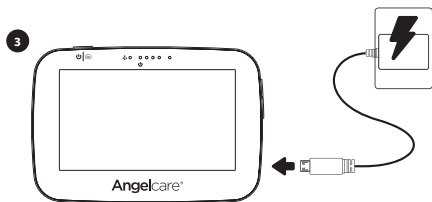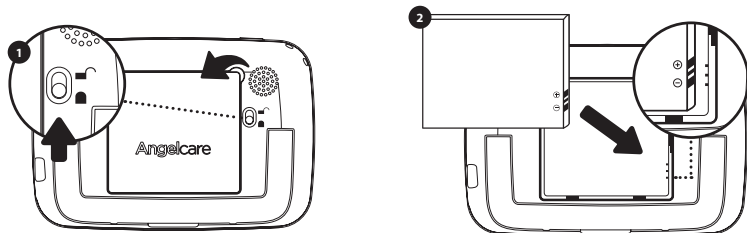


Az első használat előtt 8 órán át töltsse a szülői egység akkumulátorát

A szokásos töltési idő 4 óra


2- AZ ÉRZÉKELŐLAP ÜZEMBE HELYEZÉSE

Az érzékelőlap a baba finom mozgásait érzékeli a matrac felületén. A riasztás csak akkor szólal meg, ha a készülék 20 másodpercen át **NEM** érzékel mozgást.

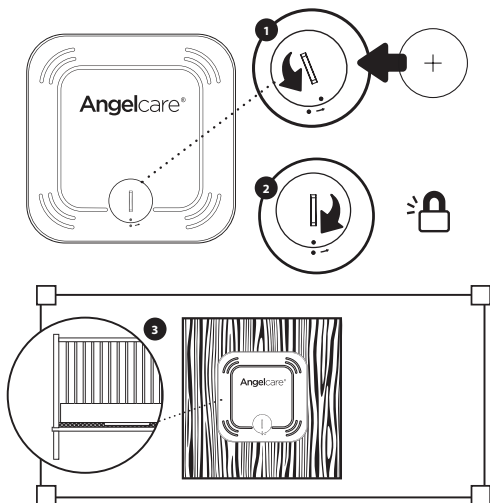

1. Távolítsa el az elemfedeleket, és helyezze be az elemet a + jellel felfelé.
2. Helyezze vissza az elemfedeleket, és a rögzítéshez fordítsa úgy, hogy a 2 pont egy vonalban legyen


3. Vegye ki a matracot a kiságyból, helyezze az érzékelőlapot – az **Angelcare®** emblémával **felfelé** – az ágy aljába, körülbelül a matrac közepe alá. Ha alsó kemény lapra is szüksége van, akkor ennek a közepére kell helyezni (lásd az alábbi „FONTOS” című megjegyzést)
4. Helyezze vissza a matracot

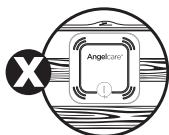


Megfelelő elhelyezés lécekből álló ágyrács esetén

! FONTOS


- Ha a kiságyban nincs szilárd, teljesen sima, stabil felület az érzékelőlap számára – például rugós vagy rácsos aljzat –, egy kemény lapot kell ez alá helyeznie a megfelelő működése érdekében. A kemény lap legyen legalább 30 x 30 cm és 6 mm vastag. A kemény lapnak nagyobbnak kell lennie az érzékelőlapnál
- Az érzékelőlap használható hagyományos rugós és habmatracccal, de nem használható memória-habmatracccal (akár részben, akár teljesen memóriahab), üreges belsejű matracokkal vagy vízágygal. Ha nem biztos a matrac kompatibilitásában, forduljon az Angelcare® ügyfélszolgálatához. A kemény lap állandó nyomást biztosít az érzékelőlapnak, így az akkor is képes érzékelni a baba mozgását, ha az a kiságy szélén tartózkodik

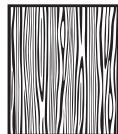


3- A BABAEGYSÉG ÜZEMBE HELYEZÉSE

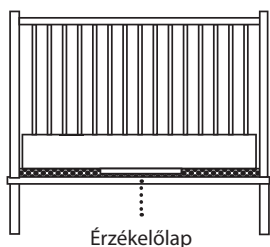


Helyezze el a babaegységet és az adapterkábel legalább **1 méterre** a kiságytól

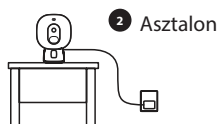

FALRA SZERELVE

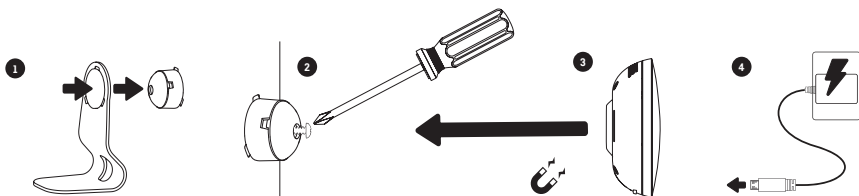


ASZTALON

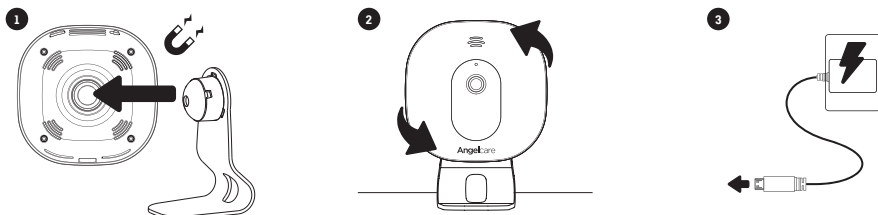

4- A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

BABAEGYSÉG

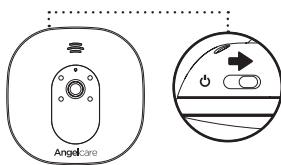

SZÜLŐI EGYSÉG



Megjegyzés:

- A babaegység és a szülői egység előre párosítva vannak
- Minden alkalommal, amikor **bekapcsolja** a babaegységet, az a pontosság biztosítása érdekében automatikusan kalibrálja a belső hőmérőjét. Ez körülbelül 30 percet vesz igénybe

AZ ÉRZÉKELŐLAP MŰKÖDÉSNEK SZÜNETELTETÉSE ÉS ÚJRAINDÍTÁSA

- Lehetővé teszi az érzékelőlap működésének szüneteltetését, ha kivesszi a babát a kiságyból, hogy megetesse vagy dédelgesse. Mielőtt visszatenné a babát a kiságyba, indítsa el újra az érzékelőlap működését

BABAEGYSÉG



SZÜLŐI EGYSÉG



AZ ÉRZÉKELŐLAP KIPRÓBÁLÁSA

1. Az érzékelőlap a gyermekén kívül más rezgést vagy mozgást is érzékelhet. Ezek a rezgésforrások akadályozhatják az Angelcare® készülék működését. A készülék nem riaszt, ha a gyermekén kívül más mozgást is érzékel
2. A készülék érzékenysége 4 fokozatban állítható. A gyári alapértelmezett beállítás a 3-as szint; ez szükség szerint megváltoztatható
3. Az érzékelőlap hibásan az Ön mozgásait fogja érzékelni, ha megérinti a kiságyat
4. Ha a készülék 15 másodpercen keresztül nem érzékel mozgást, egy sípszóból álló előriasztást ad, hogy a baba megmozduljon. Ha továbbra sem érzékel mozgást, 20 másodperc után megszólal a fő riasztás: folyamatosan ismétlődő hosszú sípszók

AZ ÉRZÉKELŐLAP MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

1. Helyezze az érzékelőlapot a baba alvóterületének hozzávetőleges középpontjába, és tegye vissza a matracot
2. Kapcsolja BE a babaegységet és a szülői egységet, majd ellenőrizze, hogy mindkét egység párosítva van-e (össze van-e kapcsolva)
3. Finoman, egyenletes mozgással simítson végig a matrac egyik sarkán a kezével, majd ezt tegye meg **másodszor** is, hogy az érzékelő mozgást érzékeljen. Ha a babaegység érzékeli a mozgást, akkor 5 másodpercenként kattanás hallható, és egy érzékelőlap használata esetében zölden fog villogni a szülői egység jelzőfénye
4. Lépjen távolabb a kiságytól
5. 20 másodperc elteltével a babaegység és a szülői egység riasztást ad. Ha **nem szólal meg** a riasztás, ellenőrizze, hogy minden megfelelően van-e beállítva, és próbálja újra. Ellenőrizze az akkumulátorok/elemek töltöttségi szintjét minden egységen, és kövesse a „NINCS RIASZTÁS” című részben leírtakat. Lehetséges, hogy a az érzékenység szintjét egy szinttel lejjebb kell állítani, hogy ne érzékeljen más rezgéseket és mozgásokat
6. Ha a riasztás megszólal, finoman simítson végig a matrac egyik sarkán a kezével, majd ezt tegye meg **másodszor** is, hogy az érzékelő mozgást érzékeljen. A mozgás érzékeléséig és a riasztás elhallgatásáig akár 8 másodperc is eltelhet.
7. Ha a riasztás annak ellenére folytatódik, hogy kétszer finoman végigsimította a matrac sarkát, állítsa az érzékenységet magasabbra, és ismétlje meg ezt a tesztet




⚠ FONTOS

- Az első használat előtt tesztelje a készüléket
- Használat előtt és rendszeresen (mielőtt a gyermeket a kiságyba helyezi) ellenőrizni kell, hogy az érzékelőlap nem érzékel-e a környezetből származó mozgást vagy rezgést
- Tesztelje a készüléket minden alkalommal, ha új helyre teszi az érzékelőlapot

5- ISMERKEDÉS A KÉSZÜLÉKKEL


BABAEGYSÉG

- 1 Hangszóró
- 2 Mikrofon
- 3 A kamera lenszéje
- 4 Bekapcsolásjelző (az AC507 számú modellen)
Hőmérsékletjelzés (az AC527 számú modellen)
- 5 Mikro-USB csatlakozóaljzat
- 6 Érzékelőlap szüneteltetése / Párosítás gomb
- 7 Főkapcsoló
- 8 Mágnes az asztali állványra és a falra történő szereléshez

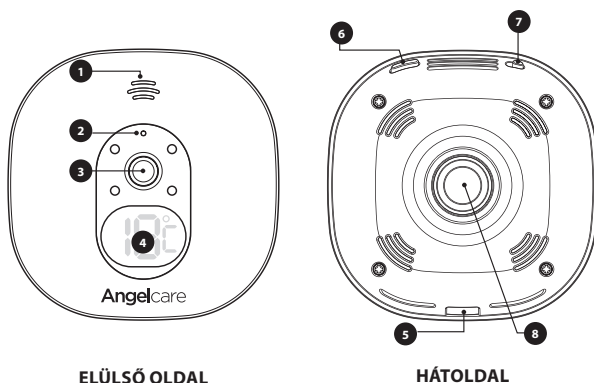


SZÜLŐI EGYSÉG

- 1 Főkapcsoló (ha megnyomja és nyomva tartja) Alvó üzemmód (ha megnyomja és gyorsan elengedi)
- 2 Mozgásérzékelés kijelzője („KATTOGÁS” funkció)
- 3 Bekapcsolásjelző
- 4 Hangfunkció jelzőfénye
- 5 Mikrofon
- 6 Navigálás felfelé (csak bizonyos funkciók esetében jelenik meg)
- 7 Navigálás lefelé (csak bizonyos funkciók esetében jelenik meg)
- 8 Főmenü
- 9 Nagyítás és pásztázás funkció
- 10 Válasz
- 11 Képernyő fényerőssége
- 12 Nézet módja (csak akkor, ha 2 babaegység van csatlakoztatva)
- 13 Hangerő növelése
- 14 Hangerő csökkentése
- 15 Mikro-USB töltőcsatlakozó aljzat
- 16 Hangszóró
- 17 Újratölthető akkumulátor fedele
- 18 Behajtható állvány

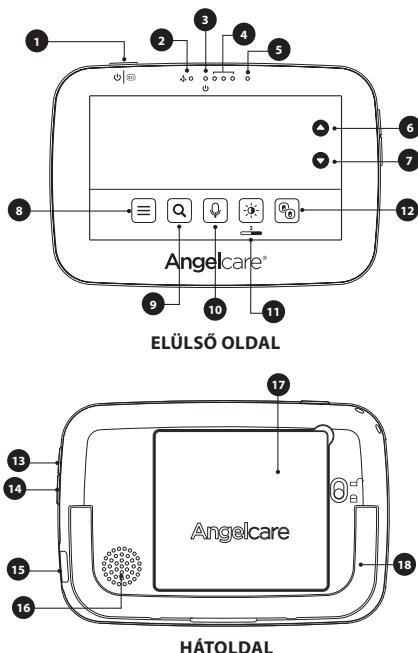


FELSŐ ÁLLAPOTJELZŐ SÁV

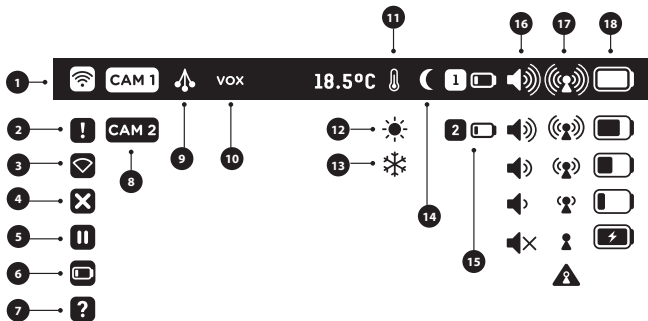

- | | | |
|--|---|--|
| <p>1 Be van kapcsolva az érzékelőlap mozgásérzékelő funkciója</p> <p>2 Érzékelőlap riasztása</p> <p>3 Megszakadt a kapcsolat az érzékelőlappal</p> <p>4 Ki van kapcsolva az érzékelőlap mozgásérzékelő funkciója</p> <p>5 Szünetel az érzékelőlap működése</p> <p>6 Lemerülőben van az érzékelőlap eleme</p> | <p>7 Az érzékelőlapot még sohasem párosították</p> <p>8 Kiválasztották a babaegységet, amely hangot sugároz</p> <p>9 Be van kapcsolva a „KATTOGÁS” funkció</p> <p>10 Be van kapcsolva a „VOX” funkció</p> <p>11 Be van kapcsolva a hőmérsékleti riasztás</p> <p>12 Hőmérsékleti riasztás: túl magas hőmérséklet</p> | <p>13 Hőmérsékleti riasztás: túl alacsony hőmérséklet</p> <p>14 Be van kapcsolva az éjjeliórási mód</p> <p>15 Lemerülőben van a második érzékelőlap eleme (csak akkor jelenik meg, ha 2 párosított érzékelőlappal rendelkezik)</p> <p>16 Hangerősség kijelzői</p> <p>17 Vételi minőség kijelzői</p> <p>18 Szülői egység akkumulátora töltöttségi szintjének kijelzői</p> |
|--|---|--|

FŐMENÜ ☰

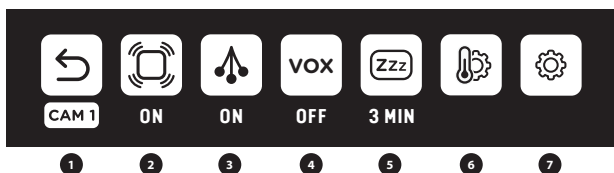

- 1 Beállítások megerősítése és visszatérés a előző menühöz**
- 2 Mozgásérzékelő lap bekapcsolása:**
ON (BEKAPCSOLVA): A szülő- és a babaegység is riasztást ad, ha 20 másodpercig nincs mozgás.
PAUSE (SZÜNETELTETVE): Lehetővé teszi az érzékelőlap működésének szüneteltetését, ha kiveszi a babát a kiságyból, hogy megetesse vagy dédelgesse.
 - Az AC527 számú modell babaegységének hőmérsékletjelzőjén a szüneteltetés „P” szimbóluma jelenik meg
 - Az AC507 számú modell babaegységének bekapcsolásjelzője lassan villog


Mielőtt visszatenné a babát a kiságyba, kapcsolja ki az érzékelőlap szüneteltetését (kapcsolja be az mozgásérzékelést)

OFF (KIKAPCSOLVA): Lehetővé teszi, hogy kikapcsolja a mozgásérzékelést, amikor nagyobb lesz a baba, és a gyereket csak videón szeretné figyelni
- 3 Kattogás bekapcsolása:**
 Ha be van kapcsolva a mozgásérzékelés, 5 másodpercenként kattánás hallható. Ha két érzékelőlap van csatlakoztatva, akkor a Kattogás kijelzője zölden villan fel az 1. érzékelőlaphoz, és kéken a 2. érzékelőlaphoz kapcsolódóan.
- 4 A VOX funkció bekapcsolása:** A „Hangra bekapcsol” (VOX ON – VOX bekapcsolva) azt jelenti, hogy csak hang észlelése esetén kezd el hangot továbbítani, a beállított érzékenységi szintnek megfelelően. Energiatakarékosság céljából az átvitel leáll, ha 10 másodpercen át nem érkezik hangot. Hang észlelése esetén a továbbítás automatikusan újraindul. A „Folyamatos hang” (VOX OFF – VOX kikapcsolva) azt jelenti, hogy a hangfigyelés folyamatosan be van kapcsolva, és a készülék továbbítja az összes hangot
- 5 Az Alvó üzemmód beállítások**
- 6 Hőmérséklet-beállítások**
- 7 Általános beállítások**

! FONTOS


- A beállítások megerősítéséhez mindig meg kell nyomnia a ikont. Ezután egy visszaigazoló ikon jelenik meg a képernyőn: Megtörtént a beállítások mentése Nem történt meg a beállítások mentése
- Ha 2 babaegység és 2 érzékelőlap van a készülékhez párosítva, akkor csak az éppen megtekintett babaegység beállításai módosíthatók

HŐMÉRSÉKLETI BEÁLLÍTÁSOK MENÜJE

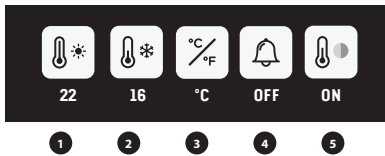


- 1 Felső riasztási hőmérséklet beállítása
- 2 Alsó riasztási hőmérséklet beállítása
Megjegyzés: A minimális és maximális hőmérséklet között legalább 4 °C (7 °F) különbségnek kell lennie
- 3 Celsius vagy Fahrenheit fok kijelzésének beállítása
- 4 Hőmérsékleti riadtás bekapcsolása
- 5 A gyerekzoba szinkronos hőmérsékletjelzésének bekapcsolása (az AC527 számú modellen)
Fehér: Normál hőmérséklet
Piros: Túl magas a hőmérséklet
Kék: Túl alacsony a hőmérséklet

ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

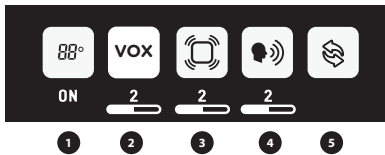

- 1 A babaegység kijelzőjének bekapcsolása (az AC527 számú modellen)
- 2 A VOX funkció érzékenysége beállítása: A mikrofon érzékenysége 4 fokozatban állítható (a legérzékenyebb a 4-es fokozat). A rendszer csak akkor továbbít hangot, ha az eléri az Ön által meghatározott szintet
- 3 Az érzékelőlap érzékenysége beállítása: A gyerek mozgásának megfelelő felügyelete érdekében beállítható az érzékelőlap érzékenysége
- 4 A babaegység hangszórója hangerősségének beállítása
- 5 Párosítás menü

PÁROSÍTÁS MENÜ

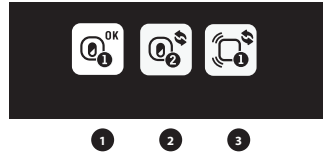

1. babaegység állapota
2. babaegység állapota
3. érzékelőlap állapota

A babaegység és az érzékelőlap állapotjelző ikonjai:

OK Zöld: Csatlakoztatva/párosítva

Kék: Babaegység vagy érzékelőlap hozzáadása

Piros: Babaegység vagy érzékelőlap eltávolítása

A megerősítés folyamata A KÉPERNYŐN:

Kék: Animált „Kapcsolat” ikon párosításkor (a kapcsolat létrehozására rendelkezésre álló idő: 60 másodperc)

Zöld: Sikeres párosítás

Piros: Sikertelen párosítási kísérlet, próbálja meg újra

RIASZTÁS IKONOK



- 1 **Érzékelőlap riasztása:** Ha 20 másodperc elteltével NEM érkezik mozgást, a szülői egység és a babaegység hangszórói egymást követő hangos hangjelzéseket adnak ki: ez a légzéskimaradás miatti riasztás
- 2 **Szünetel az érzékelőlap működése**
- 3 **Megszakadt a kapcsolat az érzékelőlappal:** A szülői egység és a babaegység hangszórói egymást követő hangos hangjelzéseket adnak ki
- 4 **Lemerülőben van az érzékelőlap eleme:** A szülői egység 5 másodpercenként 3 egymást követő hangjelzést ad
- 5 **Hatótávolságon kívül van a szülői egység:** A szülői egység 10 másodpercenként 2 egymást követő hangjelzést ad
- 6 **Túl magas a hőmérséklet:** A szülői egység 5 másodpercenként 3 egymást követő hangjelzést ad
- 7 **Túl alacsony a hőmérséklet:** A szülői egység 5 másodpercenként 3 egymást követő hangjelzést ad

Megjegyzés: Nyomja meg valamelyik (bármelyik) gombot, ha azt szeretné, hogy **leálljon a riasztás** és eltűnjön a riasztás ikonja

Az **érzékelőlap riasztása** esetén, ha megnyomta bármelyik gombot, akkor a készülék szünetelteti az érzékelőlap működését. Szüneteltetési módban a mozgásérzékelési funkció ki van kapcsolva. Az érzékelőlap újbóli bekapcsolásához egyszerűen kapcsolja ki az érzékelőlap szüneteltetését az első menüben

6- TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

Az Angelcare® készülékhez egy további babegység és egy további érzékelőlap is hozzáadható. Ezek beszerzéséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazókkal

FONTOS:

- Két babaegység használata esetén egyszerre csak egy babaegységtől érkező hang hallható (a babegységtől érkező hang kiemelve jelenik meg az infósávon). Osztott képernyős nézetben a babegységtől érkező hangot a kameraikonoktól jobbra megjelenő hangszóróikon jelzi a képernyőn
- Ha két érzékelőlapot használ egy babaőrző készülékkel, akkor javasoljuk, hogy az egyes érzékelőlapokat más-más szobában helyezze el

7- HIBAEHÁRÍTÁS

AZ ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOR KEZELÉSE

- Első használat előtt töltsen az akkumulátort 8 órán át.
- Élettartamának maximalizálása érdekében ajánlott időnként teljesen lemeríteni az akkumulátort. Ha nem használja a szülői egységet, kapcsolja **KI**.

NEM HALLATSZIK A HANG

- Ellenőrizze, hogy a szülői egység és a babegység hangerőssége megfelelőre van-e állítva.
- Próbálja a szülői egységet közelebb vinni a babaegységhez, hogy ellenőrizze, van-e hang.
- Töltsen fel a szülői egységet.

GYENGE VÉTEL

- Vigye közelebb egymáshoz az egységeket.
- Változtassa meg az egyik vagy mindkét egység helyzetét.
- Helyezze az egységeket lapos felületre, úgy, hogy a baba ne érje el őket.
- Töltse fel újra a szülői egységet.

STATIKUS ZAJ, TORZÍTÁS, INTERFERENCIA (MÁS BABAŐRZŐKTŐL, VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONOKTÓL, ADÓ-VEVŐKTŐL STB.)

- Fordítsa el a szülői egységet, vagy vigye el az interferencia forrásának közeléből.

GERJEDÉS (A SZÜLŐI EGYSÉG HANGOS ZAJT AD KI)

- Helyezze egymástól távolabb az egységeket (legalább 3 méterre).
- Csökkentse a szülői egység hangerejét.

A SZÜLŐI EGYSÉG KÉPERNYŐJE FEKETE (A SZÜLŐI EGYSÉG KI VAN KAPCSOLVA)

- Kapcsolja újra **be** a szülői egységet: nyomja meg és 2 másodpercig tartsa nyomva a **FŐKAPCSOLÓT**.
- Töltse fel újra a szülői egység.

MOZGÁSÉRZÉKELŐ LAP – NINCS RIASZTÁS

- Lehetséges, hogy az érzékelőlap a gyermekén kívül más rezgést vagy mozgást érzékel, és nem szólal meg a riasztás.
- Lásd: 3–11. figyelmeztetés, illetve 4. LÉPÉS, AZ ÉRZÉKELŐLAP ELLENŐRZÉSE.

MOZGÁSÉRZÉKELŐ LAP – TÉVES RIASZTÁSOK

- Cserélje ki az érzékelőlap CR2450 típusú elemét.
- Kapcsolja ki a babaegységet.
- Az érzékelőlap többféle okból adhat téves riasztást. Ha riasztás hallható, mindig azonnal ellenőrizze a baba állapotát:
 - A leggyakoribb ok, hogy a babaegységet nem kapcsolják ki, miután a gyermeket kivették a kiságyból
 - Győződjön meg arról, hogy nincsen ágynemű a matrac és az érzékelőlap között
 - További ok lehet, hogy az érzékelőlapot nem megfelelően helyezte az ágymatrac alá. Gondoskodjon arról, hogy az érzékelőlap sík, stabil felületen legyen, és a nyomtatott oldala felfelé nézzen
 - Előfordulhat, hogy módosítania kell az érzékenységi szintet
- Lásd: 3–11. figyelmeztetés, illetve 4. LÉPÉS, AZ ÉRZÉKELŐLAP ELLENŐRZÉSE.

NEM HALLATSZIK A HANG:

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva mindkét egység.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e elnémítva a szülői egység.

A SZÜLŐI EGYSÉG AKKUMULÁTORÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ:

- Húzza ki az hálózati adaptert a szülői egységből, és ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.


A KAPCSOLAT MEGSZAKADÁSA A BABAEGYSÉG ÉS A SZÜLŐI EGYSÉG KÖZÖTT

Ha megszakad a kapcsolat a babaegység és a szülői egység között, az alábbi lépéseket végrehajtv párosíthatja őket újból.

1. Kapcsolja be a szülői egységet, de hagyja kikapcsolva a babaegységet
2. Nyomja meg a Főmenü gombot ☰
3. Mindjárt az Általános beállítások menü jelenik meg. Nyomja meg a Párosítás ikont 📶
4. A Párosítás menüben nyomja meg az 1. babaegység ikonját ①

 - Ha az 1. babaegység csatlakoztatottként ①^{OK} jelenik meg, akkor nyomja meg, hogy az 1. babegység párosításához lépjen. Most el kell távolítania; ehhez nyomja meg a piros ①^X ikont. A képernyőn addig lesz látható a Kapcsolat ikon, amíg meg nem jelenik a Sikeres párosítás ikonja 📶. Most már tudja folytatni a 4. lépéssel

5. A képernyőn megjelenik a Kapcsolat ikon 📶
6. Kapcsolja be a babaegységet, majd nyomja meg és addig tartsa nyomva a „szüneteltetés/párosítás” gombját, amíg a párosítás során villogni nem kezd a bekapcsolás jelzőfénye (AC507) vagy a hőmérsékletjelző (AC527)
7. Ha létrejött a kapcsolat, akkor a képernyőn megjelenik a Sikeres párosítás zöld 📶 ikonja, a menüben pedig megjelenik az OK Párosítva ikon ①^{OK}
8. Egyébként a Sikertelen párosítás piros 📶 ikonja jelenik meg a képernyőn. Újra meg kell próbálnia

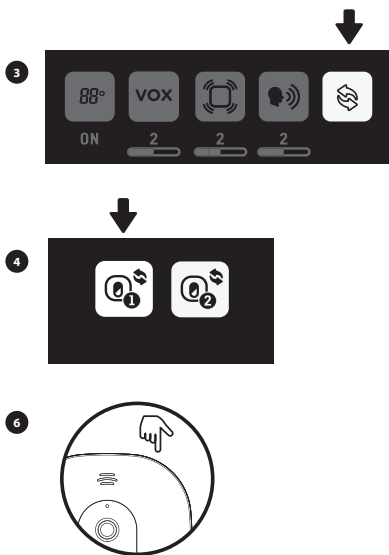

A KAPCSOLAT MEGSZAKADÁSA AZ ÉRZÉKELŐLAP ÉS A BABAEGYSÉG KÖZÖTT

Ha megszakad a kapcsolat az érzékelőlapp és a szülői egység között, az alábbi lépéseket végrehajtva párosíthatja őket újból. Ahhoz, hogy az érzékelőlapot ismét csatlakoztatni lehessen a babaegységhez, előbb párosítani kell a szülői egységet és a babaegységet.


1. Vegye ki az érzékelőlapp elemét.

Megjegyzés: Ha két érzékelőlappal rendelkezik, akkor először mindkettőből ki kell vennie az elemet, és csak ezt követően hajthatja végre az alábbi lépéseket

2. Nyomja meg a Menü ikont ☰
3. Nyomja meg az Általános beállítások menüt ⚙️
4. Nyomja meg a Párosítás ikont 📶
5. A Párosítás menüben nyomja meg az 1. érzékelőlapp ikonját ①

 - Ha az érzékelőlapp csatlakoztatottként ①^{OK} jelenik meg, akkor nyomja meg, hogy az érzékelőlapp párosításához lépjen. Most el kell távolítania; ehhez nyomja meg a piros ①^X ikont. A képernyőn addig lesz látható a Kapcsolat ikon, amíg meg nem jelenik a Sikeres párosítás 📶 ikonja. Most már tudja folytatni az 5. lépéssel

6. Tegye be az elemet az érzékelőlapba. Az ennek hatására automatikusan bekapcsolódik
7. Ha létrejött a kapcsolat, akkor a képernyőn megjelenik a Sikeres párosítás zöld 📶 ikonja, a menüben pedig megjelenik az OK Párosítva ikon ①^{OK}
8. Egyébként a Sikertelen párosítás piros 📶 ikonja jelenik meg a képernyőn. Újra meg kell próbálnia

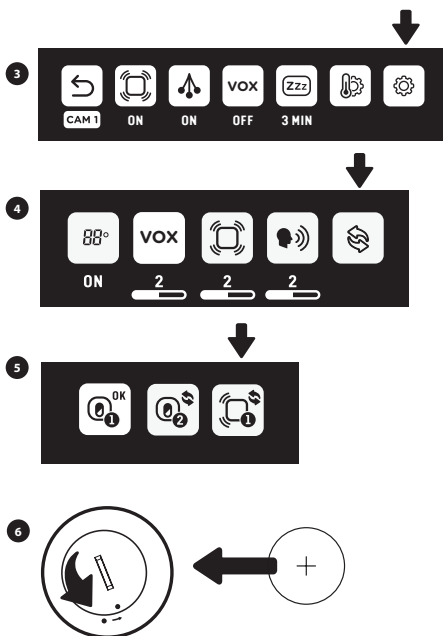

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

Az Angelcare® a termék eredeti tulajdonosa felé a jótállási időszak (lásd a jótállási időszakokat országonként mutató táblázatot) alatt garantálja, hogy az Angelcare® készülék mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Amennyiben a készüléknél a jótállási időszak alatt az utasításoknak megfelelő, rendeltetésszerű használat esetén hibás működést tapasztal, az Angelcare® saját döntése szerint ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a terméket. A jótállás és a jótállási időszak érvényesítéséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazónkkal.

A termékhez mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot, ami lehet a termékről kapott számla vagy bármilyen más dokumentum, mely igazolja, hogy a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem múlt el. A termék javításának vagy cseréjének és az Önhöz történő visszaküldésének díját az Angelcare® viseli.

A jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, mely nem megfelelő karbantartás, baleset, nem megfelelő feszültségen történő használat vagy más, nem rendeltetésszerű használat következtében sérült meg. A jótállás semmissé válik abban az esetben is, ha a tulajdonos bármilyen javítást vagy módosítást végez a terméken. Az Angelcare® a termék

használatára kapcsán az ebből adódó esetleges következményekért semminemű felelősséget nem vállal. A jótállás kizár minden, fent nem ismertetett felelősséget. Semminemű más jótállás nem érvényes.

A jótállás nem vonatkozik a nem Angelcare® márkájú termékekre és tartozékokra, nem vonatkozik továbbá az olyan problémákra, amelyek oka a termékre vonatkozó utasításokat be nem tartó használat, a termékhez mellékelt utasítások figyelmen kívül hagyása, illetve nem az Angelcare® által szállított kiegészítők, alkatrészek vagy tartozékok használata.

A TÖRVÉNYBEN BIZTOSÍTOTT JOGOK ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. EGYES ORSZÁGOKBAN TILOS A VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA, TEHÁT LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM ÉRVÉNYESEK.

AZ ANGELCARE® SEMMILYEN MÓDON ÉS ESETBEN NEM FELELŐS A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZMÉNYEIÉRT.

Jótállási időszak országonként	
Észak-Amerika, Egyesült Királyság, Dél-Afrika, Oroszország, Magyarország, Szlovénia	1 év
Más országok	2 év

MŰSZAKI ADATOK

Hatótávolság:

Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen):

- A szülői egység és a babaegység között:
legfeljebb 250 méter
- Az érzékelőlap és a babaegység között:
legfeljebb 6 méter

Csatornák száma:

Európa: 19 csatorna

Hőmérsékleti ajánlások:

„Magas hőmérséklet” riasztás: 22 °C

„Alacsony hőmérséklet” riasztás: 16 °C

Áramellátás:

1 db 1300 mAh-s, 3,7 V-os lítiumion akkumulátor (gyártó: Icon Energy System (Shenzhen) Co Ltd) a szülői egységhez mellékelve

2 db adapter (100-240 VAC / 5 VDC, 0,6 A) a szülői egységhez és a babaegységhez

1 db 3 V-os CR2450 elem (mellékelve) a vezeték nélküli érzékelőlaphoz

Vigyázat: Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek.

Az akkumulátorok/elemek nem megfelelő behelyezése esetén robbanásveszély áll fenn. A szülői egységben található akkumulátor a felhasználó által cserélhető, újratölthető lítiumion akkumulátor. Csak az Angelcare® által javasolt csereakkumulátort/ elemet használja. Az érzékelőlap eleme felhasználó által cserélhető lítium- (nem lítiumion) elem, és NEM tölthető újra. Ha tájékoztatást szeretne kapni a csereakkumulátorokkal/elemekkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az Angelcare® ügyfélszolgálatával a www.angelcarebaby.com címen, illetve a helyi forgalmazókkal. A csereakkumulátor/elem mellett megtalálja a használati útmutatóját. Az akkumulátorokat/ elemeket tartsa távol a gyermekektől.

ErP-megfelelőség

KIZÁRÓLAG A KÖVETKEZŐ MODELLSZÁMÚ
ANGELCARE® MÁRKÁJÚ TÁPEGYSÉGEKET
HASZNÁLJA:
EU (NÉMETORSZÁGOT IS IDEÉRTVE) –
MODELLSZÁM: K05S050060G
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG –
MODELLSZÁM: K05S050060B

Akkumulátorok/elemek:

- FIGYELEM! A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTOROK/ELEMEK HASZNÁLATA ROBBANÁST OKOZHAT

Átvitel:

A szülői egység és a babaegység közötti adatátvitel a 2,4 GHz-es frekvencián történik.

A babaegység és az érzékelőlap közötti adatátvitel a 2,4 GHz-es frekvencián történik.

Rádiófrekvenciás jel maximális erőssége:

- 20 dBm (100 mW) a szülői egység és a babaegység között
- 4 dBm (2,5 mW) a babaegység és az érzékelőlap között

Az Angelcare Monitors Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a készülék teljesíti a 2014/53/EU irányelv előírásait.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon található:

<https://www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>

Rádiófrekvenciának való kitétsége – Ezt a készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen az EU nem ellenőrzött környezetre érvényes rádiófrekvenciás (RF) sugárterhelési korlátozásainak. A megfelelőség fenntartásához a normál működés során nem szabad a babaegységhez 20 cm-nél közelebb tartózkodni.

VÉDJE A KÖRNYEZETET

Az áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a helyi jogszabályok és elírások szerint a terméket és/vagy az akkumulátorát/elemét nem szabad a háztartási hulladék-gyűjtőbe tenni. Amikor a termék vagy az akkumulátora/ eleme elérte az élettartama végét, vigye el egy, a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás segít megőrizni a természeti erőforrásokat és megvédeni az emberek egészségét és a környezetet. Az akkumulátor/elem eltávolítását a használati útmutató ismerteti.

A készülék megfelelőségét a rajta található jelzések mutatják.



TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy az Angelcare® termékét választotta. Az Angelcare® a termékek fejlesztése és gyártása során a legnagyobb gondossággal jár el, valamennyi terméke megfelel a nemzetközi szabványoknak. A cég termékeire 12 hónap garanciát vállal, mely a vásárlás napjától számítva él. A vásárlás napján kapott számlát, vagy fizetési blokkot és/vagy a készülék bélyegzett jótállási jegyét okvetlenül őrizze meg, mert jótállási igényét ezekkel érvényesítheti. A jótállás időtartama alatt minden olyan hiba esetén, amelynek eredete gyártási hibára vagy anyaghibára vezethető vissza, a termék hibás főegységét cseréljük. A készülékek utólagos javítását a gyártó a készülék jellege miatt nem engedélyezi.

A csere időtartama a bejelentéstől (a termék beérkezésétől) számított kb. 15 nap. Ez a jótállás nem vonatkozik az olyan termékekre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rossz felhasználás, helytelen alkalmazás, vagy használat, ill. nem megfelelő elem használata miatt sérült meg. A garancia szintén nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos javíttatta a készüléket, vagy átalakította.

Meghibásodás esetén a termék főegységeinek cseréjét 3 munkanapon belül az eladó szerv, ezt meghaladóan a forgalmazó végzi, kérjük további esetben ezt okvetlenül jelezze írásban az alábbi elérhetőségen: info@angelcare.hu.

JÓTÁLLÁSI JEGY

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkre a 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet alapján.

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk. 8:1. §). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. § alapján.

2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A termék, vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.

3. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót.

4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.

5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.

6. A jótállási igény a teljeskörűen kitöltött, eredeti jótállási jeggyel érvényesíthető.

7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.

8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) érvényesítheti. Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhöz kell eljuttatni, postai úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve ha a fogyasztó a küldeményről és a meghibásodásról előzetesen írásban tájékoztatta. Személyes leadásra, átvételre nincs mód.

10. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni.

11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következő jogszabályok és rendeletek szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet; Ptk. XXIV. fejezet; 19/2014 (IV.29) NGM Rend. Hibás teljesítés miatt a fogyasztó a Ptk. 6:159.§ par. alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott kellékszavatossági jog lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

12. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlát/blokkot és/vagy lebélyegzett, kitöltött jótállási jegyét feltétlenül őrizze meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerződés megkötését.

13. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

14. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

15. Jótállási igény nem érvényesíthető a következő esetekben:

- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése esetén a jótállási jegy érvénytelen.
- A használati utasítástól eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
- Átalakítás, hibás, vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
- Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre, vagy tartozékokra.
- Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bármimemű beavatkozás esetén.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy az ANGELCARE® AC527 típusú készülékek a CE nemzetközi jelzéssel vannak ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabvány-előírásoknak és irányelveknek.

Az EU megfelelési nyilatkozatot a forgalmazótól kérheti el.

TERMÉK TÍPUSA: ANGELCARE® AC527 típusú készülék	A TERMÉK GYÁRTÁSI SOROZATKÓDJA:
VÁSÁRLÁS DÁTUMA:	ELADÓ SZERV BÉLYEGZŐJE, ALÁÍRÁS:

AZONNALI INTÉZKEDÉSEK CSECSEMŐKORI LÉGZÉSKIMARADÁS ESETÉN

Amennyiben a légzésfigyelő megszólal, azonnal ellenőrizze, hogy a riasztás valós-e. Téves riasztás esetén derítse fel ennek okát, változtasson a gyermek kiságykörülményein, vagy fokozza a készülék érzékenységet.

Riasztás esetén a következő életfunkciókat azonnal ellenőrizze gyermekénél:

- a baba lélegzik-e,
- van-e a csecsemőnek szívverése;
- megfelelő-e a gyermek vérkeringése.

A légzés ellenőrzése a legegyszerűbb, a mellkas emelkedő-süllyedő mozgása szabad szemmel is könnyen látható, a gyermek arcához közel hajolva a száj- és ornyílásnál légző hang (szuszogás) hallható. A csecsemő szívverését az ismert testpontokon lehet pulzustapintással ellenőrizni, nyaki- vagy csukló- verőér esetén. A vérkeringés ellenőrzésének legegyszerűbb módja a baba arcszínének megvizsgálása. Egészséges keringés esetén a gyermek arcbőre rózsaszínű, megfelelő vérkeringés hiánya esetén a szín kékesszürke.

A három funkció mindegyike fontos, de a készülék riasztása a légzőmozgás kimaradását jelzi.

Amennyiben a gyermek nem lélegzik, azonnal hívja a mentőket a 104, vagy 112 telefonszámokon, és a következő ÉLETMENTŐ INTÉZKEDÉSEKET az életfunkciók ismételt beindulásáig, vagy a mentők kiérkezéséig a leírtak szerint végezze.

Ha a gyerek ...	Megfelelő SÜRGŐS intézkedések
...eszméletlen	Kicsit döntse hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, kb. 40-szer percenként. Ne alkalmazson szívmasszázszt! Folytassuk a lélegeztetést addig, amíg a gyermek újra magától lélegzik, vagy amíg a mentők át nem veszik.
...nem lélegzik	
...van pulzusa	
...eszméletlen	Kicsit döntse hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, 3 lélegeztetéssel Utána alkalmazson 15 szívmasszázszt, majd ismét 3 lélegeztetést. Csak akkor hagyja abba az intézkedéseket, ha a gyermek ismét maga lélegzik.
...nem lélegzik	
...nincs pulzusa	

MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS

1. Kicsit döntse hátra a baba fejét. Tegye az egyik kezét a baba homlokára, másik kezének két ujját az álla alá. Így döntse hátra a baba fejét. (a. kép) Ha lélegeztetéskor nem emelkedik a baba mellkasa, akkor azonnal ellenőrizze, hogy a megfelelő pozícióban van-e a baba feje. A leggyakoribb hiba a mesterséges lélegeztetéskor a nem megfelelő fejpozíció.



2. Száj és orr körülzárása

Tegye a száját a csecsemő orrára és szájára olyan szorosan, amennyire tudja. (b. kép)



3. Három levegő befúvás

Annyi levegőt fújjon a csecsemőnek, amennyit Ön egy könnyed levegővétellel a szájában tud tartani. A csecsemő mellkasa megemelkedik, amikor befújja a levegőt, és lesüllyed kilégzésnél. Egy befúvás kb. 1-1,5 másodpercig tart. A befúvások között a csecsemő orrát és száját szabadon kell hagyni, így önállóan bekövetkezik a kilégzés. A befúvás után fordítsuk fejünket oldalra úgy, hogy a gyermek légzésmozgását figyelhessük. (c. kép)



Ha nem emelkedik a baba mellkasa, akkor ez abból is következhet, hogy valami elzárja a baba légcsővét. Szüntesse meg az akadályt, fordítsa oldalra a baba fejét és a kisebbik ujjával törölje ki a baba száját, majd fordítsa vissza a gyerek fejét az előző pozícióba és folytassa a lélegeztetést. (d.kép)



SZÍVMASSÁZS

1. Feltételek

Ahhoz, hogy szívmasszázst végezhesen, szilárd felületre van szükség. Egy asztal, vagy pelenkázó megfelel erre a célra, de ha nincs a közelben akkor a padló is alkalmas lehet. Nem szabad szívmasszázst matracon végezni, mert az utórugózást eredményez. A következő lépésekhez, hogy a helyes nyomási pontot megtaláljuk, a gyermek felsőtestét szabadabbá kell tenni.

2. Nyomási pont

Képzeld el egy összekötő vonalat a csecsemő két mellbimbója között. Jobb keze mutatóujját helyezze e vonal alá, és szorosan mellé a középső és gyűrűsujját. (a.kép) Emelje fel a mutatóujját és így a gyűrűs- és középső ujjával meg tudja nyomni a baba mellkasát. A gyűrűs- és középső uja így 0,5-1 cm-rel a mellbimbókat összekötő vonal alatt vannak



3. 15 szívmasszázs

A mellkas csont nyomásával nyomást gyakorol a szívre is, amellyel egy szükségvérvkeringést indít be, és ezzel eljut az oxigén a létfontosságú szervekhez. Ahhoz, hogy a szív az összenyomás után újra megtelhesen vérrrel, figyelni kell arra, hogy a mellkas csont ismét tehermentesítve legyen. Ekkor az ujjat nem kell a mellkasról felemelni, mert elmozdulhat a helyes nyomási pontról. A nyomási mélység a mellkas keresztmetszet egyharmada kell hogy legyen, ez csecsemők esetében kb. 2 cm. Ahhoz, hogy a szívmasszázs a normál szívizom összehúzódásának megfelelően, nem kell hirtelen nyomással végezni a szívmasszázst, hanem finoman úgy, hogy a szív nyomása annyi ideig tartson, mint a szívizom elernyedése. (b. kép)

Elérhetőség

FONTOS! Ez az Angelcare® készülék higiéniai terméknek minősül. Kérjük, ne vigye vissza az üzletbe. Ha kérdése merült fel, vagy ha segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, mielőtt visszavinné a terméket az üzletbe.

Az Angelcare® büszke minden termékére. Ha nem elégedett maradéktalanul a termékkel, vagy ha kérdése merült fel, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, mielőtt visszavinné a terméket az üzletbe:

Egyesült Államok és Kanada: Vegye fel a kapcsolatot velünk a következő címen:
info@angelcarebaby.com

Más országok: A helyi forgalmazó elérhetősége a webhelyünkön található:
angelcarebaby.com/distributeurs

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További tájékoztatásért lásd a honlapunkon található **beállítási videókat** és egyéb funkciókat.

<https://angelcare.zendesk.com/hc/>

www.angelcarebaby.com

Angelcare Monitors Inc.

201, boulevard de l'Industrie, local 104
Candiac (Quebec) J5R 6A6
Kanada